

EURUS

ISTRUZIONI PER L'USO

Cari clienti

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

Questo libretto spiega come utilizzare EURUS.

Prima di utilizzare EURUS, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e assicurarsi di utilizzarne correttamente il prodotto.

L'utilizzo del prodotto senza la lettura di queste istruzioni potrebbe causare un incidente.

Per un facile accesso alle informazioni qui contenute, tenere il presente libretto a portata di mano e rileggerlo secondo necessità.

Chiedere al concessionario autorizzato Belmont di zona di installare il prodotto seguendo le istruzioni di installazione contenute nel prodotto.

In caso di domande relative alle istruzioni per l'uso o a questo prodotto, contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona. Se si riscontra la presenza di sporco o danni sul libretto e si necessita di un nuovo libretto, riferire il numero di catalogo indicato di seguito al concessionario autorizzato Belmont di zona per ordinarne uno nuovo.

Questo documento descrive la versione completa del sistema. Potrebbe quindi trattare componenti che non sono inclusi nel sistema acquistato.

2025-09-01 (6 ^a edizione)	
RIF	1E09WDF0

Cari clienti.....	2
1 Informazioni generali	
1–1 Uso previsto del prodotto	9
1–2 Conformità a regolamenti e direttive.....	9
1–3 Dichiarazione di conformità.....	9
1–4 Smaltimento del dispositivo	10
1–5 Smaltimento dei residui	10
1–6 Un avviso per l'utente e/o il paziente.....	10
1–7 Manipoli compatibili	10
1–8 Dispositivi collegabili al prodotto	10
1–9 Simboli	11
1–10 Descrizione tecnica	16
2 Considerazioni sulla sicurezza	
2–1 Interpretazione del livello di rischio	17
2–2 Precauzioni di sicurezza.....	19
Punti da ricordare quando si mette in funzione il prodotto.....	30
2–3 Posizioni in cui sono attaccate le etichette di avvertenza/attenzione	33
2–4 Informazioni di compatibilità elettromagnetica (EMC)	36
2–5 Manipoli compatibili	40
2–6 Dispositivi collegabili al prodotto	40
3 Precauzioni per l'uso	
3–1 Precauzioni operative	41
3–2 Precauzioni per l'uso di pelli sintetiche.....	43
4 Specifiche del prodotto	
4–1 Dati tecnici	44
4–1–1 Variazioni delle specifiche.....	44
4–1–2 S1	45
4–1–3 S3	51
4–1–4 S4	57
4–1–5 Carrello medico / Consegnna armadio.....	63
4–1–6 Specifiche per aria/acqua/aspirazione	66
4–2 Panoramica del sistema	67

4-2-1	S1	67
4-2-2	S3	69
4-2-3	S4	71
4-2-4	Carrello medico / Consegna armadio.....	73
4-3	Nome di ciascuna parte.....	74
4-3-1	Poltrona.....	74
4-3-2	Poggiatesta	75
4-3-3	Comando a pedale (cablato/wireless)	76
4-3-4	Interruttori a pedale	76
4-3-5	Unità medico	77
4-3-6	Unità sputacchiera.....	79
4-3-7	Unità assistente.....	81
4-3-8	Unità di giunzione	82

5 Funzionamento

5-1	Preparazione prima dell'uso	83
5-1-1	Unità poltrona tipo collegabile	83
5-1-2	Unità poltrona tipo non collegabile	88
5-2	Dopo l'uso.....	89
5-2-1	Unità poltrona tipo collegabile	89
5-2-2	Unità poltrona tipo non collegabile	91
5-3	Funzionamento dell'interruttore principale della poltrona durante il trattamento (Unità poltrona di tipo collegabile dotata di un interruttore principale per la poltrona)	92
5-4	Sollevamento/abbassamento della poltrona e sollevamento/inclinazione dello schienale (funzionamento manuale).....	93
5-5	Spostare la poltrona alla posizione preimpostata (funzionamento automatico)	95
5-6	Azionamento del poggiapiedi (tipo manuale).....	97
5-7	Azionamento del poggiapiedi (tipo elettroidraulico)	98
5-8	Rotazione del bracciolo	102
5-9	Rapporto tra gli angoli di schienale, gambale e poggiapiedi (poltrona con gambale pieghevole)	104
5-10	Utilizzo del gambale (poltrona con gambale pieghevole)	105
5-10-1	Unità poltrona tipo collegabile	105
5-10-2	Unità poltrona tipo non collegabile	106
5-11	Utilizzo della tavoletta medico	107
5-12	Controllo del vassoio dell'assistente	108
5-13	Manipolo	109
5-14	Pannello comandi dell'unità medico.....	110

Sommario

5-15	Pannello di comando assistente	136
5-16	Funzione di annullamento	138
5-17	Funzione di blocco	139
5-17-1	Funzione di blocco della poltrona.....	139
5-17-2	Funzione di blocco del manipolo.....	143
5-18	Micromotore.....	144
	Impostazione della modalità di scorrimento del micromotore (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)	144
	Impostazione della rotazione massima (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)	145
	Impostazione della memoria per la condizione di avvio dopo l'accensione (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)	146
	Funzione di visualizzazione conversione rapporto di trasmissione (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)	147
	Funzione di prevenzione surriscaldamento (NBX/NLX plus/MX2/MCX).....	148
	NLX plus	149
	MX2	151
5-19	Ablatore a ultrasuoni.....	158
	Impostazione interruttore Perio/Endo/Ablazione	158
	Impostazione dell'uscita massima in modalità di scorrimento Va.....	159
	Impostazione dell'uscita massima in modalità di scorrimento Fix	159
	Impostazione della memoria per la condizione di avvio dopo l'accensione.....	160
5-20	Turbina ad aria/motore pneumatico	161
	Impostazione della modalità di scorrimento	161
	Impostazione dell'uscita massima	162
	Impostazione della memoria per la condizione di avvio dopo l'accensione.....	163
5-21	Motore dell'impianto.....	164
5-21-1	Metodo di collegamento	164
5-21-2	Metodo di funzionamento	168
5-21-3	Impostazione delle condizioni del manipolo.....	169
	Impostazione della modalità di scorrimento	169
	Impostazione dell'uscita massima.....	169
	Impostazione delle memorie di accensione predefinite.....	171
	Funzione di visualizzazione conversione marce (MX-i LED 3a Gen.)	172
5-22	Siringhe	173
5-23	Comando a pedale (cablato/wireless)	174
5-23-1	Conferma dell'accoppiamento del pedale wireless.....	175
5-23-2	Come sostituire le batterie del pedale wireless	176
5-23-3	Collegamento del cavo di un pedale wireless	177

5–23–4	Precauzioni per l'uso del pedale wireless	179
5–24	Pannello di manutenzione.....	180
5–25	Manipolo (supporto assistente).....	181
5–26	Fascetta del tubo flessibile assistente	181
5–27	Riempimento di un bicchiere	182
5–28	Indicatore LED.....	183
5–29	Porta USB	184
5–30	Lampada EURUS.....	185
5–31	Lampada odontoiatrica 900.....	186
5–32	Staffa per monitor.....	187
5–33	Maniglione (S4).....	187
5–34	Visione panoramica	188
5–35	Visione odontoiatrica	188

6 Impostazione/Regolazione

6–1	Interruttore per funzionamento automatico	189
6–1–1	Impostazione delle posizioni di trattamento e di ingresso/uscita.....	189
6–1–2	Impostazione della posizione di risciacquo della bocca.....	189
6–1–3	Impostazione libera dell'angolo del gambale	190
6–2	Interruttore funzione.....	192
6–2–1	Impostazione delle voci con l'interruttore funzione	193
6–2–2	Selezione del metodo di risciacquo ed esecuzione del risciacquo	194
6–2–3	Selezione del metodo di lavaggio della linea di aspirazione e del lavaggio dei condotti	215
6–2–4	Visualizzazione della pressione dell'aria di azionamento	232
6–2–5	Impostazione della modalità spruzzo	233
6–2–6	Impostazione del tempo di attivazione della lampada.....	234
6–2–7	Impostazione della luminosità del micromotore	235
6–2–8	Impostazione del livello dell'acqua del sistema di riempimento bicchiere	237
6–2–9	Impostazione dell'interblocco riempimento bicchiere/risciacquo sputacchiera....	239
6–2–10	Impostazione del tempo di risciacquo sputacchiera	240
6–2–11	Impostazione della lingua.....	241
6–2–12	Impostazione del tono di allarme del timer	242
6–2–13	Impostazione del volume del tocco dei tasti.....	243
6–2–14	Impostazione del tempo modalità sospensione.....	244
6–2–15	Impostazione dell'annullamento di emergenza del blocco poltrona	245
6–2–16	Visualizzazione della versione del programma	246

6-3	Regolazione della quantità di acqua/aria fornita dall'unità medico	247
6-4	Regolazione della quantità di acqua/aria fornita all'unità sputacchiera.....	248

7 Manutenzione e pulizia

7-1	Esterno	249
7-1-1	Pulizia e disinfezione delle superfici	249
7-2	Poltrona	250
7-2-1	Parte in pelle.....	250
7-3	Unità medico	251
7-3-1	Pannello a sfioramento	251
7-3-2	Tappetino in silicone/appoggio per manipolo	251
7-3-3	Coperchio maniglia.....	252
7-3-4	Supporto contenitore rifiuti.....	253
7-3-5	Portastrumenti.....	253
7-3-6	Siringa BT14 3WAY	257
7-3-7	Siringa SYR-20 3WAY	259
7-3-8	Siringa tipo 77 3WAY	261
7-3-9	Tubo flessibile del manipolo	263
7-3-10	Separatore nebbia d'olio.....	263
7-4	Unità sputacchiera.....	264
7-4-1	Supporto assistente	264
7-4-2	Fascetta del tubo flessibile assistente	266
7-4-3	Tappetino in silicone assistente	266
7-4-4	Lavaggio e sterilizzazione del manipolo di aspirazione e del manipolo aspirasaliva.....	267
7-4-5	Lina di aspirazione/linea aspirasaliva	270
7-4-6	Siringa BT14 3WAY	270
7-4-7	Siringa SYR-20 3WAY	270
7-4-8	Siringa tipo 77 3WAY	270
7-4-9	Finestra sensore per sistema di riempimento bicchiere	270
7-4-10	Sputacchiera	271
7-4-11	Raccoglitore di solidi.....	273
7-4-12	Valvola sputacchiera.....	274
7-4-13	Filtro dell'aria	275
7-4-14	Compressore d'aria.....	276
7-4-15	Pompa di aspirazione	276
7-4-16	Sistema di risciacquo integrato	277

Sommario

7–5	Come staccare la batteria dell'unità medico	278
7–6	Manutenzione e ispezione	280
	Note sulla manutenzione e l'ispezione quotidiana (da parte dell'utente).....	280
	Note per l'ispezione periodica.....	282
7–7	Parti amovibili	283
7–8	Metodo di conservazione	283
8	Manutenzione da parte di tecnici dell'assistenza	
8–1	Assistenza post-vendita.....	284
8–2	Durata di servizio	284
8–3	Periodo di conservazione dei pezzi.....	284
9	Risoluzione dei problemi	
9–1	Risoluzione dei problemi.....	285
9–2	Messaggio sul pannello a sfioramento e misure da adottare	286
10	Accessori e materiali di consumo	
10–1	Accessori	289
10–2	Materiali di consumo	289

1 Informazioni generali

1-1 Uso previsto del prodotto

Questo prodotto è un dispositivo terapeutico attivo destinato all'uso esclusivo per diagnosi, trattamenti e relative procedure di odontoiatria.

Il prodotto deve essere utilizzato o manipolato da odontoiatri o da personale odontoiatrico qualificato sotto la supervisione dell'odontoiatra.

Tali odontoiatri o personale odontoiatrico devono istruire e/o assistere i pazienti ad avvicinarsi e allontanarsi dal prodotto.

Ai pazienti non deve essere consentito azionare o manipolare il prodotto a meno che non abbiano ricevuto le apposite istruzioni.

Il prodotto viene fornito insieme ai manipoli, come il micromotore elettrico, la turbina ad aria e/o il motore pneumatico, l'ablatore e così via.

1-2 Conformità a regolamenti e direttive

Questo prodotto è conforme alle norme MDR (UE) 2017/745, alla Direttiva RoHS 2011/65/UE e alla Direttiva RE 2014/53/UE.

1-3 Dichiarazione di conformità

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il dispositivo riportato di seguito è conforme a MDR (EU) 2017/745, alla Direttiva RoHS: 2011/65/EU in base alla categoria 8 dell'Allegato I e, se applicabile, a qualsiasi altra legislazione pertinente dell'Unione relativa all'emissione di una dichiarazione di conformità UE.

Tipo prodotto: UNITÀ ODONTOIATRICA E POLTRONA (CLASSE II a)

Nome prodotto: EURUS

“CLASSE IIa” definita dalla norma 9 dell’Allegato VIII di MDR.

Il prodotto è stato progettato e prodotto in conformità agli standard europei, come riportato nella Dichiarazione di conformità.

1–4 Smaltimento del dispositivo

Al momento dello smaltimento di questo prodotto e di parti sostituite, intraprendere con attenzione misure di controllo delle infezioni e maneggiarli correttamente in conformità alle leggi e ai regolamenti pertinenti (norme e regolamenti locali applicabili).

Nell'area UE, la Direttiva UE 2012/19/UE (Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche [Direttiva RAEE]) si applica a questo prodotto. Il riciclaggio/lo smaltimento rispettoso dell'ambiente è obbligatorio ai sensi di questa Direttiva.

Rimuovere tutte le batterie quando si smaltisce il prodotto.

Le batterie si trovano all'interno del pedale wireless e dell'unità medico.

A seconda delle specifiche, all'interno dell'unità medico potrebbe non essere installata una batteria.

Rimuoverla se è installata.

[Riferimento] Come staccare la batteria dell'unità medico [pagine 278, 279]

[Riferimento] Come sostituire le batterie del pedale wireless [pagina 176]

1–5 Smaltimento dei residui

Chiedere a un professionista di smaltire i residui di amalgama.

1–6 Un avviso per l'utente e/o il paziente

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utente e/o il paziente risiedono.

1–7 Manipoli compatibili

Selezionare un manipolo dall'elenco dei manipoli compatibili.

(Per riferimento, vedere pagina 40.)

I connettori del tubo flessibile del manipolo sono stati progettati e prodotti in conformità con ISO9168:2009 (CONNETTORI PER TUBI ODONTOIATRICI PER MANIPOLI ODONTOIATRICI AZIONATI AD ARIA). Tuttavia, potrebbe accadere che i connettori delle turbine ad aria o dei motori pneumatici non si inseriscano in alcuni manipoli a causa delle tolleranze di produzione. Rivolgersi al concessionario autorizzato Belmont di zona per verificare la collegabilità prima di acquistare il manipolo. Tranne che per i nostri manipoli consigliati, non saremo responsabili di eventuali problemi derivanti da una cattiva capacità di connessione o dalle loro prestazioni.

1–8 Dispositivi collegabili al prodotto

(Per riferimento, vedere pagina 40.)

1–9 Simboli

I simboli elencati di seguito sono utilizzati su questo prodotto, sull'etichettatura e in questo libretto. Controllare il significato di ciascun simbolo.

	Interruttore (ON)		Interruttore (OFF)
	Interruttore per sollevare la poltrona/il poggiatesta		Interruttore per abbassare la poltrona/il poggiatesta
	Interruttore per l'inclinazione dello schienale/del poggiatesta		Interruttore per sollevare lo schienale/del poggiatesta
	Interruttore per passare alla poltrona/al poggiatesta		Interruttore per ritornare all'ultima posizione
	Interruttore ritorno automatico		Interruttore preimpostato 1
	Interruttore preimpostato 2		Interruttore lampada odontoiatrica ON/OFF
	Interruttore sistema di riempimento bicchiere/controllo del flusso		Interruttore risciacquo sputacchiera/controllo del flusso
	Interruttore extra		Joystick per funzionamento manuale
	Joystick per funzionamento automatico		Joystick per poggiatesta (elettroidraulico)
	Raccordo di servizio per uso dell'acqua		Controllo del flusso dell'acqua del raccordo di servizio per l'uso dell'acqua
	Raccordo di servizio per uso dell'aria		Controllo del flusso acqua/aria dello spruzzo della siringa
	Controllo del flusso di acqua dello spruzzo del manipolo		Scarico dell'acqua dal filtro dell'aria
	Messa a terra protettiva		Messa a terra funzionale

1 Informazioni generali

	Attenzione *Il colore base è giallo.		Segnale di avvertenza generale *Il colore base è giallo.
	Attività generalmente vietata		Smontaggio, riparazione o modifica vietati
	Istruzioni per azioni obbligatorie in generale		Seguire le istruzioni per l'uso *Il colore della parte nera è blu nell'etichetta reale.
	Parti applicate di Tipo B che contattano solo la superficie del corpo del paziente		Corrente alternata
	Un simbolo dell'autoclave che indica le parti che possono essere sterilizzate in autoclave a temperature fino a 135 °C		Terminale USB
	Interruttore per la selezione della memoria del paziente (Modalità adulto)		Interruttore per la selezione della memoria del paziente (Modalità bambino)
	Interruttore per la selezione della memoria del paziente (Modalità senior)		Cambiare la memoria utente
	Interruttore lampada odontoiatrica ON		Interruttore lampada odontoiatrica OFF
	Interruttore timer		Interruttore del sistema di riempimento bicchiere ON
	Interruttore del sistema di riempimento bicchiere OFF		Interruttore risciacquo sputacchiera ON
	Interruttore risciacquo sputacchiera OFF		Interruttore funzione
	Interruttore cambio luci		Modalità sensore/commutazione
	Modalità commutazione		Modalità ON
	Modalità OFF		Interruttore blocco (sbloccato)
	Interruttore blocco (bloccato)		Interruttore riscaldatore acqua ON

1 Informazioni generali

	Interruttore riscaldatore acqua OFF		N. manipolo N. preso
	Interruttore riscaldatore manipolo Alto		Interruttore riscaldatore manipolo Basso
	Interruttore riscaldatore manipolo OFF		Indicatore pedale wireless (accoppiato)
	Indicatore pedale wireless (non accoppiato)		Stato di risciacquo per manipolo (risciacquo in corso)
	Avanzamento pagina		Stato di risciacquo per riempimento bicchiere e sputacchiera (risciacquo in corso)
	Avvio		Pausa
	Annulla		Interruttore di cambio spruzzo, aria ON
	Interruttore di cambio spruzzo, aria OFF		Interruttore di cambio spruzzo, acqua ON
	Interruttore di cambio spruzzo, acqua OFF		Interruttore luce manipolo (ON)
	Interruttore luce manipolo (OFF)		Indicatore bottiglia dell'acqua
	Interruttore campanello		Interruttore di selezione (es. luminosità del manipolo)
	Mostra il menu		Interruttore di rotazione del micromotore per rotazione normale (in senso orario)
	Interruttore di rotazione del micromotore per rotazione inversa (in senso antiorario)		Interruttore modalità reciproca per micromotore
	Interruttore di rotazione del micromotore per modalità reciproca		Interruttore +/-
	Interruttore memoria		Interruttore di controllo della coppia

1 Informazioni generali

	Interruttore cambio modalità di scorrimento Modalità di scorrimento Va		Interruttore cambio modalità di scorrimento Modalità di scorrimento Fix
	Nessuna impostazione di inversione automatica		Impostazione di inversione automatica
	Impostazione avanzamento automatico		Interruttore di cambio rapporto di trasmissione
	Interruttore Home		Interruttore Ritorno
	Interruttore Salta		Interruttore di registrazione nome
	Interruttore alfanumerico		Interruttore Indietro
	Copia della preimpostazione poltrona		Copia della preimpostazione manipolo
	Volume allarme		Grafico a barre a sfioramento
	Interruttore suono di allarme (attivo)		Interruttore suono di allarme (silenzioso)
	Tipo di suono di allarme		Attivazione prevenzione surriscaldamento
	Indicatore di blocco poltrona (La poltrona è bloccata!)		Pagina di spiegazione
	Risciacquo, lavaggio della linea di aspirazione		Elettore di aspirazione/aspirasaliva
	Indicazione del detergente		Aria
	Acqua		Data e Paese di fabbricazione
	Nome e indirizzo del produttore		Numero di catalogo

1 Informazioni generali

	Raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche		Raccolta differenziata di tutte le batterie
	Certificazione di terze parti stipulata nel dispositivo medico Regolamento: 2017/745		Rappresentante europeo autorizzato
	Rappresentante autorizzato svizzero		Numero di serie
	Tensione nominale		Ingresso nominale
	Unità odontoiatrica		Poltrona per pazienti odontoiatrici
	Istruzioni per l'uso elettroniche		Dispositivo medico
	① Tempo massimo di attivazione ② Funzionamento non continuo ③ Ciclo di lavoro		Interruttore impianto
	Motore dell'impianto		Interruttore commutazione irrigazione con soluzione salina ON
	Interruttore commutazione irrigazione con soluzione salina OFF		Interruttore commutazione volume di irrigazione della soluzione salina a Lv. 5
	Interruttore commutazione volume di irrigazione della soluzione salina a Lv. 4		Interruttore commutazione volume di irrigazione della soluzione salina a Lv. 3
	Interruttore commutazione volume di irrigazione della soluzione salina a Lv. 2		Interruttore commutazione volume di irrigazione della soluzione salina a Lv. 1
	Interruttore a levetta di erogazione acqua per bottiglia d'acqua ATTIVATO: abilita erogazione acqua DISATTIVATO: arresta erogazione acqua		Interruttore a levetta di erogazione acqua per bottiglia d'acqua PREMERE: abilita erogazione acqua TIRARE: arresta erogazione acqua
	Interruttore a levetta di erogazione acqua PREMERE: erogazione acqua da acquedotto pubblico TIRARE: erogazione acqua da bottiglia		Valvola di scarico

1 Informazioni generali

 CLOSE	La valvola principale dell'acqua è chiusa	 OPEN	La valvola principale dell'acqua è aperta
	Risciacquo		Interruttore timer per il risciacquo
	Impostazioni di risciacquo		Interruttore modalità manipolo
	Interruttore modalità risciacquo riempি bicchiere		Riempি bicchiere, interruttore modalità risciacquo coppа sputacchiera
	Stato di risciacquo per il riempি bicchiere (risciacquo in corso)		

1–10 Descrizione tecnica

I seguenti argomenti sono illustrati nei documenti elencati di seguito:

Voce	Documento
Come installare il prodotto	Istruzioni di installazione Istruzioni di pre-installazione
Cablaggio/impianto idraulico	Istruzioni di installazione

2-1 Interpretazione del livello di rischio

Precauzioni prima dell'uso

Assicurarsi di leggere attentamente le precauzioni di sicurezza e le precauzioni di funzionamento e di utilizzare il prodotto in modo corretto.

Queste precauzioni hanno lo scopo di garantire l'uso sicuro del prodotto e prevenire danni o lesioni agli utenti o ad altre persone.

In base alla entità di lesioni e danni e al grado di urgenza, un incidente che potrebbe essere causato da un uso improprio del prodotto è classificato in una delle seguenti categorie: CONTROINDICAZIONE, AVVERTENZA e ATTENZIONE. Tutte queste categorie sono importanti per la sicurezza. Seguire sempre le istruzioni fornite.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali incidenti dovuti al mancato rispetto delle precauzioni di sicurezza o delle precauzioni di funzionamento anche in caso di danni o lesioni agli utenti o ad altre persone.

In tal caso, gli utenti o altre persone che utilizzano il prodotto senza osservare le precauzioni di sicurezza e le precauzioni di funzionamento sono responsabili per eventuali lesioni o danni subiti.

I simboli grafici sono descritti dettagliatamente di seguito.

Dopo aver compreso appieno questa spiegazione, leggere il testo.

2 Considerazioni sulla sicurezza

Classificazione in base al grado di lesioni o danni e all'urgenza

CONTROINDICAZIONE

L'uso del prodotto con la mancata osservanza di questa indicazione crea una condizione di pericolo che potrebbe provocare la morte o gravi lesioni.



AVVERTENZA

La manipolazione non corretta del prodotto con la mancata osservanza di questa indicazione crea una condizione di pericolo che potrebbe provocare la morte o gravi lesioni.



ATTENZIONE

La manipolazione non corretta del prodotto con la mancata osservanza di questa indicazione crea una potenziale condizione di pericolo che potrebbe provocare lesioni moderate o lievi o danni materiali.

I seguenti simboli grafici vengono utilizzati per spiegare le responsabilità per l'uso del prodotto in sicurezza:

Simboli grafici di attività vietata



Attività generalmente vietata



Smontaggio, riparazione o modifica vietati

Simbolo grafico di istruzioni obbligatorie



Istruzioni per azioni obbligatorie in generale

2-2 Precauzioni di sicurezza

CONTROINDICAZIONE

Installazione o trasferimento del prodotto



Uso e manutenzione del prodotto



Precauzioni relative all'installazione

Non installare il prodotto vicino a sorgenti elettromagnetiche, per esempio strutture di comunicazione o montacarichi.

Potrebbero verificarsi problemi di funzionamento di questo prodotto in presenza di onde di interferenza elettromagnetica.

Non utilizzare l'apparecchiatura in ambienti con atmosfera esplosiva (es. in presenza di gas infiammabili).

L'uso improprio in un'atmosfera del genere potrebbe causare lesioni o incendi.

Utilizzare con attenzione in presenza di onde elettromagnetiche.

Non utilizzare apparecchiature che generano onde elettromagnetiche, per esempio telefoni cellulari, intorno a questo prodotto.

Potrebbero verificarsi problemi di funzionamento di questo prodotto.

Assicurarsi di spegnere l'interruttore principale del prodotto quando sono in uso apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza (HF).

Assicurarsi di spegnere l'interruttore principale quando sono in uso apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza, in quanto il disturbo generato da tali apparecchiature potrebbe causare un funzionamento non corretto di questo prodotto.

Mai smontare, riparare o modificare il prodotto.

Individui diversi dal concessionario autorizzato Belmont di zona non devono smontare o riparare questo prodotto.

Ciò potrebbe provocare un incidente, un guasto, scosse elettriche o incendio. Non modificare mai il prodotto, perché ciò è estremamente pericoloso.



Installazione o trasferimento del prodotto



AVVERTENZA

Precauzioni per l'installazione

Rivolgersi al concessionario autorizzato Belmont di zona per installare il prodotto.

Assicurarsi di posizionare il prodotto su un pavimento stabile e piano.

Collocare l'apparecchio su un pavimento non a livello potrebbe causarne la caduta.

Assicurarsi di collegare a terra il prodotto in modo sicuro. (Richiedere a un professionista la messa a terra del prodotto.)

Guasto o perdite elettriche potrebbero causare scosse elettriche.

Per evitare il rischio di scosse elettriche, questo apparecchio deve essere collegato soltanto a una rete di alimentazione elettrica con messa a terra protettiva.

AVVERTENZA

Uso e manutenzione del prodotto



Tenere le parti mobili del prodotto lontano da mani, dita e corpi dei pazienti e degli utenti.

Le mani, le dita o il corpo potrebbero rimanere incastrati nel prodotto, causando lesioni personali.

Il paziente non deve sdraiarsi prono, inginocchiarsi nella posizione formale di seiza (con le natiche sui talloni) o sedersi sul prodotto con un bambino in braccio.

La poltrona potrebbe spostarsi inaspettatamente, provocando lesioni.

Il paziente non deve sedersi sul bordo della seduta.

La poltrona potrebbe cadere o spostarsi inaspettatamente, provocando lesioni personali o danni a dispositivi periferici.

Il paziente non deve sedersi in un'area diversa dalla posizione designata. Non deve essere applicato carico eccessivo al prodotto.

Il paziente non deve sedersi sul poggiapiedi, sul bracciolo, sullo schienale o sul gambale.

Ciò potrebbe causare lesioni dovute a cadute o danni ai dispositivi periferici.

Non deve essere applicato un carico eccessivo sul braccio medico o sul braccio assistente.

Il paziente non deve sedersi sul braccio medico o sul braccio assistente.

Ciò potrebbe causare lesioni dovute a cadute o danni ai dispositivi periferici.

Un carico superiore al limite di peso (3 kg) non deve essere applicato sulla tavoletta medico.

Ciò potrebbe provocare danni o lesioni.

Un carico superiore al limite di peso (1,5 kg) non deve essere applicato sul vassoio secondario della tavoletta medico (asta).

Ciò potrebbe provocare danni o lesioni.

Un carico superiore al limite di peso (1,5 kg) non deve essere applicato sul vassoio assistente.

Ciò potrebbe provocare danni o lesioni.

Non lavare il prodotto con acqua.

Ciò potrebbe causare guasto o scosse elettriche.

Divieto di utilizzo di questa apparecchiatura in prossimità di altre apparecchiature elettroniche o impilata con esse

L'uso di questa apparecchiatura adiacente o impilata con altre apparecchiature deve essere evitato perché potrebbe causare un funzionamento scorretto. Se tale uso è necessario, questa apparecchiatura e le altre apparecchiature devono essere osservate per verificare che funzionino normalmente.

Divieto di collocare apparecchiature portatili di comunicazione RF adiacenti a questo prodotto

Le apparecchiature di comunicazione RF portatili (comprese le periferiche come i cavi dell'antenna e le antenne esterne) devono essere utilizzate a una distanza non inferiore a 30 cm (12 pollici) da qualsiasi parte di EURUS, compresi i cavi specificati dal produttore. In caso contrario, potrebbe verificarsi un deterioramento delle prestazioni di questo apparecchio.

Uso e manutenzione del prodotto



AVVERTENZA

Precauzioni per salire e scendere da EURUS

Quando il paziente sale o scende da EURUS, la poltrona deve essere sempre nella posizione più bassa e ciascuna operazione deve essere bloccata dall'interruttore di blocco.

Prima di spostare un paziente da una sedia a rotelle a EURUS o viceversa, assicurarsi che non vi siano ostacoli (es. comandi a pedale) situati intorno alla sedia a rotelle o a chi sta effettuando il trattamento.

Il contatto dei piedi o delle rotelle della sedia a rotelle con ostacoli (come i comandi a pedale) potrebbe causare lesioni o danni ai dispositivi periferici.

Quando il paziente viene spostato da un sedia a rotelle a EURUS o viceversa, deve essere attentamente monitorato per evitare cadute.


Se il paziente deve scendere da EURUS in una posizione diversa dalla posizione designata per salire e scendere da EURUS, a causa di un'interruzione di corrente o in caso di emergenza, deve essere attentamente monitorato per evitare cadute.

Punti da ricordare quando un paziente è seduto nella poltrona


Come mostrato nella figura, dare istruzioni al paziente per sedersi nella poltrona. Assicurarsi che il paziente mantenga la postura mostrata nella figura prima di azionare la poltrona.



Il paziente deve stringere le mani tra loro.

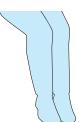

Il paziente deve mettere i piedi paralleli fianco a fianco.

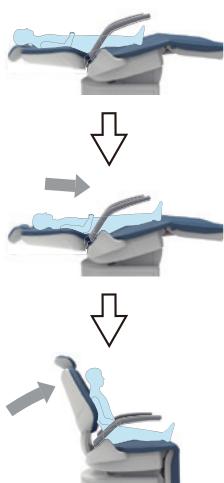

Per un bambino piccolo, confermare che i glutei siano posizionati sulla seduta prima di sollevare lo schienale.

Il bambino potrebbe scivolare in basso mentre la poltrona è in movimento, subendo lesioni.

AVVERTENZA

Uso e manutenzione del prodotto



Prestare attenzione ai pazienti e ai bambini.

Mantenere lo sguardo sul paziente quando il prodotto è in uso.

I pazienti (specialmente i bambini) potrebbero toccare l'interruttore di controllo o il sistema inavvertitamente, causando così un incidente dovuto a utilizzo improprio del prodotto.

Tenere i bambini lontani da questo prodotto tranne che durante il trattamento.

Rimuovere gli occhiali ed eventuali accessori del paziente (come collane o braccialetti) prima del trattamento.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe ostacolare il trattamento e causare un incidente.

Precauzioni quando si solleva/si abbassa la schienale

Prima di abbassare lo schienale, assicurarsi che il braccio o la mano del paziente non siano inseriti tra lo schienale e la seduta.

Prima di sollevare lo schienale, assicurarsi che il braccio o la mano del paziente non siano inseriti tra lo schienale e il bracciolo.

Se lo schienale viene abbassato durante il funzionamento automatico, il gambale si solleva. Azionare lo schienale con attenzione per evitare che le dita dei piedi del paziente entrino a contatto con i dispositivi periferici (solo poltrona con gambale pieghevole).

Se lo schienale viene sollevato durante il funzionamento automatico, il gambale si abbassa. Azionare lo schienale con attenzione dopo aver verificato che lo spazio sotto il gambale sia libero da persone e oggetti (solo poltrona con gambale pieghevole).

Precauzioni per l'azionamento della poltrona e il funzionamento automatico

Prima e durante il funzionamento della poltrona, prestare molta attenzione al raggio d'azione (direzione di sollevamento/abbassamento della seduta, direzione di abbassamento/sollevamento dello schienale e direzione di spostamento del gambale [solo poltrona con gambale pieghevole]) e assicurarsi che la poltrona non entri in contatto con parti del corpo, mani o piedi, o ostacoli. Parti del corpo, mani o piedi, oppure oggetti potrebbero rimanere intrappolati nella poltrona, causando lesioni personali o danni ai dispositivi periferici.

Prima di utilizzare la poltrona, assicurarsi che il paziente sia seduto in posizione corretta e mantenere lo sguardo su di lui/lei quando la poltrona è in uso.

Precauzioni quando si utilizza il poggiapiedi (manuale)

Durante il funzionamento del poggiapiedi, assicurarsi che le dita dell'operatore non si impigliano nella leva di comando e non vengano inserite tra il poggiapiedi e lo schienale.

AVVERTENZA

Uso e manutenzione del prodotto



Precauzioni quando si utilizza il poggiapiede (elettroidraulico)

Prima di azionare il poggiapiede, assicurarsi che il paziente sia seduto in posizione normale e mantenere lo sguardo su di lui/lei quando la poltrona è in uso.

[Riferimento] Punti da ricordare quando un paziente è seduto nella poltrona [pagina 21]

Non utilizzare il poggiapiede a un'angolazione alla quale il paziente avverte dolore.

Prima di azionare il poggiapiede, assicurarsi che non vi siano ostacoli attorno al poggiapiede e che non vi siano parti del corpo o oggetti incastrati tra il poggiapiede e lo schienale.

Quando lo schienale è reclinato mentre il paziente è seduto, non alzare o abbassare il poggiapiede con la testa del paziente su di esso.

Prestare attenzione all'uso involontario dei pedali wireless.

Se è presente più di un EURUS nello stesso ambiente, non azionare il pedale wireless collegato a un altro prodotto.

Precauzioni quando si utilizza un micromotore (NBX, NLX plus, NLX nano) con funzione anti-calore

Quando la funzione anti-calore è attivata, non accendere l'interruttore principale per il ciclo di alimentazione e il funzionamento continuo. Il micromotore potrebbe generare calore e causare ustioni o danni al motore.

Precauzioni per il fissaggio dell'ugello (siringa)

Se si utilizza la siringa con il suo ugello non saldamente collegato, potrebbe scoppiare quando si spruzza acqua o aria e potrebbe danneggiare gli utenti o altre persone. Verificare che l'ugello sia fissato saldamente prima di utilizzarlo. [pagine 257, 260 e 262]

Precauzioni quando la siringa cade sul pavimento (siringa)

Se la siringa cade sul pavimento, verificare che non si osservi alcun malfunzionamento. Quindi, pulire con un panno morbido inumidito con disinfettante FD366 prodotto da Dürr. Potrebbero verificarsi lesioni se una sporgenza affilata si trova sull'ugello o sul corpo, quindi interrompere l'uso del prodotto e contattare il concessionario autorizzato Belmont.

Sviluppo di un enfisema sottocutaneo

L'aria di raffreddamento (da sola o a spruzzo) viene rilasciata dal chip del manipolo (micromotore e turbina ad aria/motore pneumatico)/dal chip dell'ugello della siringa. Ciò può causare lo sviluppo di un enfisema sottocutaneo nel paziente, quindi utilizzare l'aria di raffreddamento con attenzione.

Prestare molta attenzione a un paziente che è portatore di un impianto di pacemaker o defibrillatore.

Se si dovessero verificare anomalie, spegnere immediatamente l'interruttore principale e interrompere l'uso del prodotto.

EURUS potrebbe influenzare il funzionamento del pacemaker o del defibrillatore, causando un incidente.

AVVERTENZA

Uso e manutenzione del prodotto



Asciugare immediatamente eventuali versamenti o perdite di acqua sul pavimento.

Una forza ridotta del pavimento potrebbe causare la caduta del prodotto, provocando lesioni personali o danni ai dispositivi periferici.

Pulire a fondo l'apparecchio.

Una scarsa pulizia potrebbe causare la crescita di batteri, costituendo un rischio per la salute.

Vedere le procedure di pulizia alle pagine da 249 a 277.

Assicurarsi di eseguire la manutenzione.

L'utilizzo del prodotto senza manutenzione potrebbe causare lesioni o danni ai dispositivi periferici.

Vedere le informazioni sulla manutenzione alle pagine da 280 a 282.

Non utilizzare il prodotto se è rotto.

In caso di rottura del prodotto, interromperne immediatamente l'uso e spegnere l'interruttore principale. Quindi, rivolgersi al concessionario autorizzato Belmont di zona per la riparazione del prodotto.

Spegnere l'interruttore principale durante la pulizia.

La mancata osservanza di questa istruzione potrebbe causare scosse elettriche o accensione. Il prodotto potrebbe anche spostarsi inaspettatamente, provocando lesioni.

Azione intrapresa per una interruzione di corrente

Per evitare un funzionamento imprevisto del prodotto dopo il ripristino da una interruzione di corrente, spegnere l'interruttore principale e mettere il manipolo/la siringa nel portastrumenti/supporto assistente.

Assicurarsi di spegnere l'interruttore di circuito dei dispositivi quando il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

Assicurarsi di spegnere l'interruttore di circuito dei dispositivi nell'ambulatorio quando il prodotto non viene utilizzato per lungo tempo per motivi come l'orario di chiusura e il giorno di chiusura delle visite.

Se l'interruttore di circuito non viene disattivato, potrebbe verificarsi un incendio causato da una fuga di elettricità se c'è deterioramento dell'isolamento.

ATTENZIONE

Uso e manutenzione del prodotto



Non consentire che una persona che supera il limite di peso si sieda sulla poltrona.

Potrebbero verificarsi caduta o problemi di funzionamento.

[Riferimento] Limite di peso

4 Specifiche del prodotto, 4-1 Dati tecnici

[pagine 47, 53 e 59]

Non colpire né strofinare il prodotto.

Ciò potrebbe causare danni all'involucro esterno o problemi di funzionamento.

Utilizzare solo una batteria specificata da Belmont per il pedale wireless.

Non combinare una batteria nuova con una vecchia e non utilizzare diversi tipi di batterie (es. una batteria alcalina e una batteria al nichel-idrogeno). L'uso improprio delle batterie potrebbe causare perdite o rotture della batteria.

Non toccare le perdite da una batteria.

Il contatto dei liquidi della batteria con gli occhi potrebbe causare cecità. Sciacquare immediatamente con acqua pulita senza strofinare e consultare immediatamente un medico.

Il contatto dei liquidi delle batterie con la pelle potrebbe causare disturbi cutanei, quindi sciacquare immediatamente con acqua pulita.



Assicurarsi che ciascuna parte funzioni normalmente, senza anomalie rilevate, prima dell'uso.

Ispezionare sempre il prodotto per situazioni anomale come componenti allentati, gioco, inclinazione, vibrazione, suono, temperatura anomala o cattivi odori.

Se si percepisce qualche anomalia, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e spegnere l'interruttore principale. Quindi, contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.

Leggere i documenti di accompagnamento per ciascun dispositivo.

Prima dell'uso, assicurarsi di leggere attentamente le istruzioni per l'uso in dotazione con ciascun dispositivo e di usare il dispositivo correttamente.

Assicurarsi di azionare gli interruttori manualmente.

Assicurarsi di azionare gli interruttori manualmente, tranne il comando a pedale azionato dal piede e i joystick. Non azionare gli interruttori manualmente potrebbe provocare danni o malfunzionamenti.

Azionare gli interruttori con attenzione per evitare errori.

L'operatore deve prestare molta attenzione alle persone intorno al prodotto e annunciare a parole prima dell'azionamento per evitare errori.

Rimuovere la pellicola attaccata al pannello a sfioramento prima dell'uso iniziale

L'utilizzo del pannello a sfioramento con la pellicola attaccata potrebbe causare un funzionamento non corretto, con conseguenti lesioni.

⚠ ATTENZIONE

Uso e manutenzione del prodotto



Precauzioni quando ci si prende cura del pannello a sfioramento

Per pulire e disinfezare il pannello a sfioramento, utilizzare etanolo per disinfezione. L'uso di altri disinfettanti potrebbe portare a un funzionamento errato, con conseguenti lesioni.

Assicurarsi di eliminare tutta l'acqua e il detergente. In caso contrario, si potrebbe causare un guasto del funzionamento, un malfunzionamento, con conseguenti lesioni.

Precauzioni per lo spostamento dell'unità medico

Guardare intorno con attenzione mentre si sposta l'unità medico. Il contatto con il chip del manipolo potrebbe causare lesioni.

Precauzioni durante l'utilizzo del carrello

Quando si utilizza il carrello all'interno del raggio di azione della poltrona, prestare attenzione a non urtare persone o la poltrona. Il contatto con l'estremità del manipolo potrebbe causare lesioni.

Non sedersi o appoggiarsi sul carrello. Non salire sulla base del carrello o sul tubo flessibile del carrello.

In caso contrario, tali azioni potrebbero danneggiare il tubo flessibile o causare la caduta del carrello, provocando lesioni.

Precauzioni quando si utilizza un manipolo


In caso di calore o odore di fumo, interrompere l'uso del manipolo, spegnere l'interruttore principale e contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona. Ciò potrebbe causare ustioni o effetti negativi sulla polpa dentaria.

Precauzioni per l'utilizzo di un ablatore a ultrasuoni

Dopo l'uso, applicare un coperchio dedicato (se presente) alla punta dell'ablatore e metterlo in un portastrumenti. Il contatto con l'estremità dell'ablatore potrebbe causare lesioni.

Precauzioni quando si utilizza una funzione dedicata per NLXplus/MX2

Se è collegata una lima a forma di vite inversa, assicurarsi di selezionare "Nessuna funzione di inversione automatica" e cambiare direzione di rotazione tramite l'interruttore di rotazione del micromotore. Se l'unità NLXplus/MX2 viene utilizzata con la "Funzione di inversione automatica/funzione di avanzamento automatico" selezionata, la lima verrà danneggiata, causando lesioni.

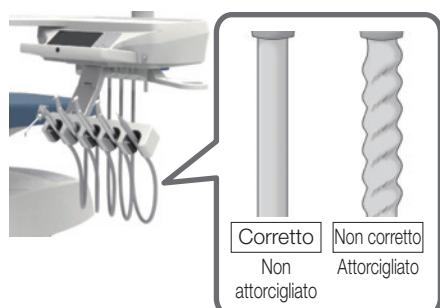

Non utilizzare il manipolo con il tubo flessibile attorcigliato

Ripetute azioni di presa e riposizionamento del manipolo possono causare l'attorcigliamento del tubo flessibile.

Controllare periodicamente che il tubo flessibile non sia attorcigliato. In caso di attorcigliamento, srotolarlo prima dell'uso.

L'uso continuo del manipolo con il tubo flessibile attorcigliato provoca pieghe nel tubo flessibile o rottura del filo, rendendo il manipolo inutilizzabile.

ATTENZIONE

Uso e manutenzione del prodotto



Precauzioni per l'uso della clip di risciacquo (siringa: BT14/tipo 77/DCI) e attrezzatura per la pulizia degli ugelli (BT14)

Fare attenzione a non rimanere feriti dal bordo della clip di risciacquo (tipo 77/DCI) o dalla punta dell'apparecchiatura di pulizia degli ugelli (BT14).

Precauzioni per la rotazione del bracciolo

Assicurarsi che non vi siano ostacoli posizionati intorno al bracciolo e che le dita non restino impigliate nel bracciolo.

Non utilizzare la poltrona quando il bracciolo è ruotato. Prima di utilizzare la poltrona, riportare il bracciolo alla posizione originale.

Precauzioni durante l'uso di una staffa per monitor

Non applicare un carico eccessivo e non urtare il monitor o la staffa per monitor. Non montare il monitor se non soddisfa le condizioni indicate di seguito per evitare danni o lesioni.

Dimensioni: fino a 340 x 530 mm (Lu x La)

[Monitor da 22 pollici o più piccolo]

Peso: fino a 6,5 kg

*Escludendo le dimensioni dell'impugnatura del monitor e di altri accessori

Precauzioni quando si utilizza il maniglione

Quando si aziona la poltrona, assicurarsi che il paziente non rimanga incastrato tra quest'ultima e il maniglione.

Quando si utilizza il prodotto, assicurarsi che non vi siano ostacoli, ad esempio monitor nelle vicinanze.

Non aggrapparsi, appoggiarsi o esercitare una forza eccessiva sul maniglione. Inoltre, non applicare un peso superiore a 60 kg.

Ciò potrebbe danneggiare il maniglione, causando potenziali lesioni.

Utilizzare il maniglione solo per lo scopo previsto di assistenza e cura

Non utilizzare il maniglione con le mani bagnate. Ciò potrebbe causare scivolamento, con conseguenti cadute e potenziali lesioni.

Controllare periodicamente che le viti (9 viti) che fissano il maniglione non siano allentate o instabili. Il maniglione potrebbe staccarsi e causare potenziali lesioni.

Uso e manutenzione del prodotto



ATTENZIONE

Precauzioni quando si maneggiano le batterie

Rimuovere la batteria dal pedale wireless quando non viene utilizzato per più di una settimana.

Spegnere l'interruttore principale durante la sostituzione della batteria. In caso contrario, e se un interruttore o un pedale viene premuto inavvertitamente, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente e causare danni alle persone o alle cose.

Indossare i guanti di pulizia quando si stacca la sputacchiera.

La sputacchiera è fatta di ceramica e potrebbe causare lesioni in caso di rottura.

Asciugare immediatamente eventuali soluzioni chimiche o acqua attaccati al prodotto.

Se soluzioni chimiche o acqua si attaccano all'unità di controllo potrebbero causare problemi di funzionamento o perdite elettriche. Se soluzioni chimiche o acqua si sono attaccati, spegnere immediatamente l'interruttore principale e asciugare con un panno morbido e asciutto.

Chiudere la valvola principale dell'acqua a fine giornata.

Per evitare perdite d'acqua, assicurarsi di chiudere la valvola principale a fine giornata.

Spegnere l'interruttore principale alla fine della giornata o durante una pausa.

Il malfunzionamento dovuto a contatto con EURUS causerà danni o lesioni.

Pulire e sterilizzare la punta dell'aspiratore HVE e l'ugello della siringa prima dell'uso.

La punta dell'aspiratore HVE, l'ugello della siringa che entra in contatto con i tessuti orali, viene fornito senza sterilizzazione.

La pulizia e la sterilizzazione sono necessarie prima dell'uso.

Precauzioni di sicurezza relative alla qualità dell'acqua



Tempo richiesto per il risciacquo standard delle linee dell'acqua dell'unità

⚠ ATTENZIONE

Eseguire il risciacquo prima del trattamento.

Se questo prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, l'acqua trattenuta nei condotti e nel riscaldatore acqua sarà suscettibile alla crescita batterica. Per fornire un trattamento sicuro e utilizzare il manipolo senza problemi, non dimenticare mai di eseguire il risciacquo (scarico) delle linee dell'acqua prima di iniziare il trattamento.

Dopo i trattamenti mattutini e serali, si consiglia di eseguire un risciacquo con acqua pulita per almeno 2 minuti e 40 secondi (ciò potrebbe variare a seconda della qualità dell'acqua) per prevenire la crescita batterica.

Risciacquo dei circuiti dell'acqua dei manipoli	Da 40 secondi a 2 minuti 40 secondi
Turbina ad aria / Micromotore / Motore pneumatico / Ablatore a ultrasuoni / Siringa	
Riempimento dei circuiti dell'acqua dei manipoli con soluzione chimica	
Riempimento dei circuiti dell'acqua del sistema di riempimento bicchiere con soluzione chimica	Da 30 secondi a 10 minuti
Turbina ad aria / Micromotore / Motore pneumatico / Ablatore a ultrasuoni / Siringa	Da 20 secondi a 5 minuti
+ Sistema di riempimento bicchiere	Da 10 secondi a 5 minuti
Risciacquo dei circuiti dell'acqua dei manipoli Risciacquo dei circuiti dell'acqua del sistema di riempimento bicchiere e della sputacchiera	Da 5 minuti 20 secondi a 10 minuti
Turbina ad aria / Micromotore / Motore pneumatico / Ablatore a ultrasuoni / Siringa	Da 2 minuti 40 secondi a 5 minuti
+ Sistema di riempimento bicchiere Risciacquo sputacchiera	Da 2 minuti 40 secondi a 5 minuti
Tipo senza coppa sputacchiera Risciacquo dei circuiti dell'acqua dei manipoli (Modalità breve)	Da 40 secondi a 2 minuti 40 secondi
Tipo senza coppa sputacchiera Risciacquo dei circuiti dell'acqua dei manipoli (Modalità lunga)	Da 2 minuti 40 secondi a 5 minuti
Risciacquo della linea di aspirazione	4 minuti
Lavaggio della linea di aspirazione con detergente	4 minuti
Risciacquo della linea di aspirazione + lavaggio della linea di aspirazione con detergente	8 minuti

Tempo richiesto per il lavaggio standard della linea di aspirazione


[Riferimento] Selezione e implementazione del metodo di risciacquo
[pagine da 194 a 214]

2 Considerazioni sulla sicurezza

Punti da ricordare quando si mette in funzione il prodotto

S1

Sopra il paziente

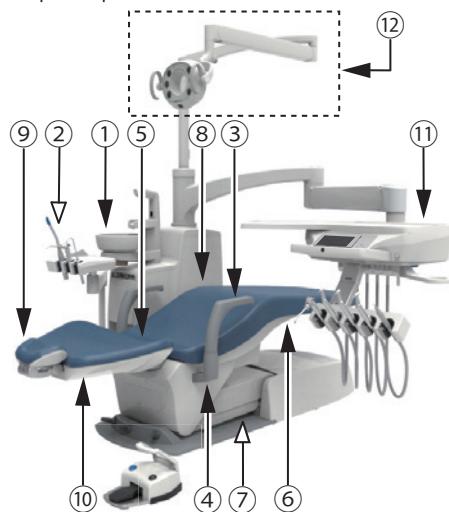


Significato del simbolo



Punto da ricordare

(posizioni che richiedono attenzione, tra cui parti mobili, parti rotanti e parti amovibili)

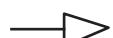

Punto da ricordare dove è disponibile un meccanismo di arresto di emergenza

Significati di ciascun punto da ricordare

- ① Prestare attenzione per evitare il contatto con la sputacchiera.
Quando la sputacchiera viene ruotata verso il lato della poltrona, tenerla lontano dal bracciolo e dal paziente.

- ② Prestare attenzione per evitare il contatto con il supporto dell'assistente.
La parte superiore del corpo del paziente non deve sporgersi in avanti sopra l'unità sputacchiera.

- ③ Prestare attenzione per evitare che parti del corpo o oggetti rimangano intrappolati nel bracciolo (durante la rotazione).
Non utilizzare la poltrona quando il bracciolo è ruotato.

- ④ Prestare attenzione per evitare che parti del corpo o oggetti rimangano intrappolati nel bracciolo (quando si abbassa la poltrona).
Non posizionare parti del corpo o oggetti sulla staffa del bracciolo quando si abbassa la poltrona.

- ⑤ Prestare attenzione per evitare che parti del corpo o oggetti rimangano intrappolati nelle parti in movimento dello schienale.
Non inserire le mani o i piedi tra lo schienale e la seduta.

- ⑥ Prestare attenzione per evitare che parti del corpo o oggetti rimangano intrappolati nella parte inferiore della seduta.
Non posizionare le mani o i piedi nella parte inferiore della seduta.

- ⑦ Prestare attenzione per evitare che parti del corpo o oggetti rimangano intrappolati nel carter posteriore struttura sollevamento poltrona.
Non posizionare parti del corpo o oggetti tra il carter posteriore struttura sollevamento poltrona e la piastra di base.

- ⑧ Prestare attenzione per evitare che parti del corpo o oggetti rimangano incastrati tra la sputacchiera e la poltrona.
Prima di azionare la poltrona, assicurarsi che mani, piedi o ostacoli non siano posizionati tra la sputacchiera e la poltrona.

- ⑨ Prestare attenzione per evitare che parti del corpo o oggetti rimangano intrappolati nella parte in movimento del poggiapiede.
Assicurarsi che le dita o i capelli non si impigliino nella parte in movimento del poggiapiede.

- ⑩ Prestare attenzione per evitare il contatto con lo schienale.
Prima di azionare lo schienale, assicurarsi che non vi siano ostacoli posizionati intorno allo schienale.


- ⑪ Prestare attenzione per evitare il contatto della poltrona con l'unità medico.
Non posizionare l'unità medico entro il raggio di azione della poltrona.

- ⑫ Prestare attenzione per evitare il contatto con la lampada.
La lampada non deve essere posizionata vicino a persone o ostacoli circostanti.

- ⑬ Prestare attenzione per evitare il contatto della poltrona con il carrello.
Non posizionare il carrello entro il raggio di azione della poltrona.


S1

Carrello

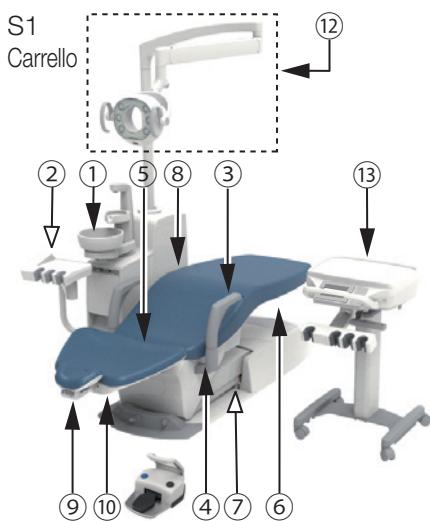

S1

Consegna armadio

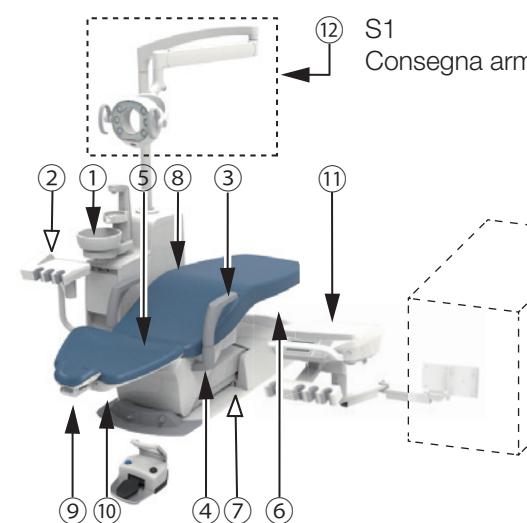

AVVERTENZA


Quando si aziona la poltrona, non posizionare parti del corpo o oggetti intorno alle parti in movimento. Ciò potrebbe causare lesioni.

2 Considerazioni sulla sicurezza

Punti da ricordare quando si mette in funzione il prodotto


S3

Sopra il paziente

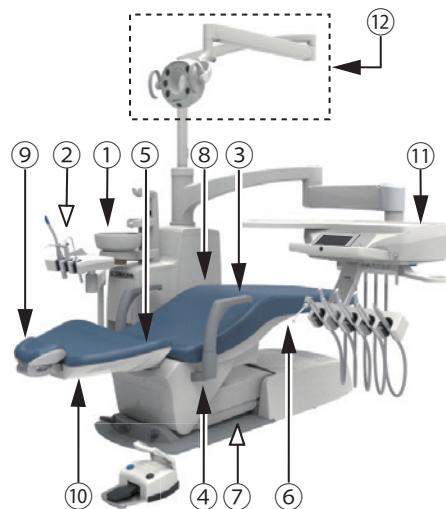


S3

Carrello

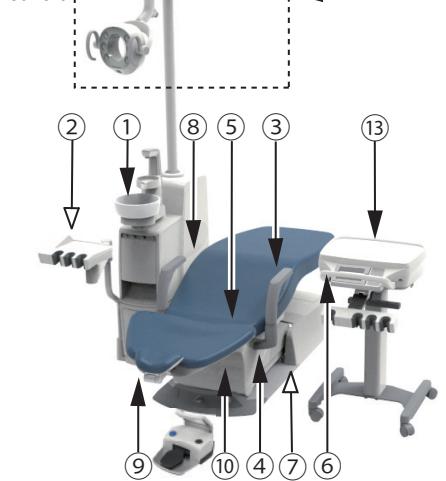

S3

Consegna armadio

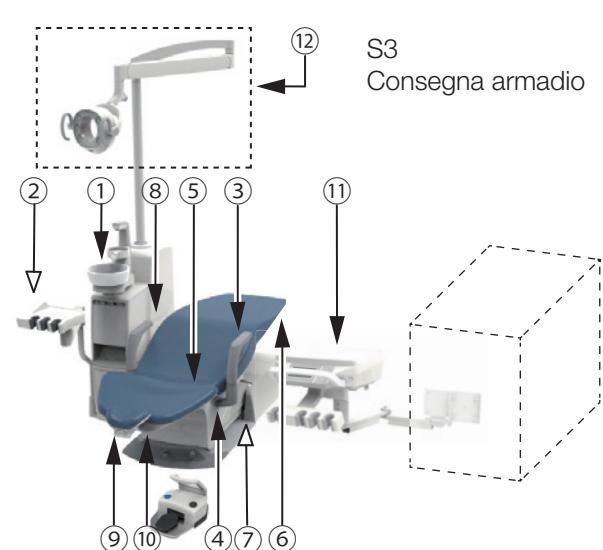


Significato del simbolo



Punto da ricordare

(posizioni che richiedono attenzione, tra cui parti mobili, parti rotanti e parti amovibili)

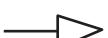

Punto da ricordare dove è disponibile un meccanismo di arresto di emergenza

Significati di ciascun punto da ricordare

- ① Prestare attenzione per evitare il contatto con la sputacchiera.
Quando la sputacchiera viene ruotata verso il lato della poltrona, tenerla lontano dal braccio e dal paziente.
- ② Prestare attenzione per evitare il contatto con il supporto dell'assistente.
La parte superiore del corpo del paziente non deve sporgersi in avanti sopra l'unità sputacchiera.
- ③ Prestare attenzione per evitare che parti del corpo o oggetti rimangano intrappolati nel bracciolo (durante la rotazione).
Non utilizzare la poltrona quando il bracciolo è ruotato.
- ④ Prestare attenzione per evitare che parti del corpo o oggetti rimangano intrappolati nel bracciolo (quando si abbassa la poltrona).
Non posizionare parti del corpo o oggetti sulla staffa del bracciolo quando si abbassa la poltrona.
- ⑤ Prestare attenzione per evitare che parti del corpo o oggetti rimangano intrappolati nelle parti in movimento dello schienale.
Assicurarsi che le mani o i piedi non siano inseriti tra lo schienale e la seduta.
- ⑥ Prestare attenzione per evitare che parti del corpo o oggetti rimangano intrappolati nella parte inferiore della seduta.
Assicurarsi che le mani o i piedi non siano posizionati nella parte inferiore della seduta.
- ⑦ Prestare attenzione per evitare che parti del corpo o oggetti rimangano intrappolati nella struttura sollevamento poltrona posteriore.
Assicurarsi che le mani o i piedi non siano posizionati nella struttura sollevamento poltrona posteriore.
- ⑧ Prestare attenzione per evitare che parti del corpo o oggetti rimangano incastrati tra la sputacchiera e la poltrona.
Prima di azionare la poltrona, assicurarsi che non ci siano ostacoli posizionati tra la sputacchiera e la poltrona.
- ⑨ Prestare attenzione per evitare che parti del corpo o oggetti rimangano intrappolati nelle parti in movimento del poggiapiede.
Assicurarsi che le dita o i capelli non si impigliino nelle parti in movimento del poggiapiede.
- ⑩ Prestare attenzione per evitare il contatto con lo schienale.
Prima di azionare lo schienale, assicurarsi che non vi siano ostacoli posizionati intorno allo schienale.
- ⑪ Prestare attenzione per evitare il contatto della poltrona con l'unità medico.
Non posizionare l'unità medico entro il raggio di azione della poltrona.
- ⑫ Prestare attenzione per evitare il contatto con la lampada.
La lampada non deve essere posizionata vicino a persone o ostacoli circostanti.
- ⑬ Prestare attenzione per evitare il contatto della poltrona con il carrello.
Non posizionare il carrello entro il raggio di azione della poltrona.



AVVERTENZA


Quando si aziona la poltrona, non posizionare parti del corpo o oggetti intorno alle parti in movimento. Ciò potrebbe causare lesioni.

2 Considerazioni sulla sicurezza

Punti da ricordare quando si mette in funzione il prodotto

S4

Sopra il paziente

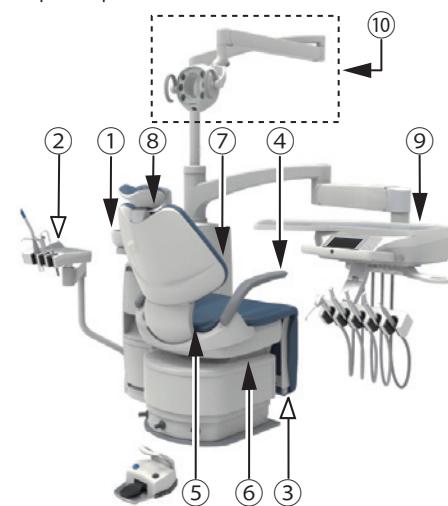

Significato del simbolo




Punto da ricordare
(posizioni che richiedono attenzione, tra cui parti mobili, parti rotanti e parti amovibili)



Punto da ricordare dove è disponibile un meccanismo di arresto di emergenza


S4

Carrello

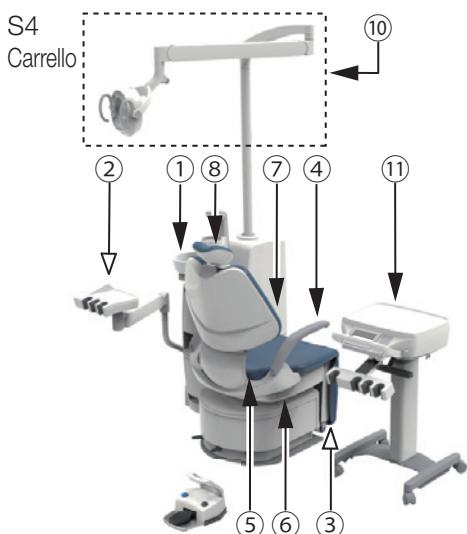

Significati di ciascun punto da ricordare

- ① Prestare attenzione per evitare il contatto con la sputacchiera.
Quando la sputacchiera viene ruotata verso il lato della poltrona, tenerla lontano dal bracciolo e dal paziente.
- ② Prestare attenzione per evitare il contatto con il supporto dell'assistente.
La parte superiore del corpo del paziente non deve sporgersi in avanti sopra l'unità sputacchiera.
- ③ Prestare attenzione per evitare che parti del corpo o oggetti rimangano intrappolati nella parte inferiore del gambale.
Assicurarsi che i piedi non siano posizionati sotto il gambale.
- ④ Prestare attenzione per evitare che parti del corpo o oggetti rimangano intrappolati nel bracciolo.
Non utilizzare la poltrona quando il bracciolo è ruotato.
- ⑤ Prestare attenzione per evitare che parti del corpo o oggetti rimangano intrappolati nelle parti in movimento dello schienale.
Assicurarsi che le mani o i piedi non siano inseriti tra lo schienale e la seduta.
- ⑥ Prestare attenzione per evitare che parti del corpo o oggetti rimangano intrappolati nella parte inferiore della sедuta.
Assicurarsi che le mani o i piedi non siano posizionati nella parte inferiore della sедuta.
- ⑦ Prestare attenzione per evitare che parti del corpo o oggetti rimangano incastrati tra la sputacchiera e la poltrona.
Prima di azionare la poltrona, assicurarsi che non ci siano ostacoli posizionati tra la sputacchiera e la poltrona.
- ⑧ Prestare attenzione per evitare che parti del corpo o oggetti rimangano intrappolati nella parte in movimento del poggiatesta.
Assicurarsi che le dita o i capelli non si impigliino nelle parti in movimento del poggiatesta.
- ⑨ Prestare attenzione per evitare il contatto della poltrona con l'unità medico.
Non posizionare l'unità medico entro il raggio di azione della poltrona.
- ⑩ Prestare attenzione per evitare il contatto con la lampada.
La lampada non deve essere posizionata vicino a persone o ostacoli circostanti.
- ⑪ Prestare attenzione per evitare il contatto della poltrona con il carrello.
Non posizionare il carrello entro il raggio di azione della poltrona.

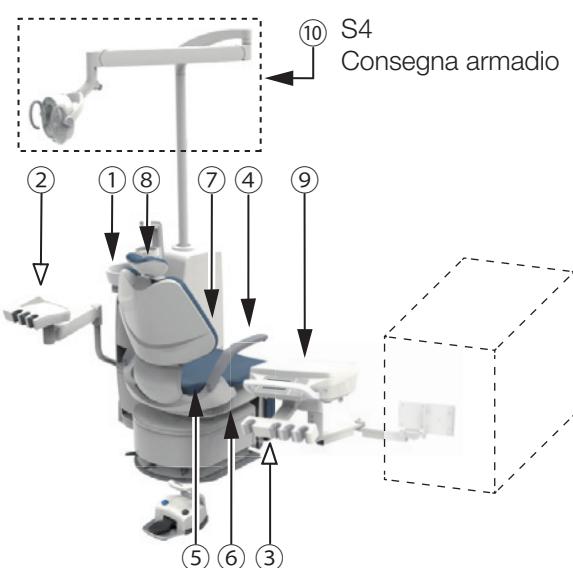


AVVERTENZA

Quando si aziona la poltrona, non posizionare parti del corpo o oggetti intorno alle parti in movimento. Ciò potrebbe causare lesioni.

2 Considerazioni sulla sicurezza


2-3 Posizioni in cui sono attaccate le etichette di avvertenza/attenzione

Sopra il paziente

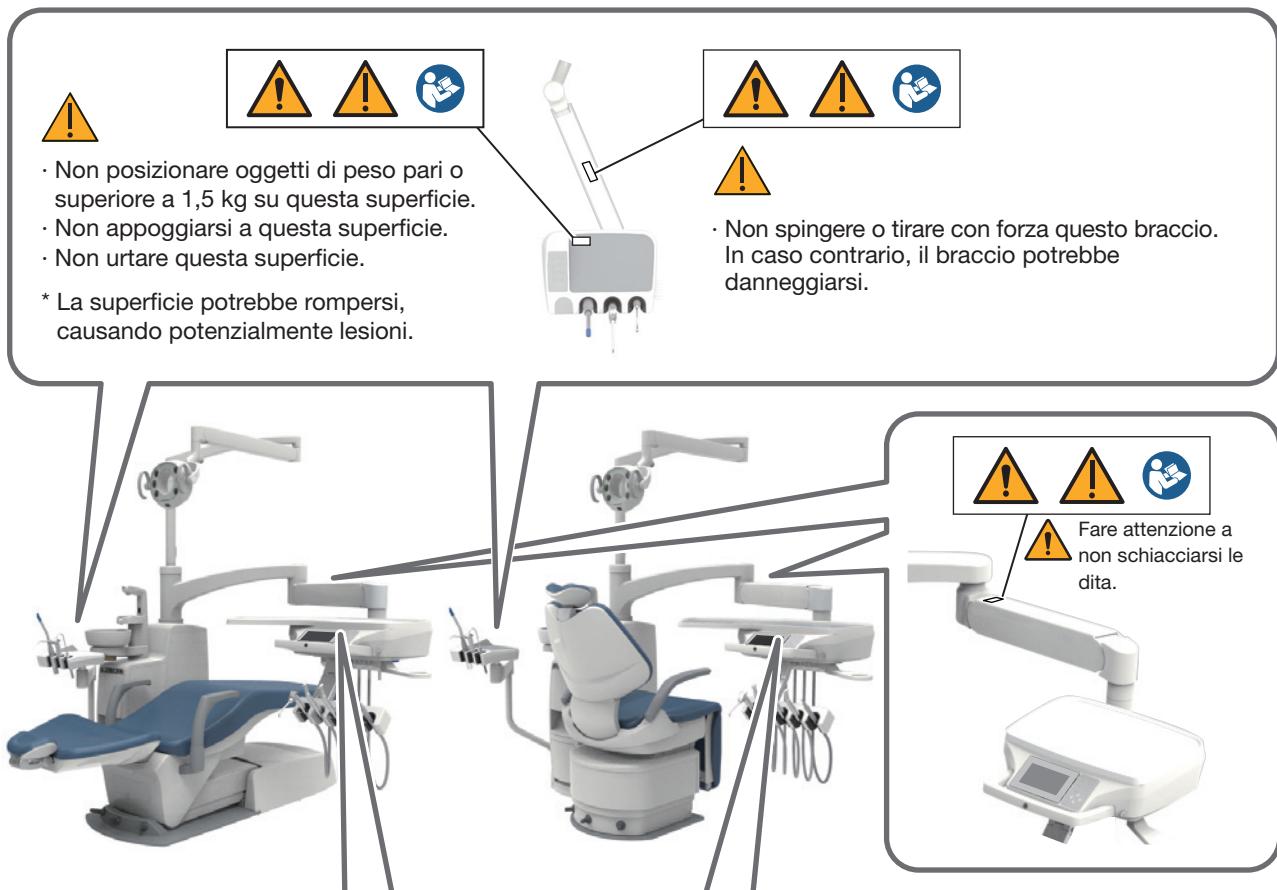


Supporto/Segnaposto

Asta

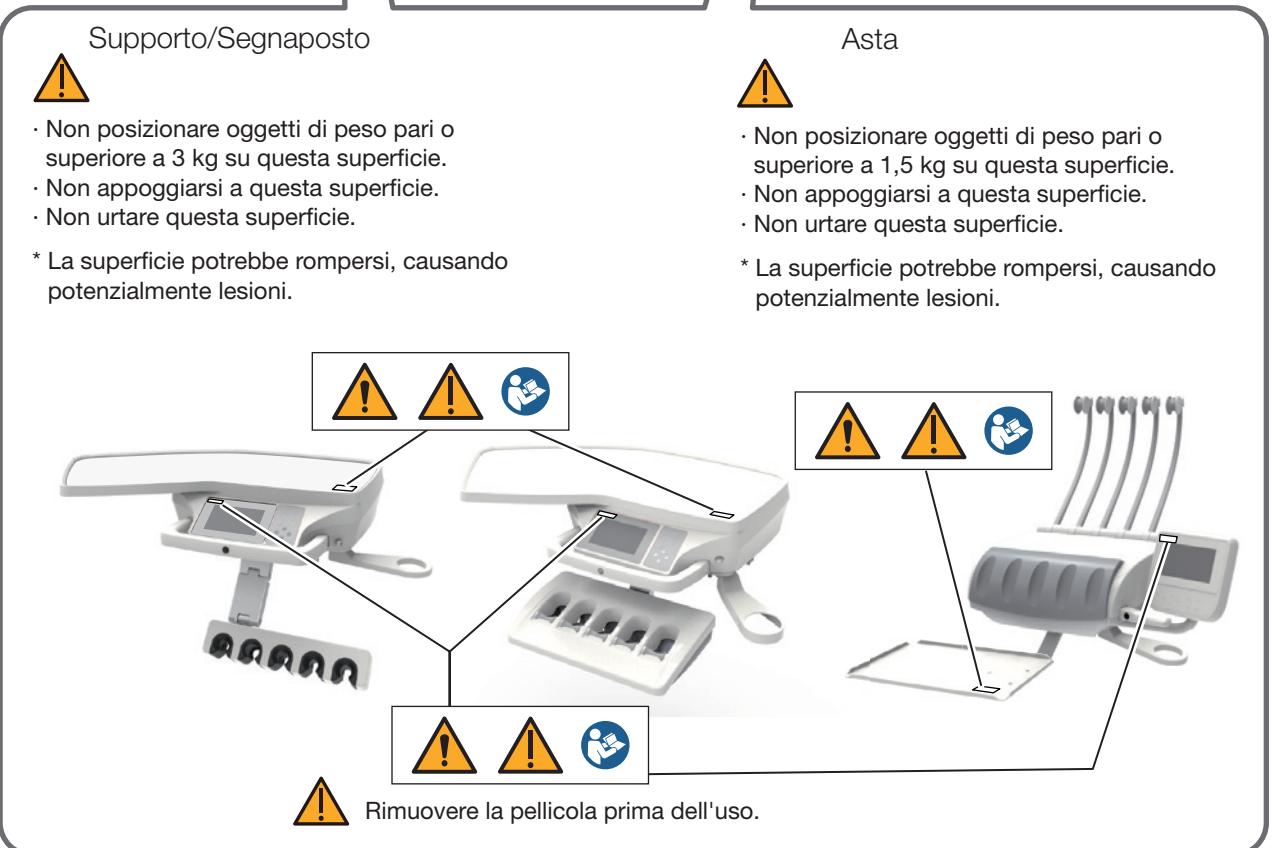


2 Considerazioni sulla sicurezza

Carrello

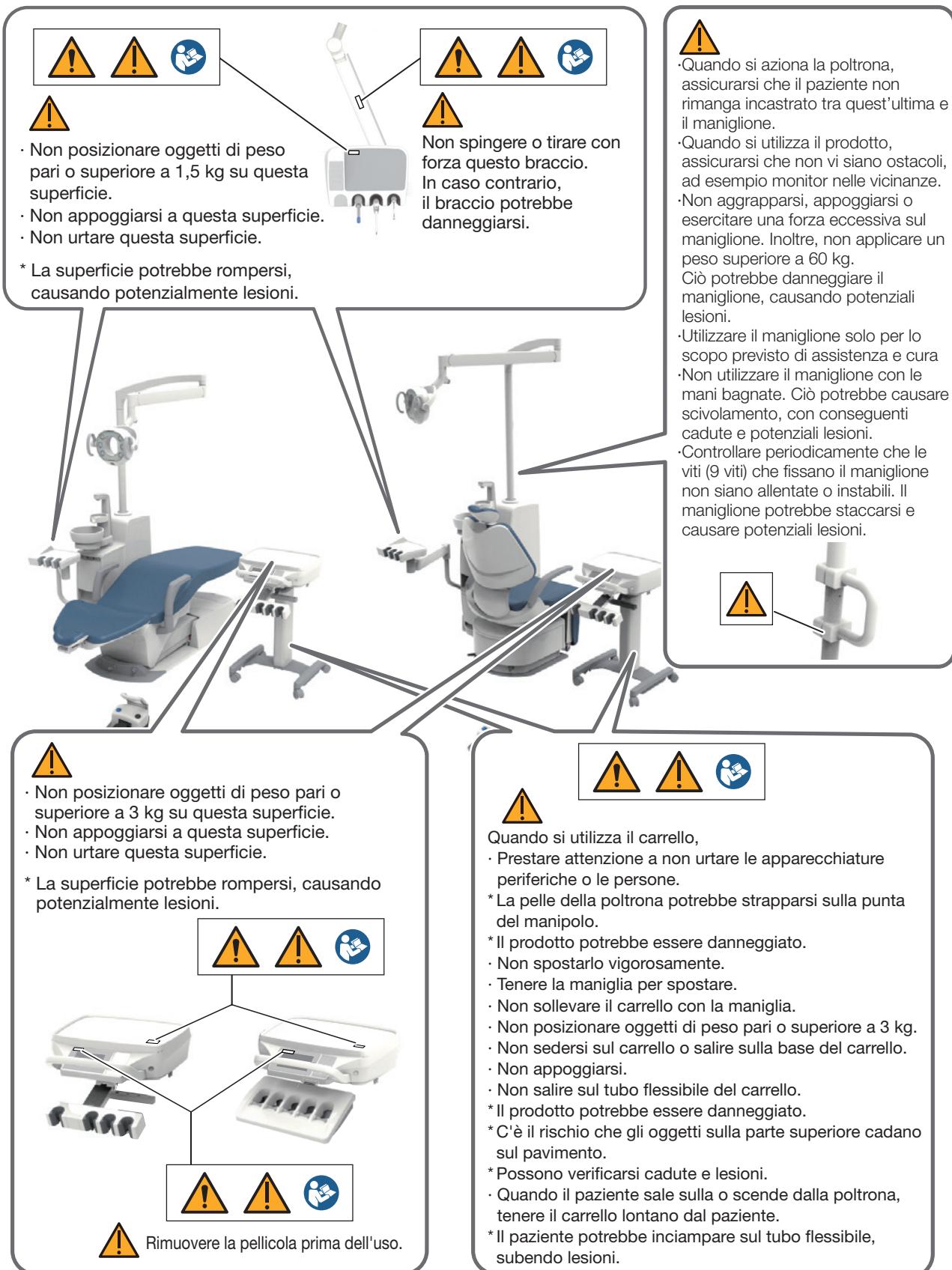

2 Considerazioni sulla sicurezza

Consegna armadio

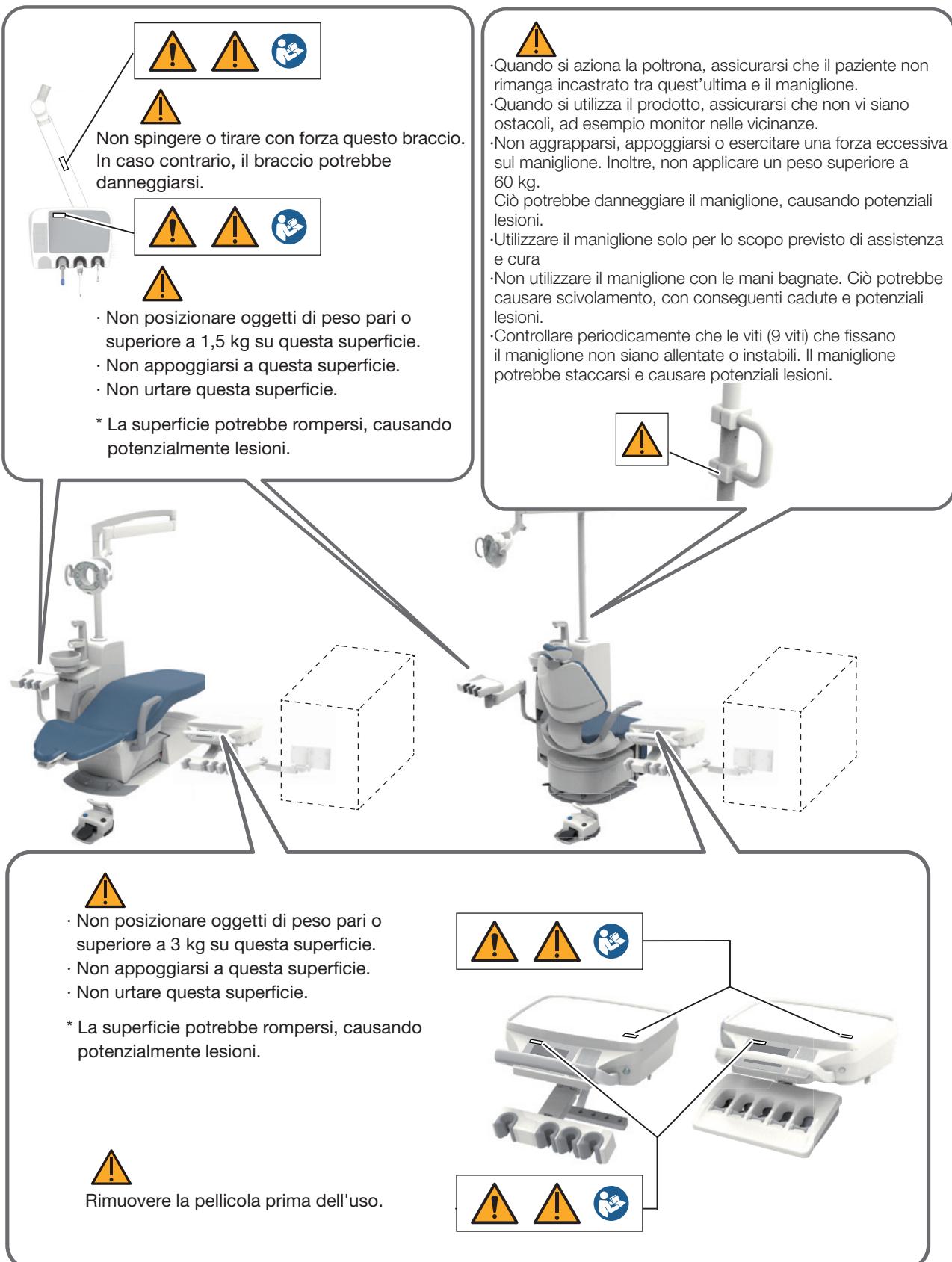

2-4 Informazioni di compatibilità elettromagnetica (EMC)

Questo prodotto è conforme alla norma EMC EN 60601-1-2:2015+AMD1:2021.

1. Precauzioni in materia di compatibilità elettromagnetica e conformità con i documenti di accompagnamento

Le apparecchiature elettromedicali necessitano di speciali precauzioni in materia di compatibilità elettromagnetica e devono essere installate e messe in servizio in base alle informazioni EMC fornite in questo libretto.

2. Effetti dei dispositivi di comunicazione RF

I dispositivi di comunicazione RF portatili e mobili possono influire sulle apparecchiature elettromedicali.

3. Ambiente di esclusione dell'installazione

Negli ospedali eccetto che in prossimità di APPARECCHIATURE CHIRURGICHE AD ALTA FREQUENZA e nella stanza schermata alla RF di un SISTEMA ME per l'imaging a risonanza magnetica, in cui l'intensità di DISTURBI EM è alta.

4. Dichiarazione sull'emissione elettromagnetica

Indicazioni e dichiarazione del produttore—emissioni elettromagnetiche			
Test delle emissioni	Conformità		Ambiente elettromagnetico—indicazioni
	Giappone	CE	
Emissioni RF CISPR 11	Gruppo 1		EURUS utilizza energia RF solo per le funzioni interne. Pertanto, le sue emissioni RF sono molto basse e non è probabile che causino interferenze con apparecchiature elettroniche vicine.
Emissioni RF CISPR 11	Classe B		EURUS è adatto per l'uso in tutti gli ambienti, compresi quelli domestici e quelli direttamente collegati alla rete di alimentazione elettrica pubblica a bassa tensione che alimenta gli edifici utilizzati per scopi domestici.
Emissioni armoniche IEC 61000-3-2	Non applicabile	Classe A	
Fluttuazioni di tensione/ Emissioni di sfarfallamento IEC 61000-3-3	Non applicabile	Conforme	



L'uso di questa apparecchiatura in prossimità o impilata con altre apparecchiature deve essere evitato, in quanto ciò potrebbe causare un funzionamento scorretto. Se tale uso è necessario, questo apparecchio e le altre apparecchiature devono essere osservati per verificare che stiano funzionando normalmente.

5. Dichiarazione di immunità elettromagnetica 1

Indicazioni e dichiarazione del produttore—immunità elettromagnetica			
EURUS è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente di EURUS devono assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.			
Test di immunità	Livello di test IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico—indicazioni
Scarica eletrostatica (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV a contatto ±15 kV in aria	±8 kV a contatto ±15 kV in aria	Il pavimento deve essere in legno, cemento o piastrelle di ceramica. Se il pavimento è rivestito di materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno del 30%.
Transitori elettrici veloci/burst IEC 61000-4-4	±2 kV per linee di alimentazione elettrica ±1 kV per linee di ingresso/uscita	±2 kV per linee di alimentazione elettrica ±1 kV per linee di ingresso/uscita	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Picco di tensione IEC 61000-4-5	Modalità differenziale ±1 kV Modalità comune ±2 kV	Modalità differenziale ±1 kV Modalità comune ±2 kV	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Cali di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione sulle linee di ingresso dell'alimentazione elettrica IEC 61000-4-11	0% UT ; 0,5 cicli 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° 0% UT ; 1 ciclo e 70% UT ; 25/30 cicli a 0°, monofase 0% UT ; 250/300 cicli	0% UT ; 0,5 cicli 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° 0% UT ; 1 ciclo e 70% UT ; 25/30 cicli a 0°, monofase 0% UT ; 250/300 cicli	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Se l'utilizzatore di EURUS necessita di un funzionamento continuo durante interruzioni dell'alimentazione elettrica, si raccomanda che venga alimentato tramite un gruppo di continuità (UPS) o una batteria.
Campo magnetico frequenza di alimentazione (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	I campi magnetici della frequenza di alimentazione devono essere ai livelli caratteristici di una tipica posizione in un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Campi magnetici di prossimità IEC 61000-4-39	134,2 kHz 65 A/m, modulazione impulsi 2,1 kHz 13,56 MHz 7,5 A/m, modulazione impulsi 50 kHz	134,2 kHz 65 A/m, modulazione impulsi 2,1 kHz 13,56 MHz 7,5 A/m, modulazione impulsi 50 kHz	I campi magnetici di prossimità devono essere a livelli caratteristici di una posizione tipica in un ambiente di strutture sanitarie professionali.
Nota: UT è la tensione di rete CA prima dell'applicazione del livello di test.			

6. Dichiarazione di immunità elettromagnetica 2

Indicazioni e dichiarazione del produttore—immunità elettromagnetica			
EURUS è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente di EURUS devono assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.			
Test di immunità	Livello di test IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico—indicazioni
RF condotta IEC 61000-4-6	3 V 0,15 MHz-80 MHz 6 V 0,15 MHz-80 MHz in bande radio ISM e amatoriali	3 V 0,15 MHz-80 MHz 6 V 0,15 MHz-80 MHz in bande radio ISM e amatoriali	Avvertenza: le apparecchiature di comunicazione RF portatili (comprese le periferiche come i cavi dell'antenna e le antenne esterne) devono essere utilizzate a una distanza non inferiore a 30 cm (12 pollici) da qualsiasi parte di EURUS, compresi i cavi specificati dal produttore. In caso contrario, potrebbe verificarsi un deterioramento delle prestazioni di questo apparecchio.
RF irradiata IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz-2,7 GHz 80% AM (1 kHz)	3 V/m 80 MHz-2,7 GHz 80% AM (1 kHz)	
Campo elettromagnetico vicino causato dai dispositivi di comunicazione wireless RF IEC61000-4-3	Vedere la tabella nella pagina successiva (pagina 39)	Vedere la tabella nella pagina successiva (pagina 39)	

7. Prestazioni essenziali

A meno che non sia azionata dall'interruttore di controllo poltrona, la poltrona non effettuerà alcun movimento. A meno che non sia azionato dal comando a pedale, il manipolo non effettuerà alcun movimento tranne che emettere un cicalino e commutare l'indicatore tra attivato/disattivato.

La perdita o il deterioramento di prestazioni essenziali potrebbero causare lo spostamento inaspettato della poltrona o del manipolo, provocando lesioni o danni al paziente, all'operatore o alle persone o agli oggetti attorno al paziente o all'operatore.

AVVERTENZA

Le apparecchiature di comunicazione RF portatili (comprese le periferiche come i cavi dell'antenna e le antenne esterne) devono essere utilizzate a una distanza non inferiore a 30 cm (12 pollici) da qualsiasi parte di EURUS, compresi i cavi specificati dal produttore.

In caso contrario, potrebbe verificarsi un deterioramento delle prestazioni di questo apparecchio.

2 Considerazioni sulla sicurezza

Campo elettromagnetico vicino causato dai dispositivi di comunicazione wireless RF

Frequenza di test (MHz)	Modulazione	Livello di test IEC 60601	Livello di conformità IEC 60601
385	Modulazione a impulsi ^{a)} 18 Hz	27 V/m	27 V/m
450	Modulazione di frequenza ± 5 kHz spostamento 1 kHz onda sinusoidale	28 V/m	28 V/m
710 745 780	Modulazione a impulsi ^{a)} 217 Hz	9 V/m	9 V/m
810 870 930	Modulazione a impulsi ^{a)} 18 Hz	28 V/m	28 V/m
1.720 1.845 1.970	Modulazione a impulsi ^{a)} 217 Hz	28 V/m	28 V/m
2.450	Modulazione a impulsi ^{a)} 217 Hz	28 V/m	28 V/m
5.240 5.500 5.785	Modulazione a impulsi ^{a)} 217 Hz	9 V/m	9 V/m

Nota a) La portante viene modulata da un'onda quadra con un ciclo di lavoro del 50%.

2–5 Manipoli compatibili

I seguenti manipoli sono compatibili con questo prodotto:

Siringa	BT14 3WAY SYR-20 3WAY Tipo 77 3WAY DCI 3439 3WAY DCI 3459 3WAY LUZZANI 3WAY (Minimate) LUZZANI 3WAY (Minilight) LUZZANI 6WAY (Minilight)
Turbina ad aria	NSK (PTL-CL-LED+M900L)
Motore pneumatico	NSK (M205+M65) NSK (M205+M25L)
Micromotore	BIEN AIR MX-i LED 3rd Gen. BIEN AIR MX2 (DMX3) BIEN AIR MCX NSK NLX plus NSK NLX nano NSK NBX
Ablatore	ABLATORE NSK VARIOS VS170 ABLATORE NSK VARIOS VS170 LUX ABLATORE DENTSPLY CAVITRON (TIPO G139) SATELEC SP4055 NEWTRON SATELEC Xinetic EMS NO PAIN
Lampada polimerizzatrice	SATELEC MINI LED STD OEM
Telecamera intraorale	ACTEON SOPRO 617 ACTEON SOPRO CARE Telecamera intraorale ACTEON C20 Full HD Telecamera intraorale ACTEON C50 Full HD

2–6 Dispositivi collegabili al prodotto

POLTRONA ODONTOIATRICA	POLTRONA GIREVOLE EURUS
Lampada odontoiatrica	LAMPADA EURUS LAMPADA ODONTOIATRICA 900

3-1 Precauzioni operative

Asciugare immediatamente eventuali soluzioni chimiche attaccate a EURUS.

In caso contrario, potrebbero causare deterioramento o scolorimento.

Non applicare calore a questo prodotto.

Questo potrebbe causare deterioramento o scolorimento.

Scolorimento della resina

Materiali in resina sono stati usati per i componenti esterni del prodotto.

Sono stati utilizzati materiali attentamente selezionati; tuttavia, potrebbe verificarsi scolorimento per motivi come il deterioramento naturale o l'adesione di soluzioni chimiche.

Per assicurarsi di utilizzare EURUS il più a lungo possibile, asciugare immediatamente tutte le soluzioni chimiche attaccate ed evitare la luce solare.

Non collocare oggetti diversi da un essere umano sulla seduta.

Ciò potrebbe causare deformazione, strappi o corrosione della pelle.

Controllare il funzionamento della tavoletta medico

Lo spostamento della tavoletta medico verso l'alto/il basso senza rilasciare il freno potrebbe causare danni al prodotto.

Assicurarsi di rilasciare prima il freno premendo l'interruttore di rilascio del freno. Quindi, spostare la tavoletta medico verso l'alto/il basso.

Precauzioni durante l'utilizzo del carrello

Prestare attenzione a non urtare le apparecchiature periferiche. La pelle della poltrona potrebbe strapparsi sulla punta del manipolo o il prodotto potrebbe essere danneggiato.

Se non si seguono le istruzioni di seguito, il prodotto potrebbe essere danneggiato o c'è il rischio che gli oggetti sulla superficie cadano sul pavimento. (Non spostarlo bruscamente e con forza. /Tenere la maniglia per spostarlo. / Non sollevare il carrello con la maniglia. /Non posizionare oggetti di peso pari o superiore a 3 kg. /Non sedersi sul carrello o salire sulla base del carrello.)

Quando si utilizza un piano di tavolo grande con un tipo a carrello, assicurarsi che il piano di tavolo grande si estenda sempre sul lato opposto rispetto alla poltrona.

Maneggiare con cura i manipoli/le siringhe.

Maneggiare i manipoli/le siringhe con cura per evitare cadute. La caduta potrebbe causare danni o deformazioni.

Precauzioni durante l'uso dell'aria (siringa)

Se l'aria viene fornita immediatamente dopo l'uso di acqua o dopo aver fissato l'ugello, potrebbe fuoriuscire una piccola quantità di acqua rimasta nell'ugello.

Quando si eroga aria, premere la leva A per due o tre volte per confermare che l'acqua non fuoriesca.

3 Precauzioni per l'uso

Precauzioni per la pulizia (BT14)

Per la pulizia, non inserire lo spazzolino interdentale o simili nella porta di inserimento ugello mentre l'ugello è staccato.

L'O-ring (materiale di tenuta) è fissato all'interno della porta di inserimento dell'ugello. Se è danneggiato, potrebbero verificarsi perdite d'acqua.

Prima della sterilizzazione in autoclave dell'ugello, inserire lo strumento di pulizia dell'ugello in dotazione dalla punta dell'ugello. Pulire l'interno dell'ugello e rimuovere i residui spruzzando acqua e aria. Se l'ugello viene sterilizzato in autoclave lasciando dei residui, questi producono ostruzioni all'interno dell'ugello e l'acqua potrebbe non fuoriuscire.

Illuminazione degli indicatori LED

Poiché l'illuminazione degli indicatori LED funge da guida per il blocco della poltrona/del manipolo e il verificarsi della commutazione della modalità, assicurarsi che gli interruttori di controllo funzionino normalmente come indicato prima di iniziare il lavoro ogni giorno.

Controllare il funzionamento del compressore.

Questo prodotto non funzionerà a meno che non venga erogata aria. Accendere il compressore prima di mettere in funzione questo prodotto.

Prestare attenzione per evitare l'uso di acqua diversa dall'acqua di rubinetto.

Questo prodotto è destinato all'uso con acqua di rubinetto, acqua purificata, acqua distillata o acqua pura; l'uso di acqua diversa da quelle sopra citate potrebbe portare a guasti.

Se il prodotto si rompe a causa dell'uso di acqua non specificata, non sarà coperto da garanzia.

Azione da adottare in caso di perdite d'acqua

In caso di perdita d'acqua, chiudere la valvola principale dell'acqua, spegnere l'interruttore principale e l'interruttore per i dispositivi utilizzati nell'ambulatorio e contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.

Utilizzare il prodotto esclusivamente per trattamenti odontoiatrici.

Questo prodotto è formato da un'unità odontoiatrica e una poltrona paziente utilizzate per trattamenti odontoiatrici.

Solo un odontoiatra e il personale odontoiatrico possono utilizzare questo prodotto.

Limite di peso della poltrona

La poltrona potrebbe sollevarsi lentamente se il peso di una persona è vicino alla massima capacità di sollevamento.

[Riferimento] Limite di peso

4 Specifiche del prodotto, 4-1 Dati tecnici
[pagine 47, 53 e 59]

3-2 Precauzioni per l'uso di pelli sintetiche

Adesione di tintura per abiti

Per la pulizia e la disinfezione delle pelli sintetiche, pulire la superficie con un panno morbido o un tovagliolo di carta inumiditi con FD360 prodotto da Dürr, quindi asciugarla con un panno asciutto.

La tintura potrebbe essere trasferita dagli abiti o dalle cinture alle pelli sintetiche del prodotto. Se la tintura si attacca, pulire delicatamente e al più presto con un panno morbido imbevuto di un detergente neutro diluito a circa un decimo con acqua per evitare la penetrazione. Quindi, strofinare con acqua e poi a fondo con un panno asciutto.

Prestare attenzione per evitare il deterioramento e il trasferimento della tintura a causa del contatto.

Il contatto con altri materiali in resina, prodotti rivestiti, solventi e nastri adesivi potrebbe alterare il rivestimento lucido della superficie e causare incrinature, deformazioni o abrasione.

La tintura potrebbe essere trasferita da giornali o materiali stampati al prodotto.

La tintura potrebbe essere trasferita da capi stampati come magliette o abiti di jeans sulle pelli di questo prodotto.

L'adesione di benzene, acetone, alcol o olio potrebbero provocare scolorimento, dissoluzione della superficie, cambiamenti nella superficie lucida, indurimento, ammorbidente o abrasione.

L'uso di un agente candeggiante o di un lenzuolo pulito con candeggina potrebbe causare variazioni nella lucentezza o scolorimento.

Posizionare il prodotto vicino a fonti di calore, come un elemento di riscaldamento, potrebbe causare deformazione o scolorimento.

Proteggere il prodotto dalla luce diretta del sole utilizzando una tenda. La luce diretta del sole può causare cambiamenti della superficie, restringimento, scolorimento o sbiadimento.

Posizionare un oggetto pesante sul prodotto per un periodo di tempo prolungato potrebbe lasciare segni o grinze.

4 Specifiche del prodotto

4-1 Dati tecnici

4-1-1 Variazioni delle specifiche

S1

		S1H	S1P	S1R	S1CH	S1CP	S1CDH	S1CDP
Poltrona	Contour	○	○	○	○	○	○	○
	Gambale pieghevole							
Unità sputacchiera	Supporto per poltrona	○	○	○	○	○	○	○
	Piedistallo							
Consegna unità medico	Sopra il paziente	○	○	○				
	Carrello				○	○		
	Consegna armadio						○	○
Consegna dello strumento	Supporto	○			○		○	
	Segnaposto		○			○		
	Asta			○				

S3

		S3H	S3P	S3R	S3CH	S3CP	S3CDH	S3CDP
Poltrona	Contour	○	○	○	○	○	○	○
	Gambale pieghevole							
Unità sputacchiera	Supporto per poltrona							
	Piedistallo	○	○	○	○	○	○	○
Consegna unità medico	Sopra il paziente	○	○	○				
	Carrello				○	○		
	Consegna armadio						○	○
Consegna dello strumento	Supporto	○			○		○	
	Segnaposto		○			○		
	Asta			○				

S4

		S4H	S4P	S4R	S4CH	S4CP	S4CDH	S4CDP
Poltrona	Contour							
	Gambale pieghevole	○	○	○	○	○	○	○
Unità sputacchiera	Supporto per poltrona							
	Piedistallo	○	○	○	○	○	○	○
Consegna unità medico	Sopra il paziente	○	○	○				
	Carrello				○	○		
	Consegna armadio						○	○
Consegna dello strumento	Supporto	○			○		○	
	Segnaposto		○			○		
	Asta			○				

4 Specifiche del prodotto

4-1-2 S1

Modello

Unità medico
AU-ER-OA* (sopra il paziente)
AU-ER-CT (carrello)
AU-ER-CD (consegna armadio)
Unità sputacchiera
AU-ER-CM*
Poltrona
AC-ER-CP* (poggiatesta motorizzato)
AC-ER-CD* (poggiatesta manuale)
(* rappresenta una o più stringhe o numeri.)

Classificazione per la protezione dalle scosse elettriche

Apparecchiatura di classe I

Classificazione in base al grado di protezione dalle scosse elettriche

Tipo B applicato
Parti (manipolo/siringa/parti imbottite della poltrona/bracciolo)

Classificazione in base al grado di protezione dalle infiltrazioni d'acqua o da sostanze particellari

Comando a pedale IPX1

Tensione nominale

CA 230 V

Frequenza di alimentazione

50/60 Hz

Ingresso di alimentazione

5,5 A

4 Specifiche del prodotto

Fusibile

Portafusibile
Circuito primario: 8 A/250 V
(Potere di interruzione: 80 A/250 V CA)
Velocità operativa: ritardo di tempo
Dimensione: 5,2 × 20 mm

Circuito secondario per linea 24 V/6,5 A
10 A/250 V
(Potere di interruzione: 1.500 A/250 V CA)
Velocità operativa: ritardo di tempo
Dimensione: 5,2 × 20 mm

Circuito secondario per linea 24 V/5 A
6,3 A/250 V
(Potere di interruzione: 1.500 A/250 V CA)
Velocità operativa: ritardo di tempo
Dimensione: 5,2 × 20 mm

Circuito secondario per linea 14 V/5 A
6,3 A/250 V
(Potere di interruzione: 1.500 A/250 V CA)
Velocità operativa: ritardo di tempo
Dimensione: 5,2 × 20 mm

Circuito secondario per il riscaldatore acqua del manipolo
6,3 A/250 V
(Potere di interruzione: 1.500 A/250 V CA)
Velocità operativa: ritardo di tempo
Dimensione: 5,2 × 20 mm

Circuito secondario per alimentazione acqua/siringa 6 vie e
riscaldatore acqua
6,3 A/250 V
(Potere di interruzione: 1.500 A/250 V CA)
Velocità operativa: ritardo di tempo
Dimensione: 5,2 × 20 mm

Scheda di alimentazione per NLX Plus/NLX Nano/MX2/MCX
5 A/250 V
(Potere di interruzione: 100 A/250 V CA)
Velocità operativa: ritardo di tempo
Dimensione: ø8,35 mm

Scheda di controllo del comando a pedale
0,315 A/32 V
(Potere di interruzione: 1,2 A/32 V CA)
Velocità operativa: Funzionamento normale
Dimensione: 1,6 × 0,8 mm

Scheda di controllo della poltrona
1,25 A/250 V
(Potere di interruzione: 1.500 A/250 V CA)
Velocità operativa: interruzione
Dimensione: 5,2 × 20 mm

Scheda circuito di alimentazione CA/CC
2,0 A/250 V
(Potere di interruzione: 100 A/300 V CA)
Velocità operativa: ritardo di tempo
Dimensione: 8,5 × 8,5 × 4 mm

4 Specifiche del prodotto

Modalità di funzionamento	Funzionamento non continuo (motorino) Tempo massimo di funzionamento, 3 minuti CICLO 1:15	
Peso	Unità sputacchiera Unità medico Sopra il paziente Carrello Consegna armadio Poltrona	40 kg 40 kg 25 kg 35 kg 145 kg
Pressione dell'aria principale	0,5 MPa	
Pressione dell'acqua principale	0,2 MPa	
Altezza iniziale/corsa poltrona	420 mm/380 mm	
Meccanismo di sollevamento e abbassamento della poltrona	Elettroidraulico	
Poggiatesta	Elettroidraulico Manuale	
Schiene	Elettroidraulico	
Seduta	Meccanismo di inclinazione collegato allo schienale	
Bracciolo	Sinistro fisso/Destro rimosso Sinistro fisso/Destro ruotato Angolo di rotazione 90°/135°	
Parti imbottite	Pelle sintetica	
Interruttore di controllo	Joystick	
Ambiente di utilizzo	Temperatura da 0 °C a 40 °C Umidità da 10% a 95% (senza condensa) Pressione atmosferica da 700 a 1.060 hPa	
Trasporto/Ambiente di stoccaggio	Temperatura da -20 °C a 70 °C Umidità da 10% a 95% (senza condensa) Pressione atmosferica da 700 a 1.060 hPa	
Limite di peso	Tavoletta medico 3 kg Vassoio secondario della tavoletta medico (asta) 1,5 kg Vassoio assistente 1,5 kg Poltrona (massa massima del paziente): Unità poltrona tipo collegabile 200 kg Unità poltrona tipo non collegabile 250 kg	
Adattamento a un ambiente ad alto contenuto di ossigeno	Il prodotto non è adatto per l'uso in un ambiente ad alto contenuto di ossigeno.	


Fare riferimento alla targhetta dei dati tecnici per la capacità di alimentazione elettrica.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.


4 Specifiche del prodotto

Disegno dimensionale (sono forniti i valori standard)

Sopra il paziente

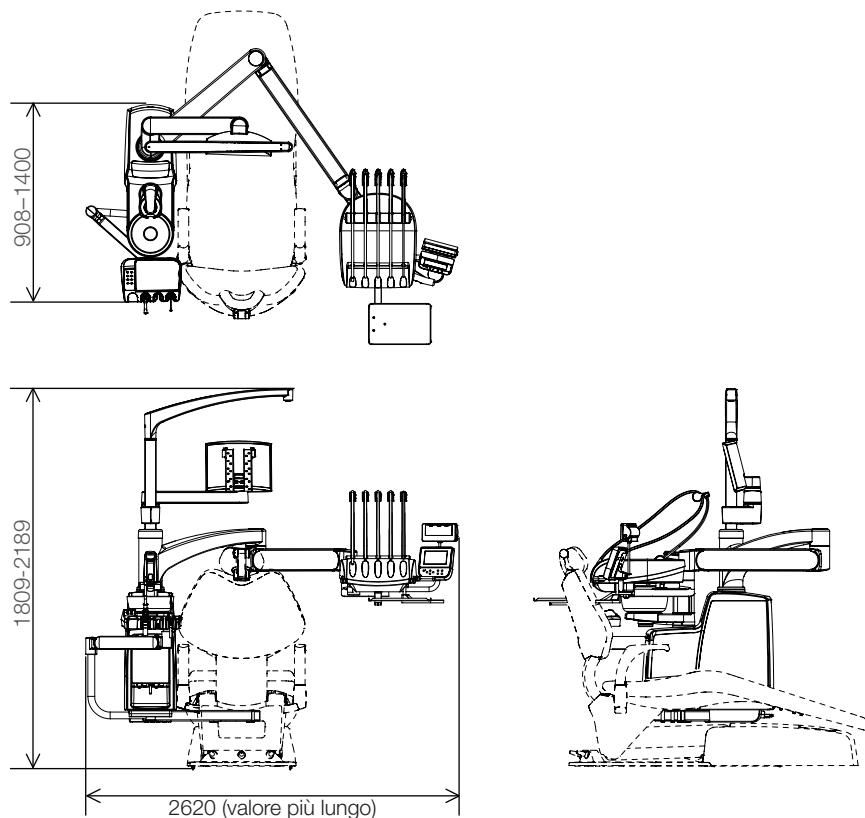

Carrello

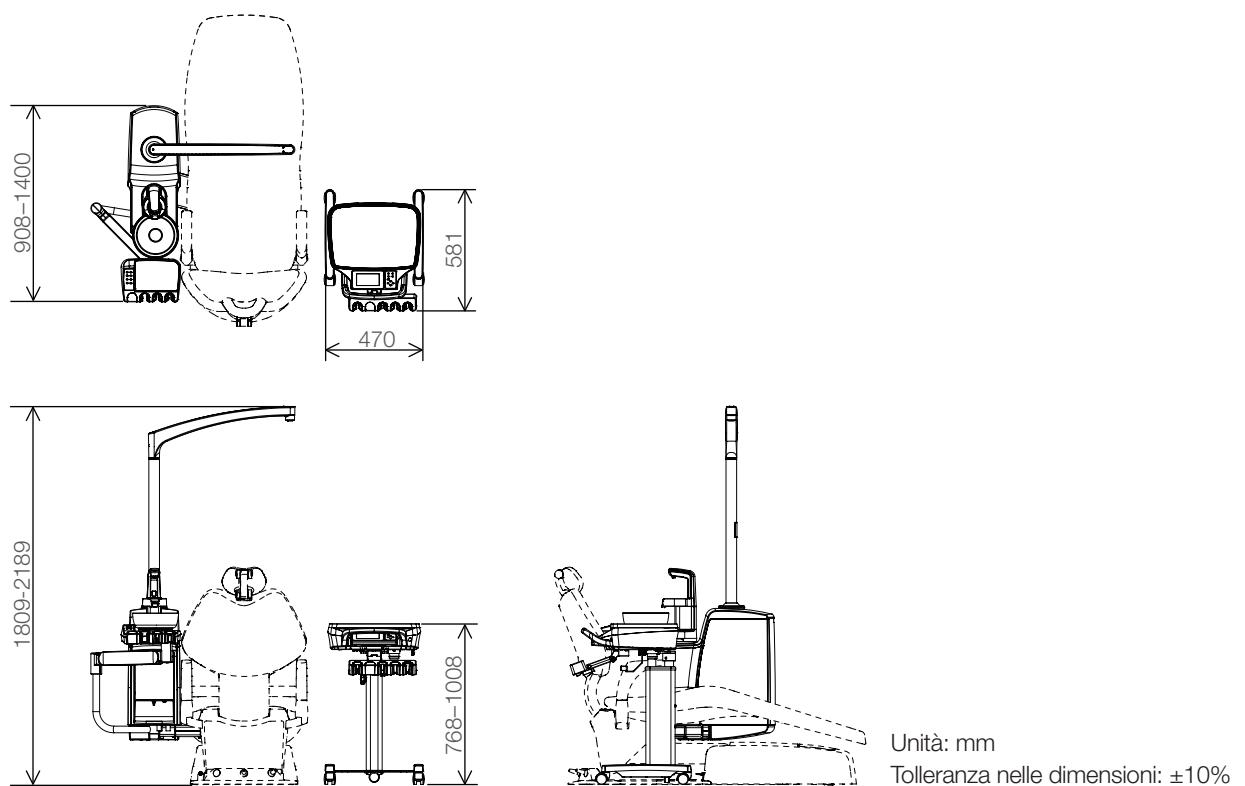


Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

4 Specifiche del prodotto

Disegno dimensionale (sono forniti i valori standard)

Consegna armadio

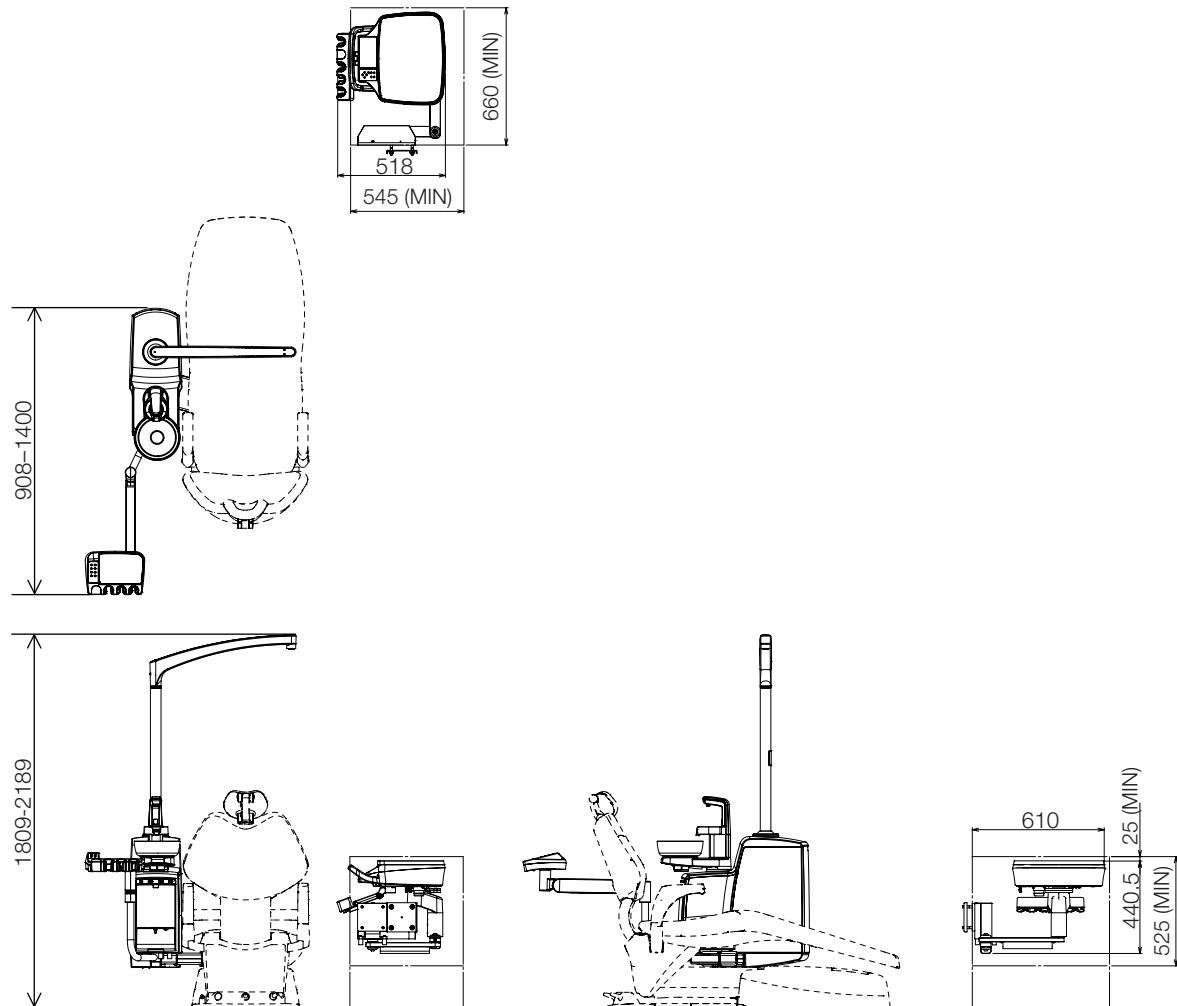

Unità: mm

Tolleranza nelle dimensioni: $\pm 10\%$


Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

4 Specifiche del prodotto


Poltrona contour

Disegno dimensionale (sono forniti i valori standard)

Poggiatesta: Elettroidraulico

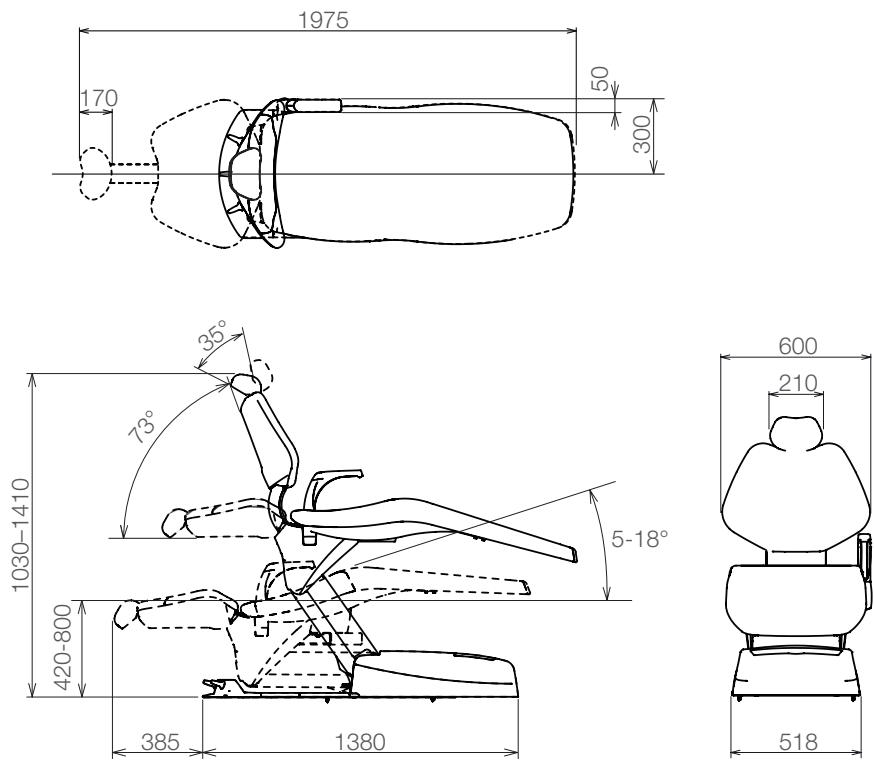

Poggiatesta: Manuale

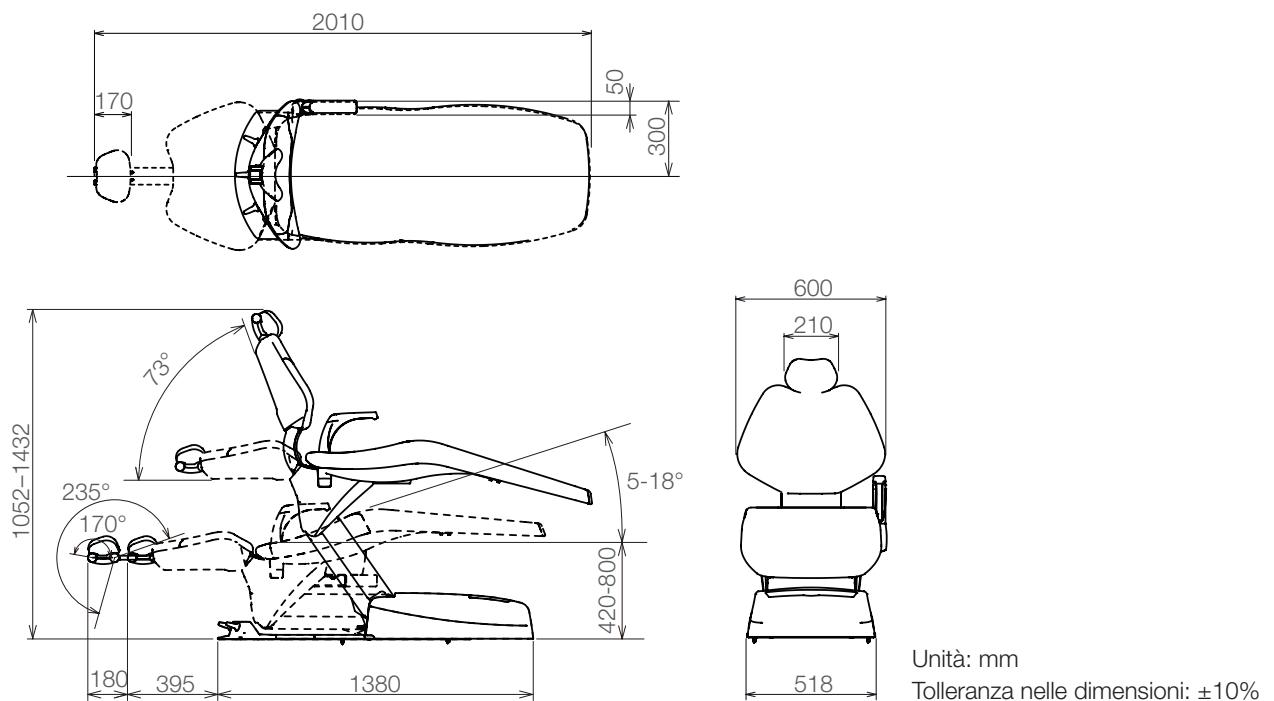

Unità: mm
Tolleranza nelle dimensioni: ±10%

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

4 Specifiche del prodotto

4-1-3 S3

Modello

Unità medico
AU-ER-OA* (sopra il paziente)
AU-ER-CT (carrello)
AU-ER-CD (consegna armadio)
Unità sputacchiera
AU-ER-PD*
Poltrona
AC-ER-CP* (poggiatesta motorizzato)
AC-ER-CD* (poggiatesta manuale)
(* rappresenta una o più stringhe o numeri.)

Classificazione per la protezione dalle scosse elettriche

Apparecchiatura di classe I

Classificazione in base al grado di protezione dalle scosse elettriche

Tipo B applicato
Parti (manipolo/siringa/parti imbottite della poltrona/bracciolo)

Classificazione in base al grado di protezione dalle infiltrazioni d'acqua o da sostanze particellari

Comando a pedale IPX1

Tensione nominale

CA 230 V

Frequenza di alimentazione

50/60 Hz

Ingresso di alimentazione

5,5 A

4 Specifiche del prodotto

Fusibile

Portafusibile
Circuito primario: 8 A/250 V
(Potere di interruzione: 80 A/250 V CA)
Velocità operativa: ritardo di tempo
Dimensione: 5,2 × 20 mm

Circuito secondario per linea 24 V/6,5 A
10 A/250 V
(Potere di interruzione: 1.500 A/250 V CA)
Velocità operativa: ritardo di tempo
Dimensione: 5,2 × 20 mm

Circuito secondario per linea 24 V/5 A
6,3 A/250 V
(Potere di interruzione: 1.500 A/250 V CA)
Velocità operativa: ritardo di tempo
Dimensione: 5,2 × 20 mm

Circuito secondario per linea 14 V/5 A
6,3 A/250 V
(Potere di interruzione: 1.500 A/250 V CA)
Velocità operativa: ritardo di tempo
Dimensione: 5,2 × 20 mm

Circuito secondario per il riscaldatore acqua del manipolo
6,3 A/250 V
(Potere di interruzione: 1.500 A/250 V CA)
Velocità operativa: ritardo di tempo
Dimensione: 5,2 × 20 mm

Circuito secondario per alimentazione acqua/siringa 6 vie e
riscaldatore acqua
6,3 A/250 V
(Potere di interruzione: 1.500 A/250 V CA)
Velocità operativa: ritardo di tempo
Dimensione: 5,2 × 20 mm

Scheda di alimentazione per NLX Plus/NLX Nano/MX2/MCX
5 A/250 V
(Potere di interruzione: 100 A/250 V CA)
Velocità operativa: ritardo di tempo
Dimensione: ø8,35 mm

Scheda di controllo del comando a pedale
0,315 A/32 V
(Potere di interruzione: 1,2 A/32 V CA)
Velocità operativa: Funzionamento normale
Dimensione: 1,6 × 0,8 mm

Scheda di controllo della poltrona
1,25 A/250 V
(Potere di interruzione: 1.500 A/250 V CA)
Velocità operativa: Interruzione
Dimensione: 5,2 × 20 mm

Scheda circuito di alimentazione CA/CC
2,0 A/250 V
(Potere di interruzione: 100 A/300 V CA)
Velocità operativa: ritardo di tempo
Dimensione: 8,5 × 8,5 × 4 mm

4 Specifiche del prodotto

Modalità di funzionamento	Funzionamento non continuo (motorino) Tempo massimo di funzionamento, 3 minuti CICLO 1:15	
Peso	Unità sputacchiera	60 kg
	Unità medico	
	Sopra il paziente	42 kg
	Carrello	25 kg
	Consegna armadio	35 kg
	Poltrona	145 kg
Pressione dell'aria principale	0,5 MPa	
Pressione dell'acqua principale	0,2 MPa	
Altezza iniziale/corsa poltrona	420 mm/380 mm	
Meccanismo di sollevamento e abbassamento della poltrona	Elettroidraulico	
Poggiatesta	Elettroidraulico	
	Manuale	
Schiene	Elettroidraulico	
Seduta	Meccanismo di inclinazione collegato allo schienale	
Bracciolo	Sinistro fisso/Destro rimosso Sinistro fisso/Destro ruotato Angolo di rotazione 90°/135°	
Parti imbottite	Pelle sintetica	
Interruttore di controllo	Joystick	
Ambiente di utilizzo	Temperatura da 0 °C a 40 °C Umidità da 10% a 95% (senza condensa) Pressione atmosferica da 700 a 1.060 hPa	
Trasporto/Ambiente di stoccaggio	Temperatura da -20 °C a 70 °C Umidità da 10% a 95% (senza condensa) Pressione atmosferica da 700 a 1.060 hPa	
Limite di peso	Tavoletta medico 3 kg Vassoio secondario della tavoletta medico (asta) 1,5 kg Vassoio assistente 1,5 kg Poltrona (massa massima del paziente): 250 kg	
Adattamento a un ambiente ad alto contenuto di ossigeno	Il prodotto non è adatto per l'uso in un ambiente ad alto contenuto di ossigeno.	


Fare riferimento alla targhetta dei dati tecnici per la capacità di alimentazione elettrica.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.


4 Specifiche del prodotto

Disegno dimensionale (sono forniti i valori standard)

Sopra il paziente

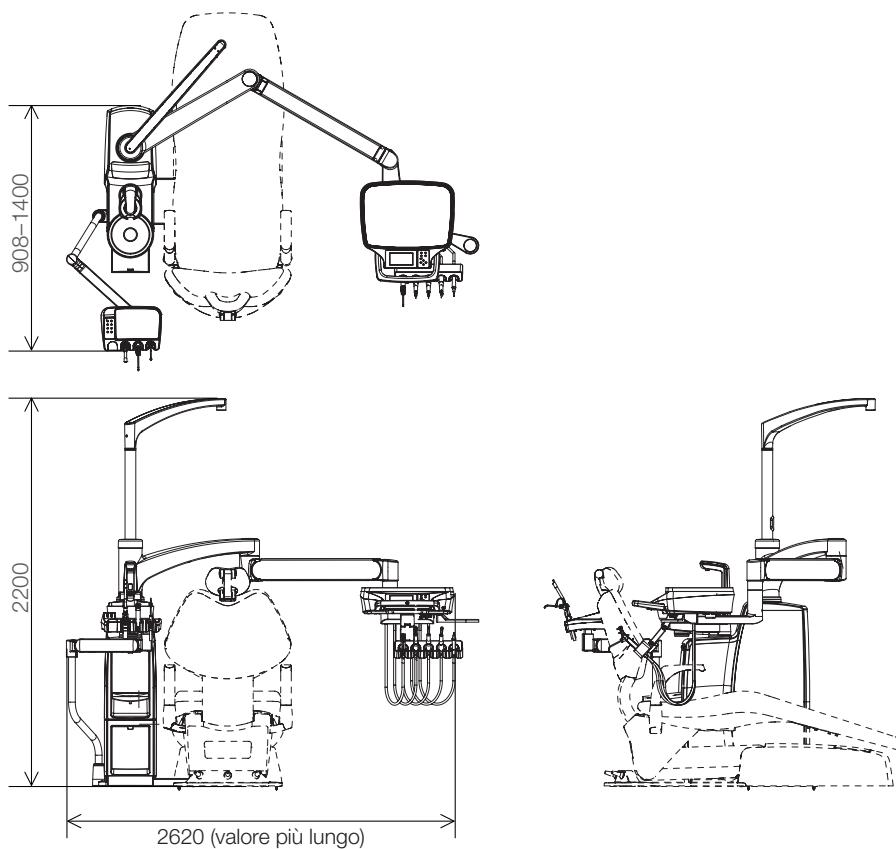

Carrello

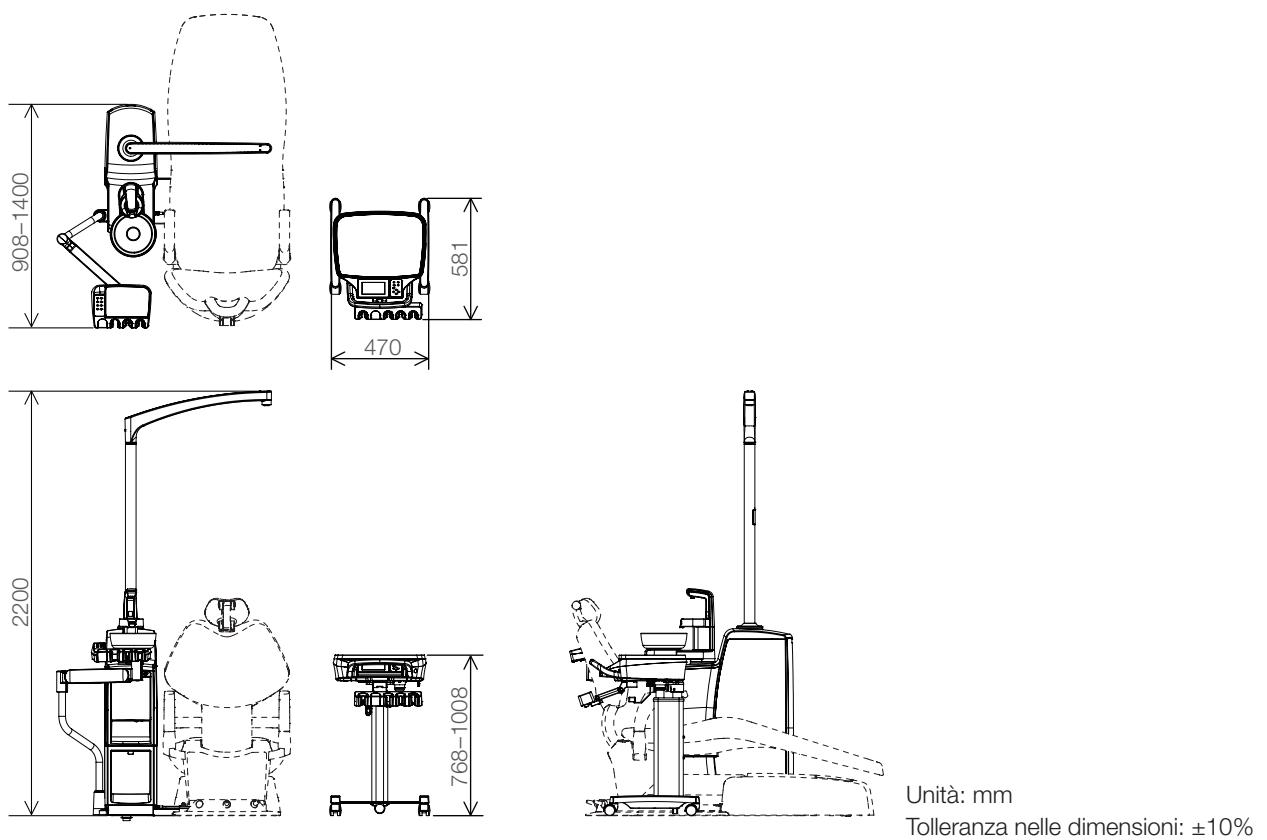


Unità: mm
Tolleranza nelle dimensioni: ±10%

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

4 Specifiche del prodotto

Disegno dimensionale (sono forniti i valori standard)

Consegna armadio

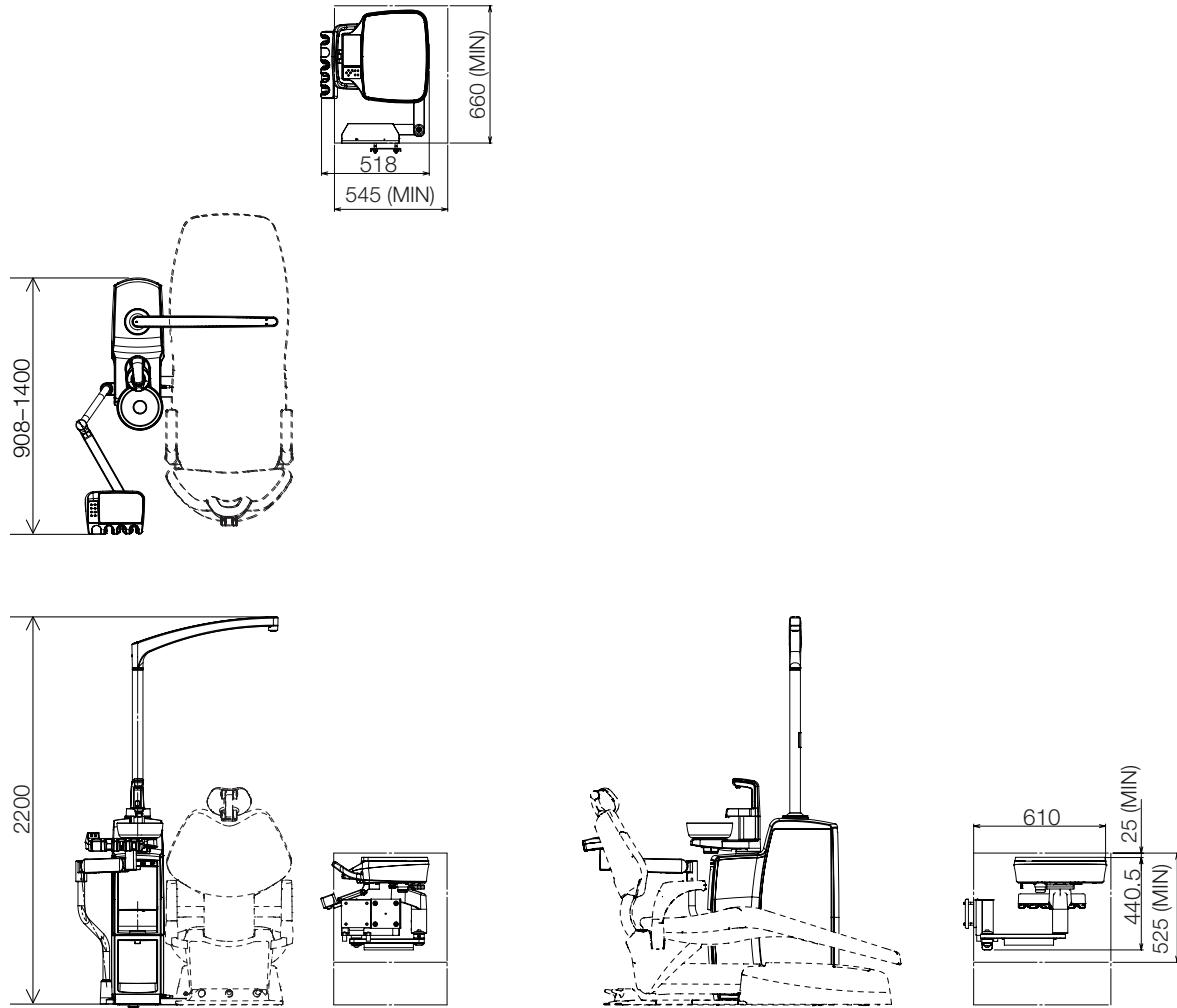

Unità: mm

Tolleranza nelle dimensioni: $\pm 10\%$


Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

4 Specifiche del prodotto


Poltrona contour

Disegno dimensionale (sono forniti i valori standard)

Poggiatesta: Elettroidraulico

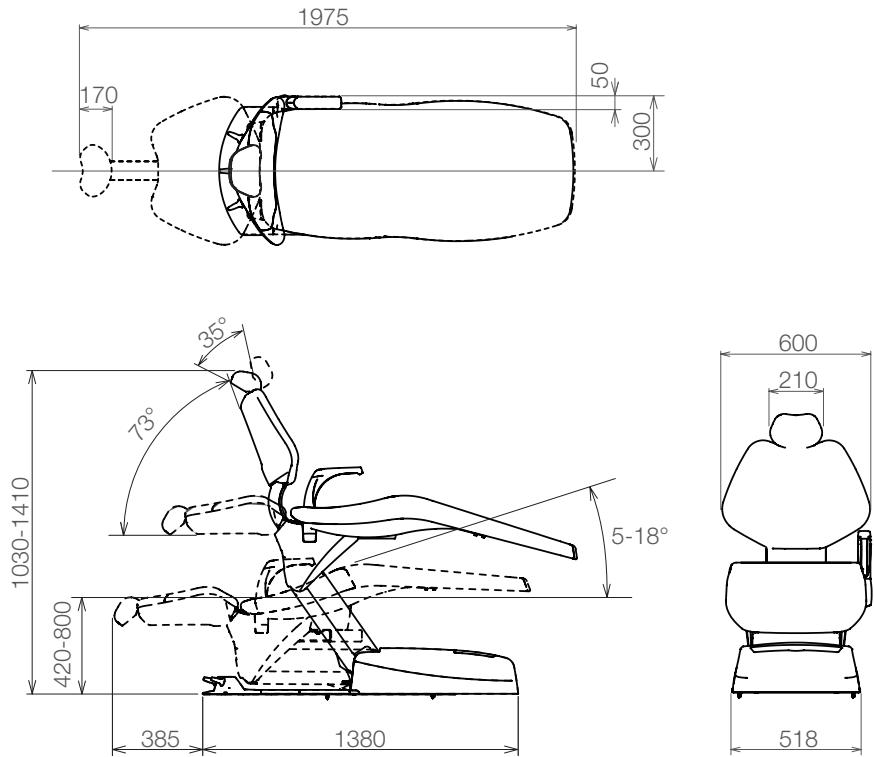

Poggiatesta: Manuale

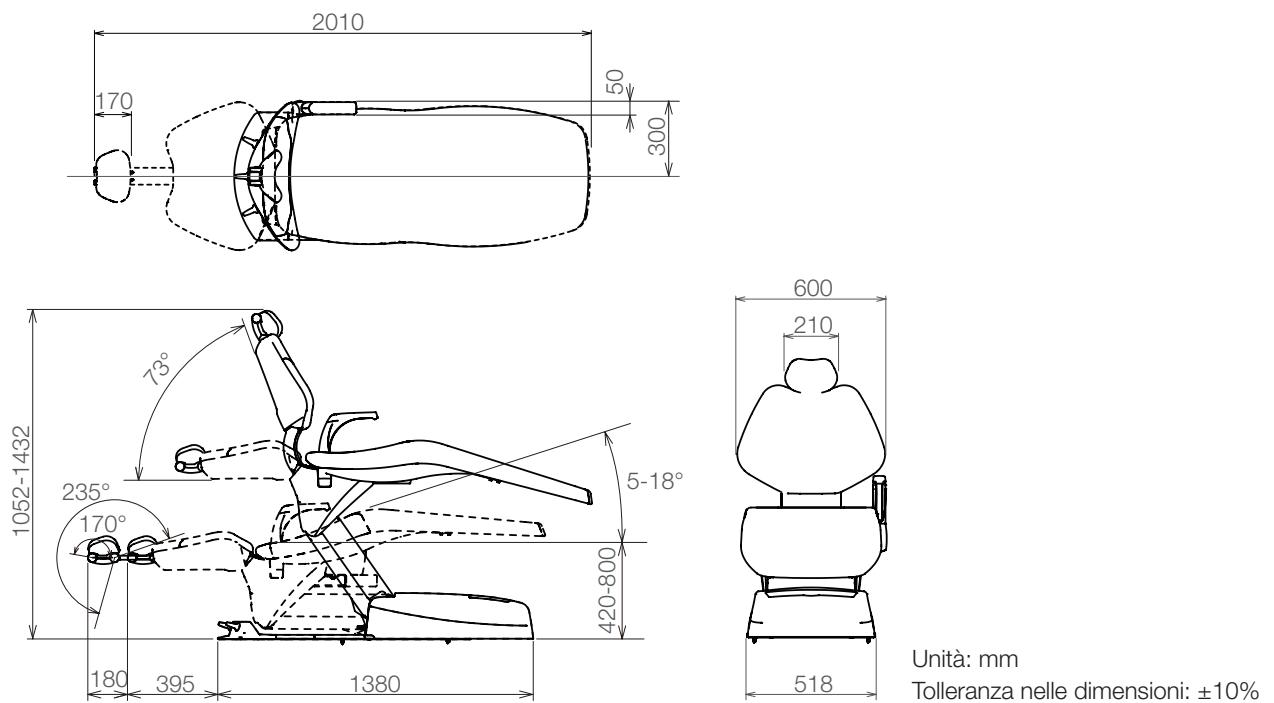

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

4 Specifiche del prodotto

4-1-4 S4

Modello

Unità medico
AU-ER-OA* (sopra il paziente)
AU-ER-CT (carrello)
AU-ER-CD (consegna armadio)
Unità sputacchiera
AU-ER-PD*
Poltrona
AC-ER-FP* (poggiatesta motorizzato)
AC-ER-FD* (poggiatesta manuale)
(* rappresenta una o più stringhe o numeri.)

Classificazione per la protezione dalle scosse elettriche

Apparecchiatura di classe I

Classificazione in base al grado di protezione dalle scosse elettriche

Tipo B applicato
Parti (manipolo/siringa/parti imbottite della poltrona/bracciolo)

Classificazione in base al grado di protezione dalle infiltrazioni d'acqua o da sostanze particellari

Comando a pedale IPX1

Tensione nominale

CA 230 V

Frequenza di alimentazione

50/60 Hz

Ingresso di alimentazione

5,5 A

4 Specifiche del prodotto

Fusibile

Portafusibile

Circuito primario: 8 A/250 V

(Potere di interruzione: 80 A/250 V CA)

Velocità operativa: ritardo di tempo

Dimensione: 5,2 × 20 mm

Circuito secondario per linea 24 V/6,5 A

10 A/250 V

(Potere di interruzione: 1.500 A/250 V CA)

Velocità operativa: ritardo di tempo

Dimensione: 5,2 × 20 mm

Circuito secondario per linea 24 V/5 A

6,3 A/250 V

(Potere di interruzione: 1.500 A/250 V CA)

Velocità operativa: ritardo di tempo

Dimensione: 5,2 × 20 mm

Circuito secondario per linea 14 V/5 A

6,3 A/250 V

(Potere di interruzione: 1.500 A/250 V CA)

Velocità operativa: ritardo di tempo

Dimensione: 5,2 × 20 mm

Circuito secondario per il riscaldatore acqua del manipolo

6,3 A/250 V

(Potere di interruzione: 1.500 A/250 V CA)

Velocità operativa: ritardo di tempo

Dimensione: 5,2 × 20 mm

Circuito secondario per alimentazione acqua/siringa 6 vie e riscaldatore acqua

6,3 A/250 V

(Potere di interruzione: 1.500 A/250 V CA)

Velocità operativa: ritardo di tempo

Dimensione: 5,2 × 20 mm

Scheda di alimentazione per NLX Plus/NLX Nano/MX2/MCX

5 A/250 V

(Potere di interruzione: 100 A/250 V CA)

Velocità operativa: ritardo di tempo

Dimensione: ø8,35 mm

Scheda di controllo del comando a pedale

0,315 A/32 V

(Potere di interruzione: 1,2 A/32 V CA)

Velocità operativa: Funzionamento normale

Dimensione: 1,6 × 0,8 mm

Scheda di controllo della poltrona

1,25 A/250 V

(Potere di interruzione: 1.500 A/250 V CA)

Velocità operativa: Interruzione

Dimensione: 5,2 × 20 mm

Scheda circuito di alimentazione CA/CC

2,0 A/250 V

(Potere di interruzione: 100 A/300 V CA)

Velocità operativa: ritardo di tempo

Dimensione: 8,5 × 8,5 × 4 mm

4 Specifiche del prodotto

Modalità di funzionamento	Funzionamento non continuo (motorino) Tempo massimo di funzionamento, 3 minuti CICLO 1:15	
Peso	Unità sputacchiera Unità medico Sopra il paziente Carrello Consegna armadio Poltrona	60 kg 42 kg 25 kg 35 kg 145 kg
Pressione dell'aria principale	0,5 MPa	
Pressione dell'acqua principale	0,2 MPa	
Altezza iniziale/corsa poltrona	450 mm/265 mm	
Meccanismo di sollevamento e abbassamento della poltrona	Elettroidraulico	
Poggiatesta	Elettroidraulico Manuale	
Schiene	Elettroidraulico	
Seduta	Meccanismo di inclinazione collegato allo schienale	
Bracciolo	Sinistro ruotato/Destro ruotato Angolo di rotazione 180°	
Parti imbottite	Pelle sintetica	
Interruttore di controllo	Joystick	
Ambiente di utilizzo	Temperatura da 0 °C a 40 °C Umidità da 10% a 95% (senza condensa) Pressione atmosferica da 700 a 1.060 hPa	
Trasporto/Ambiente di stoccaggio	Temperatura da -20 °C a 70 °C Umidità da 10% a 95% (senza condensa) Pressione atmosferica da 700 a 1.060 hPa	
Limite di peso	Tavoletta medico 3 kg Vassoio secondario della tavoletta medico (asta) 1,5 kg Vassoio assistente 1,5 kg Poltrona (massa massima del paziente) 225 kg	
Adattamento a un ambiente ad alto contenuto di ossigeno	Il prodotto non è adatto per l'uso in un ambiente ad alto contenuto di ossigeno.	




Fare riferimento alla targhetta dei dati tecnici per la capacità di alimentazione elettrica.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.




4 Specifiche del prodotto

Disegno dimensionale (sono forniti i valori standard)

Sopra il paziente

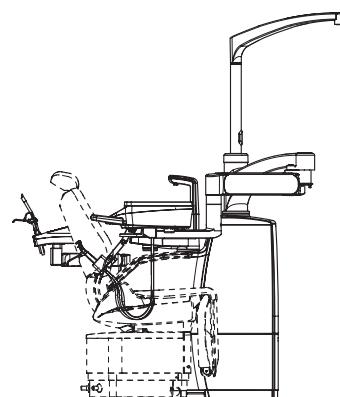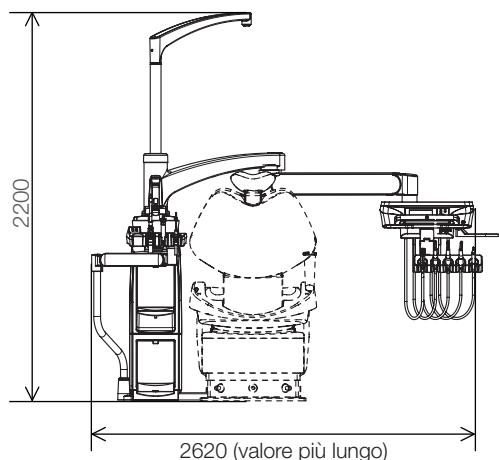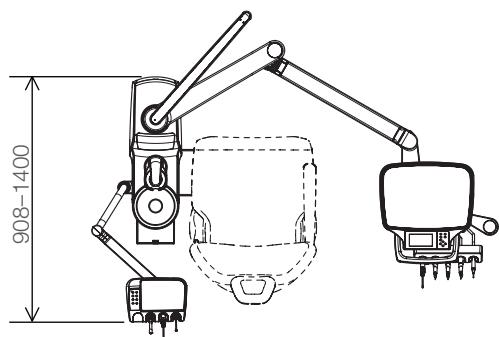

Carrello

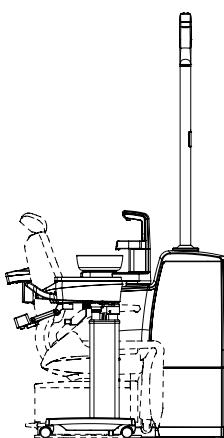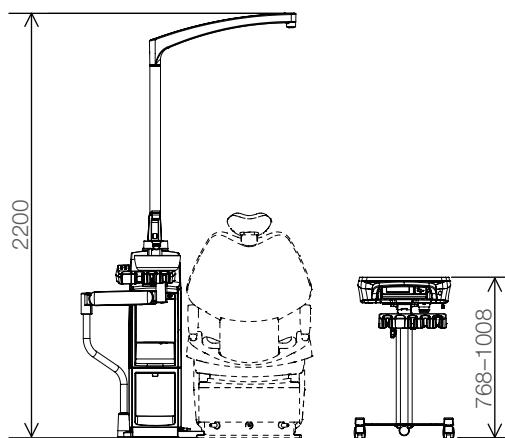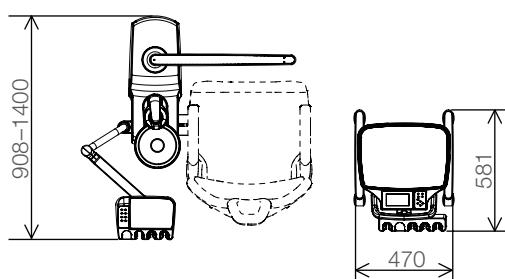




Unità: mm
Tolleranza nelle dimensioni: ±10%

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

4 Specifiche del prodotto

Disegno dimensionale (sono forniti i valori standard)

Consegna armadio

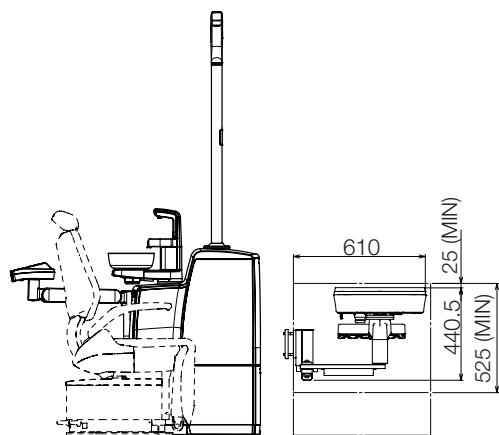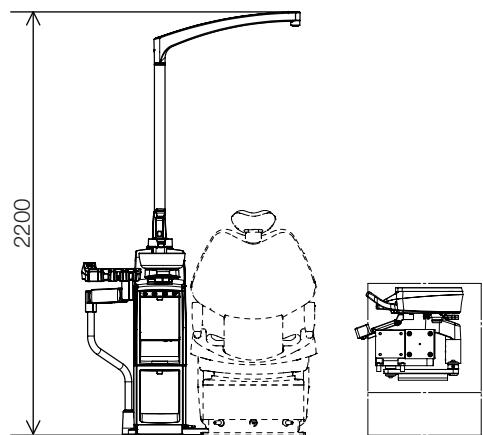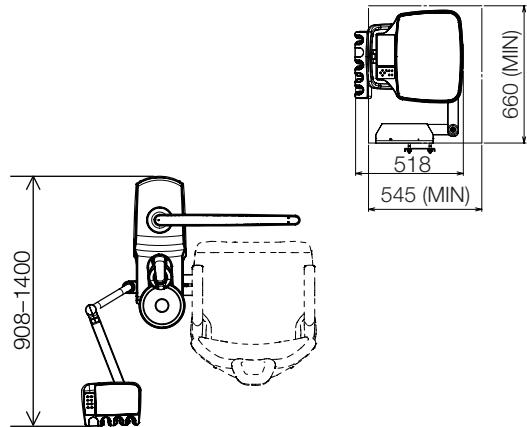

Unità: mm


Tolleranza nelle dimensioni: $\pm 10\%$

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.


4 Specifiche del prodotto

Poltrona con gambale pieghevole
Disegno dimensionale (sono forniti i valori standard)

Poggiatesta: Elettroidraulico

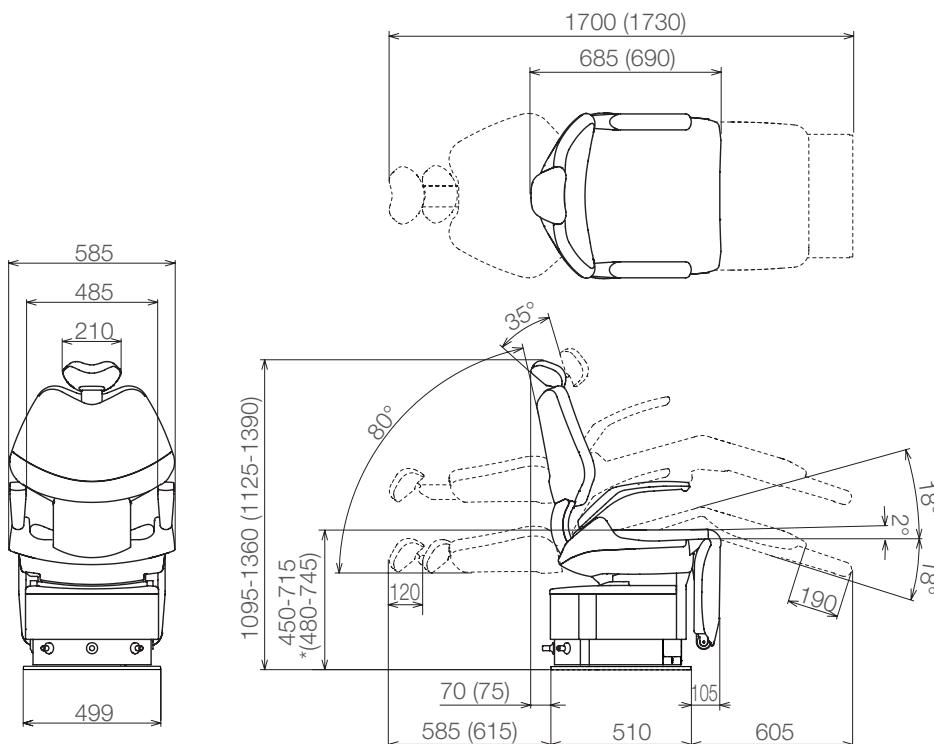

Poggiatesta: Manuale

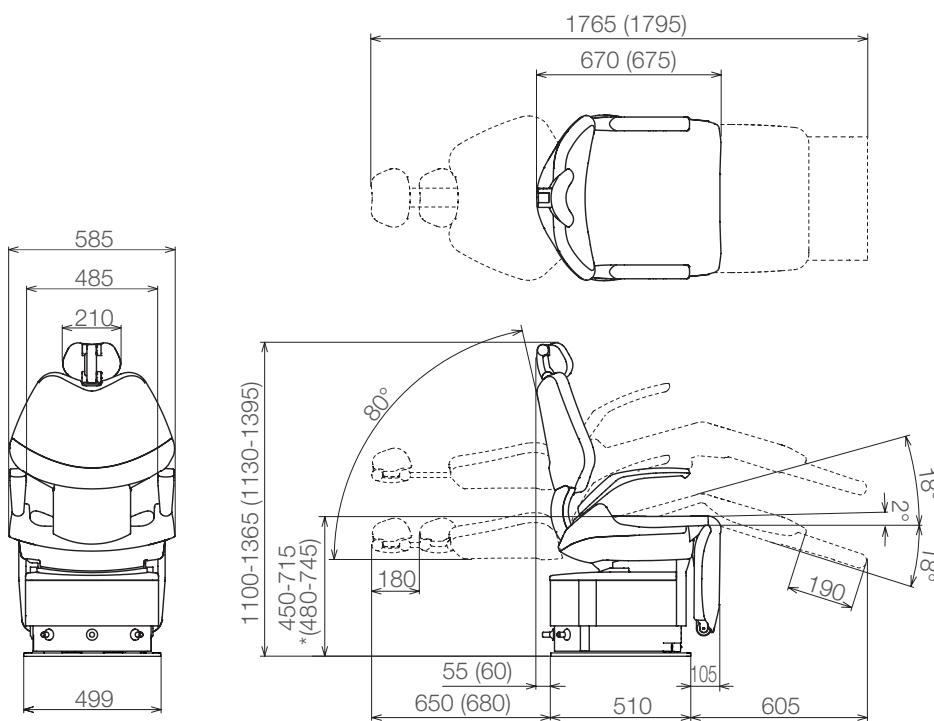

Unità: mm

Tolleranza nelle dimensioni: $\pm 10\%$

() : Schienale alto

*() : Seduta piatta

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

4 Specifiche del prodotto

4-1-5 Carrello medico / Consegnna armadio

Modello	AU-ERB-CT55CE / AU-ERB-CT56CE / AU-ERB-CT AU-ERB-CD55CE / AU-ERB-CD56CE / AU-ERB-CD
Classificazione per la protezione dalle scosse elettriche	Apparecchiatura di classe I
Classificazione in base al grado di protezione dalle scosse elettriche	Parti applicate di tipo B (manipolo/siringa)
Classificazione in base al grado di protezione dalle infiltrazioni d'acqua o da sostanze particellari	Comando a pedale IPX1
Tensione nominale	CA 230 V
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz
Ingresso di alimentazione	5,5 A
Fusibile	Portafusibile (Circuito primario: 8 A/250 V (Potere di interruzione: 80 A/250 V CA) Velocità operativa: ritardo di tempo Dimensione: 5,2 × 20 mm)
	Circuito secondario per linea 24 V/6,5 A (Potere di interruzione: 1.500 A/250 V CA) Velocità operativa: ritardo di tempo Dimensione: 5,2 × 20 mm)
	Circuito secondario per linea 24 V/5 A (Potere di interruzione: 1.500 A/250 V CA) Velocità operativa: ritardo di tempo Dimensione: 5,2 × 20 mm)
	Circuito secondario per linea 14 V/5 A (Potere di interruzione: 1.500 A/250 V CA) Velocità operativa: ritardo di tempo Dimensione: 5,2 × 20 mm)
	Circuito secondario per il riscaldatore acqua del manipolo (Potere di interruzione: 1.500 A/250 V CA) Velocità operativa: ritardo di tempo Dimensione: 5,2 × 20 mm)
	Circuito secondario per alimentazione acqua/siringa 6 vie e riscaldatore acqua (Potere di interruzione: 1.500 A/250 V CA) Velocità operativa: ritardo di tempo Dimensione: 5,2 × 20 mm)
	Scheda di alimentazione per NLX Plus/ NLX Nano/MX2/MCX (Potere di interruzione: 100 A/250 V CA) Velocità operativa: ritardo di tempo Dimensioni: ø8,35 mm)

4 Specifiche del prodotto

Fusibile	Scheda di controllo del comando a pedale 0,315 A/32 V (Potere di interruzione: 1,2 A/32 V CA) Velocità operativa: Funzionamento normale Dimensione: 1,6 × 0,8 mm
Peso	Unità medico Carrello 25 kg Consegna armadio 35 kg
Pressione dell'aria principale	0,5 MPa
Pressione dell'acqua principale	0,2 MPa
Ambiente di utilizzo	Temperatura da 0 °C a 40 °C Umidità da 10% a 95% (senza condensa) Pressione atmosferica da 700 a 1.060 hPa
Trasporto/Ambiente di stoccaggio	Temperatura da –20 °C a 70 °C Umidità da 10% a 95% (senza condensa) Pressione atmosferica da 700 a 1.060 hPa
Limite di peso	Tavoletta medico 3 kg
Adattamento a un ambiente ad alto contenuto di ossigeno	Il prodotto non è adatto per l'uso in un ambiente ad alto contenuto di ossigeno.




Fare riferimento alla targhetta dei dati tecnici per la capacità di alimentazione elettrica.

4 Specifiche del prodotto




Disegno dimensionale (sono forniti i valori standard)

Carrello medico

Sezione tavoletta medico

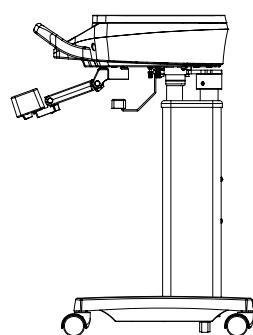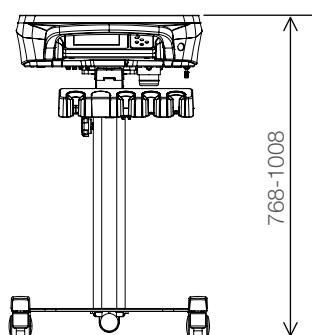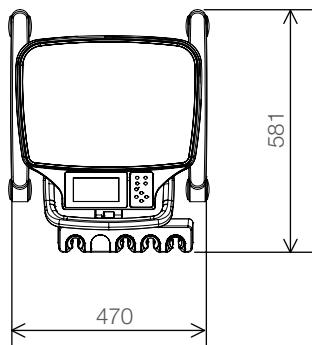




Sezione di giunzione

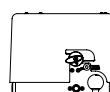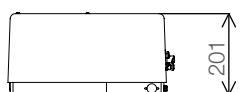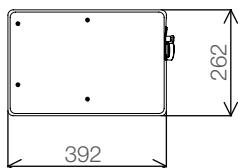

Unità: mm

Tolleranza nelle dimensioni: ±10%

Consegna armadio

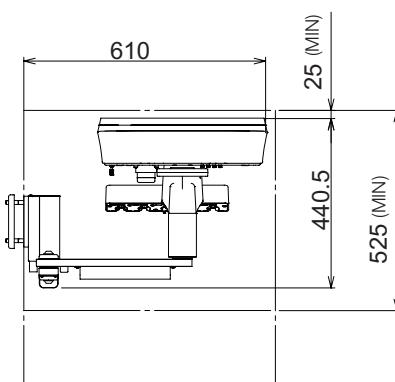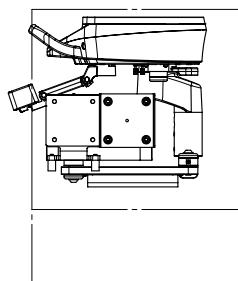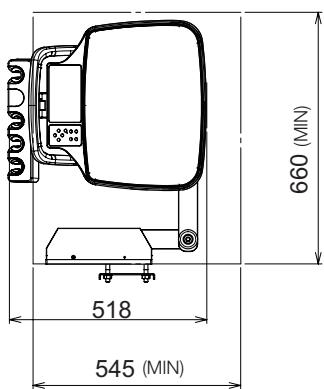

Unità: mm

Tolleranza nelle dimensioni: ±10%

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

4 Specifiche del prodotto

4-1-6 Specifiche per aria/acqua/aspirazione

Fornitura di acqua

Pressione: 0,2-0,4 MPa
Flusso dell'acqua minimo: 6 L/min
Durezza: inferiore a 2,14 mmol/l
(< 12-dH)
pH: 6,5-8,5
Filtro particolato per acqua: 100 µm
Qualità dell'acqua: deve soddisfare i
requisiti nazionali relativi all'acqua potabile.
Rispettare i requisiti nazionali relativi al
collegamento di EURUS alla rete pubblica
di distribuzione dell'acqua potabile.

Alimentazione aria

Pressione: 0,5-0,7 MPa
Portata minima: 100 L/min
Umidità: 10 - 95% (senza condensa)
Contaminazione da olio: max 0,5 mg/m³
Contaminazione da particelle: dimensione
delle particelle (1 µm - 5 µm), meno di
100/m³
Filtro antiparticolato: 5 µm

Tipo di portata volumetrica dell'aria

tipo 1: sistema di aspirazione ad alto
volume

VH-18 HVE


Dimensione punta: ø11/ø16

4 Specifiche del prodotto

4-2 Panoramica del sistema


4-2-1 S1

Sopra il paziente

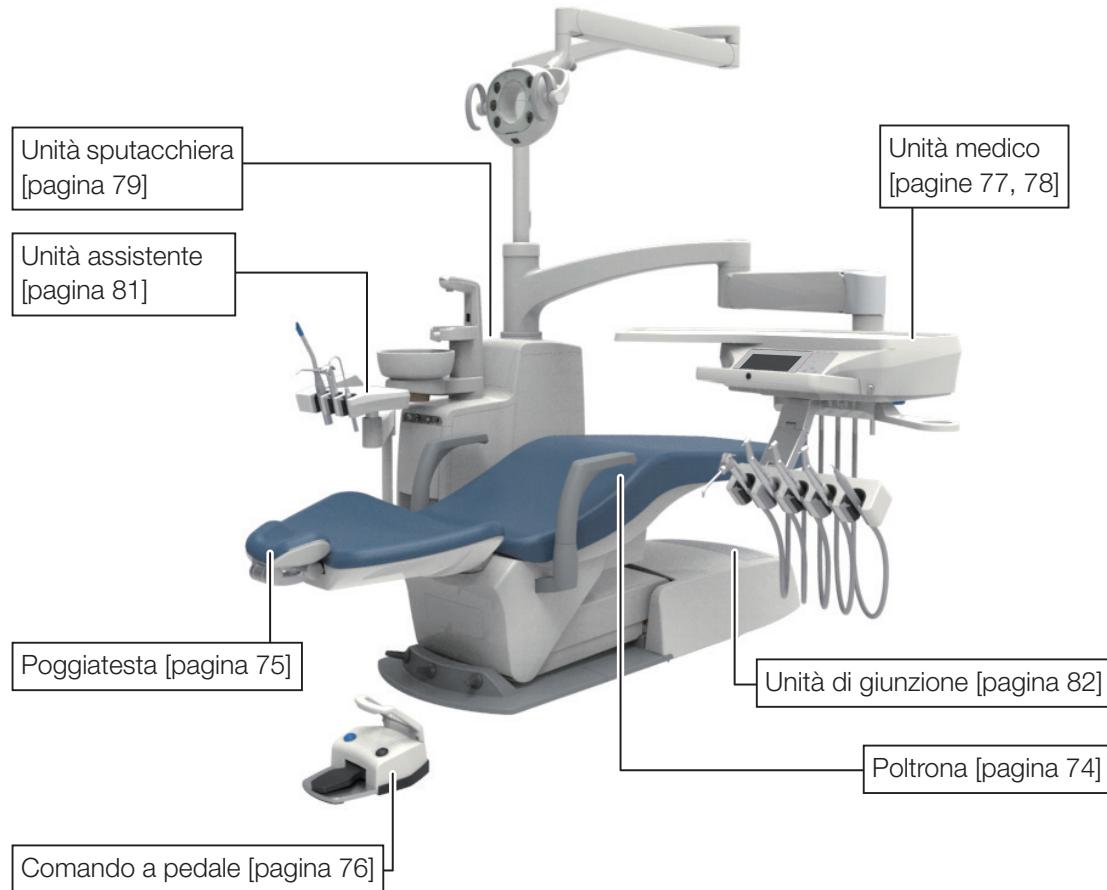


4 Specifiche del prodotto

Carrello

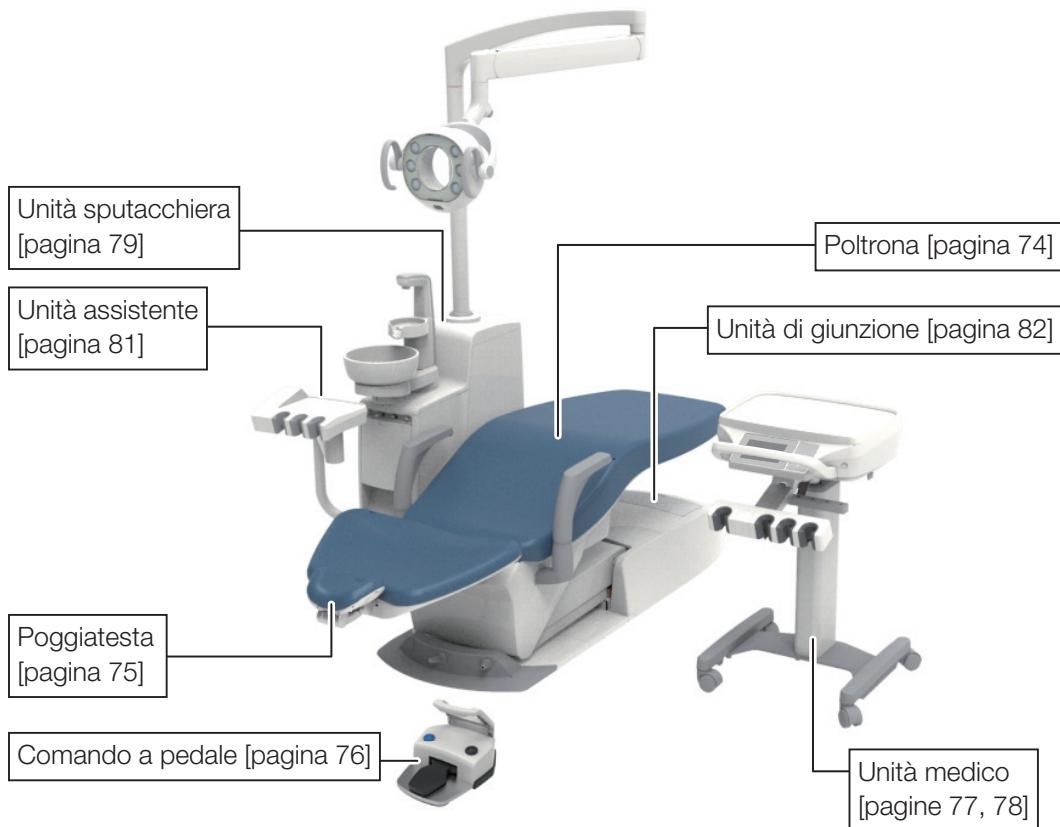


Consegna armadio

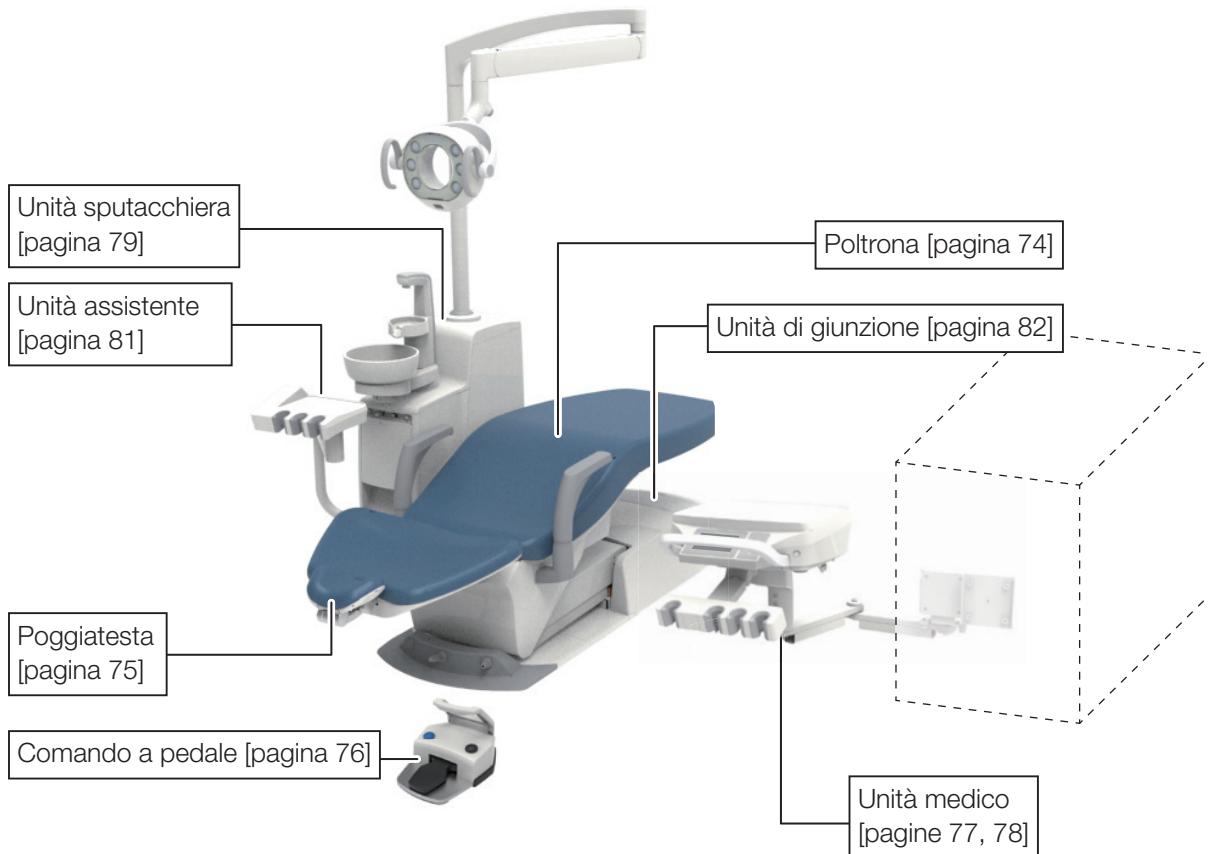

4 Specifiche del prodotto


4-2-2 S3

Sopra il paziente

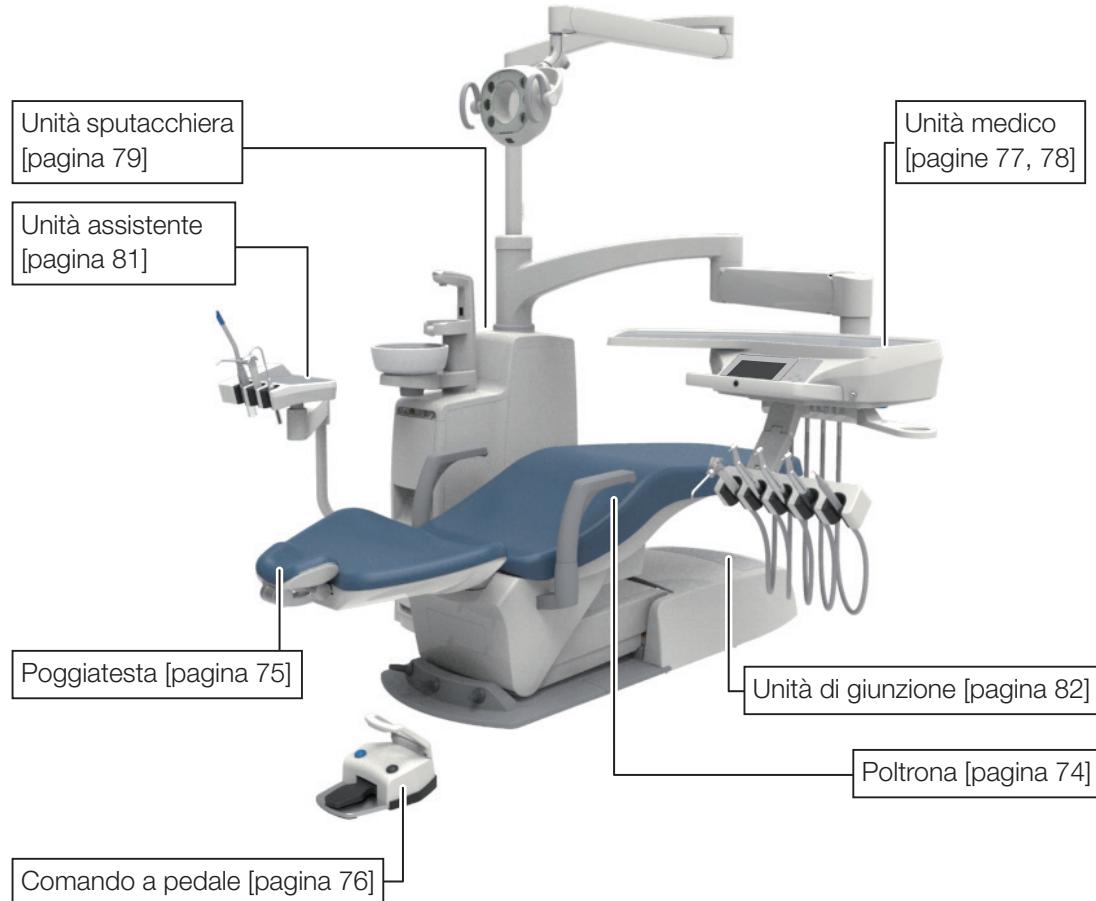


4 Specifiche del prodotto

Carrello

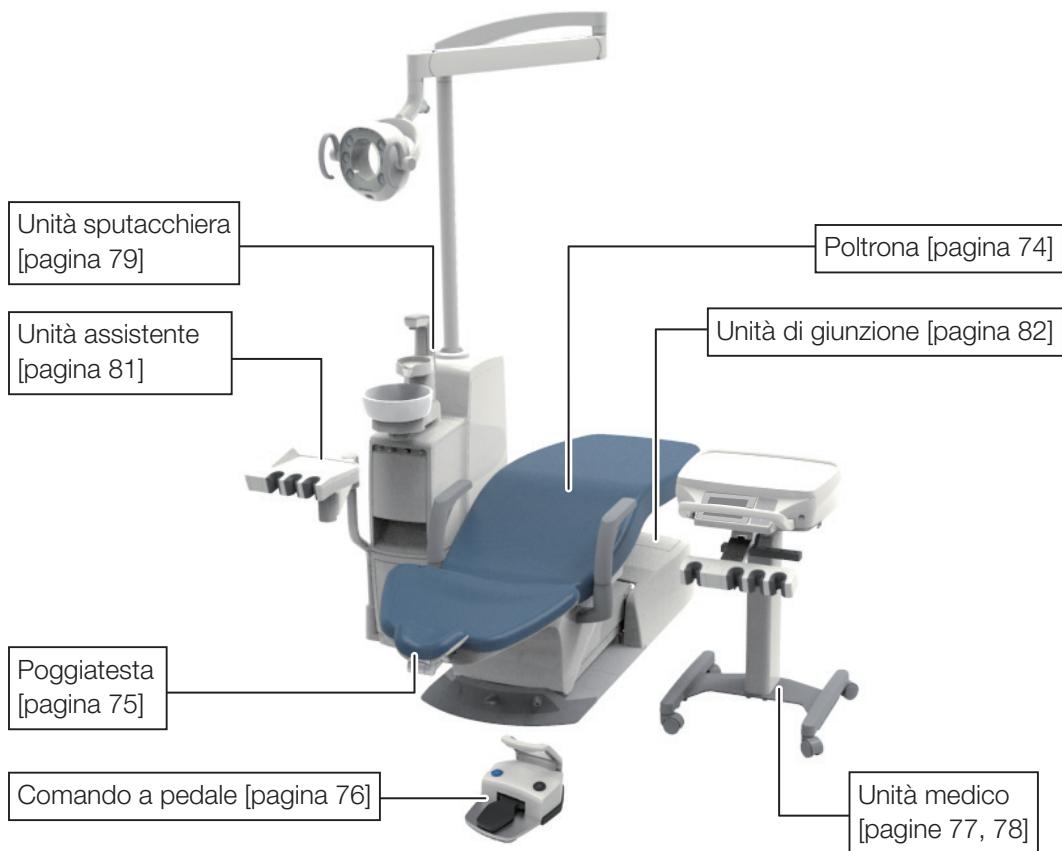


Consegna armadio

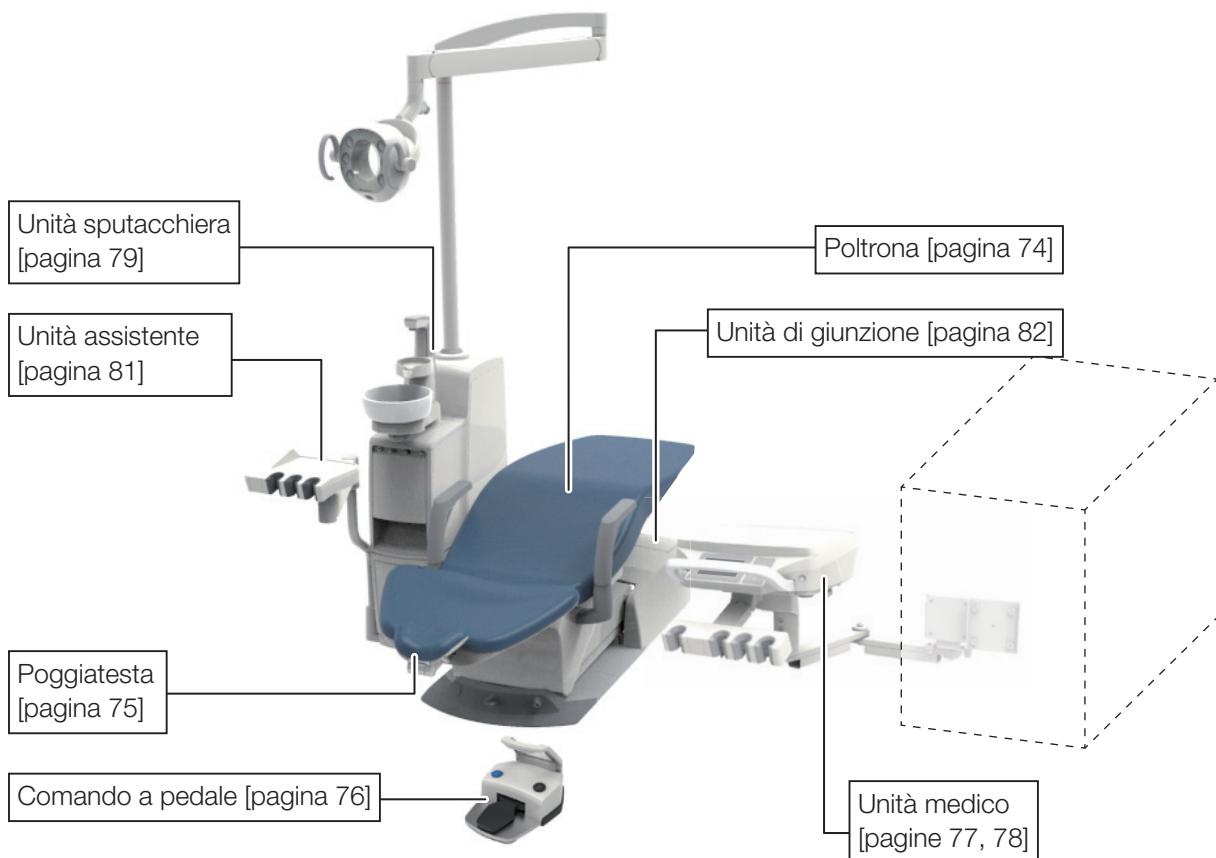


4-2-3 S4

Sopra il paziente

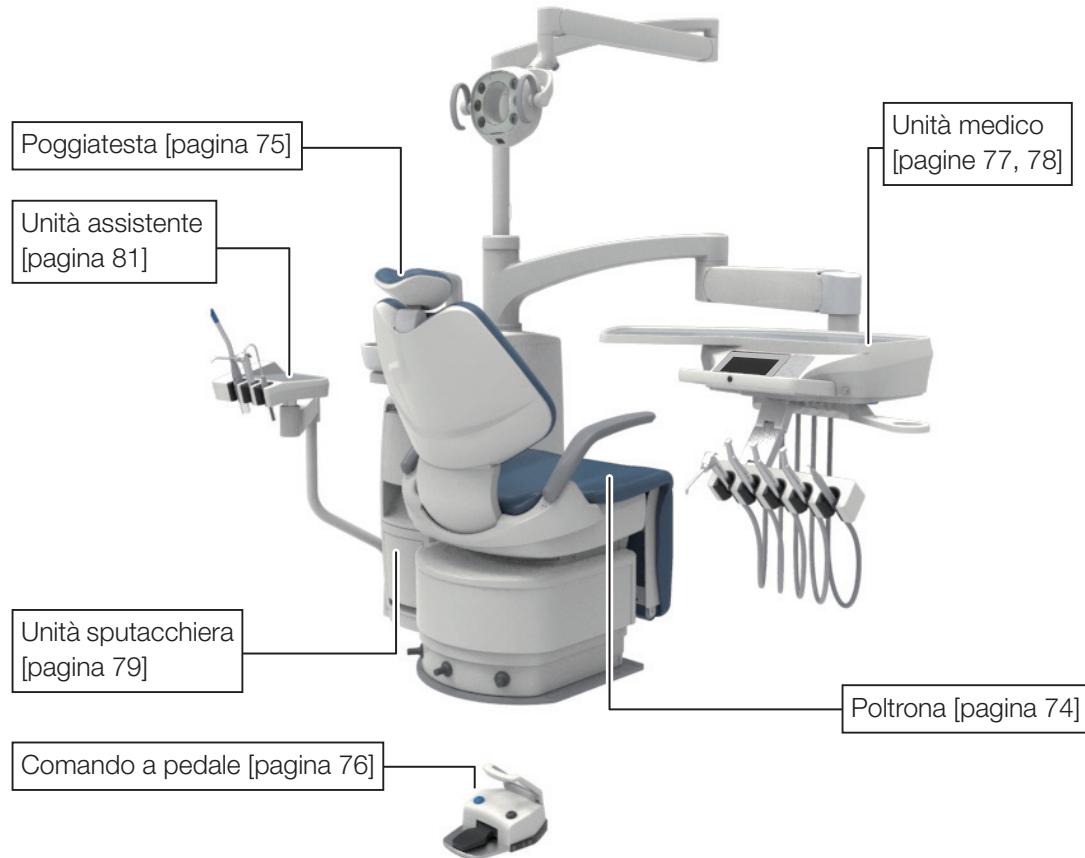


4 Specifiche del prodotto

Carrello

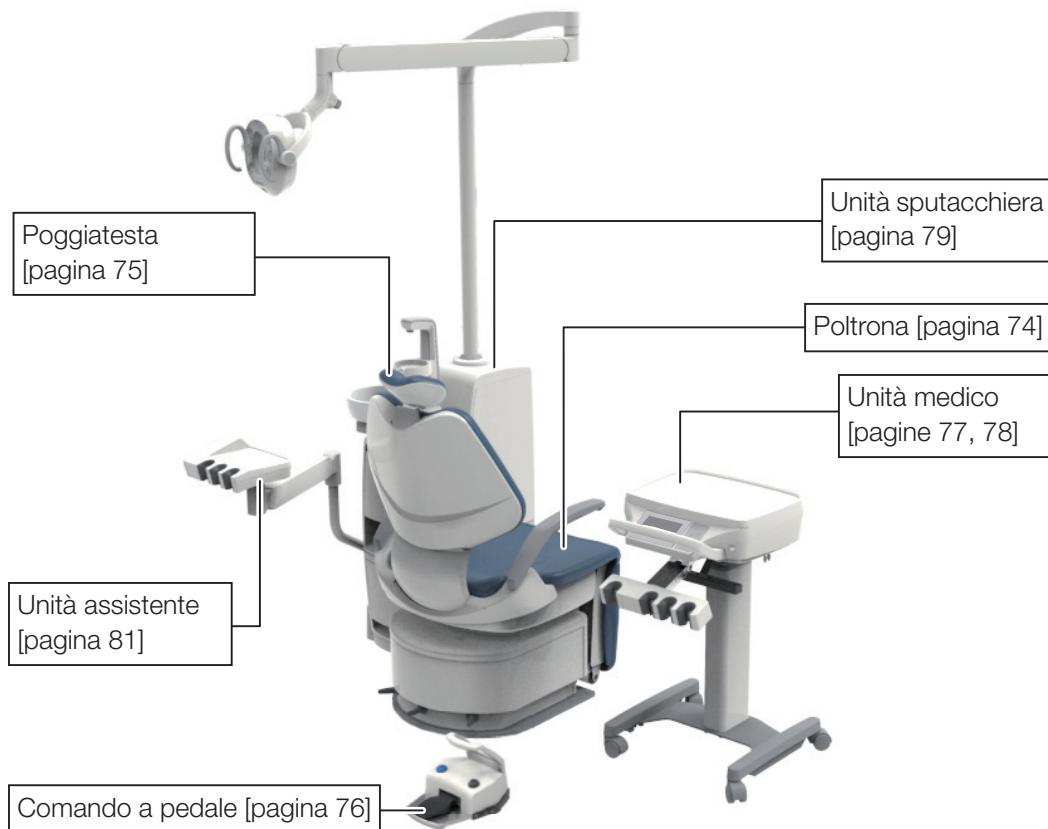


Consegna armadio

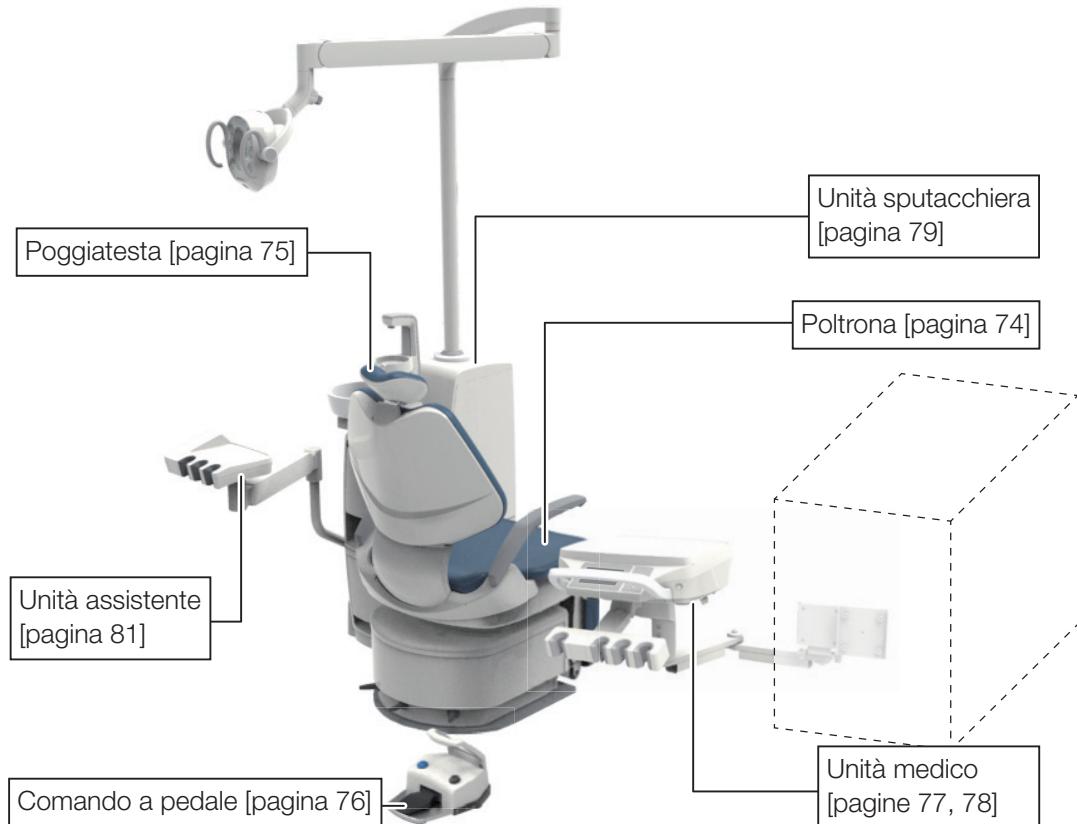


4 Specifiche del prodotto

4–2–4 Carrello medico / Consegnna armadio

Carrello medico

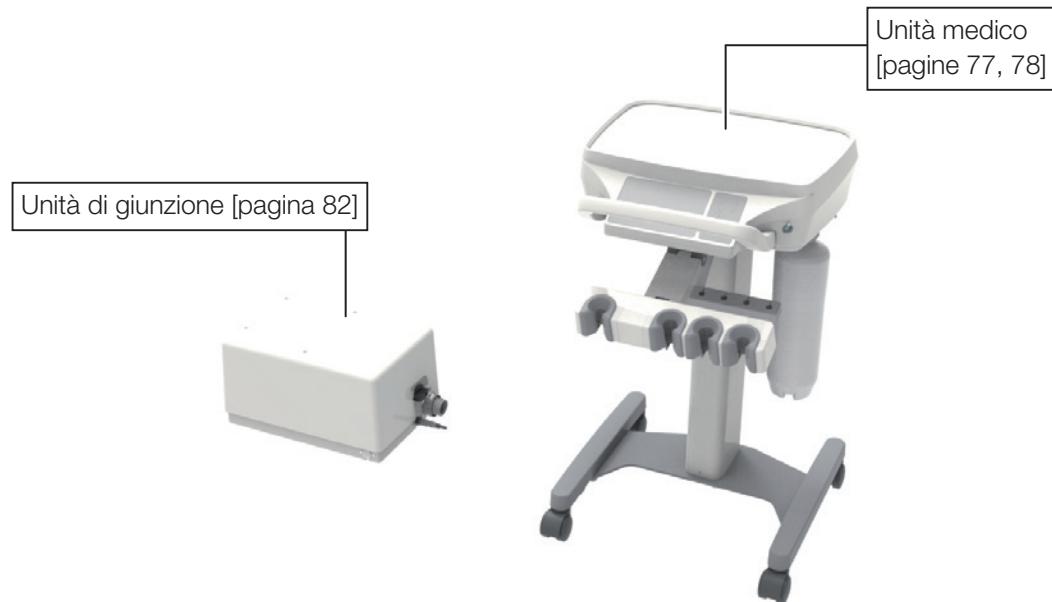

Consegna armadio

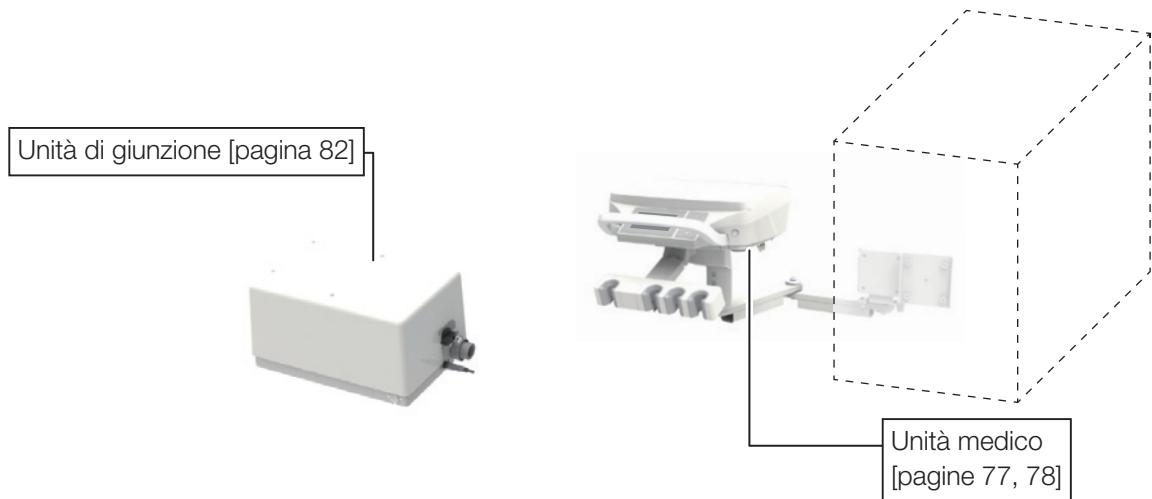


4 Specifiche del prodotto

4-3 Nome di ciascuna parte

4-3-1 Poltrona

4-3-1-1 Poltrona contour


[Unità poltrona tipo collegabile]

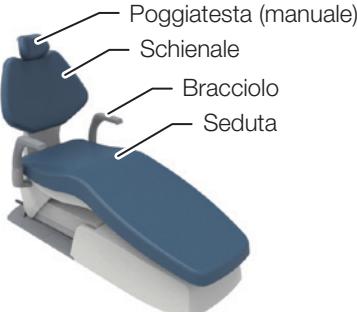

[Unità poltrona tipo non collegabile]



[Unità poltrona tipo collegabile]

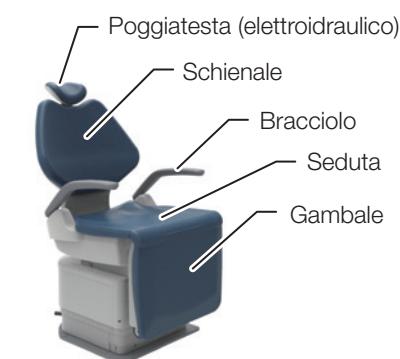

[Unità poltrona tipo non collegabile]




Il poggiatesta potrebbe differire in base alle specifiche selezionate.



La posizione o la disponibilità del joystick potrebbero variare in base alle specifiche selezionate.

4-3-1-2 Poltrona con gambale pieghevole

Il poggiatesta potrebbe differire in base alle specifiche selezionate.

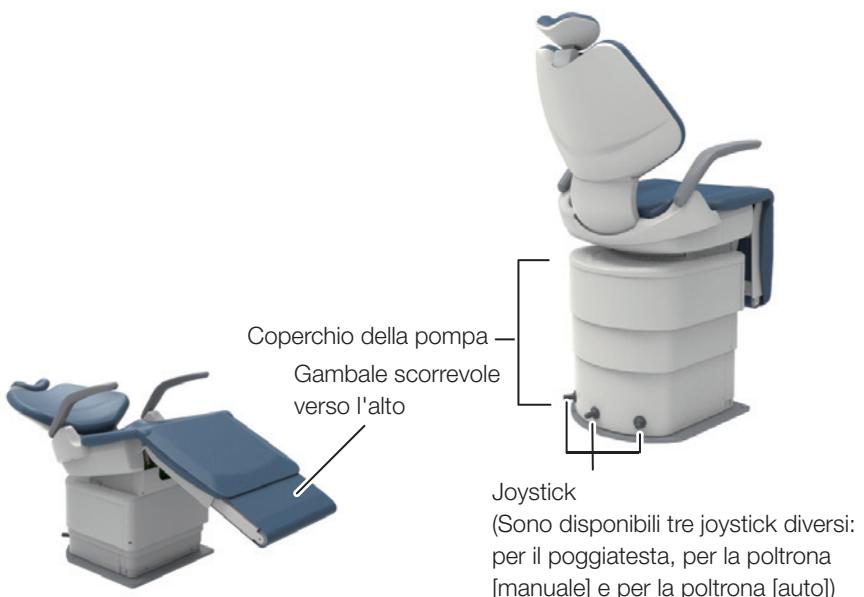

La posizione o la disponibilità del joystick potrebbero variare in base alle specifiche selezionate.

4 Specifiche del prodotto

4-3-2 Poggiatesta


4-3-2-1 Poggiatesta (elettroidraulico)



4-3-2-2 Poggiatesta (manuale)

Leva di comando

Pulsante per
abbassare il
poggiatesta

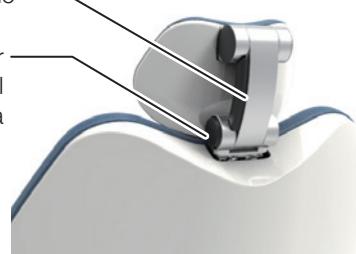


4 Specifiche del prodotto

4–3–3 Comando a pedale (cablato/wireless)



4–3–4 Interruttori a pedale

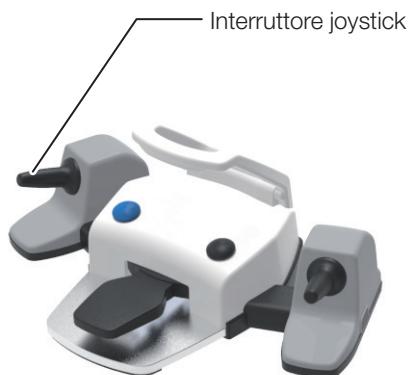


La posizione e la disponibilità degli interruttori joystick variano a seconda delle specifiche selezionate.

4 Specifiche del prodotto

4-3-5 Unità medico

4-3-5-1 Consegnna unità medico


Sopra il paziente

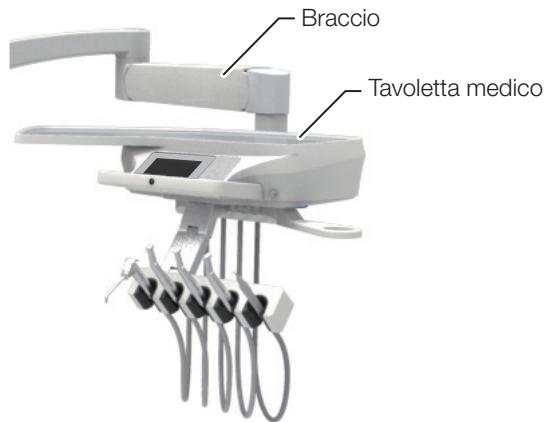

Carrello




Consegna armadio

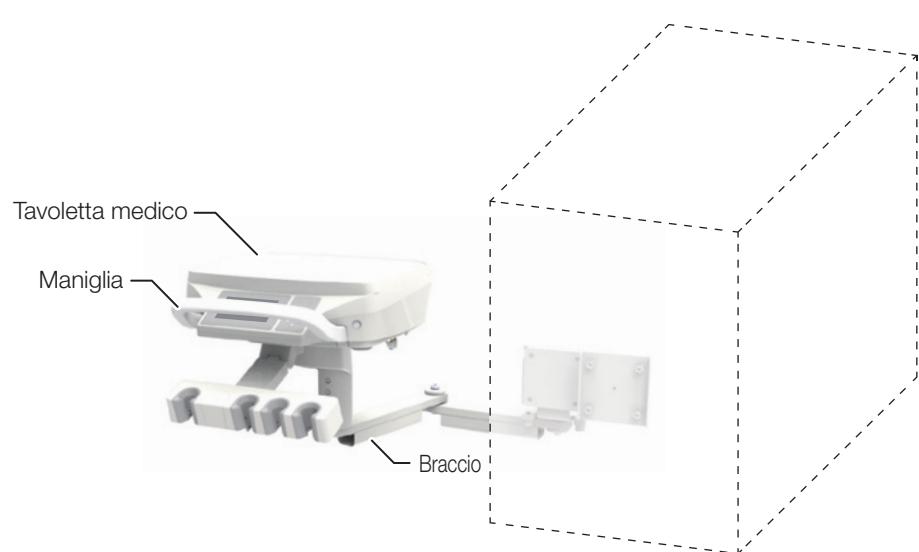


4 Specifiche del prodotto

4–3–5–2 Consegnna dello strumento


Supporto

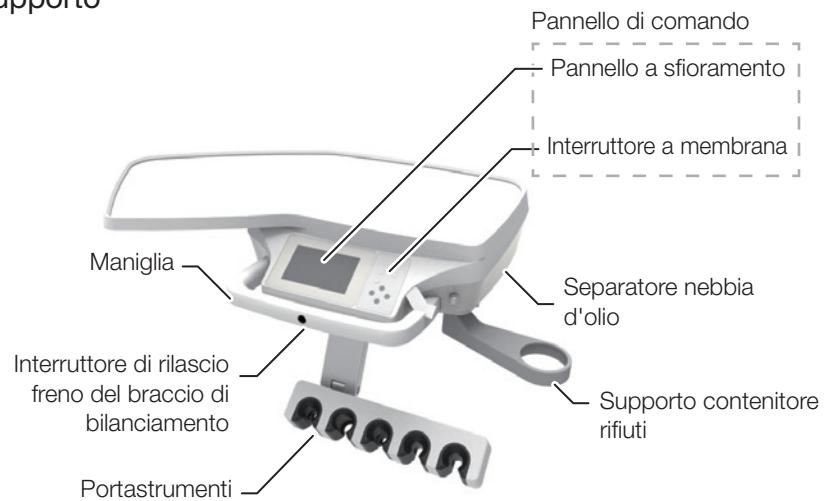

Segnaposto

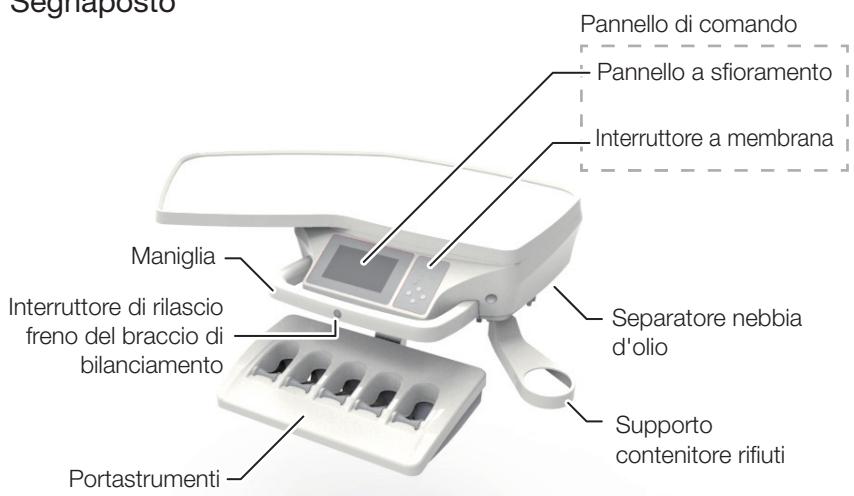


Asta

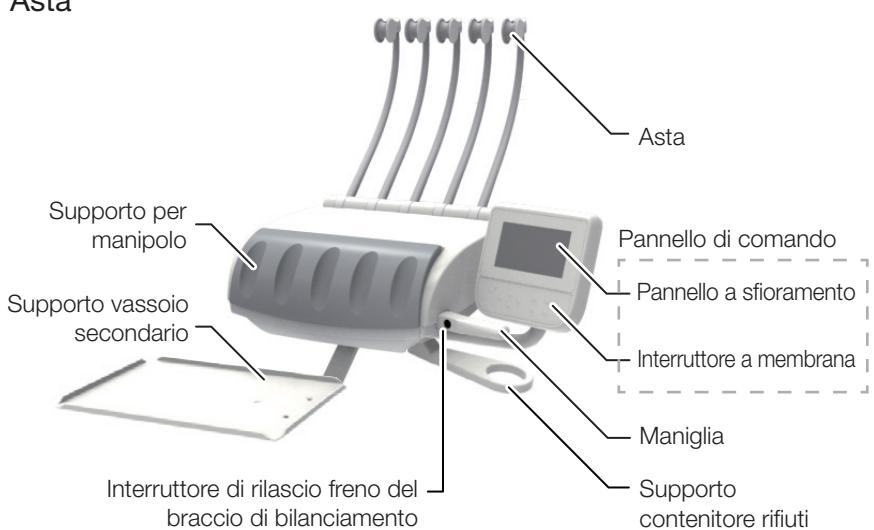


4-3-6 Unità sputacchiera


Supporto per poltrona

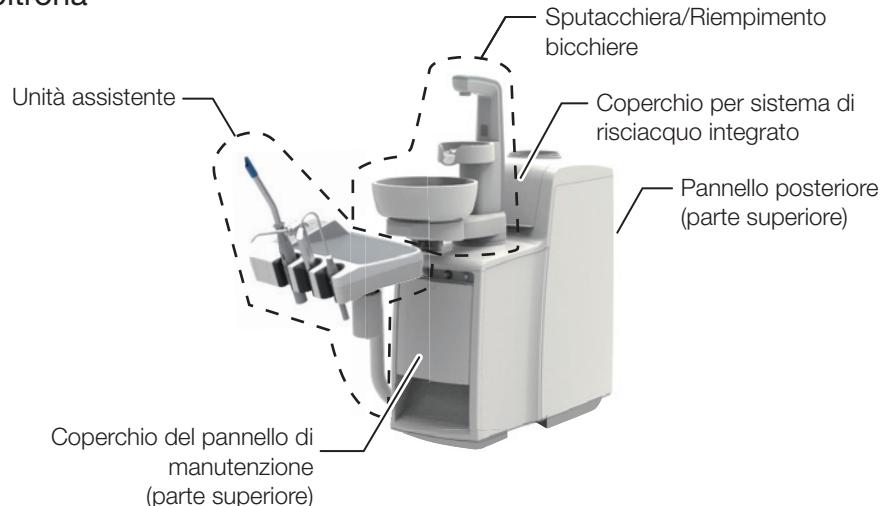

Piedistallo

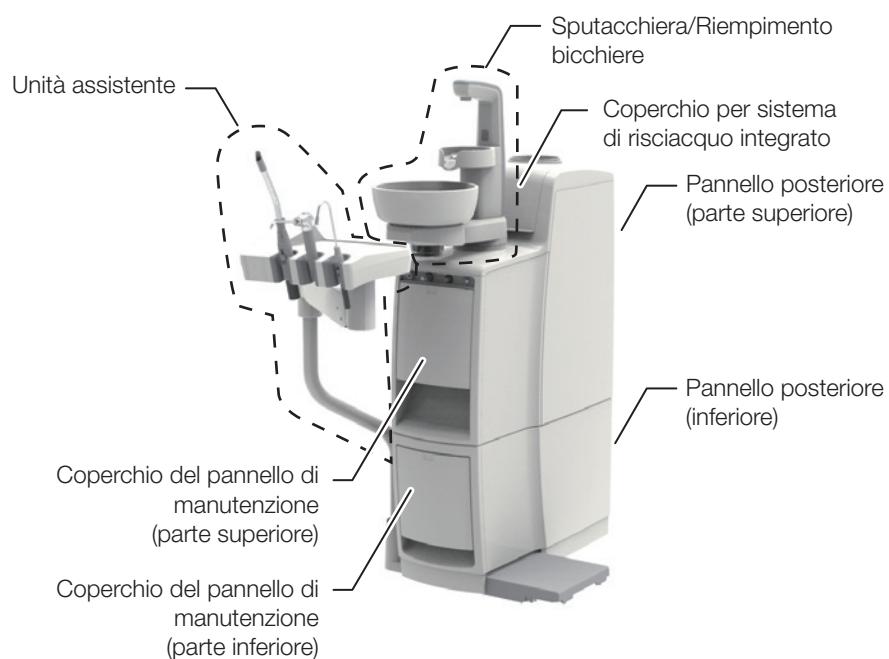


4-3-6-1 Sputacchiera/Riempimento bicchiere

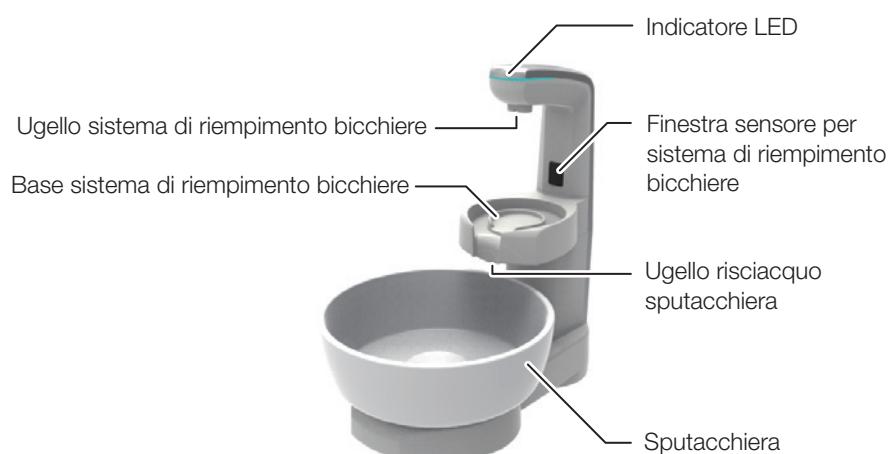

4–3–6–2 Pannello di manutenzione


- ① Connettore di servizio per l'acqua
- ② Manopola di controllo alimentazione acqua per connettore di servizio per l'acqua
- ③ Connettore di servizio per l'aria
- ④ Interruttore principale
- ⑤ Manopola di controllo del flusso dell'acqua della siringa
- ⑥ Manopola di controllo del flusso dell'aria della siringa
- ⑦ Manopola di controllo del flusso di risciacquo sputacchiera
- ⑧ Manopola di controllo del sistema di riempimento bicchiere
- ⑨ Raccoglitrice di solidi
- ⑩ Connettore di aspirazione
- ⑪ Tappo connettore di aspirazione
- ⑫ Connettore aspirasaliva

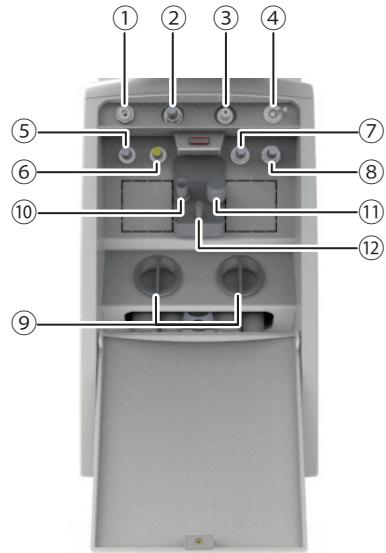


Supporto per poltrona



4-3-6-3 Sistema di risciacquo integrato

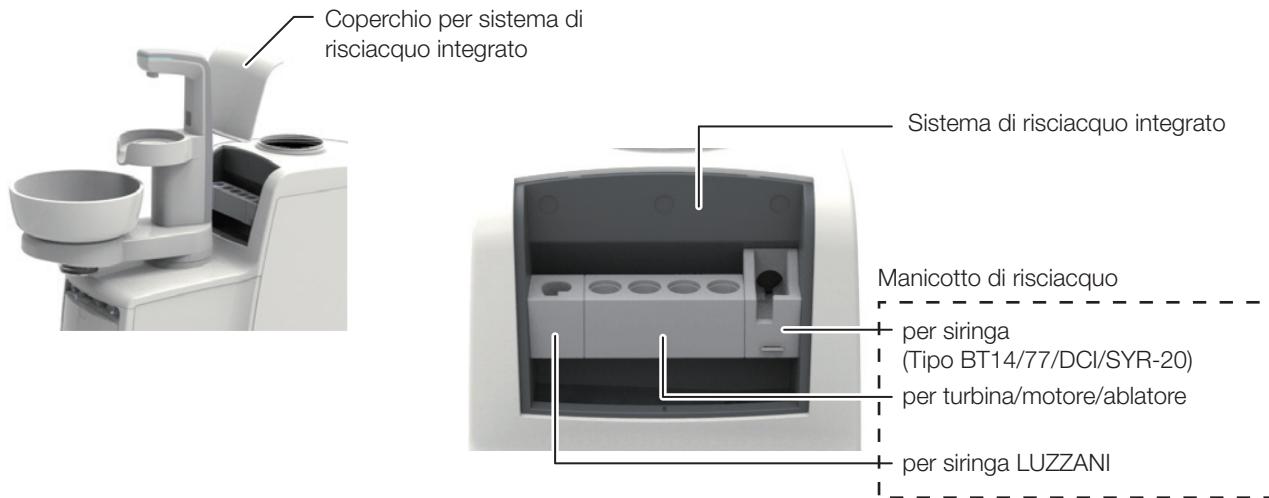

4-3-7 Unità assistente

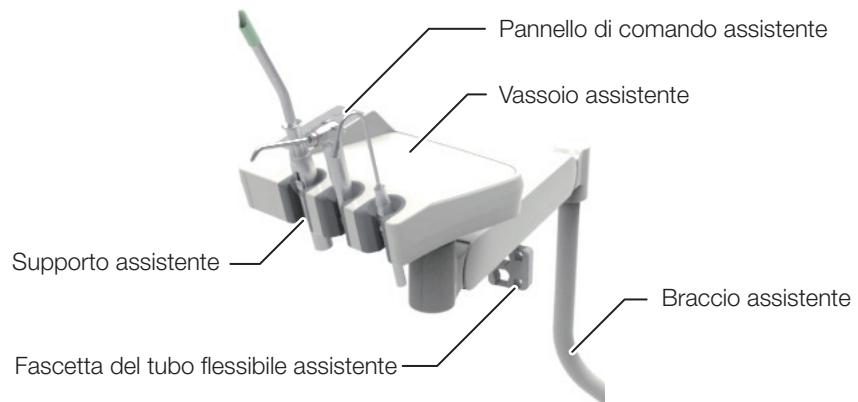


4 Specifiche del prodotto

4-3-8 Unità di giunzione

Unità poltrona tipo collegabile

(Supporto per poltrona)

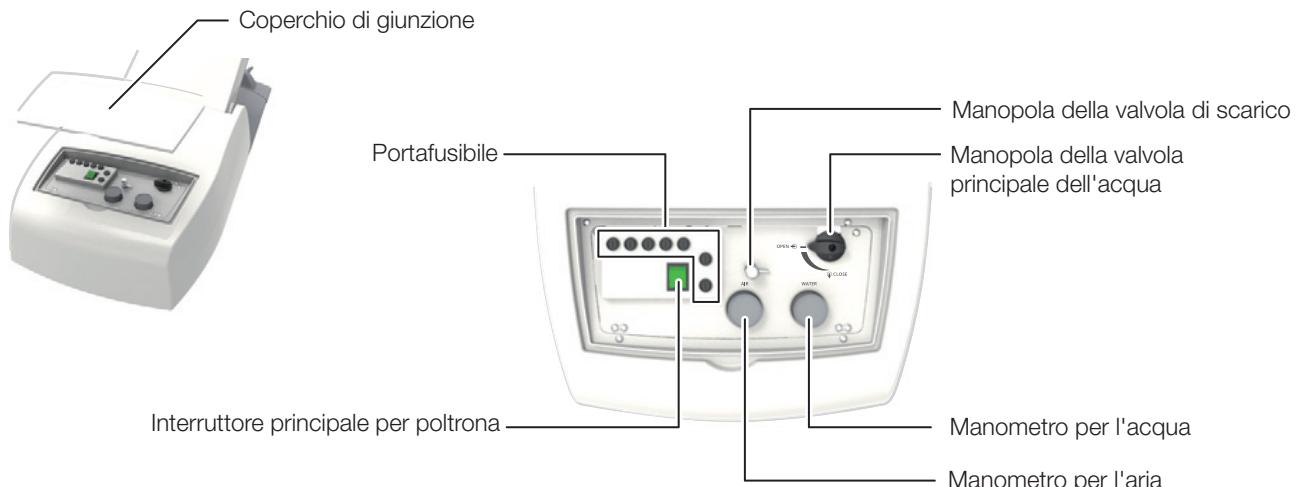

Unità poltrona tipo non collegabile



Carrello medico / Consegna armadio



5 Funzionamento

5-1 Preparazione prima dell'uso

5-1-1 Unità poltrona tipo collegabile

1 Aprire la valvola principale dell'acqua

Supporto per poltrona

- (1) Sollevare la parte marcata con  della seduta come mostrato nella figura a sinistra fino alla posizione che offre un certo spazio sopra l'unità di giunzione.
- (2) Rimuovere il coperchio di giunzione.
- (3) Ruotare la manopola principale della valvola dell'acqua in senso orario per appoggiarla sul lato.

Piedistallo

Aprire il coperchio del pannello di manutenzione. Ruotare la manopola principale della valvola dell'acqua in senso orario per appoggiarla sul lato.

Carrello medico (unità di giunzione)

Ruotare la manopola principale della valvola dell'acqua in senso orario per appoggiarla sul lato.



Piedistallo S3/S4



Supporto per poltrona S1



Carrello medico

5 Funzionamento



2 Accendere l'alimentazione della poltrona


Premere l'interruttore principale della poltrona.

* Quando si attiva, si illumina.


⚠ ATTENZIONE

Azionare l'interruttore principale della poltrona manualmente.

S4

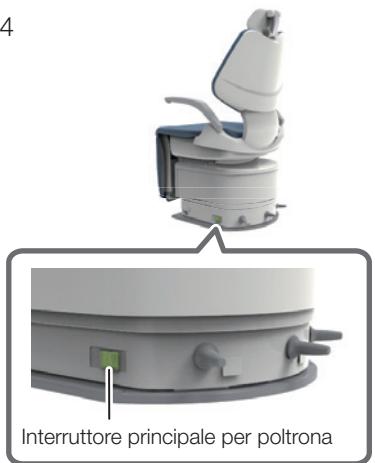

Unità sputacchiera

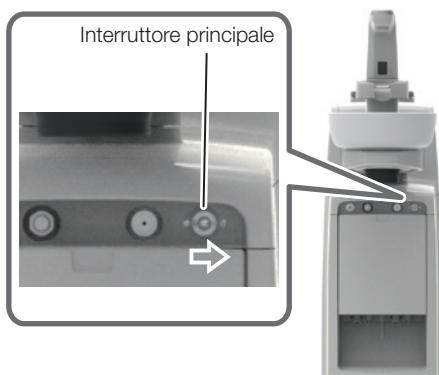

3 Accendere EURUS.

Ruotare l'interruttore principale verso destra (→)

Non deve essere collocato nulla sulla base del sistema di riempimento bicchiere quando l'interruttore principale è acceso. L'acqua potrebbe non essere erogata normalmente durante l'operazione di riempimento bicchiere.

Quando si attiva l'interruttore principale, la sensibilità del pannello a sfioramento viene inizializzata. Non accendere l'alimentazione mentre si tocca il pannello con le dita.

L'accensione dell'alimentazione mentre si tocca il pannello potrebbe causare la riduzione della sensibilità del pannello.

Se il rilevamento non è corretto, spegnere l'alimentazione e attendere circa 5 secondi. Quindi, riaccendere l'alimentazione.

Carrello medico



⚠ ATTENZIONE

Azionare l'interruttore principale manualmente.

Rimuovere la pellicola attaccata al pannello a sfioramento prima dell'uso iniziale. L'utilizzo del pannello a sfioramento con la pellicola attaccata potrebbe causare un funzionamento non corretto, con conseguenti lesioni.


5 Funzionamento

4 Confermare la schermata di avvio e far scorrere l'acqua rimasta



Attivare l'interruttore principale. La marcatura viene visualizzata sul pannello a sfioramento, si sente il suono di avvio e le informazioni sulla versione del programma vengono visualizzate per alcuni secondi.

Le informazioni sulla versione del programma variano a seconda del mese di acquisto (produzione) e delle specifiche.

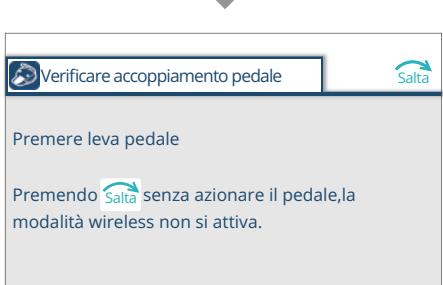

Tenere premuto il pedale wireless fino a quando non appare la schermata di risciacquo.


Se ciò non si verifica mentre si tiene premuto il pedale del comando a pedale, fare riferimento a “Comando a pedale (cablaggio/wireless)” [pagine da 174 a 178].

* La schermata di accoppiamento wireless non viene visualizzata se il comando a pedale è cablato.



Premere l'interruttore ‘Risciacquo’.

Se la funzione di risciacquo della linea di aspirazione non è in dotazione, la schermata mostrata nella figura a sinistra non viene visualizzata. Viene visualizzata la schermata denominata “Senza funzione di risciacquo per linea di aspirazione”. [pagina 86]

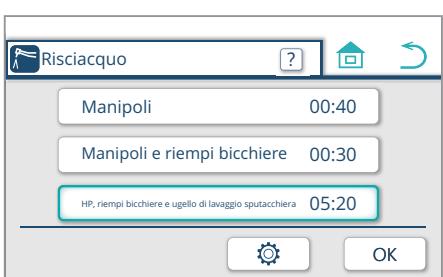


Viene visualizzata la schermata di risciacquo.

Eseguire il risciacquo, facendo riferimento a “Selezione e implementazione del metodo di risciacquo” [pagine da 194 a 214].

* Per annullare il processo, premere .

5 Funzionamento

Tipo senza sputacchiera

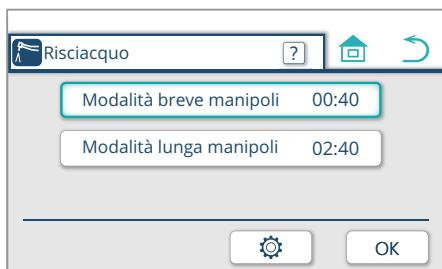


* Per il tipo senza sputacchiera, viene visualizzata la schermata mostrata nella figura a sinistra.

Senza funzione di lavaggio per la linea di aspirazione



Schermata iniziale

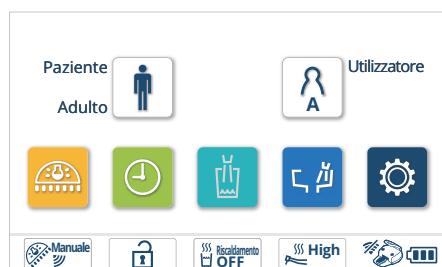

Una volta completato il processo di risciacquo, viene visualizzata la schermata iniziale.

Per la descrizione dei rispettivi interruttori e indicazioni, vedere “Pannello comandi dell’unità medico” [pagine da 110 a 135].



5 Assicurarsi di rispondere correttamente se si verifica un errore

Se si verifica un errore durante il processo di avvio, la schermata della modalità di controllo viene visualizzata sul pannello a sfioramento. Vedere la spiegazione sulle [pagine da 286 a 288] e rispondere in modo appropriato in base al metodo indicato.

Per visualizzare la schermata successiva, premere l’interruttore .

Se si verificano cinque o più errori, premere l’interruttore  per controllare gli errori diversi da quelli indicati sulla prima pagina.

6 Eseguire l’ispezione di avvio

- ① Confermare che lo scarico dell’acqua rimasta sia stato completato.
- ② Azionare gli interruttori e il comando a pedale per confermare che la poltrona e i manipoli/le siringhe funzionino normalmente.
(Collegare i manipoli/le siringhe prima di eseguire il controllo del funzionamento.)


AVVERTENZA

7 Preparazione della procedura


- ① Posizionare un bicchiere sulla base del sistema di riempimento bicchiere dell'unità sputacchiera.
- ② Collegare la punta di aspirazione/aspirasaliva al manipolo di aspirazione/aspirasaliva.

Assicurarsi di eseguire l'ispezione di manutenzione prima dell'uso (ispezione di avvio per confermare che il prodotto funzioni normalmente).


L'utilizzo senza eseguire l'ispezione di manutenzione può provocare lesioni e danni alle apparecchiature periferiche.

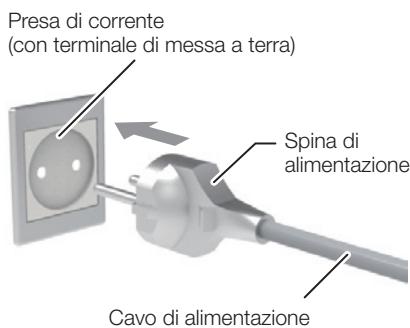

Poltrona odontoiatrica (Tipo contour)

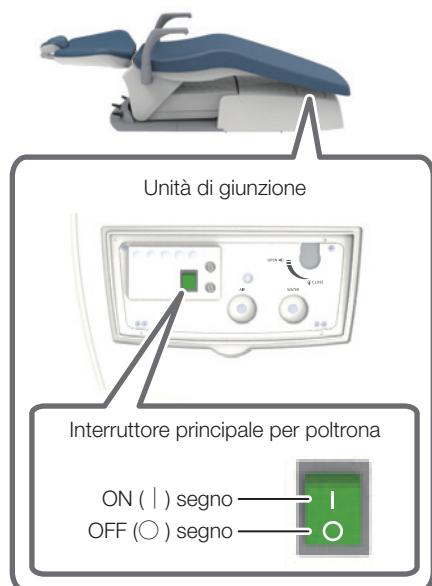

Poltrona odontoiatrica (con gambale pieghevole)

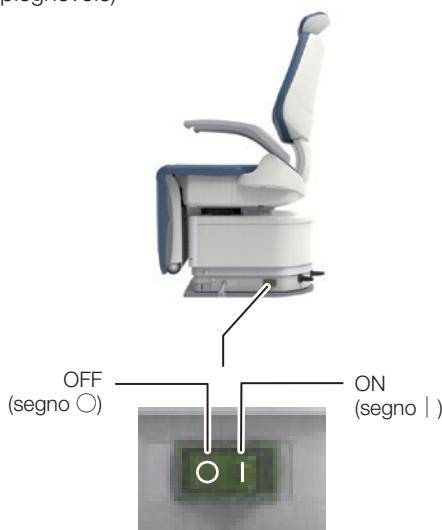

5-1-2 Unità poltrona tipo non collegabile

1 Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente

Inserire correttamente la spina di alimentazione nella presa di corrente con un terminale di messa a terra.



Utilizzare una presa non condivisa con un terminale di messa a terra collegato.

Assicurarsi di inserire completamente la spina di alimentazione nella presa di corrente fino a raggiungere la base della spina.

Pulire lo sporco presente sulla spina di alimentazione e sulla presa di corrente con un panno asciutto per evitare possibili incendi.

Non tirare il cavo per rimuovere la spina di alimentazione dalla presa di corrente. Afferrare tenendo dalla spina di alimentazione all'estremità del cavo per la rimozione.

Prestare attenzione quando si maneggia il cavo di alimentazione.

- Non danneggiare il cavo.
- Non posizionare oggetti sopra il cavo.
- Non modificare il cavo.
- Non riscaldare il cavo.
- Non piegare eccessivamente, torcere o tirare il cavo.

Fare attenzione alle rotture del cavo di alimentazione o della spina.

Non utilizzare un cavo di alimentazione o una spina danneggiati, o una spina che è allentata quando la si inserisce in una presa di corrente.

Non toccare una spina di alimentazione o una presa di corrente con le mani bagnate.

Non collegare la messa a terra (massa) ai seguenti oggetti.

Tubi dell'acqua o del gas, parafulmini e cavo di messa a terra dedicato alla linea telefonica

Consultare un elettricista per le procedure di messa a terra per garantire la sicurezza dei collegamenti di messa a terra.

Spegnere l'interruttore di alimentazione e staccare la spina di alimentazione dalla presa di corrente quando la poltrona non è in uso.

2 Accensione dell'alimentazione

Premendo il lato “|” dell'interruttore principale della poltrona si accende l'alimentazione.

Quando l'alimentazione è accesa, l'interruttore di alimentazione si illumina.



Azionare l'interruttore principale della poltrona manualmente.

5 Funzionamento

5-2 Dopo l'uso

5-2-1 Unità poltrona tipo collegabile

1 Spegnere l'alimentazione della poltrona

Premere l'interruttore principale della poltrona.


Quando è spenta, la lampada si spegne.

⚠ ATTENZIONE


Azionare l'interruttore principale della poltrona manualmente.




S4

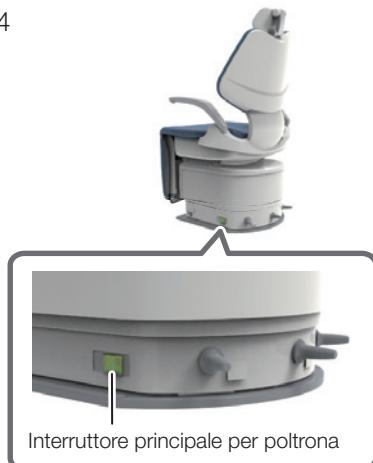

Unità sputacchiera

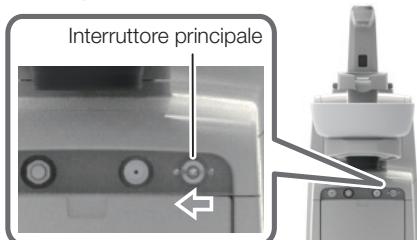

Carrello medico

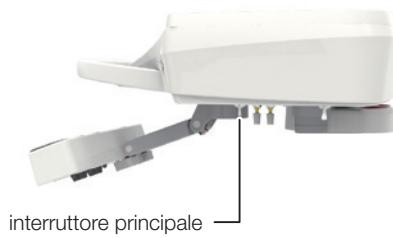

2 Spegnere l'unità

Premere l'interruttore principale verso il lato sinistro (○).

⚠ ATTENZIONE

Azionare l'interruttore principale manualmente.


5 Funzionamento



Piedistallo S3/S4



Supporto per poltrona S1

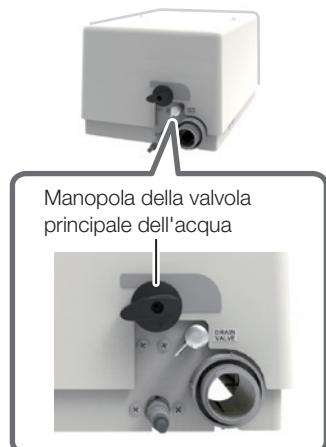

Carrello medico

3 Chiudere la valvola principale dell'acqua

Ruotare la manopola della valvola principale dell'acqua in senso antiorario fino a posizionarla verticalmente.

ATTENZIONE

Per evitare perdite accidentali, assicurarsi di chiudere la valvola principale dell'acqua a fine giornata.


5–2–2 Unità poltrona tipo non collegabile

1 Spegnere l'unità

Premendo il lato “○” dell'interruttore principale della poltrona si spegne l'alimentazione.



Azionare l'interruttore principale della poltrona manualmente.

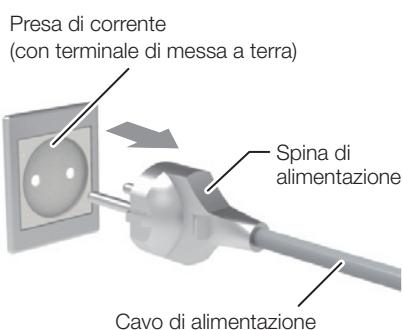

2 Scollegare la spina di alimentazione dalla presa

Scollegare la spina di alimentazione dalla presa (con terminale di terra).

5 Funzionamento

5–3 Funzionamento dell'interruttore principale della poltrona durante il trattamento (Unità poltrona di tipo collegabile dotata di un interruttore principale per la poltrona)

1 Spegnere l'alimentazione della poltrona

Premere l'interruttore principale della poltrona.

Pannello a sfioramento



Quando si spegne la poltrona, "E06: comunicazione con poltrona" viene visualizzato sul pannello a sfioramento a causa dell'interruzione della comunicazione tra l'unità e la poltrona, quindi l'indicatore LED dell'unità della sputacchiera si illumina in arancione, il che non indica un malfunzionamento.

Indicatore LED



2 Accendere l'alimentazione della poltrona

Premere l'interruttore principale della poltrona.

Premere l'interruttore principale della poltrona quando sono passati 5 secondi o più dopo aver spento l'interruttore principale della poltrona.


5–4 Sollevamento/abbassamento della poltrona e sollevamento/inclinazione dello schienale (funzionamento manuale)



Joystick per funzionamento manuale


La posizione e/o la disponibilità del joystick potrebbero variare in base alla specifica selezionata.

Interruttore a membrana (supporto)

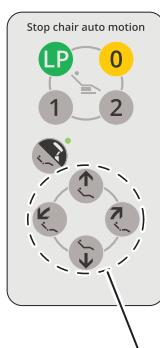

Interruttori per funzionamento manuale

Interruttore a membrana (asta)

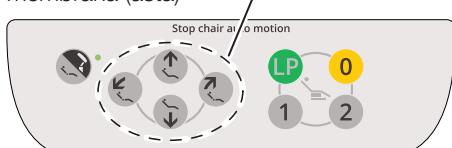

Poltrona contour

Joystick		Interruttore pannello comandi	Funzionamento
Direzione di spinta	Indicazione dell'etichetta		
			La poltrona viene sollevata
			La poltrona viene abbassata
			Lo schienale viene sollevato
			Lo schienale viene reclinato

*La poltrona viene azionata mentre il joystick viene premuto in basso o l'interruttore viene premuto.

AVVERTENZA

Prima di sollevare/abbassare la poltrona, accertarsi che nessuna parte del corpo umano, braccio o ostacolo stiano ostruendo la poltrona.

Prima di inclinare lo schienale, confermare che il braccio o la mano del paziente non siano posizionati tra lo schienale e la seduta.

Prima di sollevare lo schienale, confermare che il braccio o la mano del paziente non siano posizionati tra lo schienale e il bracciolo.

[Riferimento] Precauzioni quando un paziente è seduto [pagina 21]

5 Funzionamento


(Funzionamento manuale) Poltrona con gambale pieghevole



Joystick per funzionamento manuale


La posizione e/o la disponibilità del joystick potrebbero variare in base alla specifica selezionata.

Interruttore a membrana (supporto)

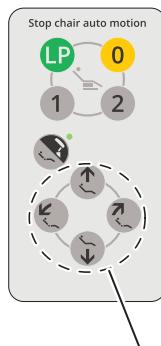

Interruttori per funzionamento manuale

Interruttore a membrana (asta)

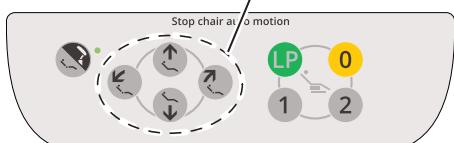

Joystick		Interruttore pannello comandi	Funzionamento
Direzione di spinta	Indicazione dell'etichetta		
			La poltrona viene sollevata 
			La poltrona viene abbassata 
			Lo schienale viene sollevato 
			Lo schienale viene reclinato 

*La poltrona viene azionata mentre il joystick viene premuto in basso o l'interruttore viene premuto.



AVVERTENZA

Prima di sollevare/abbassare la poltrona, accertarsi che nessuna parte del corpo umano, arto o ostacolo stiano ostruendo la poltrona.

Prima di inclinare lo schienale, confermare che il braccio o la mano del paziente non siano posizionati tra lo schienale e la seduta.

Prima di sollevare lo schienale, confermare che il braccio o la mano del paziente non siano posizionati tra lo schienale e il bracciolo.

[Riferimento] Precauzioni quando un paziente è seduto [pagina 21]

5–5 Spostare la poltrona alla posizione preimpostata (funzionamento automatico)


Poltrona contour



Joystick per funzionamento automatico


La posizione e/o la disponibilità del joystick potrebbero variare in base alla specifica selezionata.

Interruttore a membrana (supporto) Pannello di comando assistente

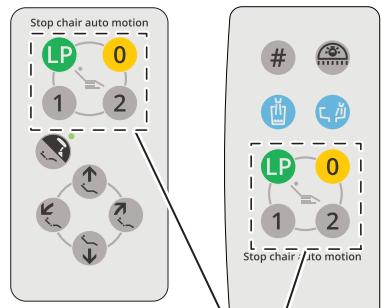

Interruttori per funzionamento automatico

Interruttore a membrana (asta)

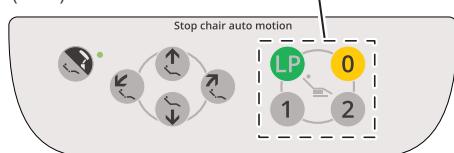

	Joystick	Interruttore pannello comandi	Funzionamento	
	Direzione di spinta	Indicazione dell'etichetta		
I		 1 LP 2 0		La poltrona viene spostata alla "Posizione trattamento 1" preimpostata.
II		 1 LP 2 0		La poltrona viene spostata alla "Posizione trattamento 2" preimpostata.
III		 1 LP 2 0		La poltrona viene spostata alla "Posizione di ingresso/uscita" preimpostata. Premendo nuovamente dopo il completamento del movimento, il poggiastesa viene alloggiato nella scatola del poggiastesa (elettroidraulico).
IV		 1 LP 2 0		La poltrona viene spostata alla "posizione di risciacquo bocca" preimpostata. Premendo nuovamente dopo il completamento del movimento, la poltrona viene spostata alla posizione precedente alla "posizione di risciacquo bocca".

Non tenere premuti gli interruttori preimpostati 1 o 2, l'interruttore di ritorno automatico 0 o l'interruttore ultima posizione LP per cinque secondi o più. Se vengono premuti per cinque secondi o più, si sente il suono di un cicalino e la posizione della poltrona in quel momento viene memorizzata come la posizione impostata.

[Riferimento] Impostazione funzionamento automatico [pagina 189]

AVVERTENZA

Prima di spostare la poltrona, confermare che nessuna parte del corpo umano, arto o ostacolo stiano ostacolando la poltrona.

5 Funzionamento


(Funzionamento automatico) Poltrona con gambale pieghevole



Joystick per funzionamento automatico


La posizione e/o la disponibilità del joystick potrebbero variare in base alla specifica selezionata.

Interruttore a membrana (supporto)

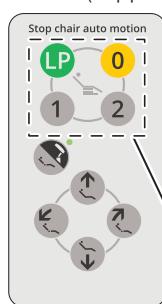


Interruttori per funzionamento automatico

Pannello di comando assistente

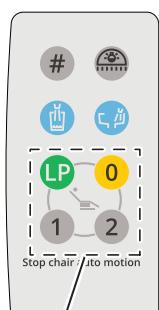

Interruttore a membrana (asta)

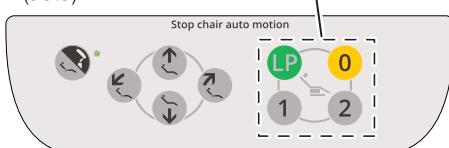

	Joystick		Interruttore pannello comandi	Funzionamento
	Direzione di spinta	Indicazione dell'etichetta		
I			1	La poltrona viene spostata alla "Posizione trattamento 1" preimpostata.
II			2	La poltrona viene spostata alla "Posizione trattamento 2" preimpostata.
III			0	La poltrona viene spostata alla "Posizione di ingresso/uscita" preimpostata. Premendo nuovamente dopo il completamento del movimento, il poggiapiede viene alloggiato nella scatola del poggiapiede (elettroidraulico).
IV			LP	La poltrona viene spostata alla "posizione di risciacquo bocca" preimpostata. Premendo nuovamente dopo il completamento del movimento, la poltrona viene spostata alla posizione precedente alla "posizione di risciacquo bocca".


Non tenere premuti gli interruttori preimpostati 1 o 2, l'interruttore di ritorno automatico 0 o l'interruttore ultima posizione LP per cinque secondi o più. Se vengono premuti per cinque secondi o più, si sente il suono di un cicalino e la posizione della poltrona in quel momento viene memorizzata come la posizione impostata.

[Riferimento] Impostazione funzionamento automatico [pagina 189]



AVVERTENZA

Prima di spostare la poltrona, confermare che nessuna parte del corpo umano, arto o ostacolo stiano ostacolando la poltrona.

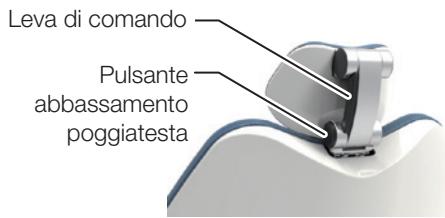

5-6 Azionamento del poggiapiede (tipo manuale)

Regolazione del poggiapiede

Il poggiapiede (tipo manuale) è in grado di regolare in modo flessibile l'inclinazione della testa del paziente per il trattamento nella mascella superiore/inferiore. È inoltre possibile estendere/piegare manualmente il poggiapiede in conformità all'altezza del paziente.

Regolazione dell'angolo del poggiapiede

1. Inserire la mano dell'operatore sotto il poggiapiede per sostenere la testa del paziente.
2. Premere la leva di comando con l'altra mano per spostare il poggiapiede.
3. Regolare il poggiapiede a un angolo che corrisponda al trattamento richiesto e rilasciare la leva di comando per bloccare il poggiapiede.

Regolazione in alto/basso del poggiapiede

1. Per sollevare il poggiapiede, tirarlo lentamente in alto mentre lo si tiene.
2. Per abbassare il poggiapiede, applicare la mano dell'operatore sul poggiapiede e tirarlo lentamente verso il basso mentre si preme il pulsante di abbassamento poggiapiede.

Non applicare un carico o un impatto eccessivo al poggiapiede quando è esteso. Non colpire il poggiapiede dall'alto. In caso contrario, potrebbe guastarsi.


AVVERTENZA

Se lo schienale deve essere spostato mentre il poggiapiede è esteso, confermare che non vi siano oggetti che ostruiscono o vengono a contatto con la poltrona. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni o lesioni.

Quando si aziona il poggiapiede, prestare attenzione a non intrappolare la mano o le dita dell'operatore intorno alla leva di comando o tra il poggiapiede e lo schienale.

Quando si regola l'angolo o la posizione in alto/basso, assicurarsi di applicare la mano dell'operatore sul poggiapiede e di sostenere la testa del paziente. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti o lesioni.

Accertarsi che il poggiapiede non vibri o produca rumori anomali. Lo spostamento del poggiapiede se vibra potrebbe causare un incidente o lesioni.

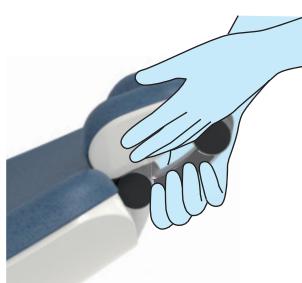

5–7 Azionamento del poggiapiede (tipo elettroidraulico)


Poggiatesta (elettroidraulico)




Joystick per poggiapiede (elettroidraulico)

La posizione e/o la disponibilità del joystick potrebbero variare in base alla specifica selezionata.

Interruttore a membrana (supporto)

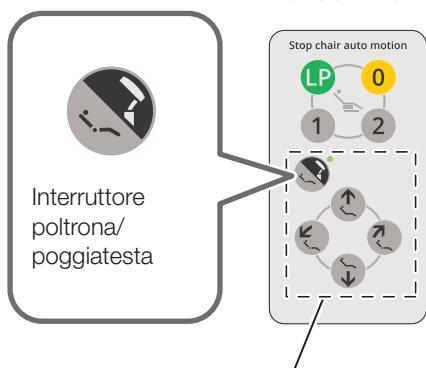

Interruttore per funzionamento manuale

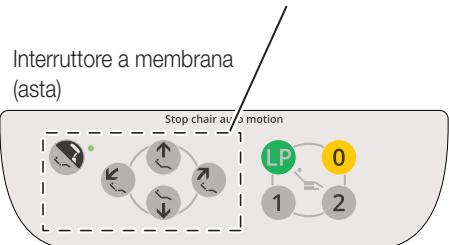

Poltrona contour

Per il funzionamento con l'interruttore di funzionamento manuale, premere l'interruttore poltrona/poggiatesta per passare alla funzione poggiapiede (la luce è accesa).

Joystick		Interruttore pannello comandi la lampada è accesa	Funzionamento
Direzione di spinta	Indicazione dell'etichetta		
			Sollevere
			Abbassare
			Sollevere
			Reclinare

* La poltrona viene azionata mentre il joystick viene premuto in basso o l'interruttore viene premuto.

Non applicare un carico o un impatto eccessivo al poggiapiede quando è esteso. Non colpire il poggiapiede dall'alto. In caso contrario, potrebbe guastarsi.

AVVERTENZA

Prima di spostare il poggiatesta, verificare che la testa del paziente sia posizionata correttamente. L'operatore non deve distogliere gli occhi dal paziente durante il movimento.

[Riferimento] Precauzioni quando un paziente è seduto [pagina 21]

Non utilizzare l'unità con un'angolazione tale da causare disagio al paziente.

Quando si sposta il poggiatesta, confermare che non vi siano oggetti di ostacolo. Prestare estrema attenzione a non intrappolare oggetti o parti del corpo umano tra il poggiatesta e lo schienale.


Quando lo schienale è reclinato mentre il paziente è seduto, non alzare o abbassare il poggiatesta con la testa del paziente su di esso.

5 Funzionamento




La posizione e/o la disponibilità del joystick potrebbero variare in base alla specifica selezionata.

Interruttore a membrana (supporto)

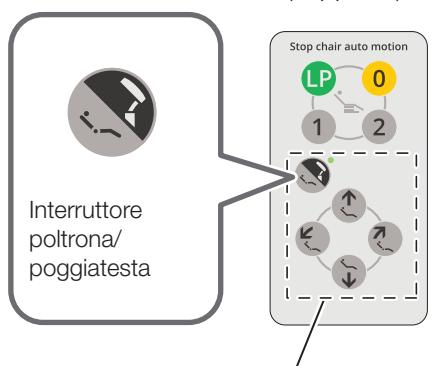

Interruttore per funzionamento manuale

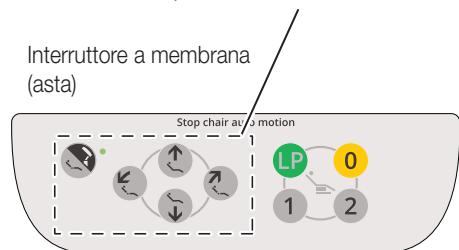

Poltrona con gambale pieghevole

Per il funzionamento con l'interruttore di funzionamento manuale, premere l'interruttore poltrona/poggiatesta per passare alla funzione poggiatesta (la luce è accesa).

Joystick		Interruttore pannello comandi la lampada è accesa	Funzionamento
Direzione di spinta	Indicazione dell'etichetta		
			Sollevare
			Abbassare
			Sollevare
			Reclinare

* Il poggiatesta viene azionato mentre il joystick viene premuto in basso o l'interruttore viene premuto.

Non applicare un carico o un impatto eccessivo al poggiatesta quando è esteso. Non colpire il poggiatesta dall'alto. In caso contrario, potrebbe guastarsi.

AVVERTENZA

Prima di spostare il poggiatesta, verificare che la testa del paziente sia posizionata correttamente. L'operatore non deve distogliere gli occhi dal paziente durante il movimento.

[Riferimento] Precauzioni quando un paziente è seduto [pagina 21]

Non utilizzare l'unità con un'angolazione tale da causare disagio al paziente.

Quando si sposta il poggiatesta, confermare che non vi siano oggetti di ostacolo. Prestare estrema attenzione a non intrappolare oggetti o parti del corpo umano tra il poggiatesta e lo schienale.

Quando lo schienale è reclinato mentre il paziente è seduto, non alzare o abbassare il poggiatesta con la testa del paziente su di esso.

5–8 Rotazione del bracciolo

Poltrona con gambale pieghevole

Se il bracciolo ostacola ingresso/uscita o trattamento, è possibile ruotarlo all'indietro.

Sia il bracciolo sinistro sia il bracciolo destro possono essere ruotati.



- (1) Tirare la base del bracciolo (lato posteriore) diagonalmente verso l'alto.



- (2) Ruotare il bracciolo all'indietro mentre lo si tiene in alto.



- (3) Per riportare il bracciolo nella posizione originale, ruotarlo in avanti con la stessa procedura.

Il bracciolo è bloccato quando raggiunge la posizione normale.

ATTENZIONE

Quando si ruota il bracciolo, confermare che non vi siano ostruzioni. L'operatore deve prestare attenzione a non intrappolare la mano o le dita.

Non spostare la poltrona quando il bracciolo è stato ruotato all'indietro. Riportare il bracciolo nella posizione normale prima di spostare la poltrona.

Poltrona contour

Se il bracciolo ostacola ingresso/uscita o trattamento, è possibile ruotarlo all'indietro.

Solo il bracciolo destro può essere ruotato.

(1) Tirare la base del bracciolo (lato posteriore) verso l'alto.



(2) Ruotare il bracciolo all'indietro mentre lo si tiene in alto.
Angolo di rotazione: 90 o 135 gradi



(3) Per riportare il bracciolo nella posizione originale, ruotarlo in avanti con la stessa procedura.
Il bracciolo è bloccato quando raggiunge la posizione normale



⚠ ATTENZIONE

Quando si ruota il bracciolo, confermare che non vi siano ostruzioni. L'operatore deve prestare attenzione a non intrappolare la mano o le dita.

Non spostare la poltrona quando il bracciolo è stato ruotato all'indietro. Riportare il bracciolo nella posizione normale prima di spostare la poltrona.

5–9 Rapporto tra gli angoli di schienale, gambale e poggiapiedi (poltrona con gambale pieghevole)

“Alto/basso” del gambale e “Estendi/piega” del poggiapiedi funzionano solo durante il movimento automatico.


L'angolo del gambale viene determinato automaticamente in base all'angolo dello schienale nell'impostazione del movimento automatico.

Nel caso del poggiatesta (elettroidraulico), la larghezza di estensione del poggiapiedi viene determinata automaticamente in base alla posizione alto/basso del poggiatesta durante il movimento automatico.


Nel caso del poggiatesta (tipo manuale), la larghezza di estensione del poggiapiedi viene determinata automaticamente in base all'angolo dello schienale nell'impostazione del movimento automatico.

Tipo elettroidraulico

Posizione sollevamento/abbassamento poggiatesta

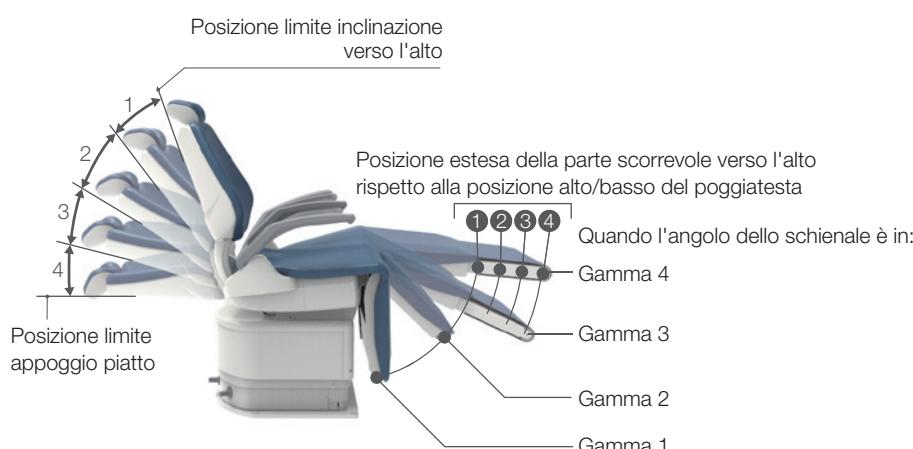


Tipo manuale

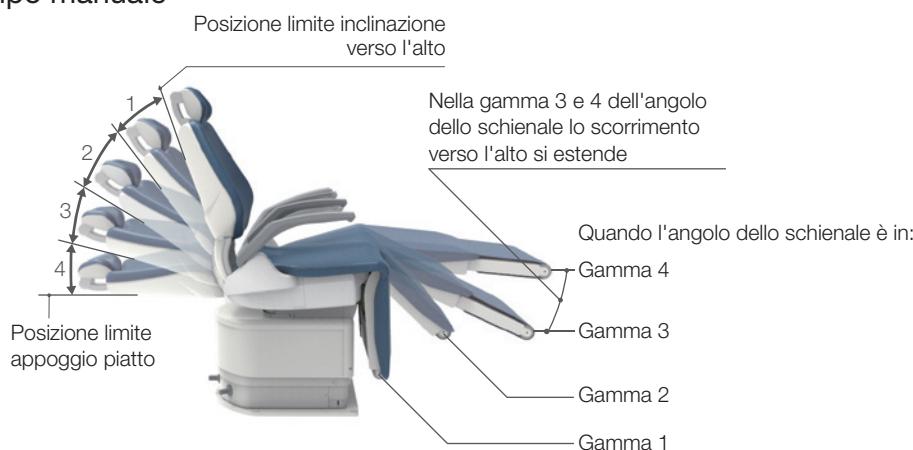

5-10 Utilizzo del gambale (poltrona con gambale pieghevole)


5-10-1 Unità poltrona tipo collegabile

Interruttore a membrana (supporto)

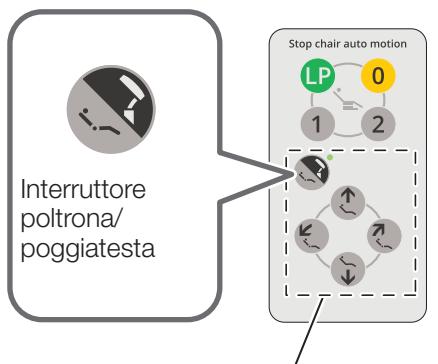

Interruttore per funzionamento manuale

Interruttore a membrana (asta)

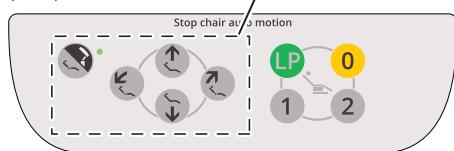

Tenendo premuto l'interruttore poltrona/poggiatesta per circa un secondo o più, l'unità passa alla modalità di controllo gambale (la luce lampeggia) e il gambale diventa controllabile.

Interruttore pannello comandi la lampada è accesa	Funzionamento
	 Il gambale viene sollevato
	 Il gambale viene abbassato

* Il gambale può essere spostato mentre l'interruttore è tenuto premuto.

Poggiatesta (tipo manuale)

La larghezza di estensione del poggiapiedi viene determinata automaticamente in base all'angolo del gambale.

Poggiatesta (tipo elettroidraulico)

La larghezza di estensione del poggiapiedi è determinata in base all'angolo del gambale e all'altezza del poggiatesta.

Per annullare la modalità di controllo gambale, premere nuovamente l'interruttore poltrona/poggiatesta .

Notifica della modalità di controllo gambale

Quando l'interruttore poltrona/poggiatesta viene premuto dopo l'accensione dell'unità, viene visualizzata una schermata popup che notifica la modalità di controllo gambale.

Premere l'interruttore per chiudere la finestra popup.

[Pannello a sfioramento]



AVVERTENZA

Prima di sollevare/abbassare il gambale, accertarsi che nessuna parte del corpo umano, braccio o ostacolo stiano ostruendo la poltrona.

Tipo di poggiatesta manuale



Joystick per funzionamento automatico

Tipo di poggiatesta manuale



Joystick per funzionamento manuale

5-10-2 Unità poltrona tipo non collegabile

La "modalità operativa gambale" controlla l'azionamento del gambale.

1 Attivazione della modalità operativa gambale



Non rilasciare il joystick per le movimentazioni automatiche mentre vengono emessi i segnali acustici. Quando si lascia il joystick, la posizione di quel momento viene memorizzata come posizione di risciacquo bocca.

[Riferimento] Modifica della posizione di trattamento, della posizione di risciacquo della bocca e della posizione di ingresso/uscita

2 Azionare il gambale tramite il joystick per il funzionamento manuale.

Joystick		Funzionamento
Direzione di spinta	Indicazione dell'etichetta	
		Il gambale viene sollevato
		Il gambale viene abbassato

* Il gambale può essere spostato mentre l'interruttore è premuto in basso.

Tipo di poggiatesta manuale

La gamma di estensione del poggia piedi scorrevole e determinata automaticamente dall'angolo del gambale.

Tipo di poggiatesta motorizzato

La gamma di estensione del poggia piedi scorrevole e determinata dall'angolo del gambale e dall'altezza del poggiatesta.

3 Per annullare la modalità operativa gambale, ruotare il joystick per il funzionamento schienale in qualsiasi direzione per un secondo o più.

AVVERTENZA

Prima di sollevare/abbassare il gambale, accertarsi che nessuna parte del corpo umano, braccio o oggetto stiano ostruendo la poltrona.

5-11 Utilizzo della tavoletta medico

Sopra il paziente



Spostamento della tavoletta medico in avanti/indietro e a destra/sinistra

Tenere la maniglia e spostare lentamente la tavoletta medico.

AVVERTENZA

Non applicare un carico superiore a 3 kg sulla tavoletta medico.
In caso contrario, potrebbero verificarsi danni o lesioni.



Regolazione dell'altezza della tavoletta medico

L'altezza della tavoletta medico può essere regolata nell'intervallo mostrato nella figura a sinistra.

Per modificare l'altezza, rilasciare prima il freno premendo l'interruttore di rilascio del freno del braccio di bilanciamento al centro della maniglia. Quindi, spostare la tavoletta medico verso l'alto/il basso.

Lo spostamento della tavoletta medico verso l'alto/il basso senza rilasciare il freno potrebbe causare danni al prodotto.

Assicurarsi di rilasciare prima il freno premendo l'interruttore di rilascio del freno. Quindi, spostare la tavoletta medico verso l'alto/il basso.

Carrello



L'altezza della tavoletta medico può essere regolata nell'intervallo mostrato nella figura a sinistra.

Per modificare l'altezza, allentare la manopola di blocco e tirare in alto/in basso la tavoletta medico.

Dopo aver cambiato l'altezza alla posizione desiderata, serrare saldamente la manopola di blocco.

Allentare la manopola di blocco → ruotarla in senso antiorario


Serrare la manopola di blocco → ruotarla in senso orario

Lo spostamento della tavoletta medico verso l'alto/il basso senza rilasciare la manopola di blocco potrebbe causare danni al prodotto.

Assicurarsi di allentare prima la manopola di blocco, quindi spostare la tavoletta medico verso l'alto/il basso.




5-12 Controllo del vassoio dell'assistente

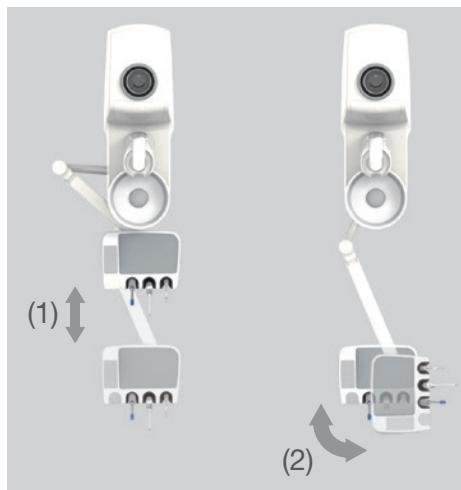

Quando si sposta il vassoio assistente in avanti/indietro, assicurarsi che non vi sia nulla sul vassoio.

AVVERTENZA

Non applicare un carico superiore a 1,5 kg sul vassoio assistente.
In caso contrario, potrebbero verificarsi danni o lesioni.

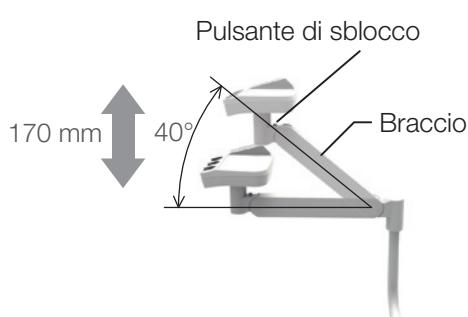

Regolazione in altezza del vassoio assistente

L'altezza del vassoio può essere regolata arrestando l'angolo del braccio nell'intervallo da 0 a 40 gradi (vedere la figura a sinistra).
Per modificare l'altezza, spostare il vassoio tenendo la parte del braccio.

Per aumentare l'altezza

Tenere il vassoio quando lo si sposta verso l'alto.

Per ridurre l'altezza

Prima di tutto spostare il braccio verso l'alto mentre si preme il pulsante di sblocco, quindi spostarlo verso il basso.
Spostare il vassoio all'altezza desiderata e rilasciare il pulsante di sblocco.

Quando si regola l'altezza del vassoio assistente, assicurarsi che non ci sia nulla sul vassoio.

Per ridurre l'altezza, assicurarsi di premere il pulsante di sblocco durante la regolazione.





Ridurre l'altezza senza premere il pulsante di sblocco potrebbe danneggiare il prodotto.

AVVERTENZA

Non applicare un carico superiore a 1,5 kg sul vassoio assistente.
In caso contrario, potrebbero verificarsi danni o lesioni.



(Esempio di display) Micromotore MX2

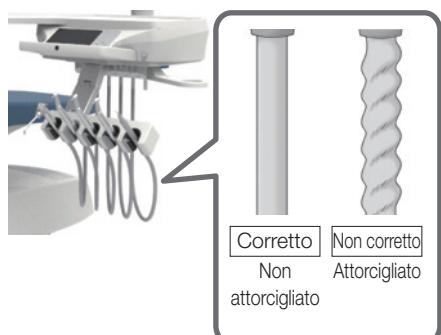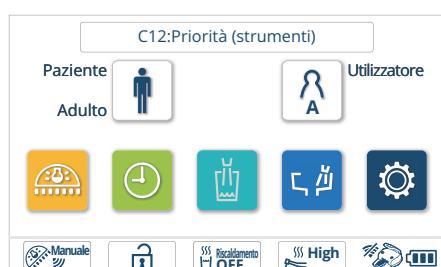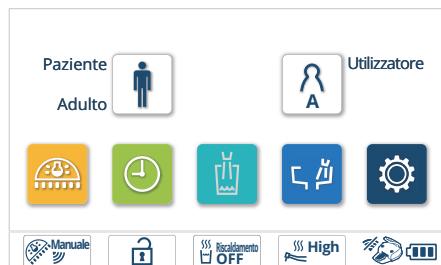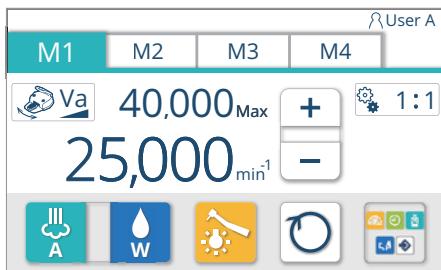

5-13 Manipolo

Quando un manipolo diverso dalla siringa viene preso dal portastrumenti, la schermata di funzionamento del manipolo viene visualizzata sul pannello a sfioramento. Successivamente, azionare il comando a pedale per spostare l'unità.

[Riferimento]	Micromotore Ablatore a ultrasuoni Turbina ad aria/motore pneumatico Manipolo di aspirazione Manipolo aspirasaliva Comando a pedale (cablato/wireless)	[pagine da 144 a 157] [pagine da 158 a 160] [pagine da 161 a 163] [pagina 181] [pagina 181] [pagina 174]
---------------	--	---

	Siringa
Strumento	Micromotore
Manipolo	Ablatore a ultrasuoni
	Turbina ad aria
	Motore pneumatico
	Manipolo di aspirazione
	Manipolo aspirasaliva

Quando il manipolo viene riportato sul portastrumenti, viene visualizzata la schermata iniziale.

Funzione di priorità manipolo (prima priorità)

È possibile utilizzare solo il manipolo che è stato preso per primo.

Se due o più manipoli vengono presi dal portastrumenti e se il manipolo preso per primo viene riportato sul supporto, viene visualizzato il messaggio [C12: priorità (strumenti)].

Questo messaggio scompare se tutti i manipoli vengono riportati nel portastrumenti.

ATTENZIONE

Ripetute azioni di presa e riposizionamento del manipolo possono causare l'attorcigliamento del tubo flessibile.

Controllare periodicamente che il tubo flessibile non sia attorcigliato. In caso di attorcigliamento, srotolarlo prima dell'uso.

L'uso continuo del manipolo con il tubo flessibile attorcigliato provoca pieghe nel tubo flessibile o rottura del filo, rendendo il manipolo inutilizzabile.


5-14 Pannello comandi dell'unità medico

Pannello a sfioramento (schermata iniziale)


La panoramica delle indicazioni e degli interruttori sul pannello a sfioramento è la seguente.



Pannello a sfioramento

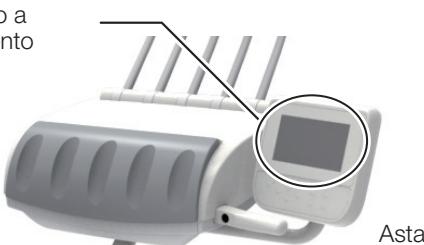

Asta

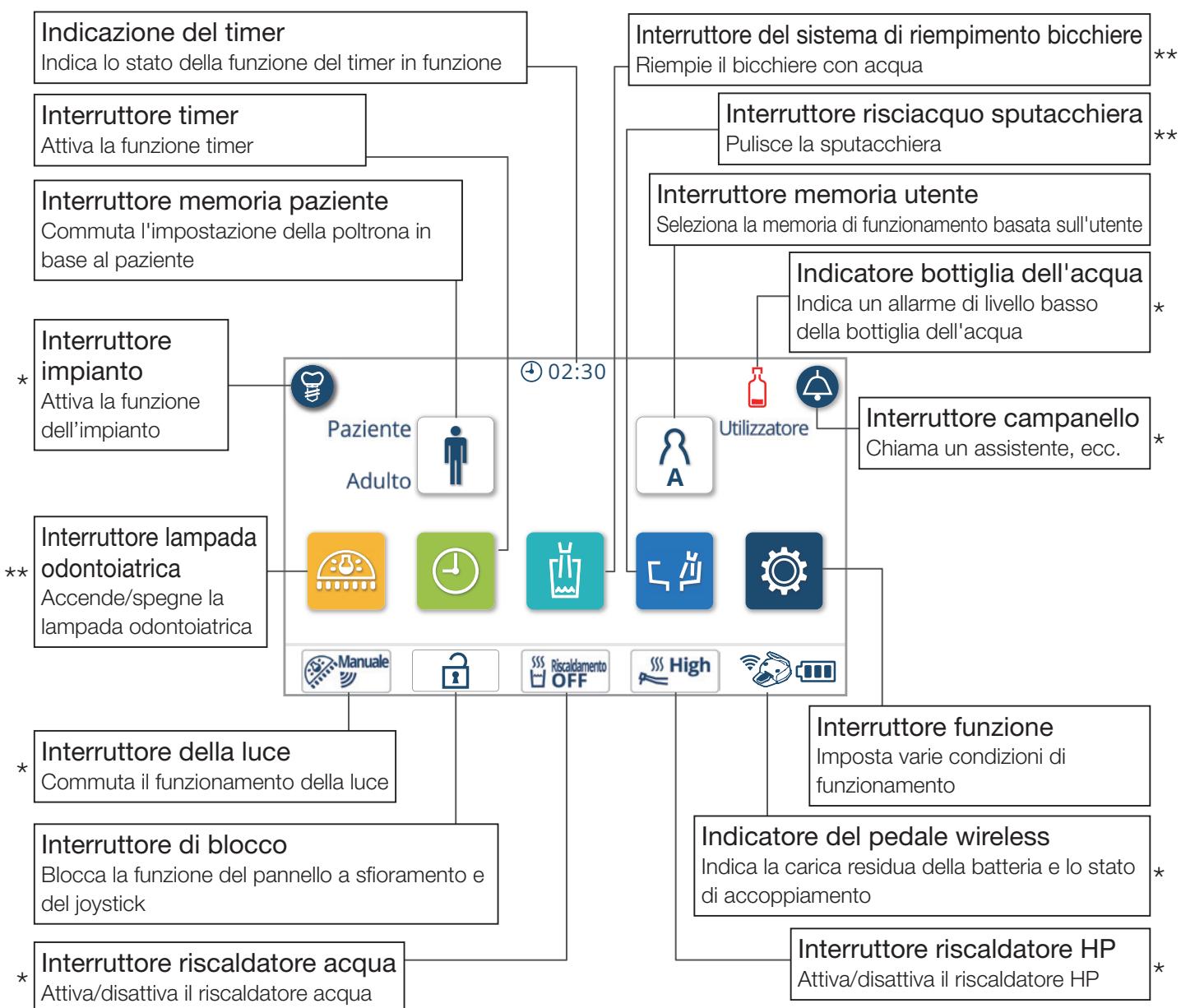


* Non indicato se la funzione non è installata

** Viene visualizzato in grigio se la funzione non è installata.

5 Funzionamento

Pannello a sfioramento (schermata manipolo)


La panoramica delle indicazioni e degli interruttori sul pannello a sfioramento è la seguente.

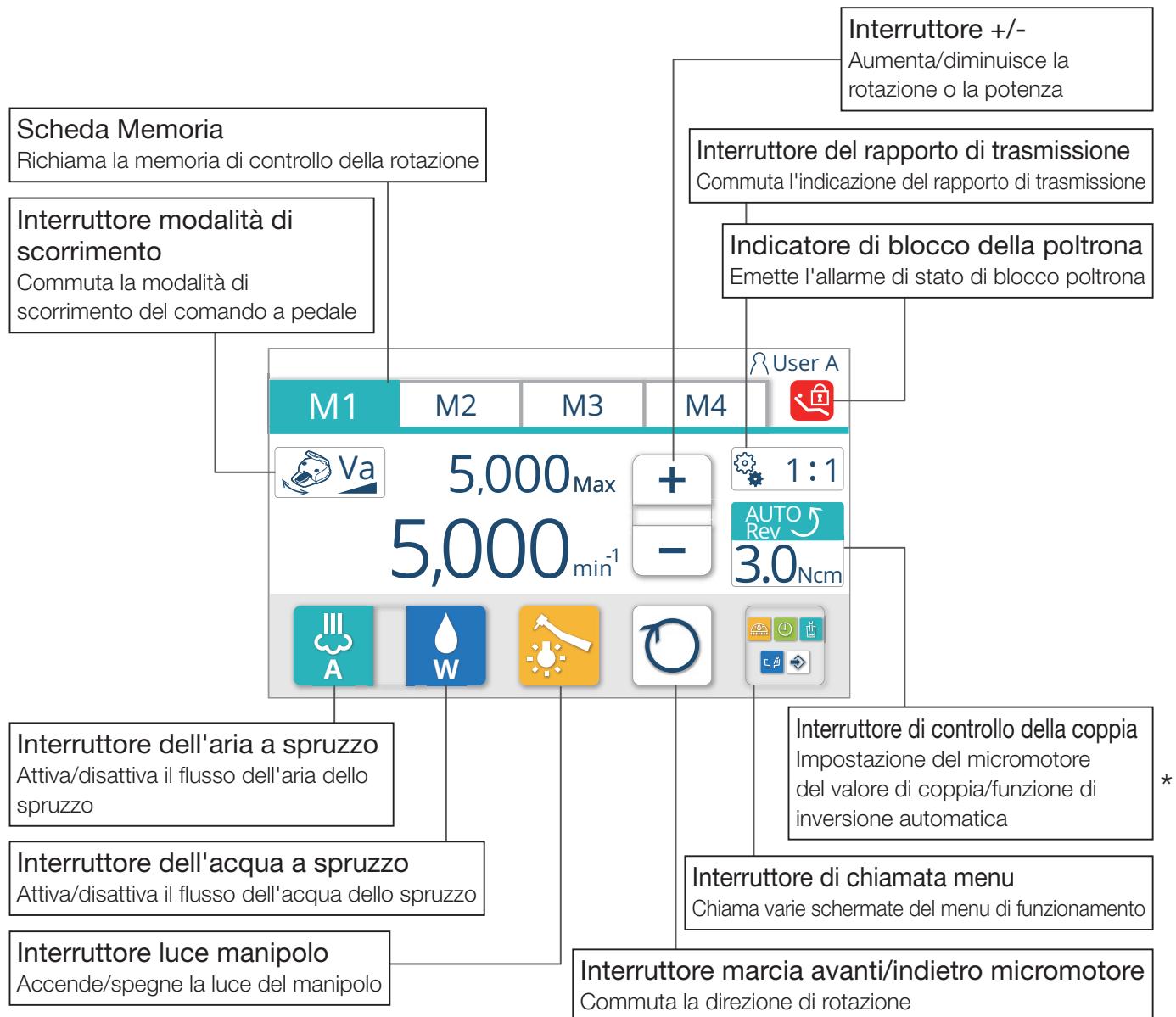

* Non indicato se la funzione non è installata

Pannello a sfioramento (Schermata dell'impianto)



La panoramica delle indicazioni e degli interruttori sul pannello a sfioramento è la seguente.

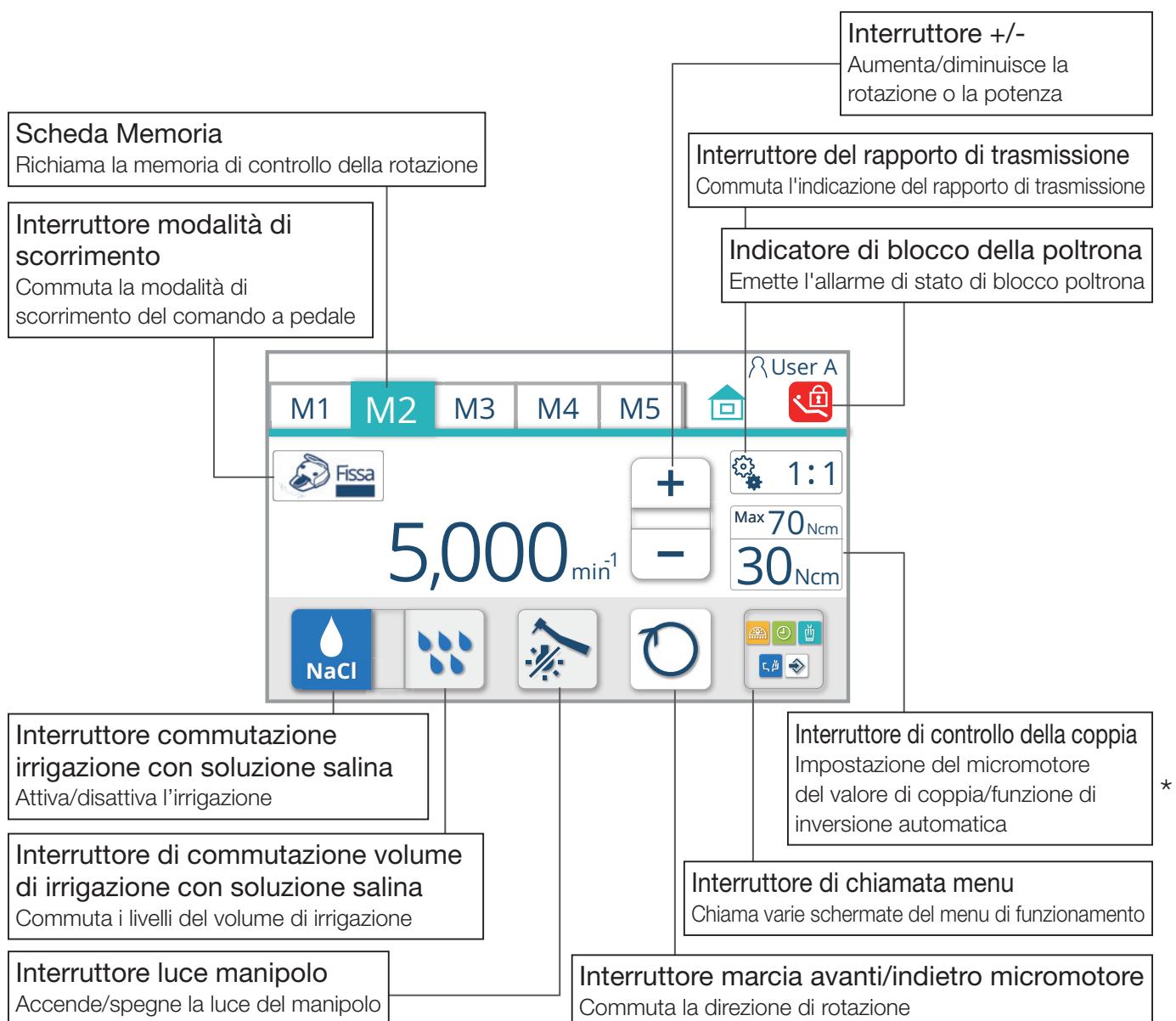

* Non indicato se la funzione non è installata

Interruttore a membrana

La panoramica delle indicazioni e degli interruttori sul pannello comandi è la seguente.

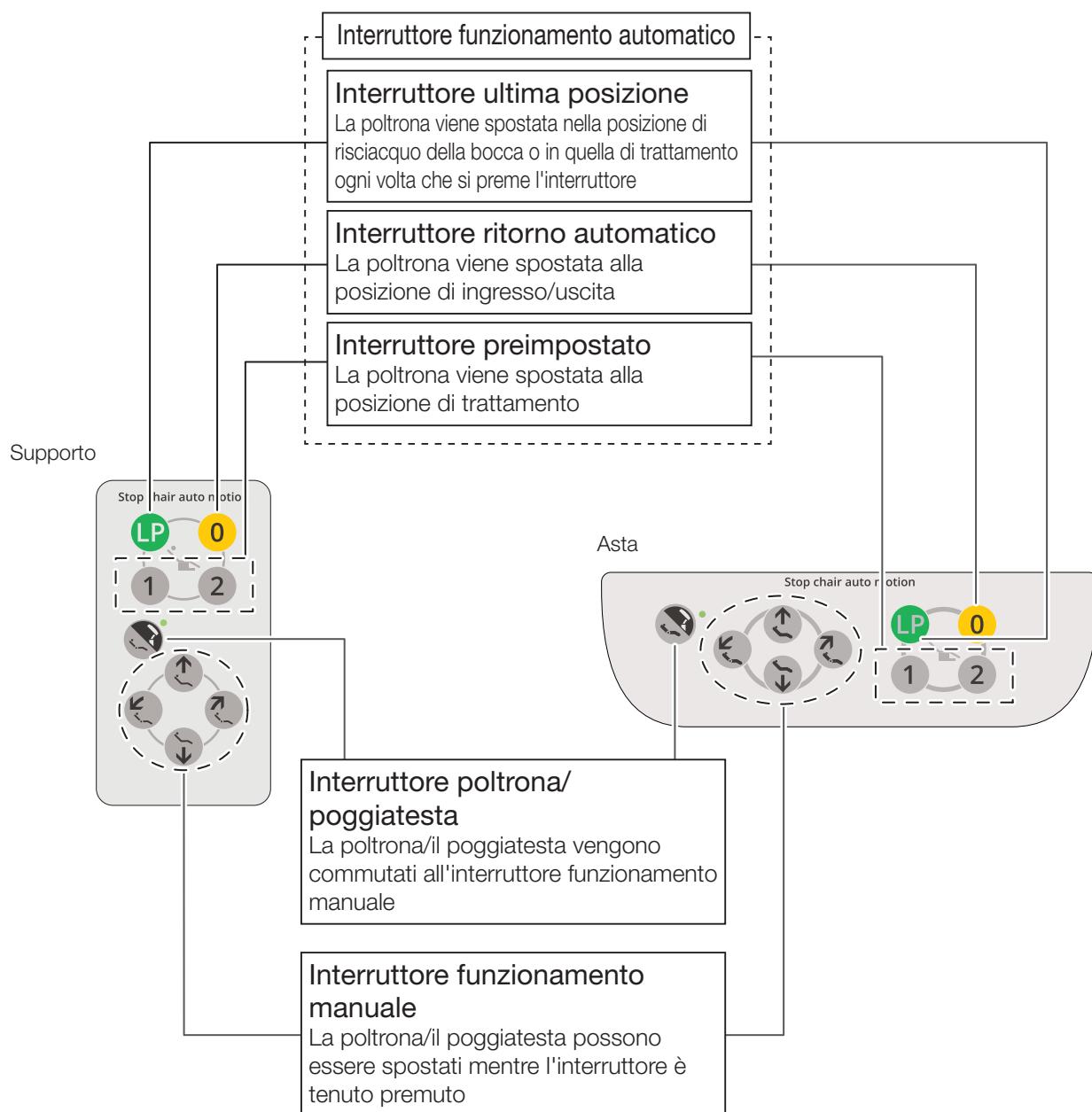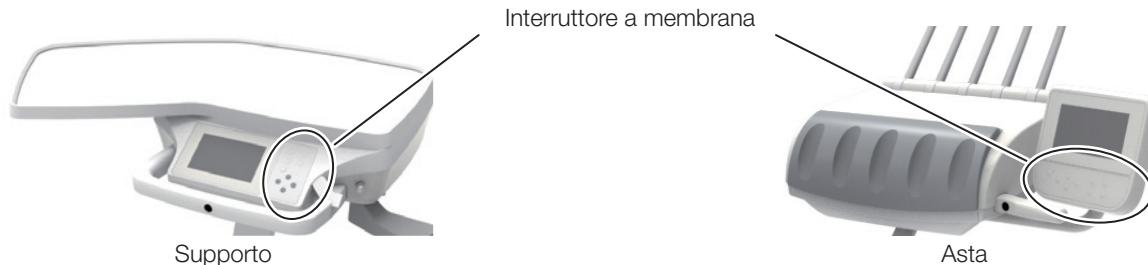

LP

Interruttore ultima posizione

Quando premuto in posizione trattamento, la poltrona si sposta nella posizione di risciacquo della bocca.

Quando l'interruttore viene premuto nuovamente, la poltrona ritorna alla posizione di trattamento precedente al risciacquo della bocca.

0

Interruttore ritorno automatico

La poltrona viene spostata alla posizione di ingresso/uscita.

* Nel caso di un poggiapiede (elettroidraulico), premendo nuovamente questo interruttore dopo che la poltrona si è arrestata completamente, il poggiapiede viene allacciato.

1

Interruttore preimpostato

Quando 1 viene premuto, la poltrona viene spostata alla posizione di trattamento 1.


2

Quando 2 viene premuto, la poltrona viene spostata alla posizione di trattamento 2.

Non tenere premuto l'interruttore preimpostato, l'interruttore di ritorno automatico o l'interruttore ultima posizione per cinque secondi o più.

Se vengono premuti per cinque secondi o più, si sente il suono di un cicalino e la posizione della poltrona in quel momento viene memorizzata come la posizione impostata.

[Riferimento] Impostazione funzionamento automatico [pagina 189]

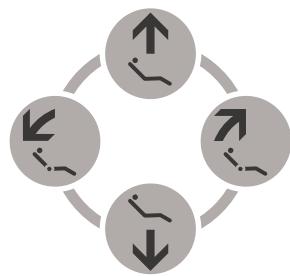

Interruttore funzionamento manuale

Aziona manualmente "Sollevare/abbassare" e "Sollevare/reclinare" di poltrona/poggiatesta.

Interruttore	Funzionamento
	La poltrona viene sollevata/ Il poggiatesta viene sollevato
	La poltrona viene abbassata/ Il poggiatesta viene abbassato
	Lo schienale viene reclinato/ Il poggiatesta viene reclinato
	Lo schienale viene sollevato/ Il poggiatesta viene sollevato

*La poltrona/il poggiatesta possono essere spostati mentre l'interruttore è tenuto premuto



Quando è selezionata
la funzione poggiatesta,
la luce è accesa

Interruttore poltrona/poggiatesta

Commuta le funzioni poltrona/poggiatesta all'interruttore di funzionamento manuale.

Quando è selezionata la funzione poggiatesta, la luce è accesa.





AVVERTENZA

Prima di spostare la poltrona, confermare che nessuna parte del corpo umano, arto o ostacolo stiano ostacolando la poltrona.

Adottare particolari precauzioni per il movimento e il comportamento dei bambini durante il funzionamento.

5 Funzionamento

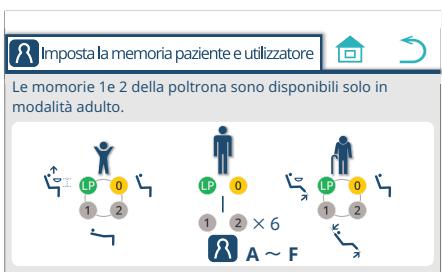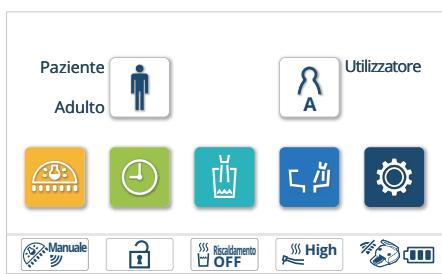

Struttura delle memorie utente/paziente

Fino a sei memorie utente (da A a F) e fino a tre memorie paziente (Adulto, Bambino e Senior).

[Adulto]

: Modalità Adulto

Una modalità consigliata per un paziente adulto di figura standard; oltre all'interruttore di ritorno automatico **0** e all'interruttore ultima posizione **LP**, gli interruttori preimpostati **1** **2** possono essere impostati per fino a sei memorie utente (da A a F).

[Bambino]

: Modalità Bambino

Una modalità raccomandata per un paziente pediatrico o un paziente di piccola corporatura; l'interruttore di ritorno automatico **0**, l'interruttore ultima posizione **LP** e gli interruttori preimpostati **1** **2** possono essere impostati rispettivamente.

Nel caso di un tipo a piedistallo, è possibile impostare l'altezza della poltrona nella posizione di risciacquo della bocca.

In caso di una poltrona con gambale pieghevole, è possibile impostare una posizione di trattamento senza estendere il gambale e ottenere la posizione intorno al gambale.

[Senior]


: Modalità Senior

Una modalità raccomandata per un paziente anziano o un paziente che richiede una speciale considerazione; l'interruttore di ritorno automatico **0**, l'interruttore ultima posizione **LP** e gli interruttori preimpostati **1** **2** possono essere impostati rispettivamente.


Gli angoli dello schienale e del gambale possono essere limitati e sono possibili altre impostazioni.

5 Funzionamento


Richiamo della struttura delle memorie utente/paziente

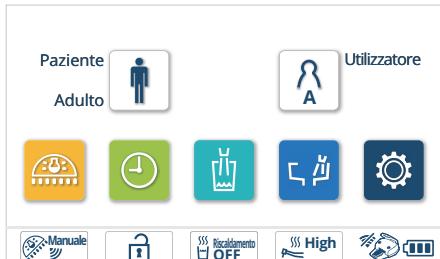

- Premere l'interruttore memoria utente . Viene visualizzata la schermata "Seleziona utente".

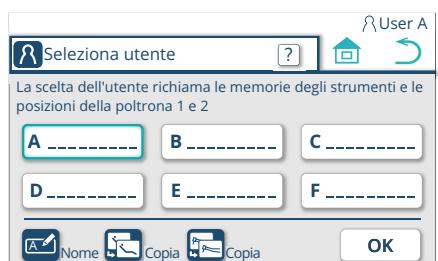

- Sulla schermata "Seleziona utente", premere l'interruttore . Viene visualizzata la schermata "Struttura di paziente e utente".

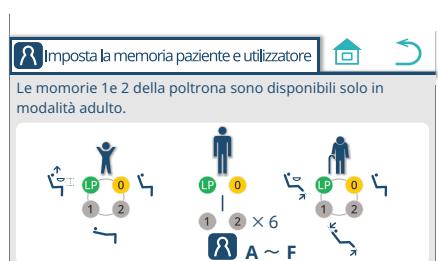

Premere l'interruttore per tornare dalla schermata attuale alla schermata iniziale.

Premere l'interruttore per tornare dalla schermata attuale alla schermata precedente.

Interruttore di selezione memoria paziente

L'impostazione della posizione di trattamento della poltrona può essere commutata in base al paziente da trattare.


Ogni volta che si preme l'interruttore, la modalità viene commutata tra "Adulto" > "Senior" > "Bambino".







Interruttore memoria utente

La posizione della poltrona preimpostata per ciascun utente e le impostazioni iniziali per i manipoli all'accensione possono essere memorizzate e selezionate quando necessario.

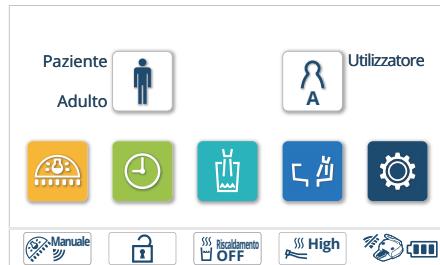

1. Premere l'interruttore memoria utente


Viene visualizzata la schermata "Seleziona utente".

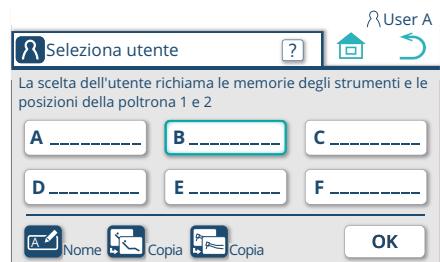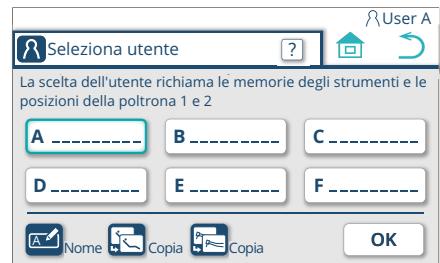

2. Nella schermata "Seleziona utente", premere l'interruttore di memoria per richiamare l'utente da selezionare.

(In questo caso, è stato selezionato l'utente **B** -----.)





Premere **OK** per richiamare le impostazioni per il nuovo utente selezionato e tornare alla schermata iniziale.

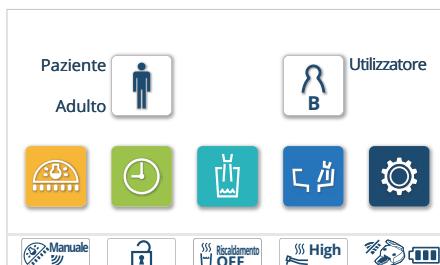

5 Funzionamento

Registrazione nome

È possibile registrare un nome per ciascuna memoria utente.

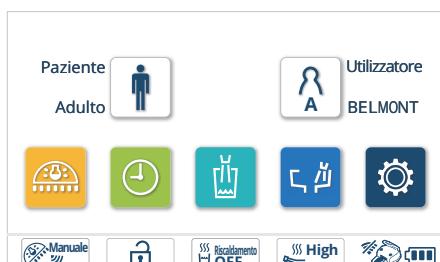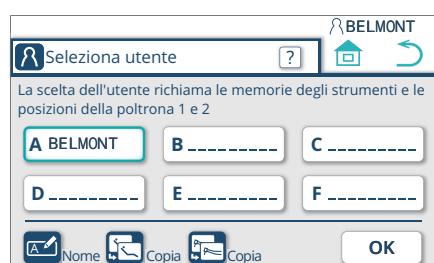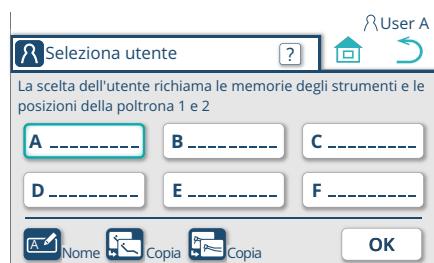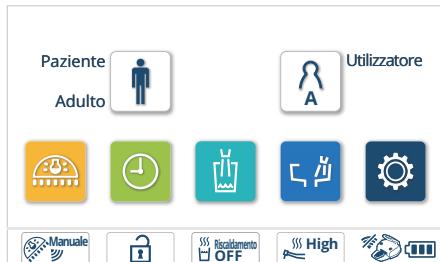

1. Premere l'interruttore memoria utente .

Viene visualizzata la schermata "Selezione utente".

2. Sulla schermata "Selezione utente", premere l'interruttore memoria utente per la selezione e la registrazione del nome. (In questo esempio, è selezionata la memoria utente A.)

Premere l'interruttore di registrazione del nome per visualizzare la schermata "Inserimento nome" per l'utente selezionato.

3. Immettere il nome utilizzando la tastiera.

Premere per visualizzare la schermata "Selezione utente".

Il nome utente può essere immesso in formato alfabetico o numerico fino a nove caratteri.

Quando si cambia l'ingresso alfanumerico, premere l'interruttore alfanumerico .


Premere il tasto Indietro per eliminare il carattere precedente (a sinistra) nella posizione del cursore durante l'immissione dei caratteri.

In questo esempio è stato immesso il nome "BELMONT". Il nome registrato è indicato per la casella Memoria utente A e visualizzato in alto a destra.


* In questo esempio è stato immesso il nome "BELMONT". Il nome registrato è indicato per la casella Memoria utente A e visualizzato in alto a destra.

Copia della poltrona preimpostata

Le impostazioni per gli interruttori poltrona preimpostati 1, 2 in modalità Adulto possono essere copiate in un'altra memoria utente.

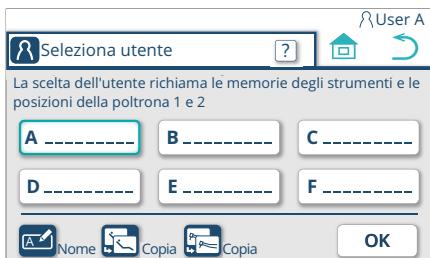


- Sulla schermata “Selezione utente”, premere l'interruttore **copia poltrona**.

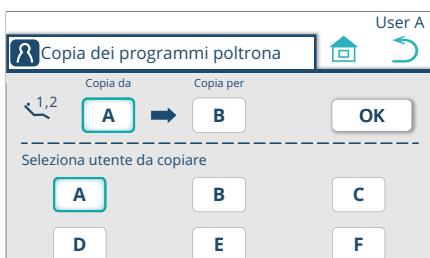

- Selezionare l'utente “Copia da” da [A] a [F].


L'indicazione di commutazione “Copia da” viene modificata per mostrare l'utente selezionato.

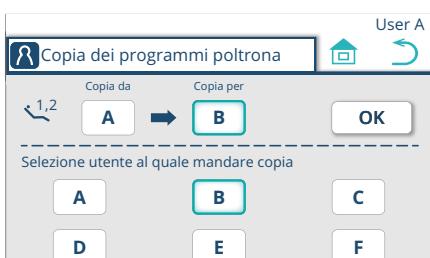

- Premere l'interruttore “Copia per” e selezionare l'utente “Copia per” da [A] a [F].

L'indicazione di commutazione “Copia per” viene modificata per mostrare l'utente selezionato.

Premere l'interruttore **OK** per visualizzare la schermata popup di conferma.

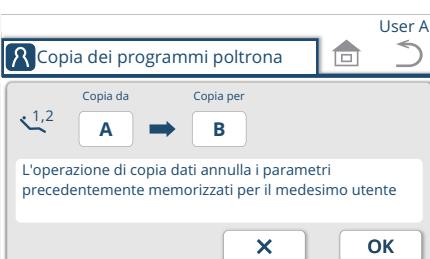

- Per confermare, premere **OK**.


La copia è stata completata e viene visualizzata la schermata “Selezione utente”.

Premere **X** per tornare alla schermata precedente senza copiare.


5 Funzionamento

Copia dell'impostazione del manipolo

L'impostazione iniziale di un manipolo all'accensione può essere copiata in un'altra memoria utente.

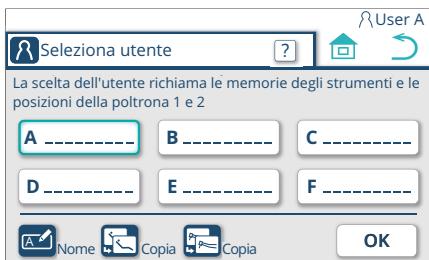

1. Sulla schermata “Selezione utente”, premere l'interruttore “Impostazione copia del manipolo”

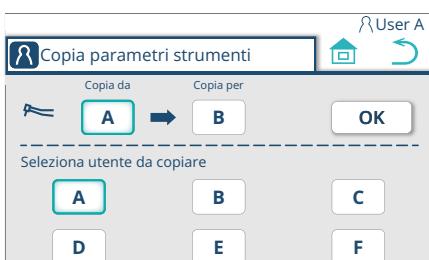

2. Selezionare l'utente “Copia da” da [A] a [F].


L'indicazione di commutazione “Copia da” viene modificata per mostrare l'utente selezionato.



3. Premere l'interruttore “Copia per” e selezionare l'utente “Copia per” da [A] a [F].

L'indicazione di commutazione “Copia per” viene modificata per mostrare l'utente selezionato.

Premere per visualizzare la schermata popup di conferma.

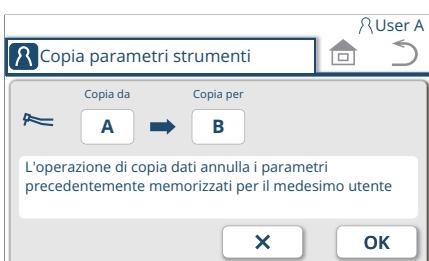

4. Per confermare, premere .

La copia è stata completata e viene visualizzata la schermata “Selezione utente”.

Premere per tornare alla schermata precedente senza copiare.



Interruttore lampada odontoiatrica


Accende/spegne la lampada odontoiatrica;
l'attivazione/disattivazione viene commutata;

- * Mantenere premuto l'interruttore mentre la lampada è accesa per 2 secondi o più fa passare la modalità a Composito sicuro.
- * La plafoniera e la luce del binario non sono utilizzabili.



Interruttore timer

Per l'uso e l'impostazione del timer

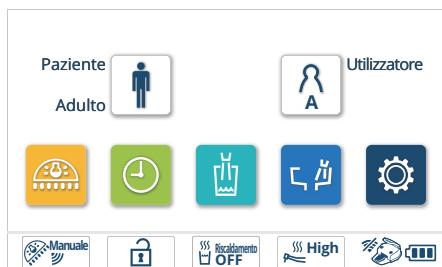

<Come utilizzare il timer>

Il tempo per il timer può essere selezionato da quattro memorie.

1. Premere l'interruttore del timer ⏱


Viene visualizzata la schermata "Timer".



2. Selezionare una memoria (in questo esempio, "Timer D: 5 minuti" è selezionato)

Viene visualizzata la schermata di funzionamento/impostazione del Timer D.

Premere l'interruttore Home ⌂ per annullare l'operazione e tornare alla schermata iniziale. Per tornare alla schermata di funzionamento precedente, utilizzare l'interruttore di ritorno ⏪.

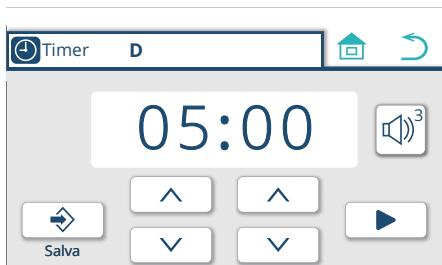

3. Modificare l'impostazione del timer

Ogni volta che l'interruttore di aumento/diminuzione ▲/▼ viene premuto, il tempo del timer può essere aumentato/diminuito di un minuto per la cifra dei minuti e di dieci secondi per la cifra dei secondi.

▲ : aumentare il tempo impostato

▼ : diminuire il tempo impostato

Premere l'interruttore memoria ⌂ per salvare le impostazioni modificate nella memoria.

5 Funzionamento




4. Modificare il volume dell'allarme per il timer

Quando viene premuto l'interruttore di regolazione del volume dell'allarme , viene visualizzata la schermata "Regolazione volume suoneria timer".

Premere il grafico a barre a sfioramento per regolare il volume dell'allarme in cinque livelli.


Premere l'interruttore della suoneria dell'allarme per disattivare o riattivare il suono dell'allarme.

Una volta completata la regolazione, premere l'interruttore per tornare alla schermata precedente.

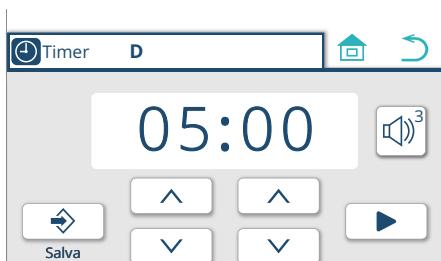


5. Premere l'avvio per avviare il conto alla rovescia del timer

Il timer a scendere viene avviato.

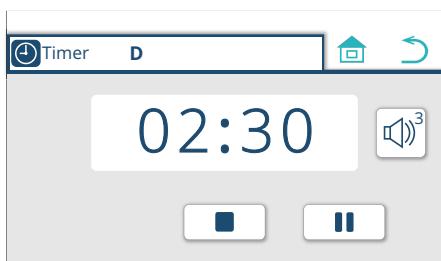

Premere la pausa per mettere in pausa il funzionamento del timer. Per riavviare il timer, premere l'avvio .

Premere l'arresto per annullare il funzionamento del timer e tornare alla schermata in 3.

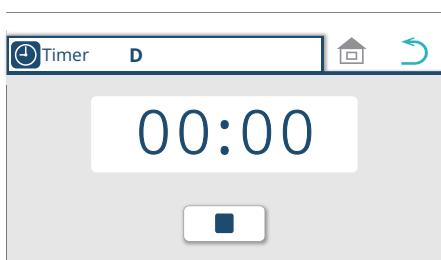






6. Una volta completato il conto alla rovescia del timer, suona un allarme

L'allarme suona per il tempo specificato, quindi si arresta automaticamente.

Premere l'arresto per arrestare la suoneria dell'allarme e tornare alla schermata iniziale.

* Se il funzionamento del timer viene eseguito sulla schermata del manipolo mentre il manipolo è stato preso, il display ritorna alla schermata del manipolo pertinente.

5 Funzionamento

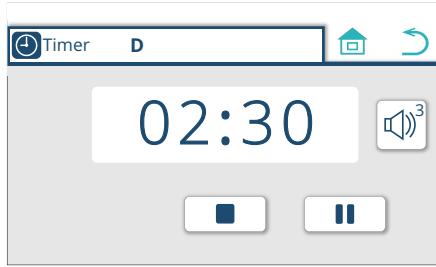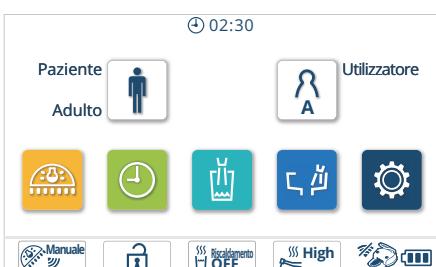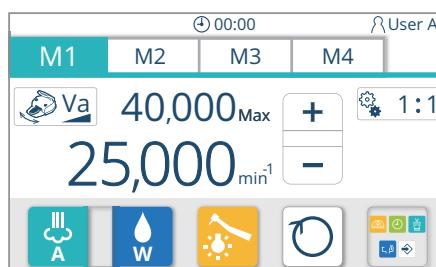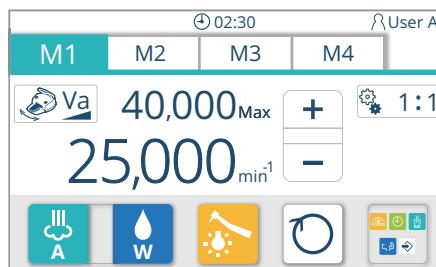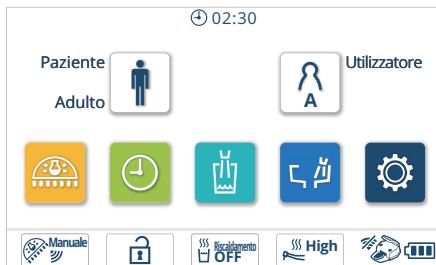

7. Ritorno alla schermata iniziale durante il funzionamento del timer

Premere l'interruttore home mentre il timer è in funzione per tornare alla schermata iniziale. Lo stato di funzionamento del timer viene visualizzato nella parte superiore della schermata.

Quando il conto alla rovescia del timer è stato completato sulla schermata iniziale, viene visualizzata la schermata in 6.

* Con il manipolo preso, anche se l'interruttore del timer viene premuto dopo aver premuto l'interruttore di richiamo del menu , il timer non si avvia e il display torna alla schermata del manipolo.

Quando il conto alla rovescia del timer è stato completato con il manipolo preso, l'interruttore del timer appare sullo schermo.

Se viene premuto l'interruttore timer , il display del manipolo viene visualizzato sullo schermo.

Se il manipolo viene lasciato senza premere l'interruttore timer , appare il display mostrato in 6.

8. Modifica della modalità al display del timer

Premere l'interruttore del timer durante il processo di conto alla rovescia per visualizzare il display del timer sullo schermo come mostrato in 5.



Interruttore del sistema di riempimento bicchiere

Si tratta di un interruttore per il riempimento del bicchiere, installato separatamente dal sistema di riempimento bicchiere con sensore.

Quando si preme questo interruttore, l'acqua viene rilasciata dall'ugello del sistema di riempimento bicchiere. L'acqua viene rilasciata anche dall'ugello di risciacquo sputacchiera per lavare la sputacchiera.

Il sistema di riempimento bicchiere funziona in base al timer per un periodo di tempo specificato.

Per arrestare il sistema di riempimento bicchiere prima che sia trascorso il tempo specificato, premere di nuovo questo interruttore.

Prima di usare il sistema di riempimento bicchiere, collocare un bicchiere sulla base del sistema di riempimento bicchiere.

In caso contrario, la parete e la poltrona potrebbero essere spruzzate con acqua.

Il sistema di riempimento bicchiere è in funzione per un periodo di tempo specificato, indipendentemente dal livello dell'acqua nel bicchiere. Fare attenzione a non far traboccare il bicchiere.



Interruttore risciacquo sputacchiera

L'acqua viene rilasciata dall'ugello di risciacquo sputacchiera per lavare la sputacchiera (circa sei secondi).

Tenere premuto l'interruttore per almeno due secondi per il risciacquo continuo. Premere di nuovo questo interruttore per interrompere il risciacquo.



Interruttore funzione

Per impostare varie condizioni di funzionamento
[pagine 192-246]



Interruttore della luce

Richiamare la schermata "Modalità commutazione sensore/manuale" per cambiare la modalità di funzionamento della lampada odontoiatrica.

Selezionare una modalità di funzionamento e premere **OK** per modificare l'impostazione.

Premere **X** per annullare la modifica e uscire.

Indicazione	Modalità	Condizione
	Modalità sensore/commutazione	La lampada può essere accesa/spenta con l'interruttore touchless della lampada odontoiatrica e con l'interruttore della lampada odontoiatrica .
	Modalità commutazione	La lampada può essere accesa/spenta con l'interruttore della lampada odontoiatrica . * La lampada non può essere accesa/spenta con l'interruttore touchless della lampada odontoiatrica
	Modalità ON	La lampada odontoiatrica è sempre accesa all'illuminamento massimo. * La lampada non può essere accesa/spenta con l'interruttore touchless della lampada odontoiatrica e con l'interruttore della lampada odontoiatrica .
	Modalità OFF	La lampada odontoiatrica è continuamente spenta * La lampada non può essere accesa/spenta con l'interruttore touchless della lampada odontoiatrica e con l'interruttore della lampada odontoiatrica .

5 Funzionamento





Interruttore di blocco

Per pulire il pannello comandi o per evitare problemi con i pazienti pediatrici, il pannello a sfioramento, l'interruttore a membrana o il joystick possono essere bloccati.

Richiamare la schermata "Blocco display" e premere **OK** per bloccare il funzionamento.

Durante il blocco, la schermata dei messaggi di blocco viene visualizzata sul pannello a sfioramento.

Per annullare il blocco del funzionamento, tenere premuto l'interruttore poltrona/poggiatesta per circa un secondo o più.

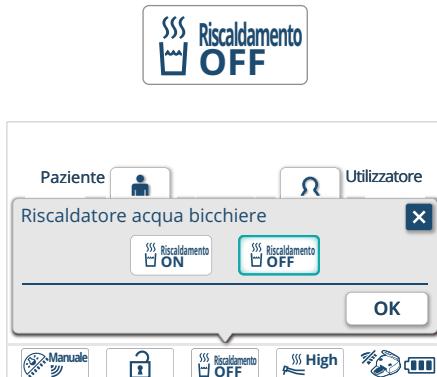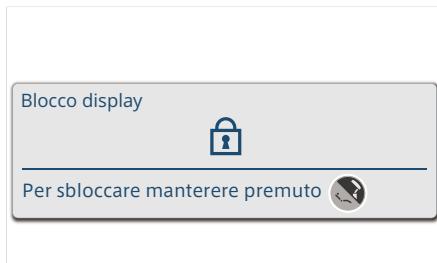


Interruttore riscaldatore acqua

Richiamare la schermata "Riscaldatore acqua bicchiere" per impostare l'acqua di riempimento bicchiere su acqua calda.

Selezionare la modalità di riscaldamento (ON/OFF) e premere **OK** per modificare l'impostazione.

Premere **X** per annullare la modifica e uscire.

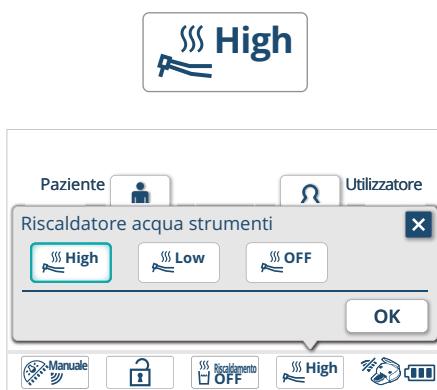

Interruttore riscaldatore HP

Richiamare la schermata "Riscaldatore acqua strumenti" per impostare l'acqua rilasciata dal manipolo su acqua calda e per impostare la temperatura dell'acqua (due temperature).

Selezionare la modalità di riscaldamento (Alto, Basso, OFF) e premere **OK** per modificare l'impostazione.

Premere **X** per annullare la modifica e uscire.



Indicazione del pedale wireless

Indica la carica residua della batteria e lo stato di accoppiamento del pedale wireless.



Man mano che il livello della batteria diminuisce, l'indicazione cambia da a .

Dopo la visualizzazione di una schermata popup di avvertenza, l'indicazione cambia a .

Quando viene visualizzato il popup, sostituire immediatamente la batteria con una nuova. [Riferimento] Come sostituire le batterie [pagina 176]

Premere per chiudere il popup.

Se il pedale wireless non è stato accoppiato, viene visualizzato



e il comando a pedale non è utilizzabile.

Se non è utilizzabile, spegnere l'interruttore principale e riavviare l'unità, quindi eseguire l'accoppiamento del pedale wireless.



Interruttore campanello

Un assistente, ecc. può essere avvisato utilizzando un dispositivo collegato esternamente.



Interruttore impianto

Attiva la funzione dell'impianto



Indicatore bottiglia dell'acqua

Indica quando il livello della bottiglia dell'acqua nella sputacchiera diventa basso.



Quando il livello della bottiglia dell'acqua scende al di sotto del livello specificato, questa indicazione viene visualizzata dopo una schermata popup di avvertenza. Quando viene visualizzato il popup, sostituire immediatamente la bottiglia dell'acqua con una nuova.

Premere per chiudere il popup.

Sostituzione della bottiglia dell'acqua
In caso di montaggio della sputacchiera
 [Come rimuovere la bottiglia dell'acqua]


(1)

Pannello posteriore
 (parte superiore)



(1) Aprire la parte superiore del pannello posteriore dell'unità sputacchiera.

(2)

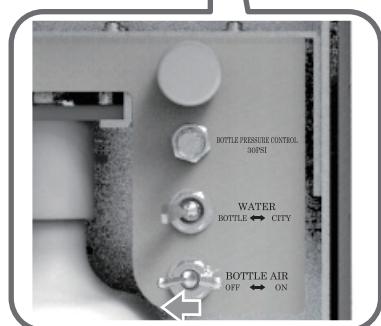


(2) Spostare l'interruttore BOTTLE AIR verso sinistra (OFF).

(3)



(3) Estrarre la bottiglia dell'acqua verso di sé.

(4)

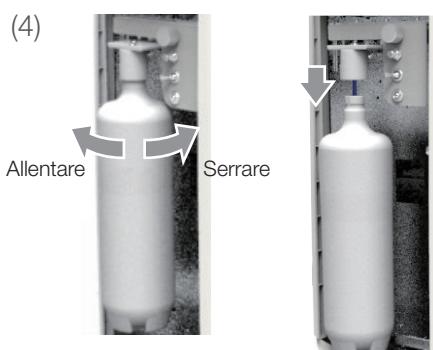


(4) Ruotare la bottiglia dell'acqua e rimuoverla.

Ruotandola in senso antiorario si allenta la connessione.
 Ruotandola in senso orario si stringe la connessione.

[Come fissarla]

Rimontarla nell'ordine inverso di quello da (1) a (4).

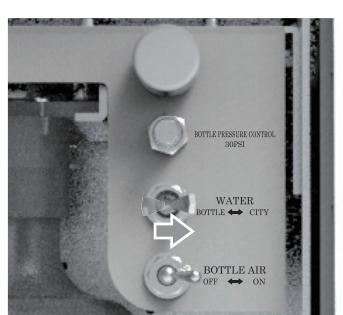

* Quando non si utilizza l'acqua dalla bottiglia dell'acqua, ruotare l'interruttore di commutazione WATER verso destra (CITY).

5 Funzionamento


In caso di montaggio su carrello medico

[Come rimuovere la bottiglia dell'acqua]

(1) Spostare l'interruttore BOTTLE AIR verso il basso (OFF).



(2)

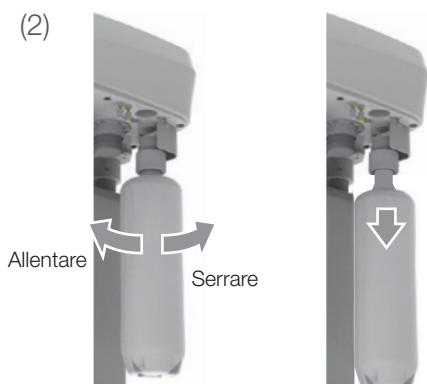


(2) Ruotare la bottiglia dell'acqua e rimuoverla.

Ruotandola in senso antiorario si allenta la connessione.
Ruotandola in senso orario si stringe la connessione.

[Come fissarla]


Rimontarla nell'ordine inverso di quello da (1) a (4).

* Quando non si utilizza l'acqua dalla bottiglia dell'acqua, ruotare l'interruttore di commutazione WATER all'indietro (CITY).

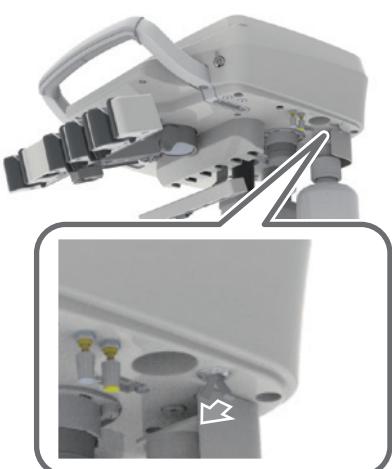

5 Funzionamento


Aria ON/acqua ON (spruzzo ON)

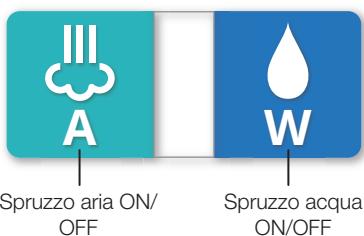

Aria OFF/Acqua ON



Aria ON/Acqua OFF

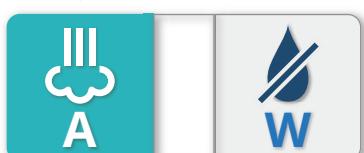

Aria OFF/Acqua OFF (spruzzo OFF)



Lampada accesa



Lampada spenta



Interruttore spruzzo

Attiva/disattiva lo spruzzo del manipolo (aria e acqua).

Prendere un manipolo e premere l'interruttore per commutare tra ON/OFF di A (Aria) e W (Acqua).

Nel caso di micromotore/turbina ad aria/motore pneumatico, è possibile selezionare due o quattro modalità a seconda dell'impostazione della modalità di spruzzo.

Quando è impostato su due modalità, lo spruzzo ON/OFF viene commutato.

Quando è impostato su quattro modalità, ON/OFF può essere commutato rispettivamente per l'aria e per l'acqua.

Indipendentemente dalle due o quattro modalità, un ablatore a ultrasuoni può commutare tra ON/OFF di solo W (acqua).

[Riferimento] Impostazione della modalità di spruzzo [pagina 233]

Interruttore luce manipolo

Accende/spegne la luce del manipolo.

La luce commuta tra accesa e spenta.

[Riferimento] Impostazione dei tempi di attivazione della luce [pagina 234]

5 Funzionamento




Interruttore commutazione irrigazione con soluzione salina
A ogni pressione di questo interruttore si attiva o si disattiva l'irrigazione.

Interruttore commutazione irrigazione con soluzione salina



Può essere utilizzato invece il comando a pedale.
Con ciascuna pressione di questo interruttore si attiva o si disattiva l'irrigazione.

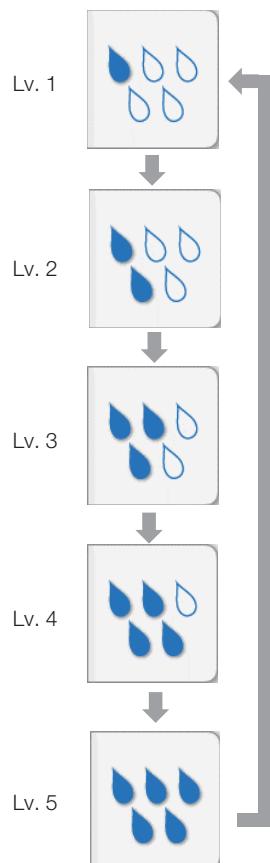

Interruttore di commutazione volume di irrigazione con soluzione salina

Ciascuna pressione di questo interruttore modifica i livelli del volume di irrigazione.

I livelli possono essere modificati come segue: Lv. 1 → Lv. 2 → Lv. 3 → Lv. 4 → Lv. 5 → Lv. 1. Ci sono cinque livelli di volume di irrigazione, più alto è il livello, maggiore è il volume di irrigazione.

Per attivare o disattivare la regolazione del volume, utilizzare l'interruttore commutazione irrigazione con soluzione salina.

5 Funzionamento

Rotazione in avanti
(in senso orario)



Rotazione inversa
(in senso antiorario)



Modalità reciproca (non commutabile)



Interruttore micromotore
avanti/indietro

Quando si aziona il motore dell'impianto)

Può essere utilizzato invece il comando a pedale.

Ciascuna pressione sull'interruttore commuta la direzione di rotazione (avanti/indietro) del micromotore.



Interruttore di chiamata menu

Richiama le schermate di menu per eseguire le seguenti operazioni mentre un manipolo viene preso.

Lampada odontoiatrica accesa/spenta

[Riferimento] Interruttore lampada odontoiatrica [pagina 122]

Uso e impostazione del timer

[Riferimento] Interruttore timer [pagine 122-124]

Sistema di riempimento bicchiere

[Riferimento] Interruttore del sistema di riempimento bicchiere [pagina 125]

Risciacquo sputacchiera

[Riferimento] Interruttore di risciacquo sputacchiera [pagina 125]

Memoria dell'impostazione delle condizioni operative del manipolo

[Riferimento] Interruttore memoria (schermata di impostazione manipolo)
[pagina 133]



Interruttore memoria (schermata di impostazione manipolo)

Questo interruttore viene visualizzato quando la rotazione, la condizione di spruzzo e altre impostazioni sono state modificate dalla memoria sulla schermata del manipolo. Premere l'interruttore per sovrascrivere la memoria richiamata (da M1 a M4) con l'impostazione modificata.



Interruttore modalità di scorrimento

Cambia la modalità di scorrimento (Va/Fix) del comando a pedale.
[Riferimento] Micromotore [pagina 144]

5 Funzionamento



Interruttore +/-

Nel caso di un micromotore, il valore massimo di rotazione viene aumentato/diminuito.

[Riferimento] Micromotore [pagina 145]



Interruttore del rapporto di trasmissione

L'indicazione può essere commutata alla rotazione che corrisponde al rapporto di trasmissione contrangolo del micromotore.

[Riferimento] Micromotore [pagina 147]


Funzione di inversione automatica e
valore di coppia 3,0 Ncm



Interruttore di controllo della coppia

La condizione del valore di coppia e della funzione di inversione automatica può essere impostata nel caso di un micromotore che accetta l'impostazione nell'intervallo di rotazione a bassa velocità.


[Riferimento] Micromotore [pagine 149, 150, da 152 a 155]

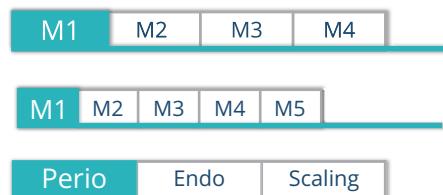

Scheda Memoria

Le memorie preimpostate delle impostazioni del manipolo possono essere richiamate e commutate.

La scheda di memoria potrebbe non essere visualizzata a seconda del manipolo.

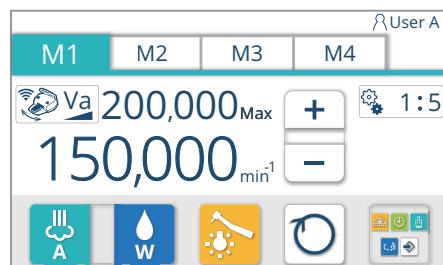


[Riferimento] Micromotore [pagina 144]

Ablatore a ultrasuoni [pagina 158]

Turbina [pagina 161]

Motore dell'impianto [pagina 164]

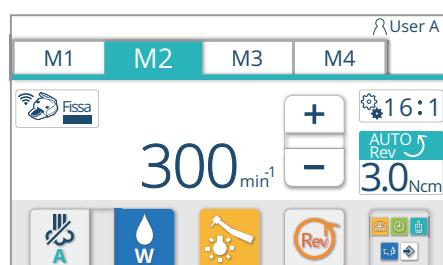

5 Funzionamento

Prima della selezione



Dopo la selezione



Interruttore modalità manipolo

Premendo l'interruttore sullo schermo per modificare il tempo di risciacquo iniziale, viene visualizzata la schermata di impostazione del tempo di risciacquo del "manipolo".

[Riferimento] Impostazione del tempo di risciacquo [pagine 204-209]

Prima della selezione



Dopo la selezione



Interruttore modalità risciacquo riempি bicchiere

Premendo l'interruttore sullo schermo per modificare il tempo di risciacquo iniziale, viene visualizzata la schermata di impostazione del tempo di risciacquo del "risciacquo riempি bicchiere".

[Riferimento] Impostazione del tempo di risciacquo (manipolo + riempি bicchiere) [pagine 206, 207]

Prima della selezione



Dopo la selezione



Riempি bicchiere, interruttore modalità risciacquo coppа sputacchiera

Premendo l'interruttore sullo schermo per modificare il tempo di risciacquo iniziale, viene visualizzata la schermata di impostazione del tempo di risciacquo del "risciacquo riempি bicchiere, coppа sputacchiera".

[Riferimento] Impostazione del tempo di risciacquo (manipolo + riempি bicchiere + coppа sputacchiera) [pagine 208, 209]



Interruttore timer per il risciacquo

Premendo l'interruttore sullo schermo per modificare l'impostazione di risciacquo, viene visualizzata la schermata per modificare il tempo di risciacquo iniziale.

[Riferimento] Impostazione del tempo di risciacquo [pagine 204-211]




Interruttore memoria (schermata di impostazione per risciacquo/timer)

Premendo l'interruttore sulla schermata di impostazione per risciacquo/timer, il tempo viene sovrascritto da un tempo impostato.

[Riferimento] Impostazione timer del risciacquo [pagine 204-211]

Come utilizzare il timer [pagina 122]

5-15 Pannello di comando assistente

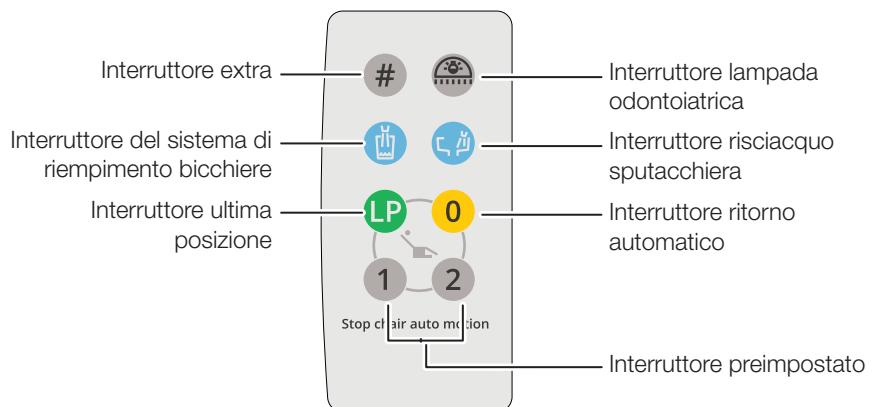

Interruttore lampada odontoiatrica

Accende/spegne la lampada odontoiatrica; l'attivazione/disattivazione viene commutata;

- * Mantenere premuto l'interruttore mentre la lampada è accesa per 2 secondi o più fa passare la modalità a Composito sicuro.
- * La plafoniera e la luce del binario non sono utilizzabili.



Interruttore extra

Quando questo interruttore viene tenuto premuto per due secondi o più, l'interruttore touchless della lampada odontoiatrica non è attivo. L'indicatore LED sull'unità sputacchiera si accende in rosa.

Quando questo interruttore viene tenuto premuto per due secondi o più, il sensore della lampada odontoiatrica è attivo. L'indicatore LED sull'unità sputacchiera ritorna al colore originale.



Interruttore del sistema di riempimento bicchiere

Si tratta di un interruttore per il riempimento del bicchiere, installato separatamente dal sistema di riempimento bicchiere con sensore.

Quando si preme questo interruttore, l'acqua viene rilasciata dall'ugello del sistema di riempimento bicchiere. L'acqua viene rilasciata anche dall'ugello di risciacquo sputacchiera per lavare la sputacchiera.

Il sistema di riempimento bicchiere funziona in base al timer per un periodo di tempo specificato.

Per arrestare il sistema di riempimento bicchiere prima che sia trascorso il tempo specificato, premere di nuovo questo interruttore.

Prima di usare il sistema di riempimento bicchiere, collocare un bicchiere sulla base del sistema di riempimento bicchiere.
In caso contrario, la parete e la poltrona potrebbero essere spruzzate con acqua.
Il sistema di riempimento bicchiere è in funzione per un periodo di tempo specificato, indipendentemente dal livello dell'acqua nel bicchiere. Fare attenzione a non far traboccare il bicchiere.



Interruttore risciacquo sputacchiera

L'acqua viene rilasciata dall'ugello di risciacquo sputacchiera per lavare la sputacchiera (circa sei secondi).

- Tenere premuto l'interruttore per almeno due secondi per il risciacquo continuo.
- Premere di nuovo questo interruttore per interrompere il risciacquo.



Interruttore ultima posizione

La poltrona viene spostata nella posizione di gargarismo quando questo interruttore viene premuto nella posizione di procedura.

Premerlo di nuovo per riportare la poltrona alla posizione della procedura prima del gargarismo.



Interruttore ritorno automatico

La poltrona viene spostata alla posizione di ingresso/uscita.

* Nel caso di un poggiatesta (elettroidraulico), premendo nuovamente questo interruttore dopo che la poltrona si è arrestata completamente, il poggiatesta viene alloggiato.



Interruttore preimpostato

Quando 1 viene premuto, la poltrona viene spostata alla posizione di trattamento 1.

Quando 2 viene premuto, la poltrona viene spostata alla posizione di trattamento 2.



Non tenere premuto l'interruttore preimpostato, l'interruttore di ritorno automatico o l'interruttore ultima posizione per cinque secondi o più. Se vengono premuti per cinque secondi o più, si sente il suono di un cicalin e la posizione della poltrona in quel momento viene memorizzata come la posizione impostata.

[Riferimento] Impostazione funzionamento automatico [pagina 189]



AVVERTENZA

Prima di spostare la poltrona, confermare che nessuna parte del corpo umano, arto o ostacolo stiano ostacolando la poltrona.

Adottare particolari precauzioni per il movimento e il comportamento dei bambini durante il funzionamento.

5-16 Funzione di annullamento

Per arrestare il movimento della poltrona avviato mediante un interruttore per il funzionamento automatico (interruttore preimpostato, interruttore ritorno automatico, interruttore ultima posizione o joystick per funzionamento automatico), eseguire una delle seguenti operazioni.



Joystick




Pedale

Joystick

Azionare uno dei joystick (indicati da ○).


Comando a pedale

Premere il pedale.

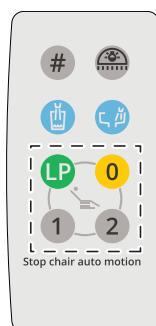


Pannello di comando assistente

Premere uno degli interruttori nel riquadro [].

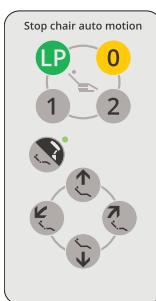

Interruttore a membrana (supporto)

Premere uno degli interruttori.

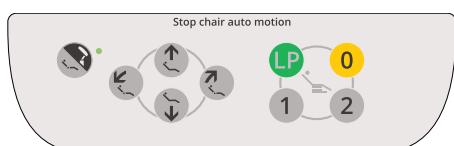

Interruttore a membrana (asta)

Premere uno degli interruttori.

5-17 Funzione di blocco


5-17-1 Funzione di blocco della poltrona

Quando la funzione di blocco è attivata, sul pannello a sfioramento vengono visualizzate le indicazioni elencate di seguito. (Quando si applica forza al carter posteriore struttura sollevamento poltrona, la funzione di blocco viene attivata.)


Schermata iniziale



Schermata iniziale:

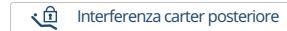

Schermata del manipolo

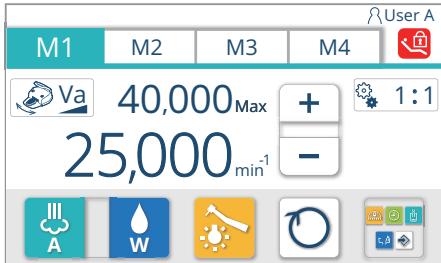

Schermata del manipolo:



Quando la funzione di blocco è attivata, il movimento della poltrona viene arrestato e si apre un popup per notificare l'anomalia.
Controllare il popup ed eliminare prontamente l'anomalia.

Eliminare l'anomalia o premere per chiudere il popup.

Le funzioni che vengono bloccate e le procedure di sbloccaggio sono le seguenti.
[Riferimento] [pagine da 140 a 142]

L'indicatore LED sull'unità sputacchiera si accende in arancione.

5 Funzionamento

<p>Condizione 1</p>  <p>La sputacchiera è stata ruotata a una posizione che potrebbe interferire con il bracciolo o con il paziente.</p>	<p>Indicazione del pannello a sfioramento</p>  <p>Come sbloccare Ruotare la sputacchiera finché l'indicazione di blocco sul pannello a sfioramento non scompare.</p> <p>Funzioni bloccate Funzionamento automatico e funzionamento manuale della poltrona (sollevamento)</p>
<p>Condizione 2</p> <p>Se forza viene applicata al poggiapiedi nella direzione indicata da una freccia durante il movimento automatico o l'abbassamento manuale della poltrona, la funzione di blocco viene attivata e la poltrona viene sollevata per circa un secondo e arrestata.</p> <p>* La funzione di blocco è attivata quando l'angolo del gambale è inferiore a 45 gradi.</p> 	<p>Indicazione del pannello a sfioramento</p>  <p>Come sbloccare Rimuovere l'ostacolo che ha causato l'arresto di emergenza, confermare la sicurezza e azionare la poltrona.</p> <p>Funzioni bloccate Funzionamento automatico e funzionamento manuale della poltrona (abbassamento/sollevamento)</p>

5 Funzionamento

<p>Condizione 3</p> <p>Quando si preme il comando a pedale durante il funzionamento automatico della poltrona</p> 	<p>Indicazione del pannello a sfioramento</p>  <p>Come sbloccare</p> <p>Togliere il piede dal pedale, controllare la sicurezza e azionare la poltrona.</p> <p>Funzioni bloccate</p> <p>Tutte le operazioni della poltrona</p>
<p>Condizione 4</p> <p>Quando forza viene applicata al braccio assistente dalla direzione verso l'alto/verso il basso durante il funzionamento automatico della poltrona</p> 	<p>Indicazione del pannello a sfioramento</p>  <p>Come sbloccare</p> <p>Rimuovere l'ostacolo che ha causato l'arresto di emergenza, confermare la sicurezza e azionare la poltrona.</p> <p>Funzioni bloccate</p> <p>Operazioni automatiche della poltrona</p>

5 Funzionamento

<p>Condizione 5</p> <p>Durante il movimento della poltrona, viene applicata forza al carter posteriore struttura sollevamento poltrona nella direzione indicata da una freccia</p> 	<p>Indicazione del pannello a sfioramento</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;">  <p>Interferenza carter posteriore Rimuovere ostacolo</p> </div> <p>Come sbloccare</p> <p>Rimuovere l'ostacolo che ha causato l'arresto di emergenza, confermare la sicurezza e azionare la poltrona.</p> <p>Funzioni bloccate</p> <p>Funzionamento automatico e funzionamento manuale della poltrona (abbassamento/inclinazione dello schienale)</p>
<p>Condizione 6</p> <p>Quando forza viene applicata all'unità medico nella direzione indicata con una freccia durante il funzionamento automatico della poltrona (Consegna armadio)</p>  <p>Consegna armadio</p>	<p>Indicazione del pannello a sfioramento</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;">  <p>Interferenza con tavoletta strumenti Rimuovere ostacolo</p> </div> <p>Come sbloccare</p> <p>Rimuovere l'ostacolo che ha causato l'arresto di emergenza, confermare la sicurezza e azionare la poltrona.</p> <p>Funzioni bloccate</p> <p>Operazioni automatiche della poltrona</p>

5-17-2 Funzione di blocco del manipolo

Quando la funzione di blocco è attivata, sul pannello a sfioramento vengono visualizzate le indicazioni elencate di seguito e il manipolo non può essere utilizzato.

Le funzioni che vengono bloccate e le procedure di sbloccaggio sono le seguenti.


Condizione	Indicazione del pannello a sfioramento
 Un manipolo viene preso dal portastrumenti mentre si preme il comando a pedale.	 <p>E20:Manipolo estratto con pedale ON</p> <p>Paziente Adulto</p> <p>Utilizzatore A</p> <p>Icone: Manuale, Bloccato, Riscaldamento OFF, High, Batteria</p>
	<h4>Come sbloccare</h4> <p>Rilasciare il comando a pedale e premerlo nuovamente.</p>
	<h4>Funzioni bloccate</h4> <p>Operazioni del manipolo</p>

5–18 Micromotore

Impostazione della modalità di scorrimento del micromotore (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)

[Esempio di MX2]

Modalità di scorrimento (Va/Fix)

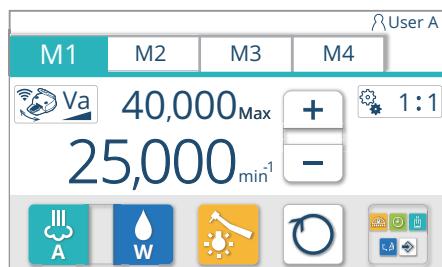

Quando il micromotore viene preso dal portastrumenti, viene visualizzata la schermata del micromotore.

La memoria può essere selezionata da quattro memorie (da M1 a M4). Le memorie possono essere commutate premendo la scheda di memoria.

La modalità di scorrimento può essere selezionata da Va e Fix.

Va (variabile)

Impostando la rotazione massima e facendo scorrere il comando a pedale a sinistra o a destra, la rotazione può essere regolata all'interno dell'intervallo della rotazione massima.

La rotazione viene diminuita scorrendo verso sinistra e aumentata scorrendo verso destra.

La rotazione può essere regolata alla rotazione massima premendo il pedale.

Fix (Fissa)

Il valore di rotazione può essere regolato sull'impostazione in base al grado di pressione sul pedale, indipendentemente dalla posizione del comando a pedale.

1. Prendere il micromotore dal portastrumenti.

2. Premere la modalità di scorrimento per visualizzare la schermata di impostazione della modalità di scorrimento.



3. Selezionare una modalità di scorrimento.

4. Memorizzare la selezione premendo .

Viene visualizzata la schermata del micromotore.

Le impostazioni della modalità di scorrimento vengono memorizzate nella condizione di avvio dopo l'accensione.

* Per annullare la modifica dell'impostazione, premere senza premere .

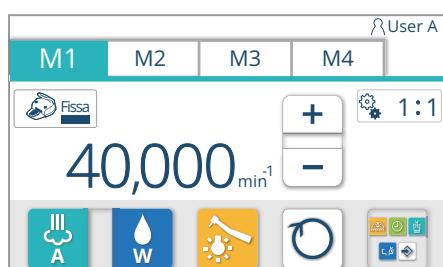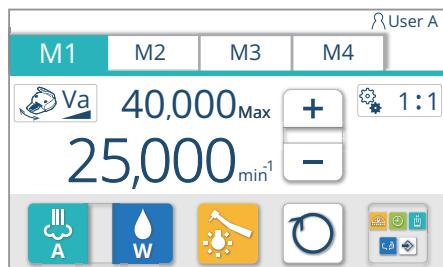

[Esempio di MX2]



Funzione di inversione automatica/
Funzione di avanzamento automatico

Impostazione della rotazione massima (NBX/NLX plus/ NLX nano/MX2/MCX)

1. Prendere il micromotore dal portastrumenti

2. Premere l'interruttore per impostare la rotazione massima

L'intervallo di impostazione della rotazione massima varia a seconda del modello di micromotore (vedere la figura sotto).


La funzione di inversione automatica/funzione di avanzamento automatico e il valore di coppia vengono visualizzati solo quando si imposta l'intervallo di rotazione a bassa velocità (NLX plus/MX2).

Modello micromotore	Intervallo di impostazione della rotazione massima (rapporto di trasmissione 1:1)																	
	100	1000	2000	5000	6000	10000	20000	30000	40000									
NBX																		
NBX																		
NBX	Ogni 1.000																	
NLX plus																		
NLX plus																		
NLX plus	Ogni 100	Ogni 500																
NLX plus																		
NLX plus																		
NLX plus	Ogni 1.000																	
NLX nano																		
NLX nano																		
NLX nano	Ogni 1.000																	
MX2																		
MX2																		
MX2	Ogni 100	Ogni 500																
MX2																		
MX2																		
MX2	Ogni 1.000																	
MCX																		
MCX																		
MCX	Ogni 1.000																	

(Unità: min⁻¹)

5 Funzionamento

[Esempio di MX2]

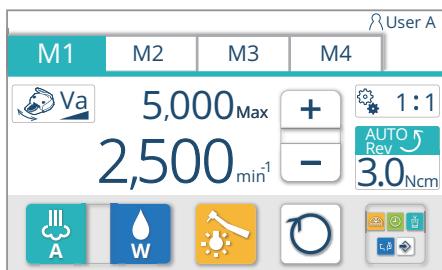

Impostazione della memoria per la condizione di avvio dopo l'accensione (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)

Quando viene modificata la seguente impostazione della condizione del manipolo, può essere memorizzata nei passaggi specificati di seguito.

- Rotazione massima

[Riferimento] Impostazione della rotazione massima [pagina 145]

- Condizione di spruzzo (ON/OFF/Acqua/Aria)



[Riferimento] Interruttore di spruzzo [pagina 131]

- Interruttore luce manipolo (ON/OFF)

[Riferimento] Interruttore luce manipolo [pagina 131]

1. Prendere il micromotore dal portastrumenti
2. Selezionare una scheda di memoria da M1 a M4 e premerla
3. Cambiare la condizione del manipolo (rotazione massima/spruzzo/condizione della luce del manipolo).
4. Premere l'interruttore di richiamo menu per richiamare la schermata del menu
5. Premere l'interruttore memoria

Viene visualizzata la schermata di impostazione memoria per la condizione di avvio.

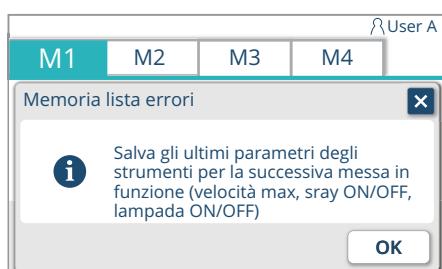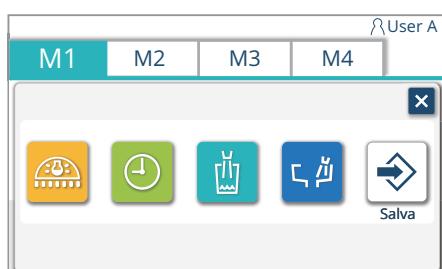


6. Confermare l'impostazione visualizzata e premere per memorizzarla.

* Se non è premuto ma è premuto, l'impostazione modificata è valida fino allo spegnimento dell'interruttore principale, ma l'impostazione ritorna a quella prima della modifica una volta spento l'interruttore principale.

5 Funzionamento

[Esempio di MX2]

Scheda Memoria Rapporto di trasmissione

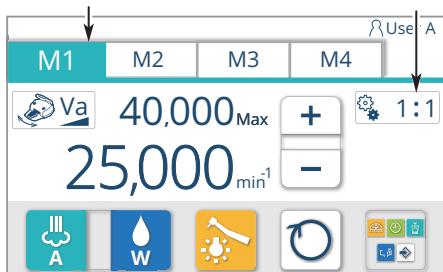

Funzione di visualizzazione conversione rapporto di trasmissione (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)

Questa funzione serve per indicare un valore vicino alla rotazione effettiva convertendo il rapporto del manipolo contrangolo/manipolo dritto collegato al micromotore.

Per la conversione vengono utilizzati i seguenti quattro tipi di rapporti di trasmissione.


1:5 (velocità cinque volte superiore), 1:1 (stessa velocità),
4:1 (decelerato a una velocità di un quarto),
16:1 (decelerato a una velocità di un sedicesimo)

1. Prendere il micromotore dal portastrumenti.
2. Selezionare una memoria dall'interruttore scheda da M1 a M4 e premerla.
3. Premere l'interruttore del rapporto di trasmissione **1:1** per visualizzare la schermata di impostazione dell'interruttore del rapporto di trasmissione.
4. Selezionare un rapporto di trasmissione.
5. Memorizzare la selezione premendo **OK**.

Viene visualizzata la schermata del micromotore.


Le impostazioni del rapporto di trasmissione vengono memorizzate nella condizione di avvio dopo l'accensione.

* Per annullare la modifica dell'impostazione, premere **X** senza premere **OK**.

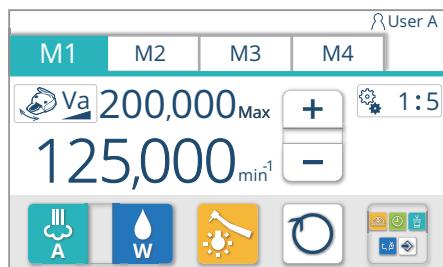

Funzione di prevenzione surriscaldamento (NBX/NLX plus/MX2/MCX)

Visualizzato quando la funzione di prevenzione surriscaldamento è attivata

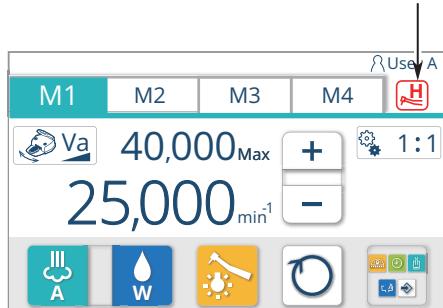

Se il prodotto viene utilizzato per un lungo periodo con un carico elevato, la funzione di prevenzione surriscaldamento viene attivata e la coppia viene automaticamente diminuita per evitare il surriscaldamento dell'unità micromotore. In questo caso, viene emesso un segnale acustico e viene visualizzato **H**. Mentre viene visualizzata questa indicazione, la funzione di prevenzione surriscaldamento è attivata.

Arrestando la rotazione o utilizzando il prodotto a un carico inferiore, la funzione di prevenzione del surriscaldamento viene disattivata dopo che è trascorso un certo tempo.



Non spegnere e riaccendere nuovamente l'interruttore principale per disattivare la funzione di prevenzione del surriscaldamento. Ciò potrebbe causare ustioni a causa del surriscaldamento dell'unità micromotore.



Per un uso corretto, assicurarsi di leggere attentamente le istruzioni per l'uso allegate al micromotore pertinente in anticipo.

5 Funzionamento

Modalità di scorrimento (Va/Fix)




- Rotazione effettiva (quando il comando a pedale è acceso)
- Rotazione nella posizione di scorrimento attuale del comando a pedale (quando il comando a pedale è spento)

NLX plus

Nel caso di un micromotore NLX plus, se la rotazione massima è impostata nell'intervallo di rotazione a bassa velocità (da 100 a 5.000 min-1), è possibile impostare il valore della coppia, l'applicabilità della funzione di inversione automatica e l'applicabilità della funzione di avanzamento automatico.

L'inversione automatica è una funzione che passa automaticamente alla rotazione inversa (in senso antiorario) quando il carico supera il valore di coppia preimpostato nell'intervallo di rotazione a bassa velocità (0,3-3,0 Ncm).

L'avanzamento automatico è una funzione che passa automaticamente alla rotazione inversa (in senso antiorario) quando il carico supera il valore di coppia preimpostato nell'intervallo di rotazione a bassa velocità (0,3-3,0 Ncm), quindi ritorna alla rotazione in avanti (in senso orario) quando il carico scompare.

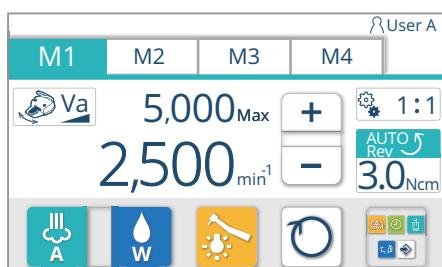

Impostazione di un valore di coppia

1. Prendere il micromotore dal portastrumenti.

2. Selezionare una memoria dall'interruttore scheda da M1 a M4 e premerla.

3. Premere l'interruttore di controllo della coppia **AUTO Rev 3.0 Ncm** per visualizzare la schermata di impostazione della coppia.

4. Premere l'interruttore **+** **-** per impostare il valore di coppia desiderato.
<Il valore può essere selezionato da:>

0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,9/1,0/1,2/1,4/1,8/2,1/2,3/2,7/3,0

Quando **+** è premuto, il valore di coppia è commutato verso l'alto tra le opzioni di cui sopra.


Quando **-** è premuto, il valore della coppia viene commutato verso il basso tra le opzioni di cui sopra.

5. Memorizzare la selezione premendo **OK**.

Viene visualizzata la schermata del micromotore.


Le impostazioni del rapporto di coppia vengono memorizzate nella condizione di avvio dopo l'accensione.

* Per annullare la modifica dell'impostazione, premere **X** senza premere **OK**.

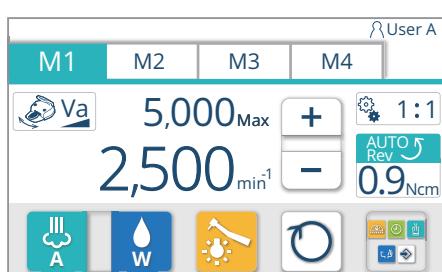

5 Funzionamento


Scheda Memoria

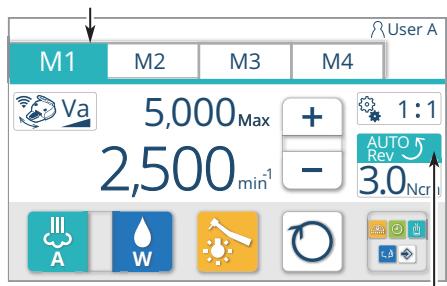

Funzione di inversione automatica/
Funzione di avanzamento automatico

Impostazione della funzione di inversione automatica/funzione di avanzamento automatico

1. Prendere il micromotore dal portastrumenti
2. Selezionare una memoria dall'interruttore scheda da M1 a M4 e premerla
3. Premere l'interruttore di controllo della coppia per visualizzare la schermata di impostazione della funzione di inversione automatica/funzione di avanzamento automatico

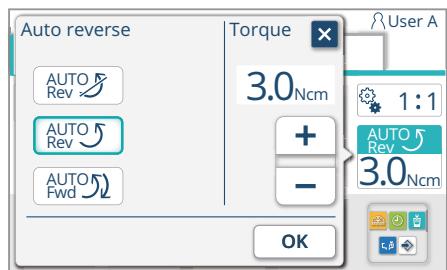

4. Selezionare l'impostazione richiesta della funzione di inversione automatica/funzione di avanzamento automatico


- : Impostare su "Nessuna funzione di inversione automatica"
- : Impostare su "Funzione di inversione automatica"
- : Impostare su "Funzione di avanzamento automatico"

5. Memorizzare la selezione premendo

Viene visualizzata la schermata del micromotore.

Le impostazioni della funzione di inversione automatica e della funzione di avanzamento automatico vengono memorizzate nella condizione di avvio dopo l'accensione.

* Per annullare la modifica dell'impostazione, premere senza premere

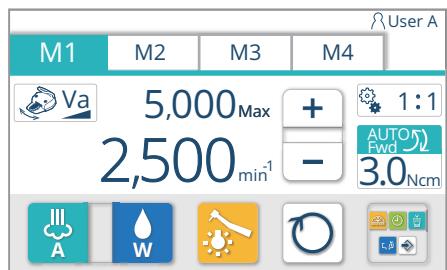

⚠ ATTENZIONE

Se una lima a forma di vite inversa, ecc. è collegata a NLX plus, assicurarsi di impostare su "Nessuna funzione di inversione automatica" e di commutare la direzione di rotazione utilizzando l'interruttore avanti/indietro sul micromotore. Se l'unità è impostata su "Funzione di inversione automatica/funzione di avanzamento automatico", la lima potrebbe danneggiarsi, causando lesioni.

5 Funzionamento

Modalità di scorrimento (Va/Fix)



Funzione di inversione automatica/
Funzione di avanzamento automatico

MX2

Nel caso di un micromotore MX2, se la rotazione massima è impostata nell'intervallo di rotazione a bassa velocità (da 100 a 5.000 min-1), è possibile impostare il valore della coppia, l'applicabilità della funzione di inversione automatica e l'applicabilità della funzione di avanzamento automatico e il tempo di durata della funzione di avanzamento automatico. L'applicazione della modalità reciproca può essere impostata.

L'inversione automatica è una funzione che passa automaticamente alla rotazione inversa (in senso antiorario) quando il carico supera il valore di coppia preimpostato nell'intervallo di rotazione a bassa velocità (0,4-3,5 Ncm).

L'avanzamento automatico è una funzione che passa automaticamente alla rotazione inversa (in senso antiorario) quando il carico supera il valore di coppia preimpostato nell'intervallo di rotazione a bassa velocità (0,4-3,5 Ncm), quindi ritorna alla rotazione in avanti (in senso orario) dopo la durata del tempo specificato (durata avanzamento automatico).



In modalità reciproca, il micromotore oscilla all'angolo, alla velocità di accelerazione e al valore di coppia preimpostati.

Questa modalità consente solo il funzionamento di avvio o arresto.

*La velocità di rotazione non può essere regolata.

Quando si preme l'interruttore a pedale, viene visualizzato come mostrato nella figura a sinistra. Quando non si preme il comando a pedale,

viene visualizzato.

L'impostazione di nella parte inferiore dello schermo non può essere modificata.

Per utilizzare la modalità reciproca, sono necessari contrangolo e file designati.

Il contrangolo designato è mostrato di seguito:




CA ENDO (REF 1600955) di Bien Air

Le lime designate sono mostrate di seguito:

WaveOne® Gold di Dentsply Maillefer

di VDW

5 Funzionamento

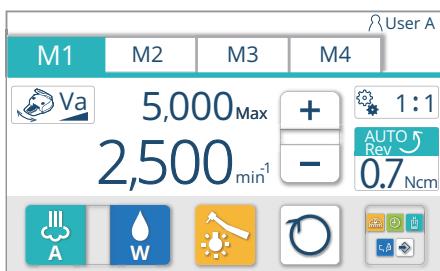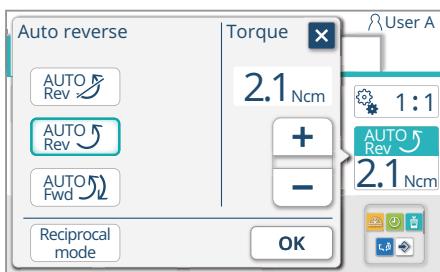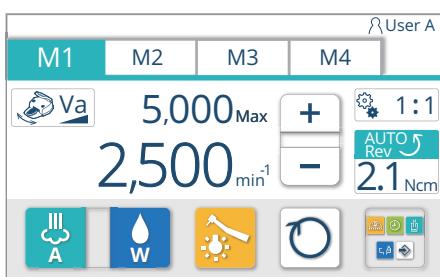


Impostazione di un valore di coppia

1. Prendere il micromotore dal portastrumenti
2. Selezionare una memoria dall'interruttore scheda da M1 a M4 e premerla
3. Premere l'interruttore di controllo della coppia **2.1 Ncm** per visualizzare la schermata di impostazione della coppia
4. Premere l'interruttore **+** **-** per impostare il valore di coppia desiderato
<Il valore può essere selezionato da:>
0,4/0,7/1,1/1,4/1,8/2,1/2,5/2,8/3,2/3,5
Quando l'interruttore **+** è premuto, il valore di coppia è commutato verso l'alto tra le opzioni di cui sopra.
Quando l'interruttore **-** è premuto, il valore di coppia viene commutato verso il basso tra le opzioni di cui sopra.
5. Memorizzare la selezione premendo **OK**
Viene visualizzata la schermata del micromotore.

* Per annullare la modifica dell'impostazione, premere **X** senza premere **OK**

5 Funzionamento

Scheda Memoria

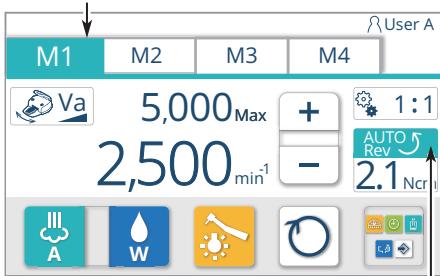

Funzione di inversione automatica/
Funzione di avanzamento automatico

Impostazione della funzione di inversione automatica/funzione di avanzamento automatico


1. Prendere il micromotore dal portastrumenti
2. Selezionare una memoria dall'interruttore scheda da M1 a M4 e premerla
3. Premere l'interruttore di controllo della coppia per visualizzare la schermata di impostazione della funzione di inversione automatica/funzione di avanzamento automatico
4. Selezionare l'impostazione richiesta della funzione di inversione automatica/funzione di avanzamento automatico
 - : Impostare su “Nessuna funzione di inversione automatica”
 - : Impostare su “Funzione di inversione automatica”
 - : Impostare su “Funzione di avanzamento automatico”
 - : Impostare su “Modalità reciproca”
[Riferimento] Impostazione della modalità reciproca
[pagine da 155 a 157]

5. Memorizzare la selezione premendo

Viene visualizzata la schermata del micromotore.

Le impostazioni della funzione di inversione automatica, della funzione di avanzamento automatico e della modalità reciproca vengono memorizzate nella condizione di avvio dopo l'accensione.

* Per annullare la modifica dell'impostazione, premere senza premere

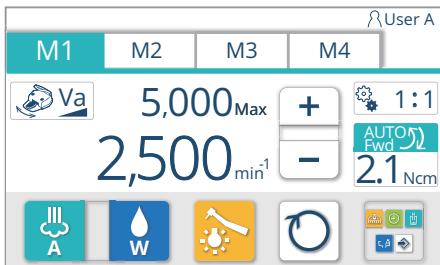


ATTENZIONE

Se una lima a vite inversa, ecc., è collegata a MX2, assicurarsi di impostare su “Nessuna funzione di inversione automatica” e commutare la direzione di rotazione utilizzando l'interruttore avanti/indietro sul micromotore.
Se l'unità è impostata su “Funzione di inversione automatica/funzione di avanzamento automatico”, la lima potrebbe danneggiarsi, causando lesioni.

5 Funzionamento

Scheda Memoria

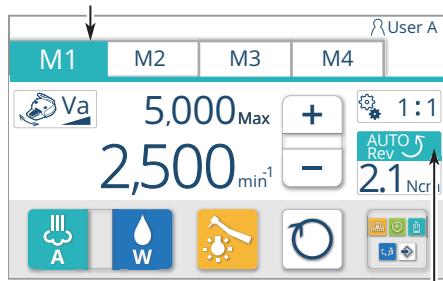



Funzione di inversione automatica/
Funzione di avanzamento automatico

Impostazione della durata della funzione di avanzamento automatico

1. Prendere il micromotore dal portastrumenti

2. Selezionare una memoria dall'interruttore scheda da M1 a M4 e premerla

3. Premere l'interruttore di controllo della coppia per visualizzare la schermata funzione di inversione automatica

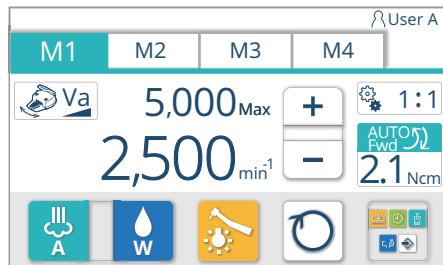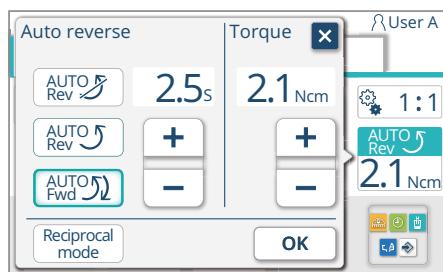

4. Selezionare la funzione di avanzamento automatico dall'impostazione funzione di inversione automatica/funzione di avanzamento automatico

5. Premere l'interruttore per selezionare da 0,0-25,4 secondi

La selezione può essere effettuata a intervalli di 0,1 secondi.

Se si mantiene premuto l'interruttore , l'intervallo di tempo è di 0,5 secondi.

6. Memorizzare la selezione premendo

Viene visualizzata la schermata del micromotore.

Le impostazioni della durata di avanzamento automatico vengono memorizzate nella condizione di avvio dopo l'accensione.




* Per annullare la modifica dell'impostazione, premere senza premere

5 Funzionamento

Impostazione della modalità reciproca

Impostazione avvio

(Esempio) Micromotore MX2 Auto-Rev

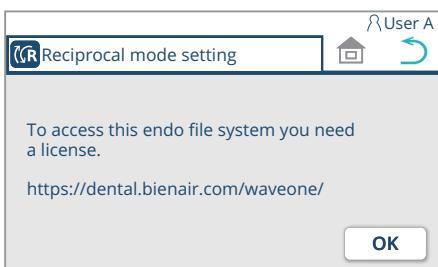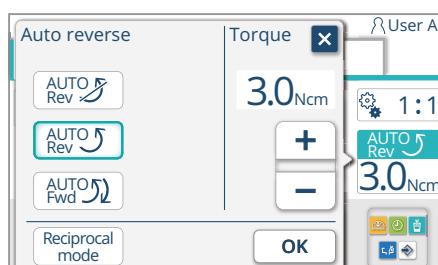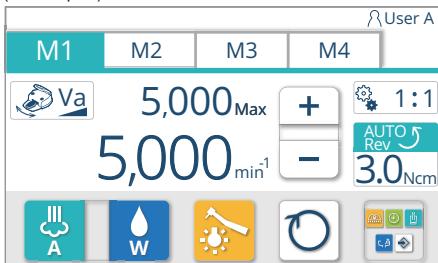

1. Prendere il micromotore dal portastrumenti

2. Impostare la velocità di rotazione su 5.000 min-1 o meno premendo



3. Premere l'interruttore di controllo della coppia



4. Premere l'interruttore reciproco



Quando si seleziona l'interruttore reciproco, il colore del riquadro diventa blu.

* L'interruttore **Reciprocal mode** non viene visualizzato quando la lingua di impostazione è giapponese, o se viene utilizzato un micromotore eccetto MX2.

* Premendo l'interruttore **x** si riporta il display alla schermata del micromotore.

5. Premere l'interruttore **OK**

A seconda della situazione, la schermata del micromotore (modalità reciproca) verrà visualizzata immediatamente oppure potrebbe essere visualizzata una schermata che richiede di acquisire una licenza.

[Quando viene visualizzata la schermata che richiede di acquisire una licenza.]

* I passaggi da 6. a 9. vengono eseguiti solo durante la configurazione iniziale. Una volta completata la configurazione, la schermata del micromotore (modalità reciproca) verrà visualizzata immediatamente.

* Premendo l'interruttore **OK** si riporta il display alla schermata di impostazione della coppia.

6. Premere l'interruttore **OK**

Viene visualizzata la schermata per l'inserimento del codice di attivazione.

7. Ottenere il codice di attivazione dal seguente sito web

[Riferimento] Come ottenere il codice di attivazione [pagina 157]
<https://dental.bienair.com/waveone/>

Quando si ottiene il codice di attivazione, è necessario il codice ID mostrato nella parte superiore sinistra dello schermo.


8. Inserire il codice di attivazione ottenuto nella Procedura 7.

Quando si cambia l'ingresso alfanumerico, premere l'interruttore alfanumerico **123**. Ogni pressione dell'interruttore alterna il display nell'ordine di **123** - **ABC** - **123**.

9. Dopo aver immesso il codice, premere l'interruttore **OK**


5 Funzionamento

Schermata del micromotore (modalità reciproca)

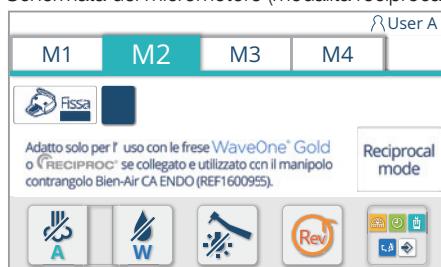

Suona un cicalino e viene visualizzata la schermata del micromotore (modalità reciproca).

L'impostazione della modalità reciproca viene memorizzata nella condizione di avvio dopo l'accensione.

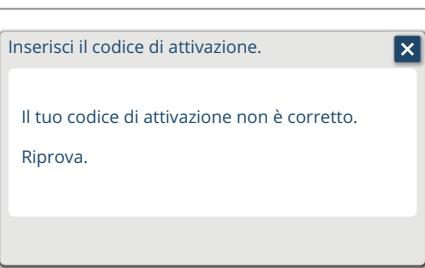

Se il codice di attivazione non è corretto, viene visualizzata la schermata mostrata a sinistra.

Dopo aver premuto l'interruttore **X**, riprendere l'impostazione dalla Procedura 8.

Schermata del micromotore (modalità reciproca)



Annnullamento della modalità reciproca

1. Prendere il micromotore dal portastrumenti

Appare la schermata del micromotore (modalità reciproca).

2. Premere l'interruttore

Reciprocal mode

3. Premere uno dei seguenti interruttori, **AUTO Rev ↗**, **AUTO Rev ↘** o **AUTO Fwd ↕**


Quando si seleziona l'interruttore, il colore del riquadro diventa blu.

* Premendo l'interruttore **X** si riporta il display alla schermata del micromotore.

4. Premere l'interruttore **OK**

Viene visualizzata la schermata del micromotore.

(Esempio) Micromotore MX2 Auto-Rev

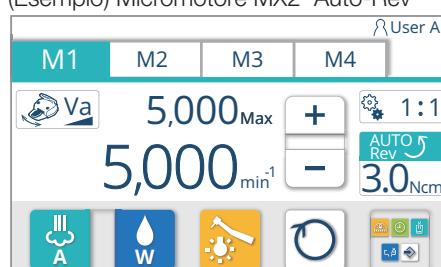

5 Funzionamento

Sito web per ottenere il codice di attivazione



Schermata per l'immissione delle informazioni

Welcome on the activation page
WaveOne® Gold

Dental unit brand *

Name * First name *

Dental office *

Email address *

License code *

ID code *

GENERATE THE ACTIVATION CODE

Your Activation Code

Please enter your activation code in the dental unit screen and get WaveOne activated.

Thank you!

Come ottenere il codice di attivazione

Selezionare “Unità odontoiatrica” mostrata nella figura a sinistra.

1. Immettere le seguenti informazioni nella casella da 1 a 6.

- 1 Selezionare “Belmont”
- 2 Inserire il proprio nome
- 3 Inserire il proprio indirizzo
- 4 Inserire il proprio indirizzo e-mail
- 5 Inserire il codice di licenza contenuto nella casella del contrangolo.
- 6 Immettere il codice ID visualizzato sul pannello a sfioramento dell'unità medica.
[Riferimento] Impostazione della modalità reciproca—
Impostazione avvio— 7. [pagina 155]

2. Immettere le seguenti informazioni nella casella da 1 a 6 e premere


GENERATE THE ACTIVATION CODE

Il codice di attivazione verrà visualizzato nella casella 7.



3. Immettere il codice di attivazione ottenuto nella casella quando richiesto nella Procedura 8— Impostazione avvio— Impostazione della modalità reciproca [pagina 155].

Il contenuto del display è soggetto a modifiche senza preavviso.

5 Funzionamento

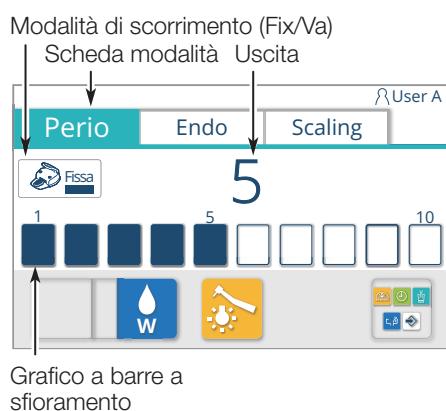

(Esempio di indicazione)
Uscita massima: 8; uscita: 5

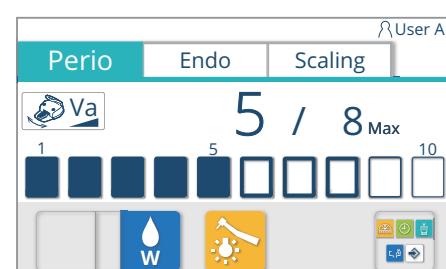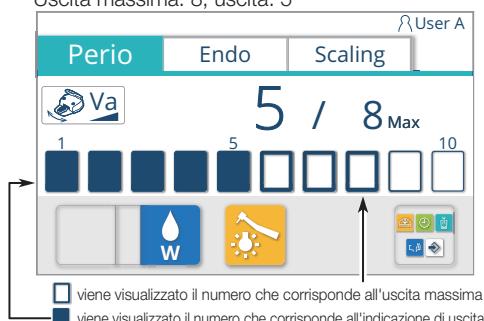

5-19 Ablatore a ultrasuoni

Impostazione interruttore Perio/Endo/Ablazione

Quando l'ablatore a ultrasuoni viene preso dal portastrumenti, viene visualizzata la schermata dell'ablatore elettrico e la modalità viene visualizzata in alto a sinistra.

La modalità può essere selezionata tra "Perio", "Endo" e "Ablazione".

La modalità viene commutata premendo la scheda della modalità.

* Quando si utilizza NO PAIN, la modalità non può essere selezionata.

La modalità di scorrimento può essere selezionata da Fix o Va.

* "Fissa" è consigliato.

Fix (Fissa)

L'uscita è fissa solo con il valore impostato.

1. Prendere l'ablatore a ultrasuoni dal portastrumenti

2. Premere l'interruttore modalità di scorrimento per visualizzare la schermata di impostazione della modalità di scorrimento

3. Selezionare una modalità di scorrimento

4. Memorizzare la selezione premendo

Viene visualizzata la schermata dell'ablatore elettrico.

Le impostazioni della modalità di scorrimento vengono memorizzate nella condizione di avvio dopo l'accensione.

* Per annullare la modifica dell'impostazione, premere senza premere

Va (variabile)

Facendo scorrere il pedale del comando a pedale a sinistra o a destra, l'uscita può essere regolata entro il campo dell'uscita massima.

L'uscita viene diminuita scorrendo verso sinistra e aumentata scorrendo verso destra.


Il grafico a barre a sfioramento e l'indicazione dell'uscita vengono visualizzati in base alla posizione di scorrimento del pedale.

L'impostazione di uscita massima può essere modificata usando il grafico a barre a sfioramento .

L'uscita dell'ablatore elettrico non può essere modificata quando l'ablatore è in funzione. Dopo aver spento l'ablatore, modificare l'uscita utilizzando il grafico a barre a sfioramento .

5 Funzionamento


Modalità di scorrimento Va

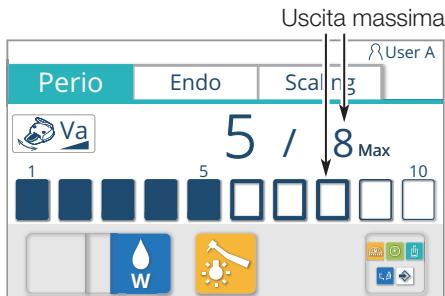

Impostazione dell'uscita massima in modalità di scorrimento Va

1. Prendere l'ablatore a ultrasuoni dal portastrumenti
2. Premere il grafico a barre a sfioramento  che corrisponde al valore di uscita massimo richiesto e selezionare l'uscita massima tra 1 e 10

Modalità di scorrimento Fix

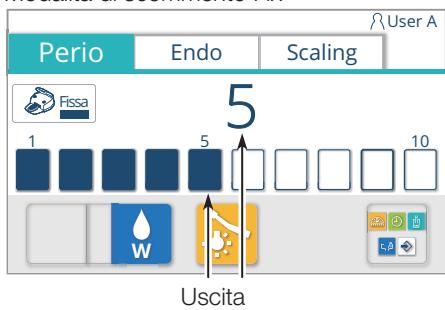


Impostazione dell'uscita massima in modalità di scorrimento Fix


1. Prendere l'ablatore a ultrasuoni dal portastrumenti
2. Premere il grafico a barre tattile  che corrisponde al valore di uscita desiderato per selezionare l'uscita tra 1 e 10 o tra 0 e 10.
(L'uscita 0 è selezionabile solo quando viene utilizzato NSK VARIOS VS170 SCALER o NSK VARIO VS170 LUX SCALER.)

* Quando l'uscita è 0, l'ablatore non vibra.
Impostare su 0 quando si desidera utilizzare l'ablatore solo per l'irrigazione.

(Esempio) Quando l'uscita è 1

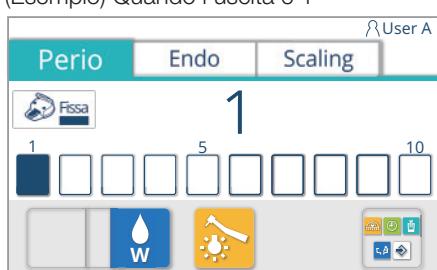

Per impostare l'uscita su 0 Con l'uscita impostata su '1', premendo il grafico a barre tattile  si imposta l'uscita su '0'.

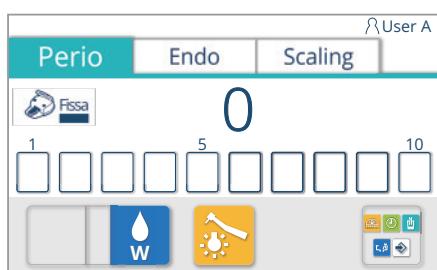

ATTENZIONE




Quando si utilizza il chip diverso dalla specifica OFF di rifornimento idrico, utilizzare l'ablatore con rifornimento idrico ON (acqua che scorre).

Per un uso corretto, assicurarsi di leggere attentamente le istruzioni per l'uso allegate all'ablatore pertinente in anticipo.

Impostazione della memoria per la condizione di avvio dopo l'accensione

Quando viene modificata la seguente impostazione della condizione del manipolo, può essere memorizzata nei passaggi specificati di seguito.

- Uscita massima
[Riferimento] Impostazione dell'uscita massima [pagina 159]
- Condizione dello spruzzo (Acqua ON/OFF)
[Riferimento] Interruttore di spruzzo [pagina 131]
- Condizione luce manipolo (ON/OFF)
[Riferimento] Interruttore luce manipolo [pagina 131]

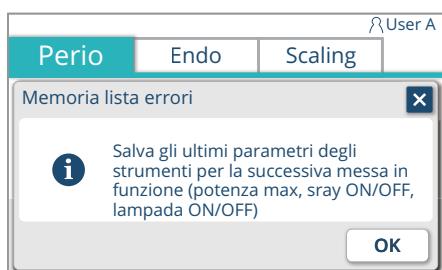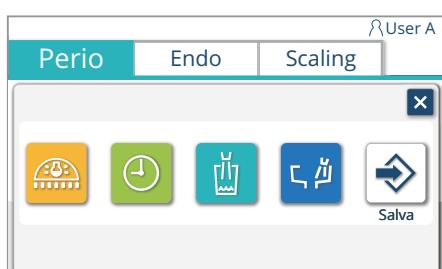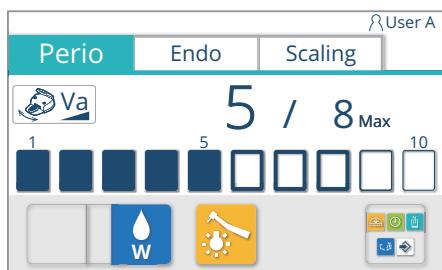

1. Prendere l'ablatore a ultrasuoni dal portastrumenti
2. Selezionare una modalità dalla scheda delle modalità e premerla
3. Cambiare la condizione del manipolo (rotazione massima/spruzzo/condizione della luce del manipolo).
4. Premere l'interruttore di richiamo menu per richiamare la schermata del menu

5. Premere l'interruttore memoria Viene visualizzata la schermata di impostazione memoria per la condizione di avvio.

6. Confermare l'impostazione da registrare, quindi premere per memorizzarla.

* Se non è premuto ma è premuto, l'impostazione modificata è valida fino allo spegnimento dell'interruttore principale, ma l'impostazione ritorna a quella prima della modifica una volta spento l'interruttore principale.



Quando si utilizza il chip diverso dalla specifica OFF di rifornimento idrico, utilizzare l'ablatore con rifornimento idrico ON (acqua che scorre).

Per un uso corretto, assicurarsi di leggere attentamente le istruzioni per l'uso allegate all'ablatore pertinente in anticipo.

5 Funzionamento

Modalità di scorrimento (Va/Fix)




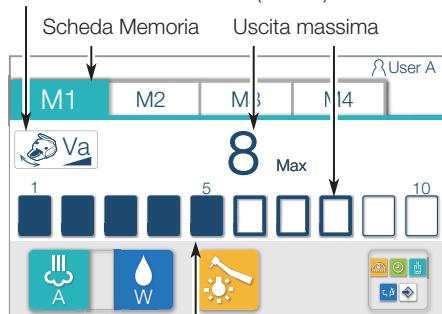


Grafico a barre a sfioramento (uscita limite superiore)

(Esempio di indicazione)

Uscita massima:10/Uscita operativa: 5

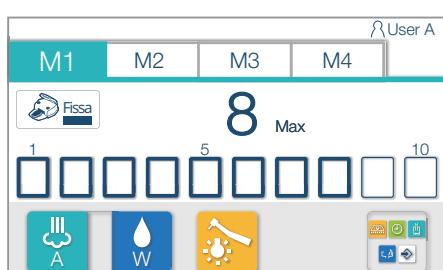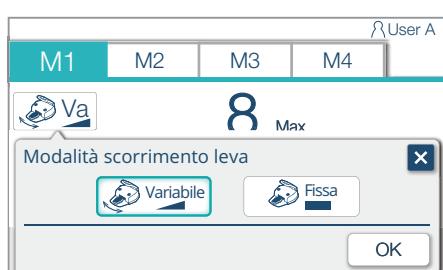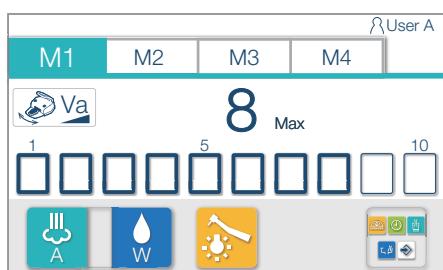

5-20 Turbina ad aria/motore pneumatico

Impostazione della modalità di scorrimento

L'impostazione iniziale di un manipolo all'accensione può essere copiata in un'altra memoria utente.

Quando la turbina ad aria/il motore pneumatico vengono presi dal portastrumenti, viene visualizzata la schermata della turbina.

La memoria può essere selezionata da quattro memorie (da M1 a M4). Il numero di memoria può essere cambiato premendo la scheda memoria.

La modalità di scorrimento può essere selezionata come Va o Fix.

La memoria della turbina ad aria/del motore pneumatico non può essere impostata individualmente per Va e Fix.

Le impostazioni Va e Fix devono essere comuni da M1 fino a M4.

Va (variabile)

Impostare l'uscita massima come spiegato a [pagina 162].

Durante il funzionamento, l'uscita può essere regolata entro la gamma di questa uscita massima facendo scorrere il pedale del comando a pedale verso sinistra (per diminuire) o verso destra (per aumentare) o premendo (per aumentare) o rilasciando (per diminuire) il pedale.

Fix

Impostare l'uscita massima come spiegato a [pagina 162].

L'uscita del limite superiore può essere regolata sul valore di uscita massimo premendo il pedale, indipendentemente dalla posizione del pedale del comando a pedale.

1. Prendere la turbina ad aria/il motore pneumatico dal portastrumenti

2. Premere l'interruttore modalità di scorrimento per visualizzare la schermata di impostazione della modalità di scorrimento

3. Selezionare una modalità di scorrimento

4. Memorizzare la selezione premendo


Venne visualizzata la schermata della turbina.

* Per annullare la modifica dell'impostazione, premere senza premere

5 Funzionamento


(Esempio di indicazione)

Uscita massima: Cambiare da 8 a 10

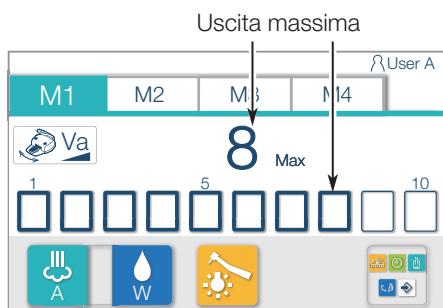

Impostazione dell'uscita massima

1. Prendere la turbina ad aria/il motore pneumatico dal portastrumenti
2. Premere il grafico a barre a sfioramento che corrisponde al valore di uscita massimo richiesto e selezionare l'uscita massima tra 1 e 10

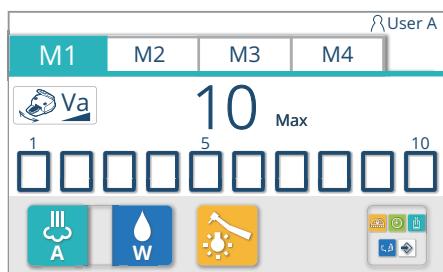

Impostazione della memoria per la condizione di avvio dopo l'accensione

Quando viene modificata la seguente impostazione della condizione del manipolo, può essere memorizzata nei passaggi specificati di seguito.

- Uscita massima

[Riferimento] Impostazione dell'uscita massima [pagina 162]



- Condizione di spruzzo (ON/OFF/Acqua/Aria)

[Riferimento] Interruttore di spruzzo [pagina 131]

- Condizione luce manipolo (ON/OFF)


[Riferimento] Interruttore luce manipolo [pagina 131]

1. Prendere la turbina ad aria/il motore pneumatico dal portastrumenti
 2. Selezionare una memoria dall'interruttore scheda da M1 a M4 e premerla
 3. Cambiare la condizione del manipolo (uscita massima/spruzzo/condizione della luce del manipolo)
 4. Premere l'interruttore di richiamo menu  per richiamare la schermata del menu
 5. Premere l'interruttore memoria 
Viene visualizzata la schermata di impostazione memoria per la condizione di avvio.
 6. Confermare l'impostazione visualizzata e premere  per memorizzarla
- * Se  non è premuto ma  è premuto, l'impostazione modificata è valida fino allo spegnimento dell'interruttore principale, ma l'impostazione ritorna a quella prima della modifica una volta spento l'interruttore principale.

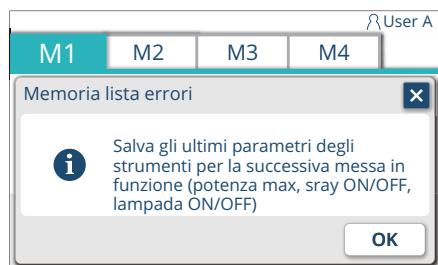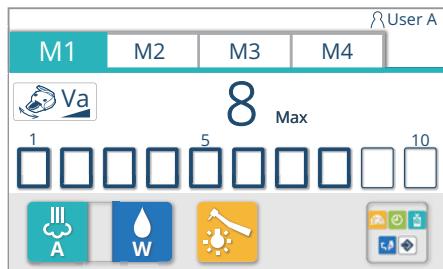

Per un uso corretto, assicurarsi di leggere attentamente le istruzioni per l'uso allegate alla turbina ad aria/al motore pneumatico pertinenti in anticipo.

Supporto

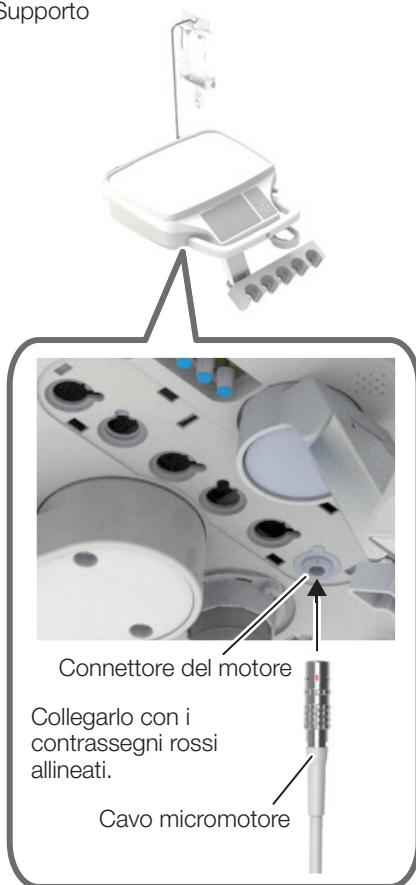


5–21 Motore dell'impianto

5–21–1 Metodo di collegamento

1. Collegare il cavo del micromotore MX-i LED 3a Gen. al connettore del motore.


Assicurarsi che la spina sia orientata correttamente.
* Collegarlo con i contrassegni rossi allineati.

Asta

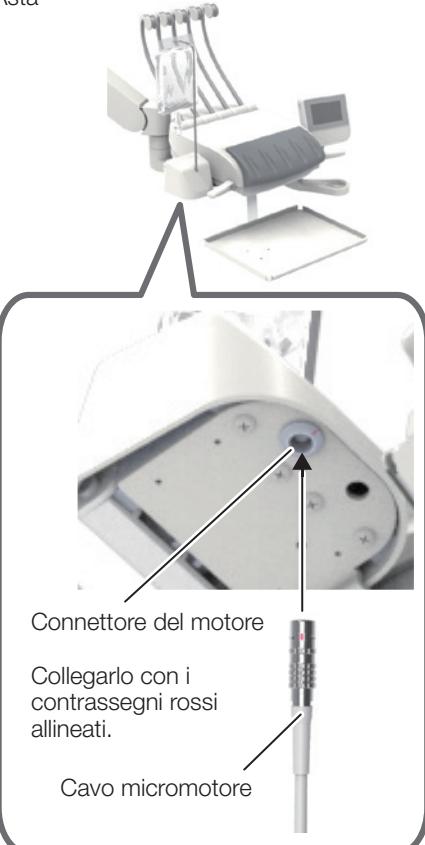

5 Funzionamento

Supporto per irrigazione

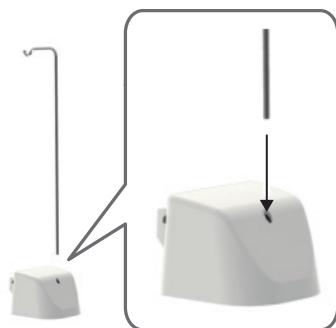

2. Inserire il supporto di irrigazione nel foro sul retro del coperchio della pompa.

Il supporto viene utilizzato per appendere un flacone di soluzione salina.



3. Controllare che la linea di irrigazione non sia scaduta o danneggiata.



ATTENZIONE

Usare le linee di irrigazione originali di Bien-Air. Sono sterili e monouso. Non riutilizzarle.

4. Estrarre dalla borsa una linea di irrigazione monouso.



5. Collegare la linea di irrigazione al tubo di nebulizzazione di un manipolo (diritto o contrangolo).



5 Funzionamento



6. Aprire il coperchio della pompa. Fissare la cassetta della linea di irrigazione sulla pompa di irrigazione.

Assicurarsi che la cassetta sia stata correttamente fissata.

7. Chiudere il coperchio della pompa.

Se c'è resistenza quando si chiude il coperchio, riaprirlo e controllare che la cassetta sia posizionata correttamente.

Quando il coperchio è chiuso correttamente, scatta in posizione.

ATTENZIONE

Quando il coperchio è aperto o non è collegata una linea di irrigazione, non azionare la pompa. Quando si apre o si chiude il coperchio della pompa, fare attenzione a non schiacciarsi le dita.

5 Funzionamento



Cappuccio protettivo

8. Rimuovere il cappuccio protettivo dalla linea di irrigazione. Quindi, inserire la punta della linea di irrigazione nel flacone della soluzione salina.




Linea di irrigazione


ATTENZIONE

Se il flacone della soluzione salina è vuoto, non può essere rilevato automaticamente dall'apparecchiatura. Prima del funzionamento, controllare il livello di soluzione salina rimanente.

9. Con il fermo, fissare la linea di irrigazione sul cavo del micromotore.

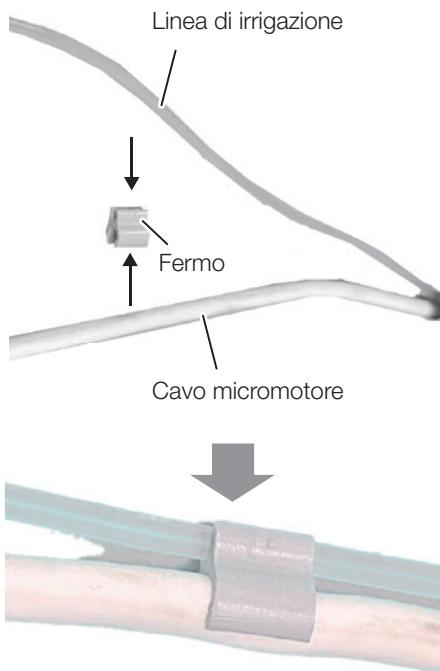

5–21–2 Metodo di funzionamento

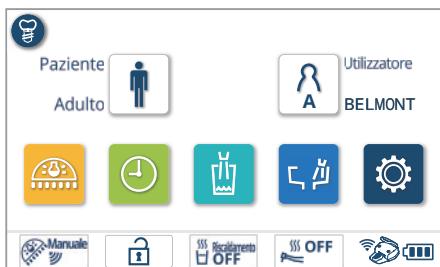


1. Premere l'interruttore dell'impianto.

Viene visualizzata la schermata delle memorie dell'impianto.



2. Selezionare una memoria di impianto.

Viene visualizzata la schermata dell'impianto.

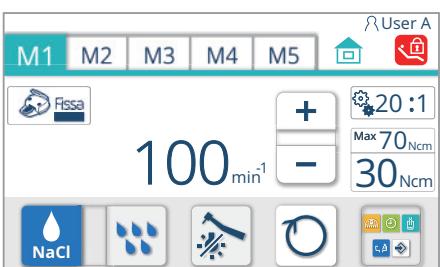

(Se si sceglie M2)


3. Selezionare una memoria.

È possibile scegliere tra cinque memorie, da M1 a M5. Selezionare la scheda corrispondente alla memoria che si desidera scegliere.


Può anche essere utilizzato il comando a pedale (con interruttori joystick).
[Riferimento] Pagina 76

Ciascuna pressione sull'interruttore a pedale cambia la memoria selezionata come segue: M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M1.

Quando passa da M5 a M1, il suono di funzionamento cambia per segnalare che il ciclo di commutazione è stato completato.

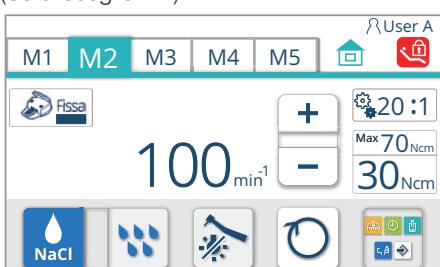


Premendo l'interruttore si ritorna alla schermata iniziale.

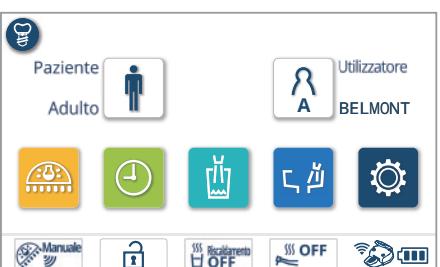

Premendo nuovamente l'interruttore dell'impianto viene visualizzata la scheda del numero di memoria che era stato visualizzato nella schermata dell'impianto al momento della chiusura della schermata.

5–21–3 Impostazione delle condizioni del manipolo

È possibile impostarle con gli interruttori mostrati di seguito.

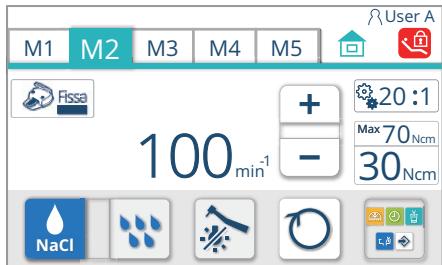

Impostazione della modalità di scorrimento

La modalità di scorrimento può essere impostata solo su Fissa.


Fissa

In questa modalità, è possibile regolare la velocità di rotazione fino alla velocità impostata premendo il pedale, indipendentemente dal fatto che il pedale sia a destra o a sinistra.

⚠ ATTENZIONE

(Esempio di indicazione)

Se viene modificato a 100 min⁻¹

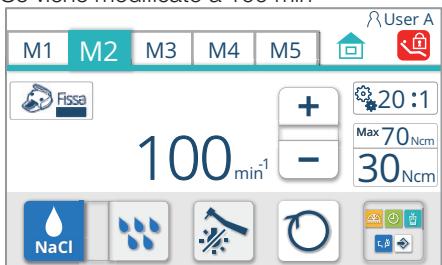

Impostazione dell'uscita massima

1. Premere l'interruttore “+” o “-”.

Con questi interruttori è possibile aumentare o diminuire la velocità di rotazione massima.


Tra 2.000 e 250 min⁻¹: in incrementi di 50 min⁻¹

Tra 250 e 50 min⁻¹: in incrementi di 25 min⁻¹

Tra 50 e 5 min⁻¹: in incrementi di 5 min⁻¹

(se il rapporto di riduzione è impostato su 20: 1)

Quando il manipolo è in funzione, viene visualizzata la velocità di rotazione effettiva. Quando non è in funzione, viene visualizzata la velocità di rotazione massima impostata.

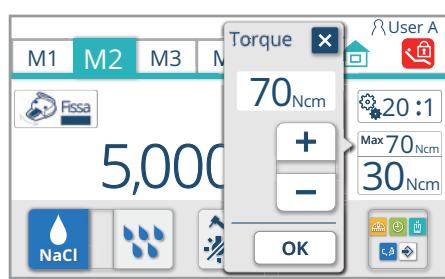

Impostazione del valore di coppia


1. Premere l'interruttore di controllo della coppia.
2. Dal valore tra M1 e M5, selezionare la scheda che corrisponde alla memoria per cui si desidera configurare le impostazioni.
3. Premere l'interruttore di controllo della coppia per visualizzare la schermata di impostazione del valore della coppia.
4. Premere l'interruttore o per impostare la coppia sul valore desiderato.
Il valore della coppia viene visualizzato e può essere impostato solo quando è inferiore a 100 min^{-1} e il rapporto di riduzione è 20:1.
<Valori selezionabili>
Tra 10 e 70 Ncm in incrementi di 5 Ncm
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 o 70
Premendo l'interruttore si aumenta il valore della coppia negli incrementi di cui sopra.
Premendo l'interruttore si riduce il valore della coppia negli incrementi di cui sopra.
5. Premere l'interruttore per salvare la modifica.
Viene visualizzata la schermata dell'impianto.

* Se si annulla la modifica dell'impostazione, non premere l'interruttore . Premere invece l'interruttore .


Impostazione delle memorie di accensione predefinite

Se si modifica una delle seguenti impostazioni delle condizioni del manipolo, è possibile salvare le modifiche procedendo come segue:

- Uscita massima
 - [Riferimento] Impostazione dell'uscita massima [pagina 169]
 - Valore di coppia
 - [Riferimento] Impostazione del valore di coppia [pagina 170]
 - Stato di irrigazione con soluzione salina (ON o OFF)
 - [Riferimento] Interruttore di commutazione irrigazione con soluzione salina [pagina 132]
 - Volume di irrigazione con soluzione salina
 - [Riferimento] Interruttore di commutazione del volume di irrigazione con soluzione salina [pagina 132]
 - Stato della luce del manipolo (ON o OFF)
 - [Riferimento] Interruttore luce manipolo [pagina 131]

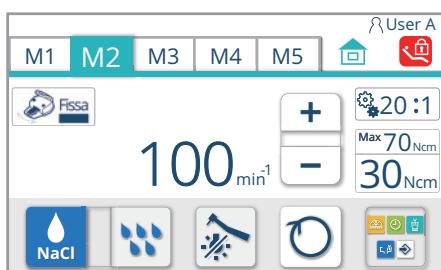


1. Dal valore tra M1 e M5, selezionare la scheda che corrisponde alla memoria per cui si desidera configurare le impostazioni.
 2. Modificare le condizioni del manipolo (la potenza massima, lo stato dell'irrigazione con soluzione salina, il volume dell'irrigazione con soluzione salina e/o lo stato della luce del manipolo) secondo necessità.
 3. Premere l'interruttore “Mostra menu”  per visualizzare la schermata del menu.
 4. Premere l'interruttore “Salva” .

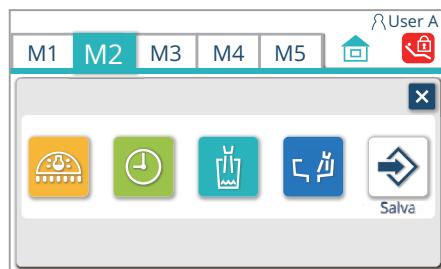

5. Confermare il contenuto visualizzato e premere **OK** per salvarlo.

* Se non si preme l'interruttore **OK** e invece si preme l'interruttore **X**, le modifiche rimarranno effettive fino a quando non si spegne l'interruttore principale, ma spegnendolo si eliminano le modifiche e si ritorna alle impostazioni precedenti.

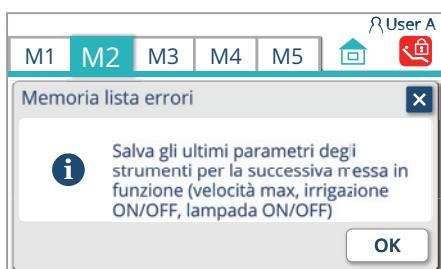

Per un uso corretto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso fornite in anticipo con il micromotore.



5 Funzionamento



Funzione di visualizzazione conversione marce (MX-i LED 3a Gen.)

Questa funzione converte il rapporto di riduzione del manipolo contrangolo/diritto collegato al micromotore e visualizza un valore che si avvicina alla velocità di rotazione effettiva.

I seguenti due rapporti di riduzione sono convertiti l'uno nell'altro:

1:1 (velocità costante)

20:1 (1/20 decelerazione)



1. Dal valore tra M1 e M5, selezionare la scheda che corrisponde alla memoria per cui si desidera configurare le impostazioni.

2. Premere l'interruttore di cambio rapporto di riduzione 1:1 per visualizzare la schermata di cambio rapporto di riduzione.


3. Selezionare il rapporto di riduzione desiderato.

4. Premere l'interruttore per salvare la modifica.

Venne visualizzata la schermata dell'impianto.

L'impostazione del cambio del rapporto di riduzione viene salvata come parte delle impostazioni di accensione predefinite.

* Se non si salva la modifica dell'impostazione, non premere l'interruttore . Premere invece l'interruttore .

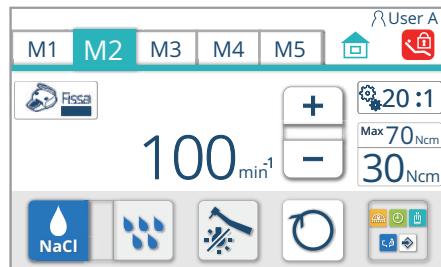


5-22 Sirinhe

Siringa BT14 3WAY
Siringa SYR-20 3WAY
Siringa tipo 77 3WAY
Siringa LUZZANI 6WAY (Minilight)
Siringa LUZZANI 3WAY (Minilight)
Siringa LUZZANI 3WAY (Minimate)
Siringa DCI 3439 3WAY
Siringa DCI 3459 3WAY



Per un uso corretto, assicurarsi di leggere attentamente le istruzioni per l'uso
allegate alla siringa pertinente in anticipo.

Siringa BT14 3WAY

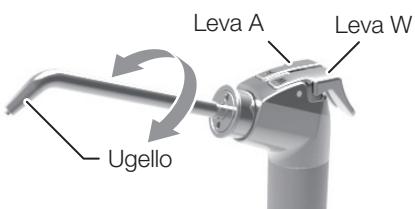


Siringa SYR-20 3WAY

• Tipo ad angolo



Siringa tipo 77 3WAY

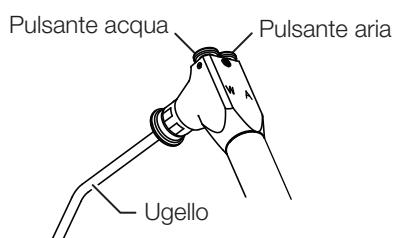

Punta dell'ugello
(Comune a tutti i tipi)



Funzionamento della siringa BT14 3WAY/della siringa SYR-20 3WAY/della siringa tipo 77 3WAY

(1) Spruzzo di acqua/aria

Premere la leva W/ il pulsante acqua per far uscire l'acqua.

Premere la leva A/ il pulsante aria per far uscire l'aria.

Premere la leva AVI pulsante una per far uscire l'aria.
Premere simultaneamente entrambi i pulsanti/le leve per far uscire lo spruzzo.
L'acqua fuoriesce dal centro della punta e l'aria fuoriesce dalla circonferenza
della punta.

(2) Rotazione dell'ugello

L'ugello ruota di 360°.

Se l'aria viene fornita immediatamente dopo l'uso di acqua o dopo aver fissato l'ugello, potrebbe fuoriuscire una piccola quantità di acqua rimasta nell'ugello. Quando si eroga aria, premere la leva A/il pulsante aria per due o tre volte per confermare che l'acqua non fuoriesca.



5 Funzionamento

5-23 Comando a pedale (cablato/wireless)

Tipo : ES (cablato)



Tipo : ESF (wireless)

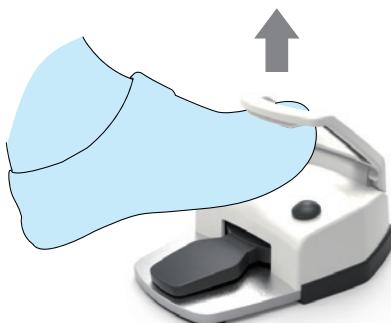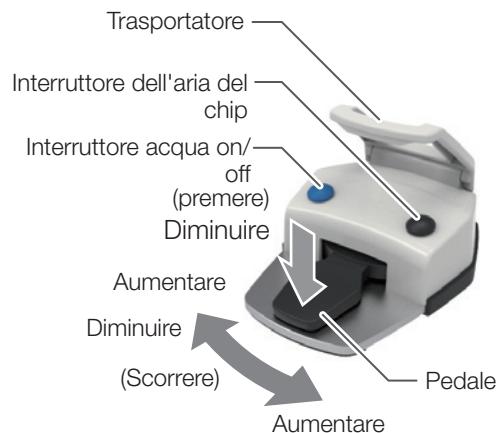

Pedale

<Quando si utilizza il micromotore>

La rotazione e l'uscita possono essere regolate dai livelli di scorrimento e di pressione del pedale.

(Entro l'intervallo della rotazione massima indicata)

In modalità Va, la rotazione viene diminuita facendo scorrere il pedale verso sinistra e aumentata facendolo scorrere verso destra.

<Quando si utilizzano la turbina ad aria/il motore pneumatico>

Il funzionamento è possibile solo con un'uscita massima di 10 max, e l'operazione di accensione/spegnimento può essere eseguita premendo. Non è possibile regolare l'uscita in base ai livelli di scorrimento/pressione.

<Quando si utilizza l'ablatore a ultrasuoni>

L'operazione viene attivata premendo il pedale.

Non è possibile regolare l'uscita in base ai livelli di scorrimento durante il funzionamento.

* L'uscita dell'ablatore elettrico non può essere modificata quando l'ablatore è in funzione. Dopo aver spento l'ablatore, modificare l'uscita, quindi attivare di nuovo l'ablatore.

L'uscita può essere regolata dal livello di scorrimento del pedale.

Non è possibile regolare l'uscita in base ai livelli di pressione.

(Entro l'intervallo dell'uscita massima indicata)

L'uscita attuale viene diminuita facendo scorrere il pedale verso sinistra e aumentata facendolo scorrere verso destra.

Interruttore acqua on/off

La modalità di spruzzo può essere commutata.

Interruttore dell'aria del chip


L'aria viene scaricata dal chip del micromotore o della turbina ad aria/del motore pneumatico.

Trasportatore

Il comando a pedale può essere spostato appendendolo sopra il piede.

Le batterie non sono incluse. Inserire le batterie facendo riferimento a "Come sostituire le batterie del pedale wireless" [pagina 176].

S1

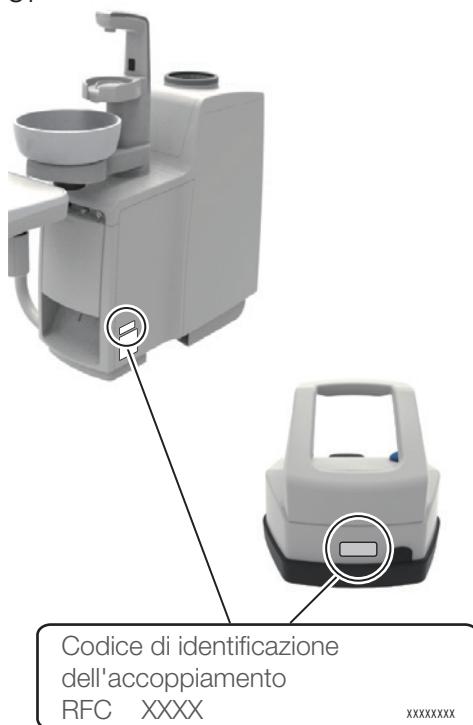

5-23-1 Conferma dell'accoppiamento del pedale wireless

Sul pedale wireless e sul lato dell'unità sputacchiera, sono applicati adesivi indicanti il codice di identificazione dell'accoppiamento.
Confermare che sia indicato lo stesso codice di identificazione di accoppiamento.

S3/S4





Azione il pedale wireless entro un metro dal prodotto.

AVVERTENZA

Se più di un'unità del prodotto viene utilizzata nello stesso ambiente, fare attenzione a non utilizzare un pedale wireless accoppiato con un'altra unità.

5–23–2 Come sostituire le batterie del pedale wireless

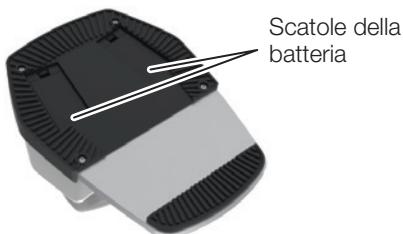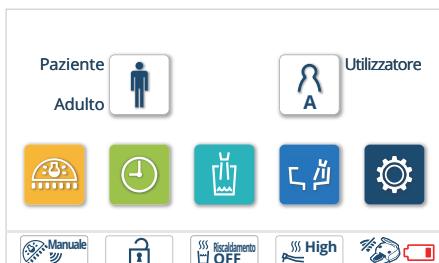


ATTENZIONE

Quando l'indicazione del livello della batteria sulla schermata iniziale diventa sostituire immediatamente le batterie con batterie nuove.

- Spegnere l'interruttore principale

- Rimuovere i coperchi delle due scatole della batteria sul retro del pedale wireless

Spegnere l'interruttore principale durante la sostituzione delle batterie.
In caso contrario, se gli interruttori o un pedale vengono premuti accidentalmente, provocano movimenti involontari, con conseguenti danni o lesioni, oppure il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.

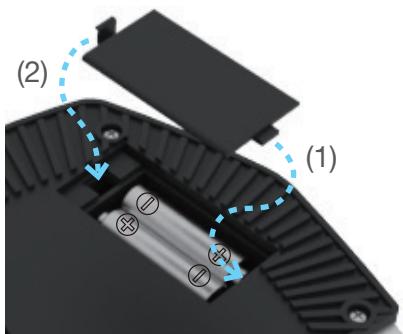

- Inserire due batterie AA nuove/caricate in ciascuna scatola. Utilizzare batterie alcaline a secco o batterie NiMH.

Fare attenzione a posizionare ciascuna batteria nella direzione corretta (positiva/negativa).

- Fissare il coperchio di ciascuna scatola batteria nell'ordine indicato dalle frecce (1, 2).

ATTENZIONE

Non utilizzare batterie di tipo diverso da quello specificato. Non mescolare batterie nuove con batterie vecchie, né batterie di tipo diverso (es. batterie alcaline a secco con batterie NiMH). Si noti che l'uso improprio delle batterie provoca perdite o rotture.

Estrarre le batterie se l'unità non verrà utilizzata per una settimana o più.

Punto di collegamento

C'è un punto di collegamento dove il tappo di gomma è stato rimosso.

Poltrona S1/S3 (poltrona contour)




Tappo in gomma


Unità sputacchiera S4 (piedistallo)



Come rimuovere il coperchio

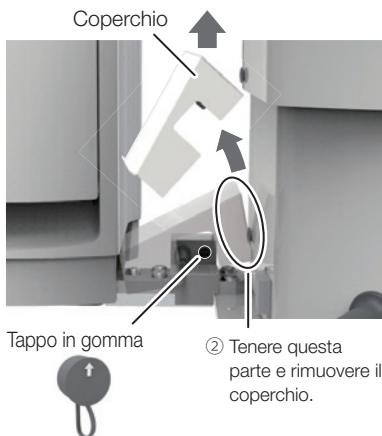

Come fissare il coperchio

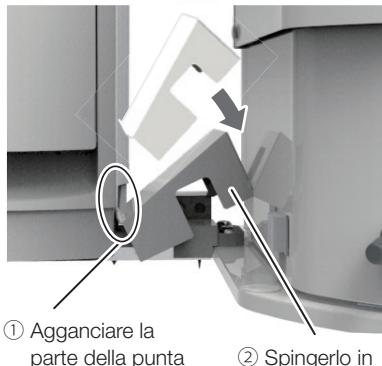

① Agganciare la parte della punta del coperchio al coperchio lato sputacchiera.
② Spingerlo in basso.

5-23-3 Collegamento del cavo di un pedale wireless

Se il pedale wireless non funziona normalmente anche dopo aver sostituito le batterie, l'unità può essere utilizzata collegando il cavo contenuto nella confezione.

Le onde elettriche utilizzate per il pedale wireless potrebbero essere interrotte a seconda delle condizioni in cui è utilizzato il prodotto, il che potrebbe influire sulle funzioni del manipolo. Non si tratta di un malfunzionamento del prodotto.

Assicurarsi di spegnere l'interruttore principale prima di collegare il cavo. In caso contrario, l'unità potrebbe non funzionare normalmente.

Prima di utilizzare il cavo, estrarre le batterie dalle scatole delle batterie. In caso contrario, l'unità potrebbe non funzionare normalmente.

Quando si rimuove il cavo, assicurarsi di tenere la parte indicata mentre lo si tira all'esterno. In caso contrario, potrebbe verificarsi disconnessione.


La connessione del cavo è solo per uso temporaneo e non deve essere utilizzata in modo permanente.

5 Funzionamento

Carrello medico (unità di giunzione)



Pedale wireless

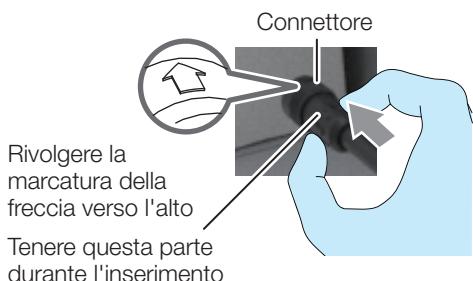


Come collegare

Quando si collega il cavo alla poltrona o all'unità sputacchiera, rimuovere il tappo in gomma e inserire il connettore finché non scatta in posizione, con la marcatura della freccia rivolta verso l'alto.

Lo stesso vale quando si collega il cavo al lato del pedale wireless.

* Conservare il tappo in gomma del pedale wireless per evitare di perderlo.

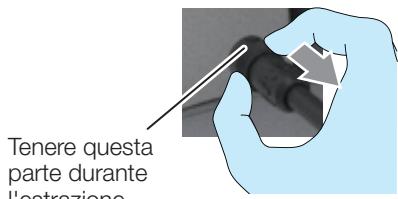


Come rimuovere

Quando si rimuove il cavo, assicurarsi di tenere la parte indicata nella figura mentre lo si estrae, quindi fissare il tappo in gomma.

Assicurarsi di fissare il tappo di gomma prima di utilizzare l'unità. L'uso senza fissare il tappo in gomma consente l'ingresso di polvere e acqua, con conseguente guasto.

5–23–4 Precauzioni per l'uso del pedale wireless

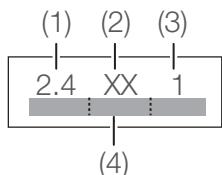

Interferenze in radiofrequenza con questo prodotto.

Questo prodotto contiene apparecchiature radio che utilizzano la banda completa da 2,4 GHz ((1)) e le interferenze con la banda di identificazione mobile ((4)) sono inevitabili. Il sistema FSK ((2)) è utilizzato come metodo di modulazione e la distanza di interferenza presupposta è di 10 metri ((3)).

La distanza di interferenza presupposta indica la distanza alla quale è prevista l'interferenza in radiofrequenza sulle stazioni radio locali o sulle stazioni radio a bassa potenza specificate.

Molti altri dispositivi, compresi quelli descritti di seguito, utilizzano la stessa banda di frequenza di questo prodotto: dispositivi industriali quali forni a microonde, dispositivi scientifici e medici, stazioni radio locali per l'identificazione di oggetti mobili utilizzati per linee di produzione nelle fabbriche (stazioni radio che richiedono una licenza), stazioni radio a bassa potenza specificate (stazioni radio che non richiedono una licenza) e stazioni radio amatoriali (stazioni radio che richiedono una licenza).

1) Controllare che non ci siano stazioni radio locali per l'identificazione di oggetti mobili o stazioni radio a bassa potenza specificate in funzione nelle vicinanze prima di iniziare a utilizzare questo prodotto.

2) Se si nota che questo prodotto provoca interferenze in radiofrequenza pericolose su una stazione radio per l'identificazione di oggetti mobili, arrestare immediatamente tutte le emissioni delle onde radio e contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.

3) Se si riscontrano problemi come un caso in cui questo prodotto causa interferenze in radiofrequenza pericolose su una stazione radio a basso consumo specificata per l'identificazione di oggetti mobili, contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.

I dispositivi elencati di seguito potrebbero causare interferenze in radiofrequenza nella banda 2,4 GHz:

- Dispositivi LAN wireless

Computer per ricevute (utilizzati in ambiente wireless ospedaliero), mouse, tastiere (Bluetooth, banda 2,4 GHz), microscopi, telecamere intraorali, apparecchiature radiografiche panoramiche, TC, ecc.

- Apparato per l'identificazione di oggetti mobili (come dispositivi antifurto, sistemi di monitoraggio di entrata e uscita, ecc.)

- Altri (come bisturi di cauterizzazione, forni a microonde, ecc.)

Certificazione dell'apparecchiatura

Gli strumenti wireless integrati in questo prodotto sono certificati come dispositivi a radiofrequenza per le comunicazioni a bassa potenza in conformità al Radio Act.

I certificati sono indicati sull'apparecchiatura a radiofrequenza. Pertanto, per utilizzare questo prodotto non è richiesta alcuna licenza. Se si esegue una delle azioni elencate di seguito con questo prodotto, tuttavia, si potrebbe violare la legge ed essere puniti.

- Smontaggio o modifica degli strumenti a radiofrequenza integrati in questo prodotto

- Rimozione delle etichette dei certificati dagli strumenti a radiofrequenza incorporati in questo prodotto

Specifiche del pedale wireless

Sistema di trasmissione: F1D (FSK)

Potenza di trasmissione massima: 1 mW

Batteria: 4 × batterie AA

(batteria alcalina o batteria NiMH (ricaricabile))

Durata della batteria: circa 1.640 ore

- Utilizzo delle batterie AA Eneloop

- Utilizzate negli ambulatori medici per 15 - 20 pazienti al giorno

- Utilizzate per 5 giorni alla settimana, in uno dei quali vengono utilizzate solo al mattino

* La durata della batteria varia in base all'ambiente di utilizzo (frequenza di utilizzo, qualità radio, ecc.).

* Eneloop è un marchio registrato del Gruppo Panasonic.

5-24 Pannello di manutenzione

(1) Connettore di servizio per l'acqua

Utilizzato per fornire acqua a dispositivi esterni.


(2) Manopola di controllo alimentazione acqua per (1) connettore di servizio per l'acqua.

Utilizzata per regolare la quantità d'acqua fornita per (1) connettore di servizio per l'acqua.


(3) Connettore di servizio per l'aria

Utilizzato per fornire aria a dispositivi esterni.

(4) Interruttore principale

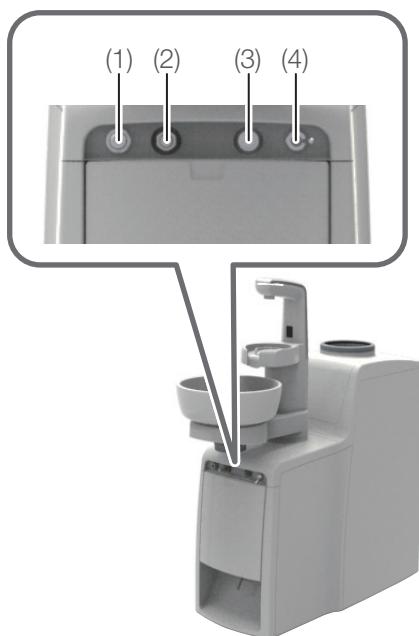

5-25 Manipolo (supporto assistente)

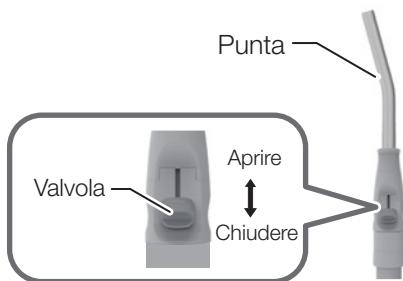


Manipolo di aspirazione

Prendendo il manipolo di aspirazione dal supporto assistente, l'aspirazione si avvia.

Poiché è previsto un circuito di ritardo, l'aspirazione non si interrompe immediatamente quando il manipolo di aspirazione viene riportato al supporto assistente. L'aspirazione continua per circa 4 secondi.

Il volume di aspirazione può essere controllato aprendo o chiudendo la valvola.

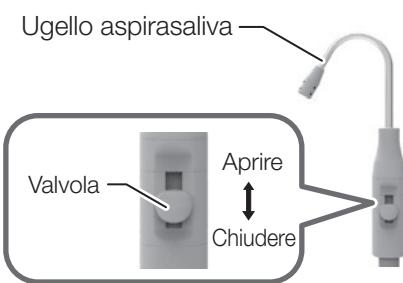


Manipolo aspirasaliva

Prendendo il manipolo aspirasaliva dal supporto assistente, l'aspirazione si avvia.

Poiché è previsto un circuito di ritardo, l'aspirazione non si interrompe immediatamente quando il manipolo aspirasaliva viene riportato al supporto dell'assistente. L'aspirazione continua per circa 4 secondi.

Il volume di aspirazione può essere controllato aprendo o chiudendo la valvola.

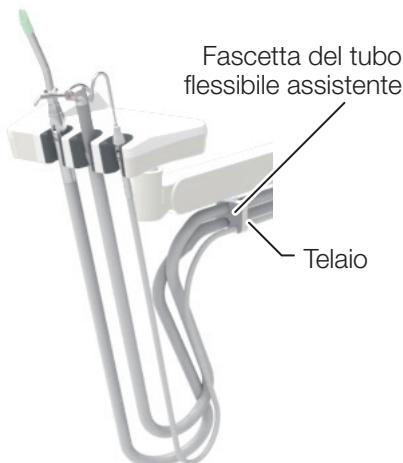


5-26 Fascetta del tubo flessibile assistente

È possibile fissare il tubo flessibile per impedire che i tubi flessibili del manipolo entrino a contatto con il pavimento.

La fascetta del tubo flessibile assistente è amovibile dal telaio, il che è adatto per pulizia.

[Riferimento] Fascetta del tubo flessibile assistente [pagina 266]

5-27 Riempimento di un bicchiere

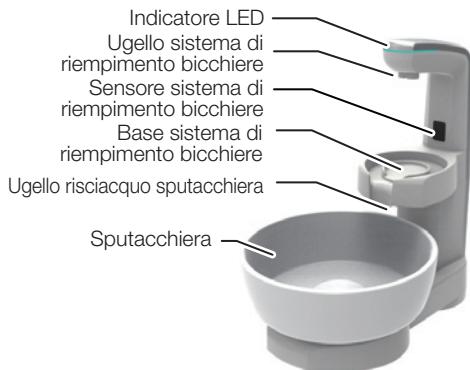

Pannello a sfioramento




Interruttore del sistema di riempimento bicchiere

Interruttore risciacquo sputacchiera

Pannello di comando assistente

Interruttore del sistema di riempimento bicchiere

Interruttore risciacquo sputacchiera

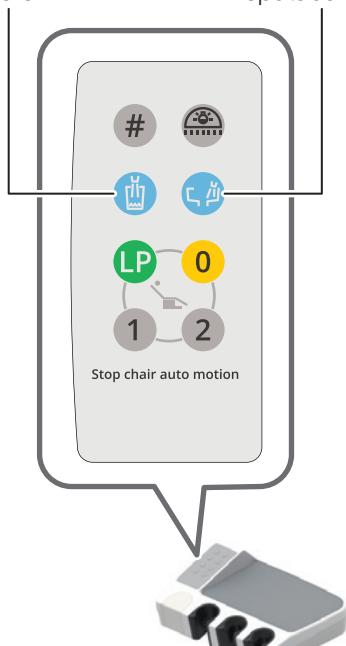

	Metodo di riempimento del bicchiere
Riempimento automatico del bicchiere con controllo sensore (Bicchiere, rilevamento del livello dell'acqua)	<p>Quando un bicchiere è posizionato sulla base del sistema di riempimento bicchiere, un sensore rileva il bicchiere e lo riempie con la quantità specificata di acqua.</p> <p>Per interrompere il riempimento, premere l'interruttore di riempimento bicchiere sul pannello a sfioramento o sul pannello di comando assistente.</p> <p>Quando sulla base del sistema di riempimento bicchiere viene collocato un bicchiere con acqua rimanente, questo verrà riempito con la quantità di acqua ridotta corretta.</p> <p>* Anche quando un bicchiere completamente pieno è posizionato sulla base, viene fornita una piccola quantità di acqua per rilevare il livello dell'acqua.</p> <p>[Rif] Impostazione del livello dell'acqua nel sistema di riempimento bicchiere [pagina 237]</p>
Sistema di riempimento bicchiere manuale	<p>Quando si preme l'interruttore del sistema di riempimento bicchiere sul pannello a sfioramento o sul pannello di comando assistente, viene fornita acqua per il tempo specificato.</p> <p>Per interrompere il riempimento, premere nuovamente l'interruttore del sistema di riempimento bicchiere .</p>

Se "risciacquo sputacchiera" è impostato su "risciacquo continuo", l'acqua viene fornita dall'ugello di risciacquo sputacchiera per lavare la sputacchiera mentre il bicchiere viene riempito.

Per interrompere il risciacquo, premere l'interruttore di risciacquo sputacchiera sul pannello a sfioramento o sul pannello di comando assistente.

Se sulla superficie del sensore di riempimento bicchiere sono presenti gocce o sporco, il sistema di riempimento bicchiere potrebbe non funzionare correttamente. In tal caso, pulire le gocce o lo sporco dopo aver portato il sensore in modalità di disattivazione.

Modalità di disattivazione sensore (modalità di manutenzione della base del sistema di riempimento bicchiere)

La modalità di disattivazione del sensore può essere attivata tenendo premuto l'interruttore del sistema di riempimento bicchiere sul pannello a sfioramento o sul pannello di comando assistente per 2 secondi o più. Nella modalità di disattivazione sensore, vengono emessi segnali acustici continui e il controllo del sensore è disattivato per il sistema di riempimento automatico del bicchiere. L'indicatore LED sull'unità sputacchiera diventa rosa.

Per uscire dalla modalità di disattivazione sensore, premere di nuovo l'interruttore del sistema di riempimento bicchiere . L'indicatore LED torna al colore originale.

5-28 Indicatore LED

Indicatore LED



Il colore degli indicatori LED mostra lo stato dell'unità/della poltrona.

[ON, Blu]

Tutte le funzioni sono fornite correttamente.

Blu



[ON, Arancione]

Il sistema è in uno degli stati descritti di seguito:

- La funzione di blocco della poltrona è attivata.
- La funzione di blocco del manipolo è attivata.

[Rif] Funzione di blocco della poltrona [pagine da 139 a 142]

Funzione di blocco del manipolo [pagina 143]

Arancione



[Arancione lampeggiante]

Il livello dell'acqua nella bottiglia dell'acqua è basso.

Rosa



[ON, Rosa]

Il sistema è in uno degli stati descritti di seguito:

- Il controllo del sensore per il sistema di riempimento automatico bicchiere si trova nella modalità di disattivazione del sensore.
- La modalità di funzionamento della lampada odontoiatrica è la modalità di commutazione.
- Il livello dell'acqua del sistema di riempimento bicchiere è in fase di impostazione.

[Rif] Modalità di disattivazione del sensore [pagina 182]

Modalità di funzionamento della lampada odontoiatrica [pagina 126]

Impostazione del livello dell'acqua del sistema di riempimento bicchiere [pagina 237]

Poiché il colore dell'indicatore LED fornisce un'indicazione dello stato del blocco di poltrona/manipolo o della transizione modalità, controllare sempre che l'indicatore LED funzioni correttamente prima di iniziare il lavoro quotidiano.

5–29 Porta USB

Supporto di consegna strumento



La porta USB accetta una tavoletta medico per una telecamera intraorale di tipo USB o un altro dispositivo.

Il cavo di collegamento è necessario all'interno della tavoletta medico in base alle specifiche del dispositivo da aggiungere.

Asta di consegna strumento



5–30 Lampada EURUS



Accendere l'interruttore principale del prodotto; la lampada odontoiatrica si accende e l'indicatore si illumina.

La lampada odontoiatrica può essere accesa o spenta utilizzando l'interruttore touchless o l'interruttore della lampada odontoiatrica sul pannello a sfioramento o sul pannello di comando assistente.

Accendere o spegnere la lampada odontoiatrica con l'interruttore touchless. L'interruttore touchless viene attivato da un sensore. Il sensore rileva un oggetto della stessa larghezza della finestra del sensore a una distanza di circa 65 mm o inferiore.

Spostare una mano davanti all'interruttore per attivarlo e di nuovo per disattivarlo.
* Se la superficie dell'interruttore touchless è sporca, potrebbe degradare la sensibilità dell'interruttore. Se la superficie è sporca, pulirla con un panno morbido.

Regolazione dell'illuminamento in modalità trattamento

L'illuminamento può essere regolato ruotando il regolatore di illuminamento. L'illuminamento non può essere regolato quando la lampada viene accesa in modalità ON.

Passaggio dalla modalità trattamento alla modalità composito sicuro

Tenere la mano sopra l'interruttore touchless entro un intervallo di 65 mm per il tempo specificato o premere l'interruttore della luce odontoiatrica sul pannello a sfioramento del pannello di comando assistente per il tempo specificato per passare alla modalità composito sicuro.

L'illuminamento non può essere regolato quando la lampada viene accesa in modalità composito sicuro.

Ripetere il passaggio precedente per tornare alla modalità trattamento.

* Quando la lampada viene spenta in modalità composito sicuro e quindi riaccesa, si troverà in modalità trattamento.

⚠ ATTENZIONE

Prima dell'uso, leggere sempre le istruzioni per l'uso di ciascuna lampada odontoiatrica per assicurare un uso corretto.



5-31 Lampada odontoiatrica 900

Accendere l'interruttore principale del prodotto; la lampada odontoiatrica si accende e l'indicatore si illumina in verde.

La lampada odontoiatrica può essere accesa o spenta utilizzando l'interruttore touchless o l'interruttore della lampada odontoiatrica   sul pannello a sfioramento o sul pannello di comando assistente.

Accendere o spegnere la lampada odontoiatrica con l'interruttore touchless.
L'interruttore touchless viene attivato da un sensore. Il sensore rileva un oggetto a una distanza di circa 65 mm o inferiore dall'interruttore. Spostare una mano davanti all'interruttore per attivarlo e di nuovo per disattivarlo.

* Se la superficie dell'interruttore touchless è sporca, potrebbe degradare la sensibilità dell'interruttore. Se la superficie è sporca, pulirla con un panno morbido.

Regolazione dell'illuminamento in modalità trattamento

L'illuminamento può essere regolato ruotando il regolatore di illuminamento. L'illuminamento non può essere regolato quando la lampada viene accesa in modalità ON.

Passaggio dalla modalità trattamento alla modalità composito sicuro

Tenere la mano sopra l'interruttore touchless entro un intervallo di 65 mm per il tempo specificato o premere l'interruttore della luce odontoiatrica   sul pannello a sfioramento del pannello di comando assistente per il tempo specificato per passare il funzionamento alla modalità composito sicuro; l'indicatore lampeggia in verde.

L'illuminamento non può essere regolato quando la lampada viene accesa in modalità composito sicuro.


Ripetere il passaggio sopra per passare alla modalità trattamento; l'indicatore diventa verde fisso.

Modalità	Indicatore
Modalità trattamento	ON, Verde
Modalità composito sicuro	Verde lampeggiante

* Quando la lampada viene spenta in modalità composito sicuro e quindi riaccesa, si troverà in modalità trattamento.

ATTENZIONE

Prima dell'uso, leggere sempre le istruzioni per l'uso fornite con ciascuna lampada odontoiatrica per assicurare un uso corretto.

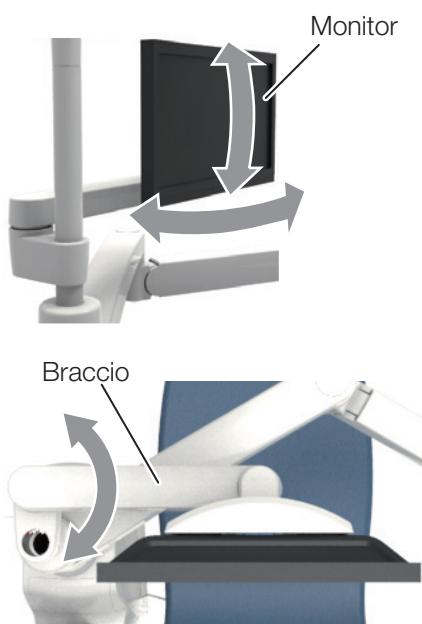

5-32 Staffa per monitor

Il monitor può essere spostato in una posizione in cui è possibile vederlo facilmente. Quando si regola la posizione, tenere il monitor mentre lo si sposta.

Quando si sposta il monitor, non lasciare che tocchi la parete o altri oggetti.

⚠ ATTENZIONE

Non applicare carichi o urti eccessivi al monitor o alla staffa del monitor. Per evitare danni o lesioni, assicurarsi che il monitor soddisfi le seguenti specifiche:

Dimensioni: fino a 340 x 530 mm (Lu x La)

[Monitor da 22 pollici o più piccolo]

Peso: fino a 6,5 kg

*Escludendo le dimensioni dell'impugnatura del monitor e di altri accessori

5-33 Maniglione (S4)

Tipo di carrello / Tipo di consegna armadio

Questo maniglione è progettato per fornire un sostegno nell'assistenza e nella cura del paziente.

⚠ ATTENZIONE

Quando si aziona la poltrona, assicurarsi che il paziente non rimanga incastrato tra quest'ultima e il maniglione.

Quando si utilizza il prodotto, assicurarsi che non vi siano ostacoli, ad esempio monitor nelle vicinanze.

Non aggrapparsi, appoggiarsi o esercitare una forza eccessiva sul maniglione. Inoltre, non applicare un peso superiore a 60 kg.

Ciò potrebbe danneggiare il maniglione, causando potenziali lesioni.


Utilizzare il maniglione solo per lo scopo previsto di assistenza e cura

Non utilizzare il maniglione con le mani bagnate. Ciò potrebbe causare scivolamento, con conseguenti cadute e potenziali lesioni.

Controllare periodicamente che le viti (9 viti) che fissano il maniglione non siano allentate o instabili. Il maniglione potrebbe staccarsi e causare potenziali lesioni.



5–34 Visione panoramica

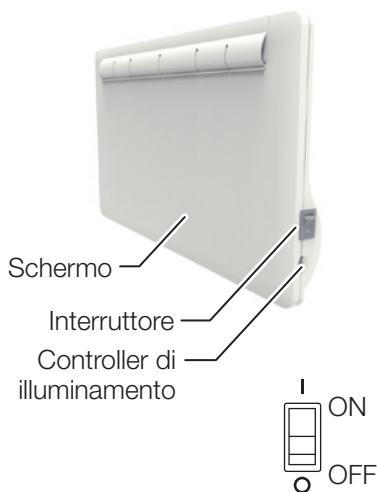


Ruotare l'interruttore verso l'alto per accendere lo schermo e verso il basso per spegnerlo.

Ruotare il controller di illuminamento verso l'alto per aumentare l'illuminamento e verso il basso per abbassarlo.

Quando non è in uso, spegnerlo.

La visione panoramica è concepita per integrare l'osservazione dei raggi X e non per l'esame o la diagnosi

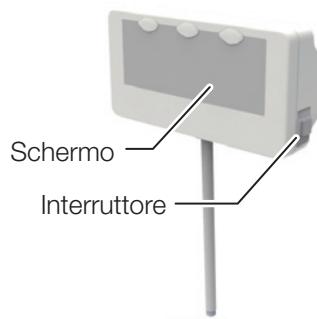

5–35 Visione odontoiatrica


Premere l'interruttore per accendere lo schermo. Premerlo nuovamente per spegnere lo schermo.

Quando non è in uso, spegnerlo.

La visione odontoiatrica è concepita per integrare l'osservazione dei raggi X e non per l'esame o la diagnosi.

6–1 Interruttore per funzionamento automatico

6–1–1 Impostazione delle posizioni di trattamento e di ingresso/uscita

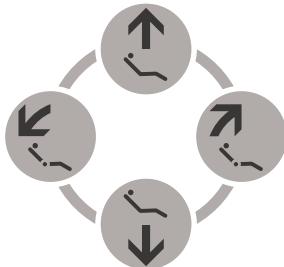


Interruttori di controllo manuale



Interruttori preimpostati



Interruttore ritorno automatico

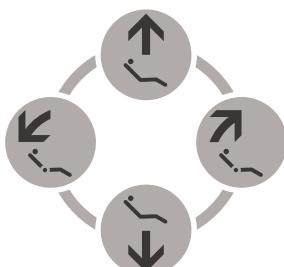

Interruttori di controllo manuale



Interruttore ultima posizione

1. Spostare la poltrona nella posizione di trattamento o nella posizione di ingresso/uscita utilizzando l'interruttore di controllo manuale come richiesto.

2. Mantenere premuto l'interruttore preimpostato 1 o 2 (posizione di trattamento) o l'interruttore di ritorno automatico 0 (posizione di ingresso/uscita) per circa 5 secondi.

3. Allontanare la poltrona dalla posizione impostata e premere l'interruttore preimpostato per controllare che la poltrona si sposti nella posizione impostata.
* L'angolo del gambale e la lunghezza delle sporgenze del poggiapiedi vengono determinati automaticamente in base all'angolo dello schienale quando impostato.

[Rif] Rapporto angolare tra schienale, gambale e poggiapiedi [pagina 104]

6–1–2 Impostazione della posizione di risciacquo della bocca

1. Spostare la poltrona nella posizione di risciacquo della bocca preimpostata utilizzando l'interruttore di controllo manuale.

2. Mantenere premuto l'interruttore ultima posizione LP per circa 5 secondi. Viene emesso un segnale acustico e la poltrona è impostata in posizione.

3. Allontanare la poltrona dalla posizione impostata e premere l'interruttore ultima posizione LP per controllare che la poltrona si sposti nella posizione impostata.

* L'angolo del gambale e la lunghezza delle sporgenze del poggiapiedi vengono determinati automaticamente in base all'angolo dello schienale quando impostato.

[Rif] Rapporto angolare tra schienale, gambale e poggiapiedi [pagina 104]

6-1-3 Impostazione libera dell'angolo del gambale


L'angolo del gambale in modalità automatica è determinato dall'angolo dello schienale.

Modificare l'angolo del gambale seguendo la procedura riportata di seguito:


6-1-3-1 Unità poltrona tipo collegabile

1. Spostare la seduta della poltrona e lo schienale nella posizione desiderata utilizzando l'interruttore di controllo manuale o l'interruttore preimpostato sul pannello di comando. (Il joystick per il funzionamento automatico/manuale può anche essere utilizzato per eseguire la stessa operazione.)

* Un joystick potrebbe non essere installato a seconda delle specifiche selezionate.

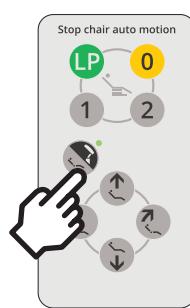

Interruttori a membrana sul pannello di comando

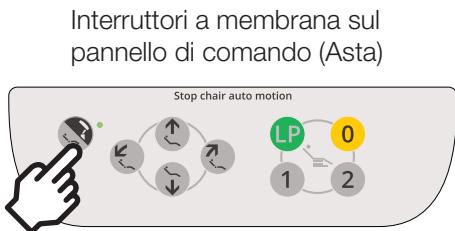

Interruttori a membrana sul pannello di comando (Asta)

2. Mantenere premuto l'interruttore a membrana poltrona/poggiatesta  sul pannello di comando per 5 secondi o più.

3. Mentre vengono emessi i segnali acustici, spostare il gambale all'angolo desiderato.

Premere l'interruttore di controllo manuale  sul pannello di comando o ruotare la leva di controllo manuale verso l'alto (nella direzione  per sollevare il gambale. Premere l'interruttore di controllo manuale  sul pannello di comando o ruotare la leva per il controllo manuale verso il basso (nella direzione 

4. Mantenere premuto l'interruttore per 5 secondi o più per impostare (interruttore di ritorno automatico , interruttore ultima posizione  o interruttore preimpostato  o  sul pannello di comando) finché non viene emesso un segnale acustico, che indica che l'impostazione è stata salvata. (Oppure, continuare a ruotare il joystick per il funzionamento automatico della poltrona nella direzione da impostare finché non viene emesso un segnale acustico, che indica che l'impostazione è stata salvata.)

5. Al termine dell'impostazione o per annullare il processo senza salvare l'impostazione, premere nuovamente l'interruttore poltrona/poggiatesta  sul pannello di comando.
I segnali acustici si arrestano e il sistema ritorna allo stato normale.

Tipo di poggiapiede manuale



Tipo di poggiapiede motorizzato



Joystick per funzionamento automatico

Tipo di poggiapiede manuale



Tipo di poggiapiede motorizzato



Joystick per funzionamento manuale

6-1-3-2 Unità poltrona tipo non collegabile

1 Attivazione della modalità operativa gambale



Mantenere nella posizione verso l'alto



Segnali acustici da 5 secondi



Altri segnali acustici da 8 secondi

Non lasciare il joystick per il funzionamento automatico mentre vengono emessi i segnali acustici. Quando si lascia il joystick, la posizione di quel momento viene memorizzata come posizione di risciacquo bocca.

[Riferimento] Modifica della posizione di trattamento, della posizione di risciacquo della bocca e della posizione di ingresso/uscita

2 Azionare il gambale con il joystick per il funzionamento manuale

Joystick	Funzionamento	
Direzione di spinta	Indicazione dell'etichetta	
		Il gambale viene sollevato
		Il gambale viene abbassato

3 Premere e tenere premuto il joystick per la modalità automatica fino a raggiungere la posizione laterale desiderata finché non si attiva il cicalino (nel giro di 5 secondi circa), quindi rilasciarlo

La posizione viene memorizzata.

Impostare nella posizione di trattamento 1: spingere a sinistra

Impostare nella posizione di trattamento 2: spingere a destra

Impostare nella posizione di risciacquo della bocca: spingere in alto

Impostare nella posizione di ingresso/uscita: spingere in basso

4 Per annullare la modalità operativa gambale, ruotare il joystick per il funzionamento schienale in qualsiasi direzione per un secondo o più



AVVERTENZA

Prima di sollevare/abbassare il gambale, accertarsi che nessuna parte del corpo umano, braccio o oggetto stiano ostruendo la poltrona.

6 Impostazione/Regolazione

6–2 Interruttore funzione

Schermata iniziale



Premere l'interruttore funzione sulla schermata iniziale per visualizzare la schermata di impostazione della funzione.

Selezionare una voce per visualizzare la schermata di impostazione corrispondente.



Premere l'interruttore per annullare l'operazione e tornare dalla schermata attuale alla schermata iniziale.

Premere l'interruttore per annullare l'operazione e tornare dalla schermata attuale alla schermata precedente.

Premere l'interruttore per passare alla pagina successiva.

Premere l'interruttore per tornare alla pagina precedente.

Premere l'interruttore per passare alla 3^a pagina.



Premere l'interruttore per tornare alla 2^a pagina.




6–2–1 Impostazione delle voci con l'interruttore funzione

Impostazione delle voci che appaiono sul pannello a sfioramento	
Risciacquo, lavaggio della linea di aspirazione	
Risciacquo	pagina 194
Lavaggio della linea di aspirazione	pagina 215
Manipolo	
Pressione dell'aria di azionamento	pagina 232
Modalità spruzzo	pagina 233
Attivazione della luce del manipolo	pagina 234
Luminosità della luce micromotore	pagina 235
Bicchiere, sputacchiera	
Livello dell'acqua del sistema di riempimento bicchiere	pagina 237
Interblocco di riempimento bicchiere, risciacquo sputacchiera	pagina 239
Tempo risciacquo sputacchiera	pagina 240
Lingua	pagina 241
Timer e pannello di comando	
Suono di allarme del timer	pagina 242
Volume di sfioramento tasti	pagina 243
Tempo della modalità di sospensione	pagina 244
Blocco della poltrona con annullamento di emergenza	pagina 245
Versione programma	pagina 246
Modalità di servizio	*

* La modalità di servizio è progettata esclusivamente per i tecnici dell'assistenza per eseguire la manutenzione su questo prodotto.

6–2–2 Selezione del metodo di risciacquo ed esecuzione del risciacquo

Per lavare solo il circuito dell'acqua del manipolo

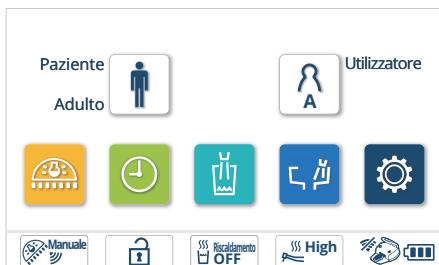

2. Premere l'interruttore ‘Risciacquo, lavaggio della linea di aspirazione’.

Se la funzione di lavaggio per la linea di aspirazione non è in dotazione, sullo schermo appare invece ‘Risciacquo’.


Le procedure mostrate di seguito non sono applicabili.

3. Premere l'interruttore ‘Risciacquo’.



4. Verificare che sia selezionato “Manipoli 00:40” e premere l'interruttore **OK**.

Per modificare l'impostazione dell'ora
[Riferimento] Impostazione timer del risciacquo (manipolo) [pagine 204, 205]

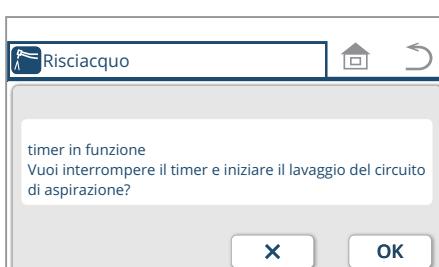


* Quando si utilizza il timer, viene visualizzata la schermata mostrata nella figura a sinistra.

Premere **X** per annullare il risciacquo.

Premere **OK** per avviare il risciacquo.

6 Impostazione/Regolazione

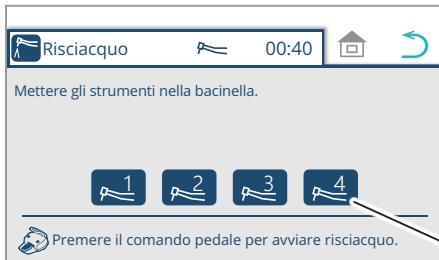


5. Prendere il manipolo che si desidera lavare e posizionarlo nella sputacchiera.

[Riferimento] Preparazione di manipoli/siringhe per il risciacquo [pagina 213]
Lavare sempre il manipolo con il corpo principale dell'ablatore a ultrasuoni collegato. Il risciacquo senza fare questo potrebbe causare un malfunzionamento.

Viene visualizzato il numero del manipolo che è stato preso.
(I manipoli sono numerati 1, 2, 3 e 4 dalla parte anteriore sinistra.)

La schermata non ritorna alla schermata iniziale nemmeno quando viene premuto l'interruttore

* Per il sistema di risciacquo integrato, fare riferimento a [pagina 214] "Come impostare i manipoli nel sistema di risciacquo integrato"

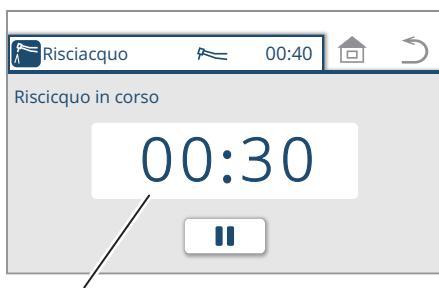

Tempo rimanente (es. 30 sec.)

6. Premere il pedale del comando a pedale.

Quando il pedale viene rilasciato, il manipolo scarica continuamente l'acqua per 40 secondi.


La schermata non torna alla schermata precedente anche se si preme l'interruttore .

* Per sospendere il risciacquo, premere l'interruttore sul pannello a sfioramento, l'interruttore a membrana, oppure attivare il pannello assistente o premere il pedale del comando a pedale.

* Per riprendere il risciacquo, premere l'interruttore .

* Per terminare il risciacquo prematuramente dopo aver premuto , premere l'interruttore a membrana/interruttore del pannello di comando assistente / o premere il comando a pedale.

* Per terminare il risciacquo prematuramente senza premere , premere l'interruttore a membrana/interruttore del pannello di comando assistente o premere il comando a pedale.

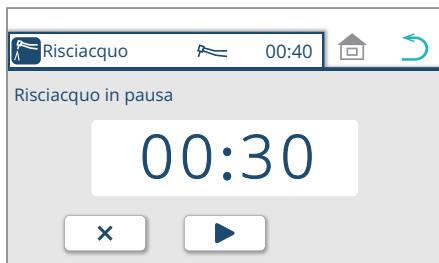

7. Una volta terminato il risciacquo, riportare il manipolo nel portastrumenti. Quando il manipolo viene riportato indietro, viene visualizzata la schermata iniziale.

* L'acqua non viene scaricata automaticamente dalla siringa. Premere la leva/il pulsante W per 40 secondi per scaricare.

6 Impostazione/Regolazione


Risciacquo dei circuiti dell'acqua del manipolo e del sistema di riempimento bicchiere

Questa modalità serve a riempire l'unità con la soluzione chimica della bottiglia dell'acqua per la specifica con bottiglia dell'acqua.

* Posizionare un bicchiere sulla base di riempimento bicchiere

1. Premere l'interruttore funzione .


Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.

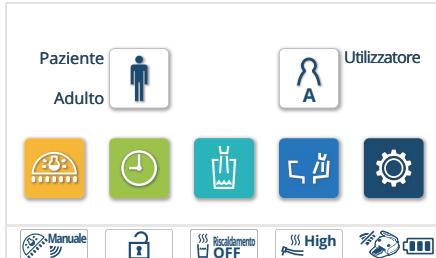

2. Premere l'interruttore 'Risciacquo, lavaggio della linea di aspirazione'.

Se la funzione di lavaggio per la linea di aspirazione non è in dotazione, sullo schermo appare invece 'Risciacquo'.

Le procedure mostrate di seguito non sono applicabili.

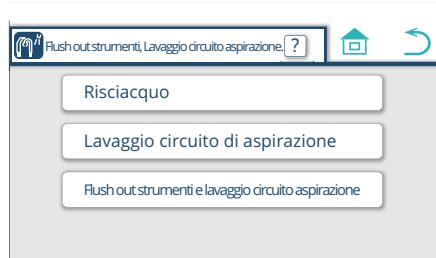


3. Premere l'interruttore 'Risciacquo'.



4. Verificare che sia selezionato "Manipoli e riempি bicchiere 00:30" e premere l'interruttore .


Per modificare l'impostazione dell'ora

[Riferimento] Impostazione timer del risciacquo (manipolo + riempি bicchiere)
[pagine 206, 207]

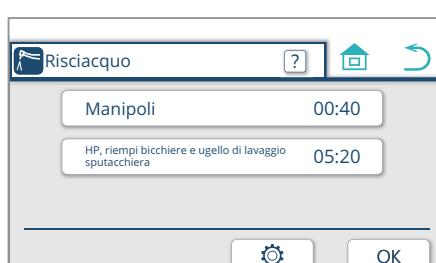

Se la specifica della bottiglia dell'acqua non è installata, verrà visualizzata la schermata a sinistra.

La seguente procedura non si applica.

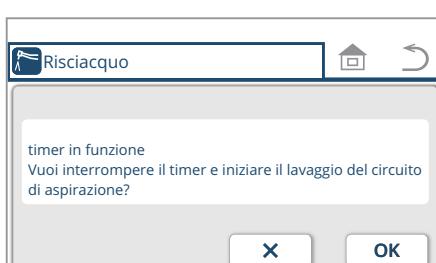


* Quando si utilizza il timer, viene visualizzata la schermata mostrata nella figura a sinistra.

Premere  per annullare il risciacquo.

Premere  per avviare il risciacquo.

6 Impostazione/Regolazione

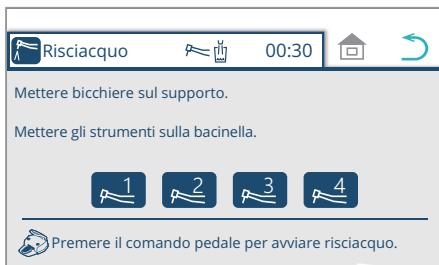

5. Prendere il manipolo che si desidera sciacquare e posizionarlo nella coppa della sputacchiera.

[Riferimento] Preparazione di manipoli/siringa per il risciacquo [pagina 213]
Lavare sempre il manipolo con il corpo principale dell'ablatore a ultrasuoni collegato.

Il risciacquo senza fare questo potrebbe causare un malfunzionamento.

Viene visualizzato il numero del manipolo che è stato preso.
(I manipoli sono numerati 1, 2, 3 e 4 dalla parte anteriore sinistra.)

La schermata non ritorna alla schermata iniziale nemmeno quando l'interruttore viene premuto.

- * Per il sistema di risciacquo integrato, fare riferimento a [pagina 199] "Come impostare i manipoli nel sistema di risciacquo integrato"

Prima di iniziare il risciacquo, collocare sempre un bicchiere sulla base del sistema di riempimento bicchiere. Senza un bicchiere, l'acqua verrà spruzzata sulla parete o sulla poltrona.



6. Premere il pedale del comando a pedale.

Quando il pedale viene rilasciato, i manipoli scaricano continuamente acqua per 20 secondi. Quindi, l'ugello di riempimento bicchiere scarica acqua per 10 secondi.


La schermata non torna alla schermata precedente neanche quando l'interruttore viene premuto.

- * Per sospendere il risciacquo, premere l'interruttore sul pannello a sfioramento, l'interruttore a membrana, oppure attivare il pannello assistente o premere il pedale del comando a pedale.

- * Per riprendere il risciacquo, premere.

- * Per terminare il risciacquo prematuramente dopo aver premuto , premere /interruttore a membrana/interruttore del pannello di comando assistente o premere il comando a pedale.


- * Per terminare il risciacquo prematuramente senza premere , premere l'interruttore a membrana/interruttore pannello di comando assistente o premere il pedale del comando a pedale.

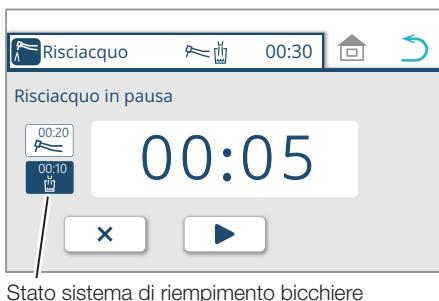

7. Una volta terminato il risciacquo, riportare il manipolo nel portastrumenti. Quando il manipolo viene riportato indietro, viene visualizzata la schermata iniziale.

- * L'acqua non viene scaricata automaticamente dalla siringa. Premere la leva/il pulsante W per 40 secondi per scaricare.

6 Impostazione/Regolazione

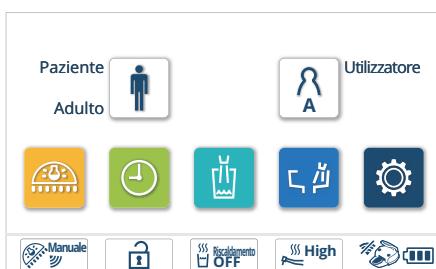


Risciacquo dei circuiti dell'acqua del manipolo e del sistema di riempimento bicchiere/sputacchiera

* Posizionare un bicchiere sulla base di riempimento bicchiere

1. Premere l'interruttore funzione .


Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.

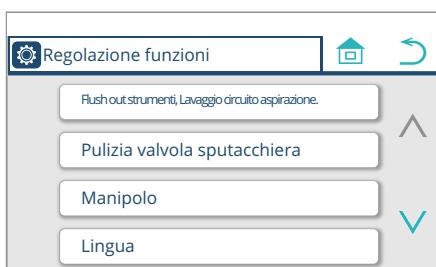


2. Premere l'interruttore 'Risciacquo, lavaggio della linea di aspirazione'.

Se la funzione di lavaggio per la linea di aspirazione non è in dotazione, sullo schermo appare invece 'Risciacquo'.

Le procedure mostrate di seguito non sono applicabili.

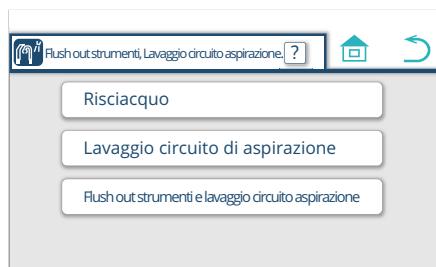


3. Premere l'interruttore 'Risciacquo'.

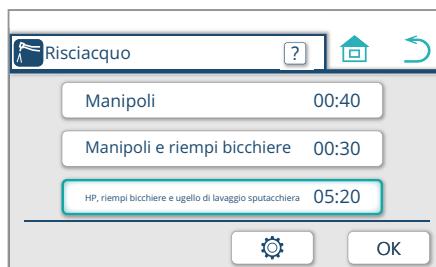

4. Assicurarsi che sia selezionato "HP, riempi bicchiere e ugello di risciacquo sputacchiera 05:20" e premere l'interruttore .

Per modificare l'impostazione del timer

[Riferimento] Impostazione del timer di risciacquo (manipolo + riempi bicchiere + coppa sputacchiera) [pagine 208, 209]

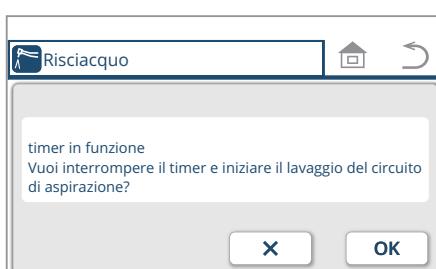


* Quando si utilizza il timer, viene visualizzata la schermata mostrata nella figura a sinistra.

Premere  per annullare il risciacquo.

Premere  per avviare il risciacquo.

6 Impostazione/Regolazione

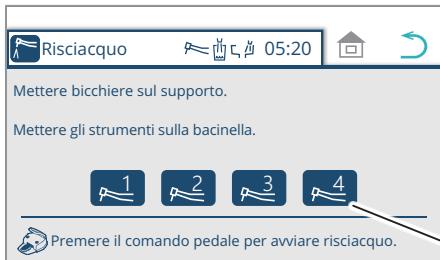

5. Prendere il manipolo che si desidera lavare e posizionarlo nella sputacchiera.

[Riferimento] Preparazione di manipoli/siringhe per il risciacquo [pagina 213]
Lavare sempre il manipolo con il corpo principale dell'ablatore a ultrasuoni collegato. Il risciacquo senza fare questo potrebbe causare un malfunzionamento.

Viene visualizzato il numero del manipolo che è stato preso.
(I manipoli sono numerati 1, 2, 3 e 4 dalla parte anteriore sinistra.)

La schermata non ritorna alla schermata iniziale nemmeno quando viene premuto l'interruttore

* Per il sistema di risciacquo integrato, fare riferimento a [pagina 214] "Come impostare i manipoli nel sistema di risciacquo integrato"

Prima di iniziare il risciacquo, collocare sempre un bicchiere sulla base del sistema di riempimento bicchiere. Senza un bicchiere, l'acqua verrà spruzzata sulla parete o sulla poltrona.



6. Premere il pedale del comando a pedale.

Quando il pedale viene rilasciato, i manipoli scaricano continuamente l'acqua per 2 minuti 40 secondi. Quindi, l'ugello di riempimento bicchiere e l'ugello di risciacquo sputacchiera scaricano acqua per 2 minuti 40 secondi.

La schermata non torna alla schermata precedente anche se si preme l'interruttore

* Per sospendere il risciacquo, premere l'interruttore sul pannello a sfioramento, l'interruttore a membrana, oppure attivare il pannello assistente o premere il pedale del comando a pedale.

* Per riprendere il risciacquo, premere .

* Per terminare il risciacquo prematuramente dopo aver premuto , premere l'interruttore a membrana/interruttore del pannello di comando assistente o premere il comando a pedale.

* Per terminare il risciacquo prematuramente senza premere , premere l'interruttore a membrana/interruttore del pannello di comando assistente o premere il comando a pedale.




7. Una volta terminato il risciacquo, riportare il manipolo nel portastrumenti. Quando il manipolo viene riportato indietro, viene visualizzata la schermata iniziale.

* L'acqua non viene scaricata automaticamente dalla siringa. Premere la leva/il pulsante W per 40 secondi per scaricare.

6 Impostazione/Regolazione

Tipo senza sputacchiera

Per lavare il circuito dell'acqua solo del manipolo (modalità Breve)

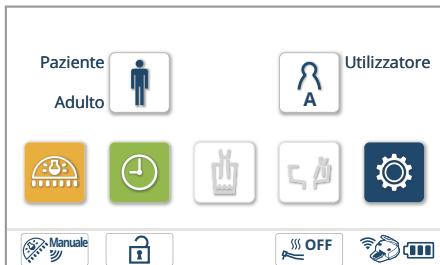


1. Premere l'interruttore funzione .

Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.




2. Premere l'interruttore 'Risciacquo'.

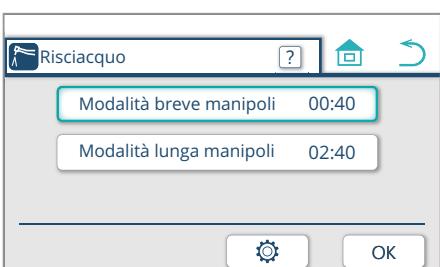

3. Verificare che sia selezionato "Modalità breve manipoli 00:40" e premere l'interruttore .

Per modificare l'impostazione del timer

[Riferimento] Impostazione del timer di risciacquo (tipo senza coppa sputacchiera) [pagine 210, 211]

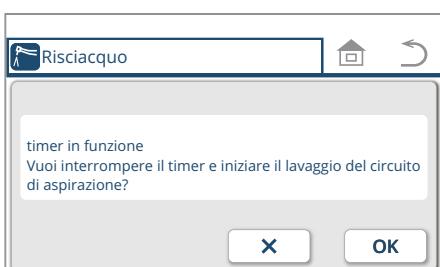


* Quando si utilizza il timer, viene visualizzata la schermata mostrata nella figura a sinistra.

Premere per annullare il risciacquo.

Premere per avviare il risciacquo.

6 Impostazione/Regolazione

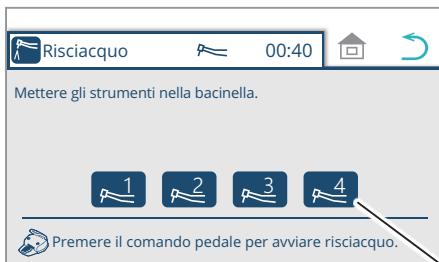


4. Prendere il manipolo che si desidera lavare e posizionarlo in un contenitore, per esempio un secchio.

[Riferimento] Preparazione di manipoli/siringhe per il risciacquo [pagina 213]
Lavare sempre il manipolo con il corpo principale dell'ablatore a ultrasuoni collegato. Il risciacquo senza fare questo potrebbe causare un malfunzionamento.

Viene visualizzato il numero del manipolo che è stato preso.
(I manipoli sono numerati 1, 2, 3 e 4 dalla parte anteriore sinistra.)

La schermata non ritorna alla schermata iniziale nemmeno quando viene premuto l'interruttore .

- * Per il sistema di risciacquo integrato, fare riferimento a [pagina 214] "Come impostare i manipoli nel sistema di risciacquo integrato"

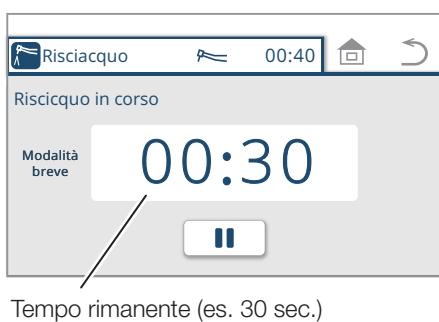

5. Premere il pedale del comando a pedale.

Quando il pedale viene rilasciato, il manipolo scarica continuamente l'acqua per 40 secondi.


La schermata non torna alla schermata precedente anche se si preme l'interruttore .

- * Per sospendere il risciacquo, premere l'interruttore sul pannello a sfioramento, l'interruttore a membrana, oppure attivare il pannello assistente o premere il pedale del comando a pedale.

- * Per riprendere il risciacquo, premere l'interruttore .

- * Per terminare il risciacquo prematuramente dopo aver premuto , premere l'interruttore a membrana/interruttore del pannello di comando assistente o premere il comando a pedale.

- * Per terminare il risciacquo prematuramente senza premere , premere l'interruttore a membrana/interruttore del pannello di comando assistente o premere il comando a pedale.

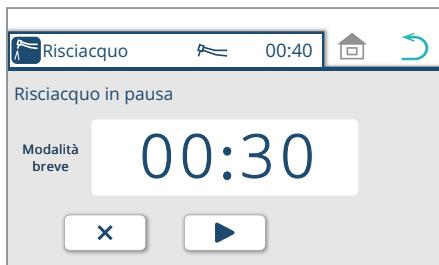


6. Una volta terminato il risciacquo, riportare il manipolo nel portastrumenti. Quando il manipolo viene riportato indietro, viene visualizzata la schermata iniziale.



- * L'acqua non viene scaricata automaticamente dalla siringa. Premere la leva/il pulsante W per 40 secondi per scaricare.

6 Impostazione/Regolazione

Per risciacquare il manipolo + il circuito dell'acqua dell'unità
(Modalità lunga)

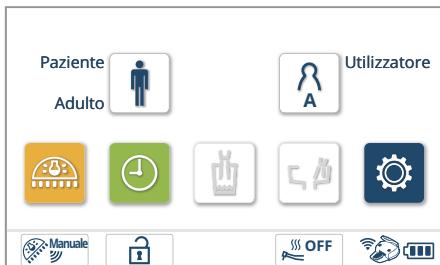


1. Premere l'interruttore funzione .

Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.




2. Premere l'interruttore 'Risciacquo'.

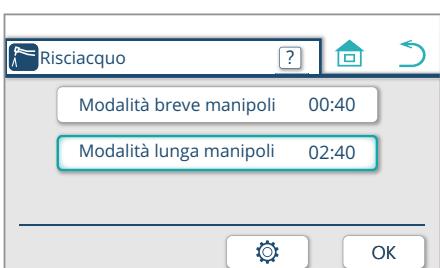

3. Verificare che sia selezionato "Modalità lunga manipoli 02:40" e premere l'interruttore .

Per modificare l'impostazione del timer

[Riferimento] Impostazione del timer di risciacquo (tipo senza coppa sputacchiera)
[pagine 210, 211]

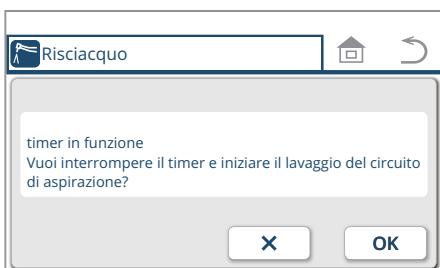


* Quando si utilizza il timer, viene visualizzata la schermata mostrata nella figura a sinistra.

Premere per annullare il risciacquo.

Premere per avviare il risciacquo.

6 Impostazione/Regolazione

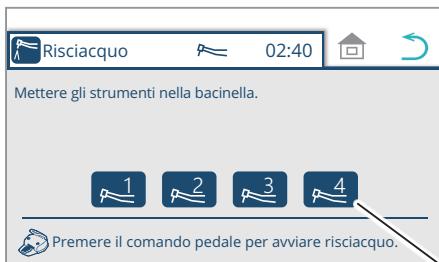


4. Prendere il manipolo che si desidera lavare e posizionarlo in un contenitore, per esempio un secchio.

[Riferimento] Preparazione di manipoli/siringhe per il risciacquo [pagina 213]
Lavare sempre il manipolo con il corpo principale dell'ablatore a ultrasuoni collegato. Il risciacquo senza fare questo potrebbe causare un malfunzionamento.

Viene visualizzato il numero del manipolo che è stato preso.
(I manipoli sono numerati 1, 2, 3 e 4 dalla parte anteriore sinistra.)

La schermata non ritorna alla schermata iniziale nemmeno quando viene premuto l'interruttore .

- * Per il sistema di risciacquo integrato, fare riferimento a [pagina 214] "Come impostare i manipoli nel sistema di risciacquo integrato"

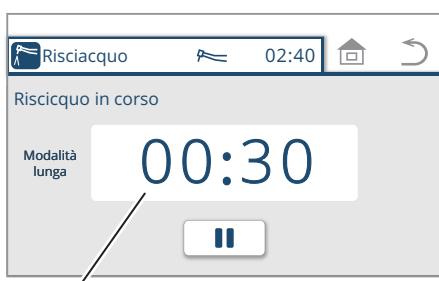

5. Premere il pedale del comando a pedale.

Quando il pedale viene rilasciato, il manipolo scarica continuamente l'acqua per 2 minuti 40 secondi.


La schermata non torna alla schermata precedente anche se si preme l'interruttore .

- * Per sospendere il risciacquo, premere l'interruttore sul pannello a sfioramento, l'interruttore a membrana, oppure attivare il pannello assistente o premere il pedale del comando a pedale.

- * Per riprendere il risciacquo, premere l'interruttore .

- * Per terminare il risciacquo prematuramente dopo aver premuto , premere l'interruttore a membrana/interruttore del pannello di comando assistente o premere il comando a pedale.


- * Per terminare il risciacquo prematuramente senza premere , premere l'interruttore a membrana/interruttore del pannello di comando assistente o premere il comando a pedale.

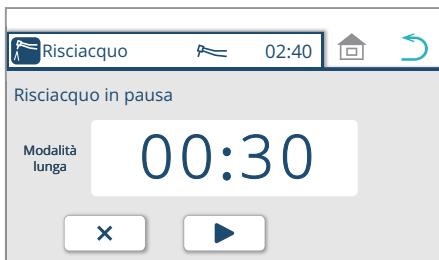

6. Una volta terminato il risciacquo, riportare il manipolo nel portastrumenti. Quando il manipolo viene riportato indietro, viene visualizzata la schermata iniziale.

- * L'acqua non viene scaricata automaticamente dalla siringa. Premere la leva/il pulsante W per 40 secondi per scaricare.

6 Impostazione/Regolazione

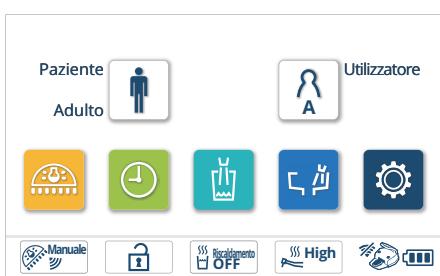

Impostazione del timer di risciacquo (manipolo)

1. Premere l'interruttore funzione


Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.



2. Premere l'interruttore 'Risciacquo, lavaggio della linea di aspirazione'.


Se la funzione di lavaggio per la linea di aspirazione non è in dotazione, sullo schermo appare invece 'Risciacquo'.

Le procedure mostrate di seguito non sono applicabili.

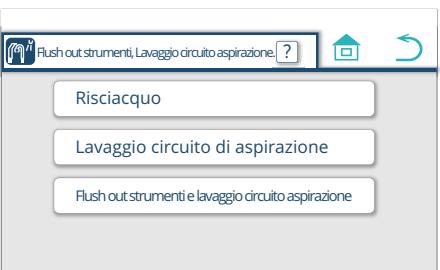

3. Premere l'interruttore 'Risciacquo'.

* Per visualizzare la spiegazione del risciacquo e del lavaggio della linea di aspirazione, premere l'interruttore (fare riferimento a pagina 216).

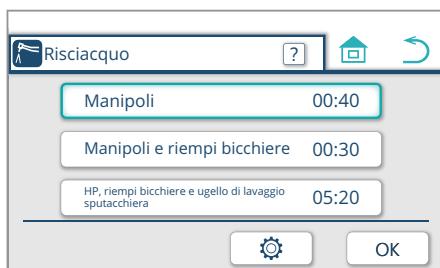

4. Premere la voce della modalità di risciacquo per modificare le impostazioni. Premere Manipoli.

Il colore del riquadro della modalità cambia e diventa una schermata di selezione.

5. Premere l'interruttore di impostazione del timer per il risciacquo.

Viene visualizzata la schermata per la modifica del tempo di risciacquo.

6 Impostazione/Regolazione




6. Modificare l'impostazione del timer della modalità manipolo (esempio) modificare a 2 min 30 sec

Premere gli interruttori / per aumentare o diminuire il tempo in incrementi di 1 minuto per i minuti e di 10 secondi per i secondi.

: aumentare il tempo impostato
 : diminuire il tempo impostato

Intervallo di tempo impostabile da 00:40 a 02:40

L'impostazione predefinita di fabbrica è 40 secondi.

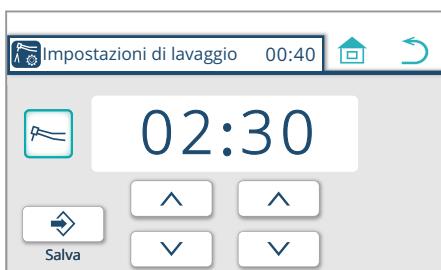


7. Premere l'interruttore memoria per salvare l'impostazione
Viene visualizzata la schermata di risciacquo in 4.



6 Impostazione/Regolazione

Impostazione del timer di risciacquo (manipolo + riempì bicchiere)

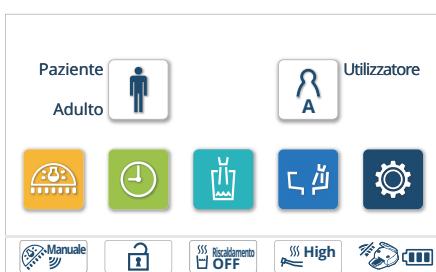

1. Premere l'interruttore funzione


Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.



2. Premere l'interruttore 'Risciacquo, lavaggio della linea di aspirazione'.


Se la funzione di lavaggio per la linea di aspirazione non è in dotazione, sullo schermo appare invece 'Risciacquo'.

Le procedure mostrate di seguito non sono applicabili.

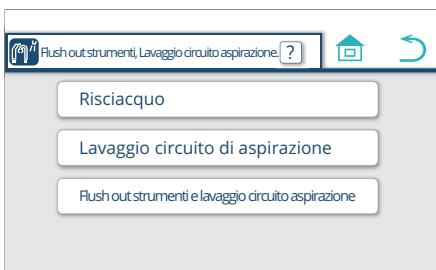

3. Premere l'interruttore 'Risciacquo'.

* Per visualizzare la spiegazione del risciacquo e del lavaggio della linea di aspirazione, premere l'interruttore (fare riferimento a pagina 216).

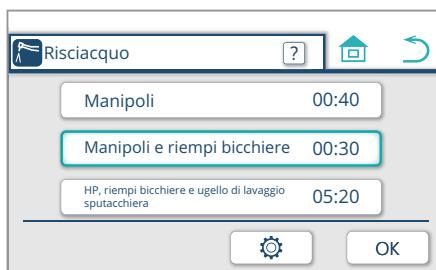

4. Premere la voce della modalità di risciacquo per modificare le impostazioni.

Premere Manipoli e Riempì bicchiere.

Il colore del riquadro della modalità cambia e diventa una schermata di selezione.

5. Premere l'interruttore di impostazione del timer per il risciacquo.

Viene visualizzata la schermata per la modifica del tempo di risciacquo.

6 Impostazione/Regolazione



6. Modificare l'impostazione del timer della modalità manipolo
(esempio) modificare a 30 sec

Premere gli interruttori / per aumentare o diminuire il tempo con incrementi di 1 minuto per i minuti e di 10 secondi per i secondi.

: aumentare il tempo impostato

: diminuire il tempo impostato

Intervallo di tempo impostabile da 00:20 a 05:00

L'impostazione predefinita di fabbrica è 20 secondi.



7. Premere l'interruttore riempি bicchiere .

Il colore del riquadro della modalità cambia e diventa una schermata di selezione.



8. Modificare l'impostazione del timer della modalità riempি bicchiere.

(esempio) modificare a 20 sec

Premere gli interruttori / per aumentare o diminuire il tempo con incrementi di 1 minuto per i minuti e di 10 secondi per i secondi.

: aumentare il tempo impostato


: diminuire il tempo impostato

Intervallo di tempo impostabile da 00:10 a 05:00

L'impostazione predefinita di fabbrica è 10 secondi.




9. Premere l'interruttore memoria per salvare l'impostazione
Viene visualizzata la schermata di risciacquo in 4.

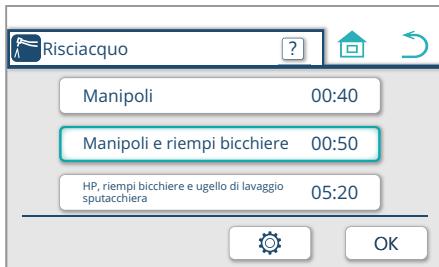

6 Impostazione/Regolazione

Impostazione del timer di risciacquo (manipolo + riempì bicchiere + coppa sputacchiera)

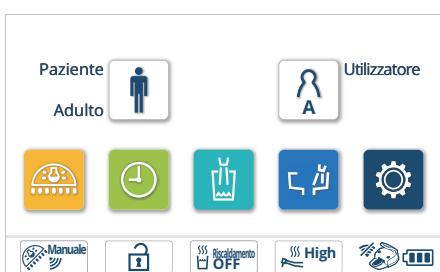

1. Premere l'interruttore funzione .


Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.



2. Premere l'interruttore 'Risciacquo, lavaggio della linea di aspirazione'.

Se la funzione di lavaggio per la linea di aspirazione non è in dotazione, sullo schermo appare invece 'Risciacquo'.

Le procedure mostrate di seguito non sono applicabili.

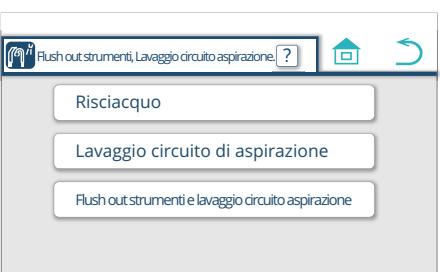

3. Premere l'interruttore 'Risciacquo'.

* Per visualizzare la spiegazione del risciacquo e del lavaggio della linea di aspirazione, premere l'interruttore (fare riferimento a pagina 216).



4. Premere la voce della modalità di risciacquo per modificare le impostazioni.

Premere HP, riempì bicchiere e ugello di risciacquo sputacchiera.

Il colore del riquadro della modalità cambia e diventa una schermata di selezione.

5. Premere l'interruttore di impostazione del timer per il risciacquo.

Viene visualizzata la schermata per la modifica del tempo di risciacquo.

6 Impostazione/Regolazione



6. Modificare l'impostazione del timer della modalità manipolo

(esempio) modificare a 3 min

Premere gli interruttori / per aumentare o diminuire il tempo con incrementi di 1 minuto per i minuti e di 10 secondi per i secondi.

: aumentare il tempo impostato

: diminuire il tempo impostato

Intervallo di tempo impostabile da 02:40 a 05:00


L'impostazione predefinita di fabbrica è 2 minuti e 40 secondi.



7. Premere l'interruttore di lavaggio riempি bicchiere, coppa sputacchiera

.

Il colore del riquadro della modalità cambia e diventa una schermata di selezione.

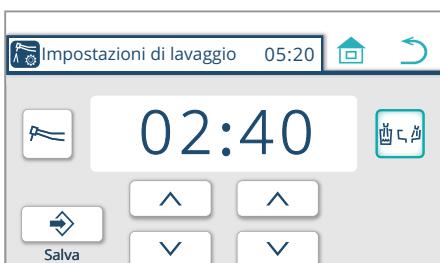

8. Modificare l'impostazione del timer della modalità di lavaggio riempি bicchiere, coppa sputacchiera.

(esempio) modificare a 3 min


Premere gli interruttori / per aumentare o diminuire il tempo con incrementi di 1 minuto per i minuti e di 10 secondi per i secondi.

: aumentare il tempo impostato

: diminuire il tempo impostato

Intervallo di tempo impostabile da 02:40 a 05:00

L'impostazione predefinita di fabbrica è 2 minuti e 40 secondi.

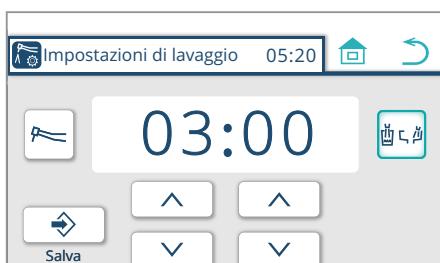


9. Premere l'interruttore memoria per salvare l'impostazione

Venne visualizzata la schermata di risciacquo in 4.



6 Impostazione/Regolazione

Impostazione del timer di risciacquo (tipo senza coppa sputacchiera)

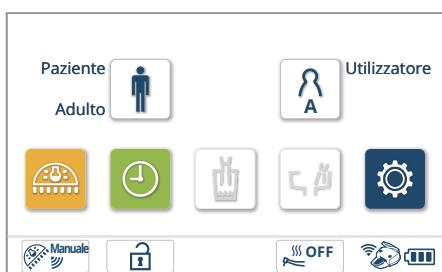


1. Premere l'interruttore funzione .

Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.



2. Premere l'interruttore 'Risciacquo'.

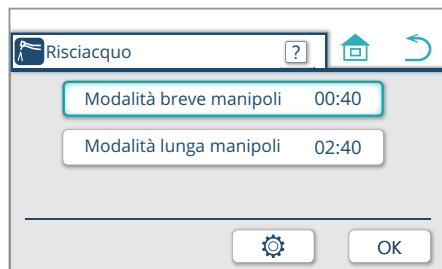

3. Premere la voce della modalità di risciacquo per modificare le impostazioni.
(esempio) premere modalità breve manipoli


Il colore del riquadro della modalità cambia e diventa una schermata di selezione.

* Per visualizzare la spiegazione del risciacquo (tipo senza coppa sputacchiera), premere l'interruttore (fare riferimento a pagina 212).

4. Premere l'interruttore di impostazione del timer per il risciacquo.

Viene visualizzata la schermata per la modifica del tempo di risciacquo.

6 Impostazione/Regolazione

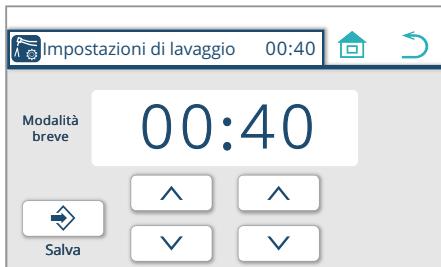

5. Modificare l'impostazione del timer

(esempio) modificare a 50 sec

Premere gli interruttori / per aumentare o diminuire il tempo con incrementi di 1 minuto per i minuti e di 10 secondi per i secondi.

: aumentare il tempo impostato


: diminuire il tempo impostato

Impostare l'intervallo di tempo

Modalità breve 00:40 - 02:40

Modalità lunga 02:40 - 05:00


L'impostazione predefinita di fabbrica è 40 secondi.

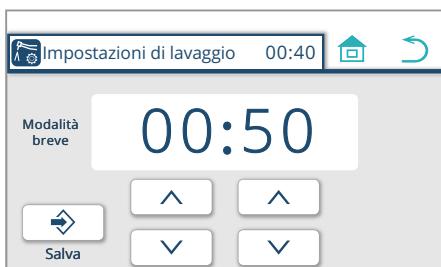

6. Premere l'interruttore memoria


per salvare l'impostazione

Viene visualizzata la schermata di risciacquo in 3.

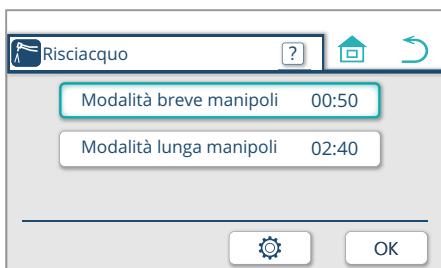

6 Impostazione/Regolazione


Spiegazione del lavaggio (tipo senza coppa sputacchiera)

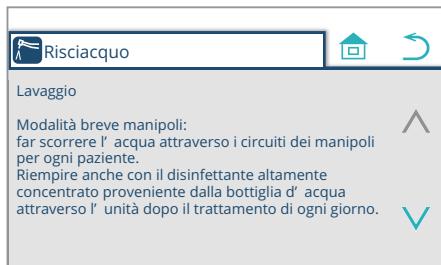

1. Premere l'interruttore

Procedere alla schermata in 2.


Appare la spiegazione del risciacquo di "Modalità lunga manipoli".

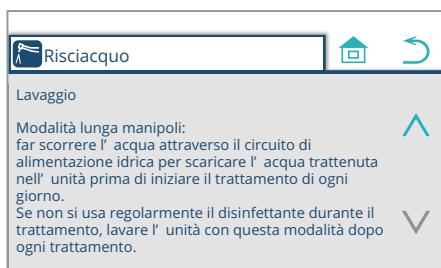

2. Premere l'interruttore

Tornare alla schermata in 1.

Appare la spiegazione del risciacquo di "Modalità breve manipoli".




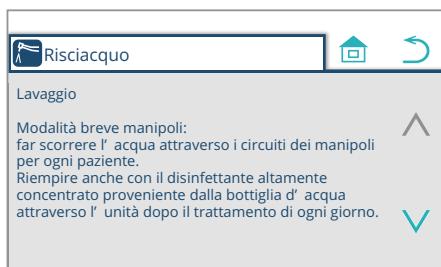


3. Premere l'interruttore

Tornare alla schermata in 3. a pagina 210.

6 Impostazione/Regolazione


Preparazione di manipoli/siringhe per il risciacquo
Impostare il lato destro della posizione di distacco nella sputacchiera.

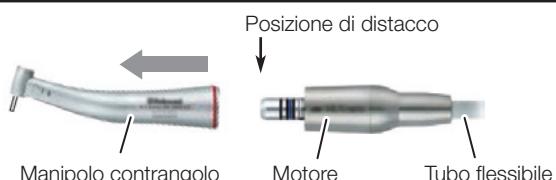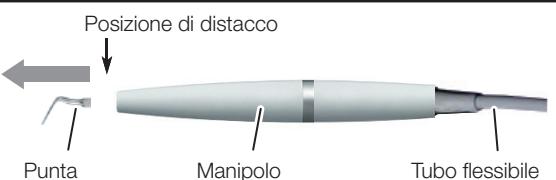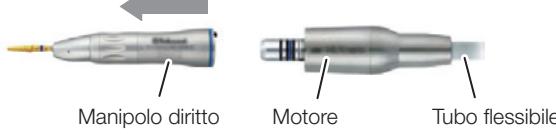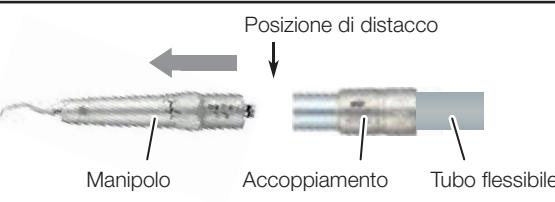Motore	Ablatore a ultrasuoni
 <p>Manipolo contrangolo Motore Tubo flessibile</p>	 <p>Posizione di distacco Punta Manipolo Tubo flessibile</p>
 <p>Manipolo diritto Motore Tubo flessibile</p>	<p>Ablatore ad aria</p>  <p>Posizione di distacco Manipolo Accoppiamento Tubo flessibile</p>
<p>Turbina ad aria</p>	<p>Siringa</p>  <p>Ugello Posizione di distacco</p>

Dopo il risciacquo, pulire il manipolo con un panno morbido per rimuovere l'umidità in eccesso.

Quando si prende il manipolo dopo il risciacquo, l'aria residua potrebbe essere scaricata. Questo è normale.

6 Impostazione/Regolazione

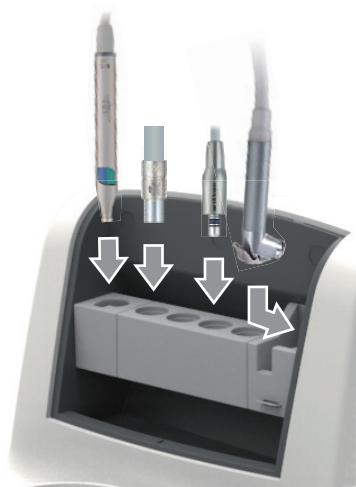

Come posizionare i manipoli nei manicotti di risciacquo incorporati

Verificare che i manipoli/la siringa siano inseriti correttamente con i manipoli posizionati sottosopra.

Forma del manicotto	Manipolo/siringa applicabili	
	Siringa	LUZZANI 3WAY (Minilight) LUZZANI 6WAY (Minilight) LUZZANI 3WAY (Minimate)
	Turbina ad aria/ ablatore ad aria Ablatore a ultrasuoni	NSK PTL-CL-LED NSK NBX NSK NLX plus NSK NLX nano BIEN AIR MX2 (DMX3) BIEN AIR MCX NSK M205 ABLATORE NSK VARIOS VS170 SATELEC Xinetic SATELEC SP4055 NEWTRON EMS NO PAIN ABLATORE NSK VARIOS VS170 LUX ABLATORE DENTSPLY CAVITRON (TIPO G139) SATELEC SP4055 NEWTRON SLIM
	Siringa	BT14 3WAY DCI 3439 3WAY DCI 3459 3WAY Tipo 77 3WAY SYR-20 3WAY

Fare riferimento a [pagina 213] "Preparazione di manipoli/siringhe per il risciacquo".

DCI
tipo standard



DCI
tipo diritto



Tipo 77



Clip

Posizionare il tipo 77/DCI nel manicotto dopo aver fissato la clip contenuta nella confezione.

La clip deve essere collegata solo per le siringhe DCI/77.



ATTENZIONE

Fare attenzione a non ferirsi con il bordo della clip di risciacquo.

6–2–3 Selezione del metodo di lavaggio della linea di aspirazione e del lavaggio dei condotti

Lavaggio della sola linea di aspirazione



Sono disponibili le seguenti tre opzioni: Sciacquare la linea di aspirazione + lavare la linea di aspirazione con un detergente (fare riferimento a pagina 217); risciacquare la linea di aspirazione (fare riferimento a pagina 220) e lavare la linea di aspirazione con un detergente (fare riferimento a pagina 222).

Utilizzare una delle seguenti soluzioni chimiche specificate da noi.

Soluzione chimica: Orotol plus di Dür

GREEN&CLEAN M2 di METASYS

GREEN&CLEAN CL N di METASYS

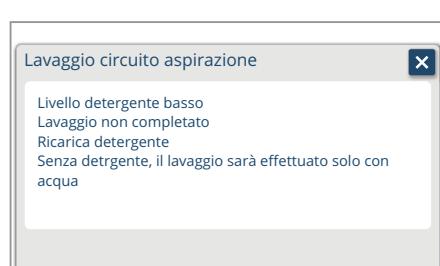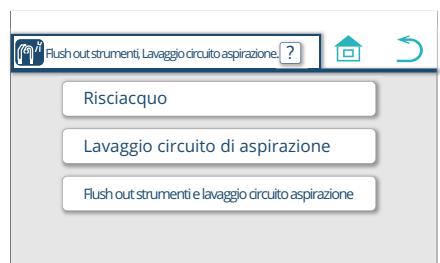

1. Premere l'interruttore funzione .

Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.

2. Premere l'interruttore ‘Risciacquo, lavaggio della linea di aspirazione’.

3. Premere l'interruttore ‘Lavaggio della linea di aspirazione’.

* Per visualizzare la spiegazione del risciacquo e del lavaggio della linea di aspirazione, premere l'interruttore (fare riferimento a pagina 216).

* Se si seleziona ‘Lavaggio circuito di aspirazione’, verrà controllata la quantità di detergente rimanente. Se la quantità di detergente è sufficiente, viene visualizzata la schermata mostrata nella figura a sinistra.

Viene visualizzato il nome della soluzione chimica impostata. Per cambiare la soluzione chimica, contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.

: Orotol plus Orotol plus: sia per aspirazione singola sia doppia

GREEN&CLEAN M2 1: per aspirazione singola

GREEN&CLEAN M2 2: per aspirazione doppia

GREEN&CLEAN CL N 1: per aspirazione singola


GREEN&CLEAN CL N 2: per aspirazione doppia

Se la quantità di detergente è insufficiente, viene visualizzata la schermata mostrata nella figura a sinistra. Rabboccare il detergente.

[Riferimento] Come rabboccare il detergente [pagina 231]

Dopo aver rabboccato il detergente, premere l'interruttore per visualizzare la schermata ‘Lavaggio della linea di aspirazione’.

6 Impostazione/Regolazione

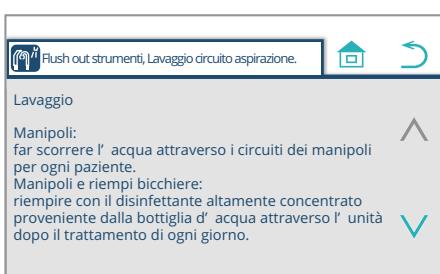


Spiegazione del risciacquo e del lavaggio della linea di aspirazione

1. Premere l'interruttore

Il display passa alla schermata 2.


Appare la spiegazione del risciacquo di "HP, riempì bicchiere e ugello di risciacquo sputacchiera".

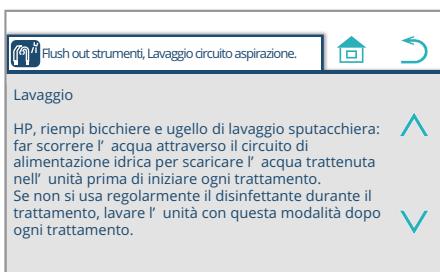

2. Premere l'interruttore

Il display passa alla schermata 3.


La schermata fornisce una spiegazione sul lavaggio della linea di aspirazione; "Risciacquo e lavaggio della linea di aspirazione con detergente" e "Risciacquo".

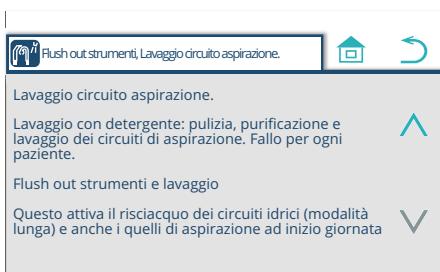

3. Premere l'interruttore

Il display passa alla schermata 4.


La schermata fornisce una spiegazione sul lavaggio della linea di aspirazione; "Lavaggio con detergente" e "Risciacquo e lavaggio della linea di aspirazione".

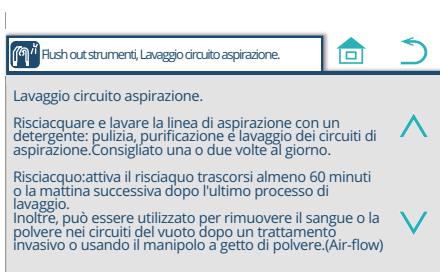

4. Premere l'interruttore

Il display torna alla schermata 3.


La schermata fornisce una spiegazione sul lavaggio della linea di aspirazione; "Risciacquo e lavaggio della linea di aspirazione con detergente" e "Risciacquo".

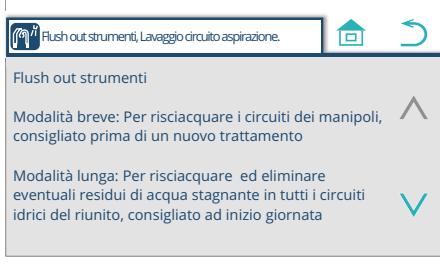

5. Premere l'interruttore

Il display torna alla schermata 2.

Appare la spiegazione del risciacquo di "HP, riempì bicchiere e ugello di risciacquo sputacchiera".

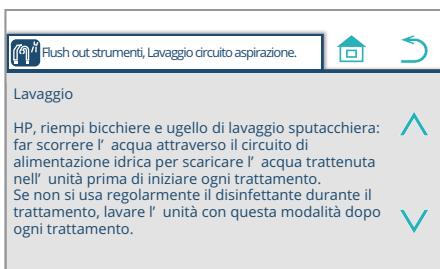

6. Premere l'interruttore

Il display torna alla schermata 3 mostrata a pagina 215.

6 Impostazione/Regolazione

Risciacquo della linea di aspirazione + lavaggio linea di aspirazione con detergente




- Premere l'interruttore 'Risciacquo della linea di aspirazione + lavaggio della linea di aspirazione con detergente'.

Venne visualizzato il nome della soluzione chimica impostata. Per cambiare la soluzione chimica, contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.

Orotol plus	Orotol plus: sia per aspirazione singola sia doppia
GREEN & CLEAN M 2 1	GREEN&CLEAN M2: per aspirazione singola
GREEN & CLEAN M 2 2	GREEN&CLEAN M2: per aspirazione doppia
GREEN & CLEAN CL N 1	GREEN&CLEAN CL N: per aspirazione singola
GREEN & CLEAN CL N 2	GREEN&CLEAN CL N: per aspirazione doppia

- * Se la quantità di detergente è insufficiente, viene visualizzata la schermata mostrata nella figura a sinistra. Rabboccare il detergente.
[Riferimento] Come rabboccare il detergente [pagina 231]

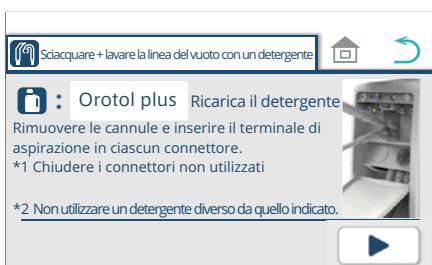


- Avviare il risciacquo della linea di aspirazione + il lavaggio della linea di aspirazione con detergente.

- Aprire il pannello di manutenzione dell'unità sputacchiera. Prendere i manipoli di aspirazione e aspirasaliva dal supporto assistente e inserirli nel connettore.
[Riferimento] Procedura per il lavaggio con detergente [pagina 230]
(A questo punto, l'aspirazione non è attivata.)

- Premere l'interruttore


- * Prima di premere l'interruttore , assicurarsi di inserire i manipoli di aspirazione e aspirasaliva nel connettore.

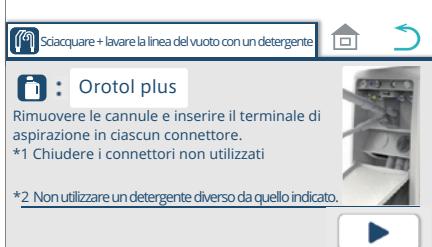


La schermata non ritorna alla schermata iniziale nemmeno quando viene premuto l'interruttore .

- * Per interrompere il lavaggio della linea di aspirazione in corso, premere l'interruttore .

Il tempo visualizzato varia a seconda della soluzione chimica.

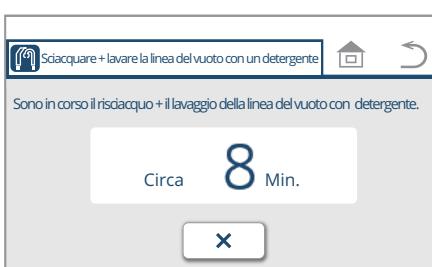


6 Impostazione/Regolazione

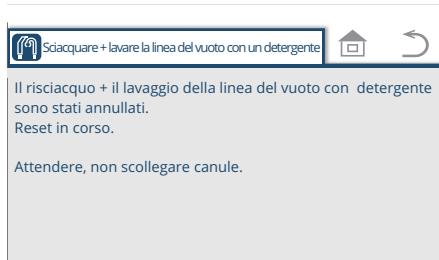


* Se l'interruttore viene premuto durante il lavaggio, appare la schermata mostrata nella figura a sinistra.

Se si rimuove il manipolo dal connettore mentre è visualizzata la schermata a sinistra, il detergente verrà lasciato all'interno del manipolo e del tubo flessibile del manipolo. Lasciare il detergente fermo potrebbe causare una crescita batterica.

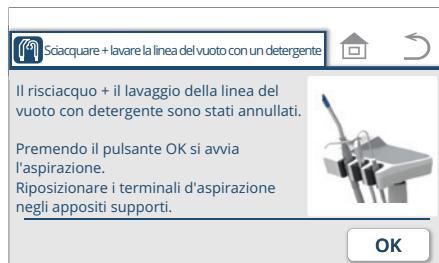


Premere l'interruttore .

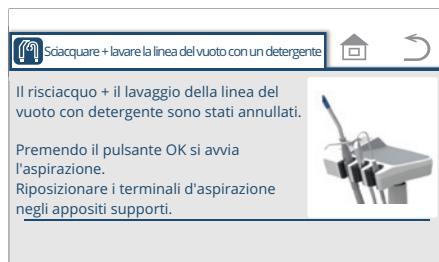


* Dopo l'avvio dell'aspirazione, riportare i manipoli di aspirazione e aspirasaliva nel supporto assistente.

Quando i manipoli di aspirazione e aspirasaliva vengono riportati al supporto assistente, la schermata torna alla schermata iniziale.

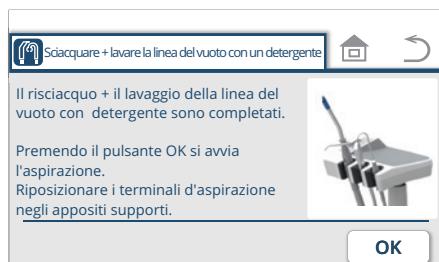

3. Al termine del risciacquo della linea di aspirazione + lavaaggio della linea di aspirazione con detergente, premere l'interruttore .

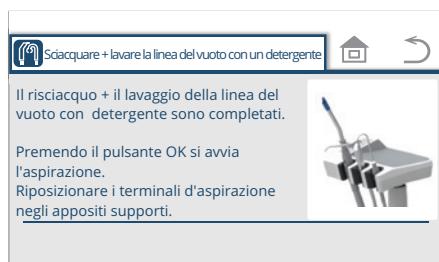

* Dopo l'avvio dell'aspirazione, riportare i manipoli di aspirazione e aspirasaliva nel supporto assistente.

Quando i manipoli di aspirazione e aspirasaliva vengono riportati al supporto assistente, la schermata torna alla schermata iniziale.


Dopo l'avvio dell'aspirazione, rimuovere i manipoli di aspirazione e aspirasaliva dal connettore.

È possibile evitare il gocciolamento del detergente.

Se il detergente gocciola dal connettore, pulirlo immediatamente.

I luoghi in cui il detergente aderisce potrebbero scolorirsi.

6 Impostazione/Regolazione

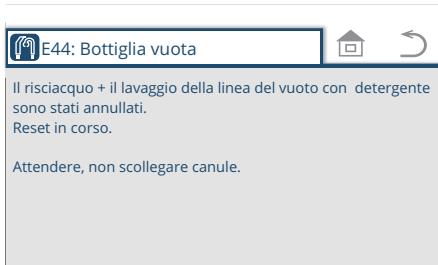


4. In caso di uno stato di errore, adottare le misure necessarie.

In caso di uno stato di errore prima/nel/durante il lavaggio con detergente/risciacquo, il sistema verrà ripristinato e verrà visualizzata la schermata di errore. "Messaggio sul pannello a sfioramento e misure da prendere" Fare riferimento alle pagine da 286 a 288 e prendere le misure in conformità con i rimedi indicati.

es.

E44: Non c'è acqua nel flacone

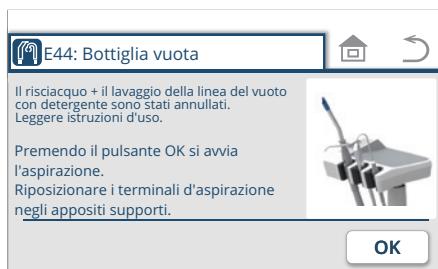

5. Premere l'interruttore **OK**.



* Dopo l'avvio dell'aspirazione, riportare i manipoli di aspirazione e aspirasaliva nel supporto assistente.

Quando i manipoli di aspirazione e aspirasaliva vengono riportati al supporto assistente, la schermata torna alla schermata iniziale.

6 Impostazione/Regolazione


Risciacquo della linea di aspirazione



1. Premere l'interruttore 'Risciacquo della linea di aspirazione'.

Viene visualizzato il nome della soluzione chimica impostata. Per cambiare la soluzione chimica, contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.

- | | |
|----------------------|---|
| Orotol plus | Orotol plus: sia per aspirazione singola sia doppia |
| GREEN & CLEAN M2 1 | GREEN&CLEAN M2: per aspirazione singola |
| GREEN & CLEAN M2 2 | GREEN&CLEAN M2: per aspirazione doppia |
| GREEN & CLEAN CL N 1 | GREEN&CLEAN CL N: per aspirazione singola |
| GREEN & CLEAN CL N 2 | GREEN&CLEAN CL N: per aspirazione doppia |

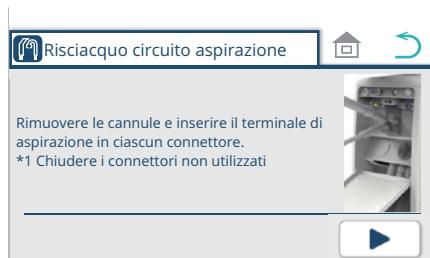


2. Avviare il risciacquo della linea di aspirazione.

① Aprire il pannello di manutenzione dell'unità sputacchiera. Prendere i manipoli di aspirazione e aspirasaliva dal supporto assistente e inserirli nel connettore. [Riferimento] Procedura per il lavaggio con detergente [pagina 230]


② Premere l'interruttore

* Prima di premere l'interruttore , assicurarsi di inserire i manipoli di aspirazione e aspirasaliva nel connettore.


La schermata non ritorna alla schermata iniziale nemmeno quando viene premuto l'interruttore .

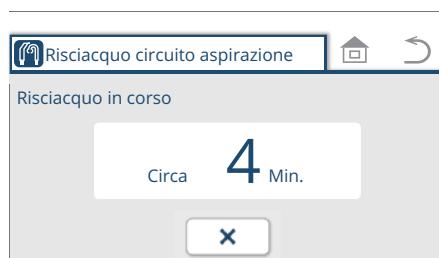

* Per interrompere il lavaggio della linea di aspirazione in corso, premere l'interruttore .

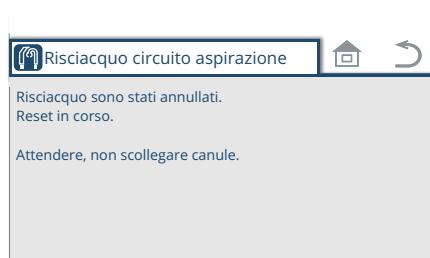

* Se l'interruttore viene premuto durante il lavaggio, appare la schermata mostrata nella figura a sinistra.

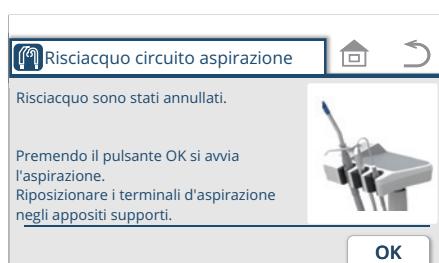


Premere l'interruttore .

* Dopo l'avvio dell'aspirazione, riportare i manipoli di aspirazione e aspirasaliva nel supporto assistente.

Quando i manipoli di aspirazione e aspirasaliva vengono riportati al supporto assistente, la schermata torna alla schermata iniziale.

6 Impostazione/Regolazione

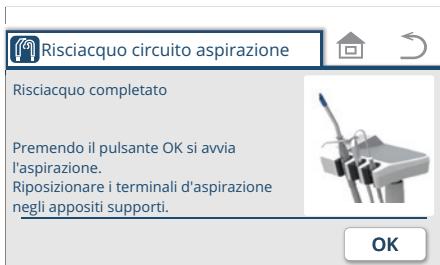

3. Al termine del risciacquo della linea di aspirazione, premere l'interruttore **OK**.



* Dopo l'avvio dell'aspirazione, riportare i manipoli di aspirazione e aspirasaliva nel supporto assistente.


Quando i manipoli di aspirazione e aspirasaliva vengono riportati al supporto assistente, la schermata torna alla schermata iniziale.

Dopo l'avvio dell'aspirazione, rimuovere i manipoli di aspirazione e aspirasaliva dal connettore.

È possibile evitare il gocciolamento del detergente.

Se il detergente gocciola dal connettore, pulirlo immediatamente.

I luoghi in cui il detergente aderisce potrebbero scolorirsi.

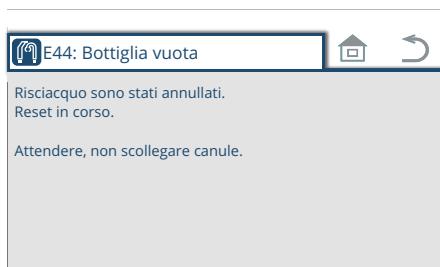


4. In caso di uno stato di errore, adottare le misure necessarie.

In caso di uno stato di errore prima/nel/durante il lavaggio con detergente/risciacquo, il sistema verrà ripristinato e verrà visualizzata la schermata di errore. "Messaggio sul pannello a sfioramento e misure da prendere"

Fare riferimento alle pagine da 286 a 288 e prendere le misure in conformità con i rimedi indicati.

es.

E44: Non c'è acqua nel flacone

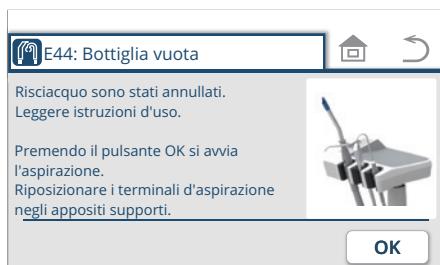

5. Premere l'interruttore **OK**.



* Dopo l'avvio dell'aspirazione, riportare i manipoli di aspirazione e aspirasaliva nel supporto assistente.

Quando i manipoli di aspirazione e aspirasaliva vengono riportati al supporto assistente, la schermata torna alla schermata iniziale.

6 Impostazione/Regolazione


Lavaggio della linea di aspirazione con detergente



1. Premere l'interruttore 'Lavaggio della linea di aspirazione con detergente'.

Viene visualizzato il nome della soluzione chimica impostata. Per cambiare la soluzione chimica, contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.

- | | |
|----------------------|---|
| Orotol plus | Orotol plus: sia per aspirazione singola sia doppia |
| GREEN & CLEAN M2 1 | GREEN&CLEAN M2: per aspirazione singola |
| GREEN & CLEAN M2 2 | GREEN&CLEAN M2: per aspirazione doppia |
| GREEN & CLEAN CL N 1 | GREEN&CLEAN CL N: per aspirazione singola |
| GREEN & CLEAN CL N 2 | GREEN&CLEAN CL N: per aspirazione doppia |

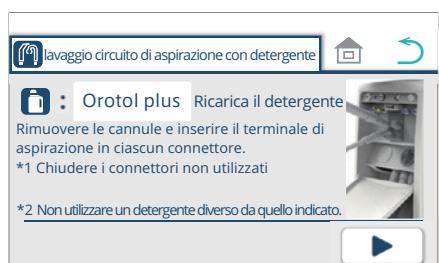


* Se la quantità di detergente è insufficiente, viene visualizzata la schermata mostrata nella figura a sinistra. Rabboccare il detergente.
[Riferimento] Come rabboccare il detergente [pagina 231]

2. Avviare il lavaggio della linea di aspirazione con detergente.

- ① Aprire il pannello di manutenzione dell'unità sputacchiera. Prendere i manipoli di aspirazione e aspirasaliva dal supporto assistente e inserirli nel connettore.
[Riferimento] Procedura per il lavaggio con detergente [pagina 230]
(A questo punto, l'aspirazione non è attivata.)

② Premere l'interruttore

* Prima di premere l'interruttore , assicurarsi di inserire i manipoli di aspirazione e aspirasaliva nel connettore.

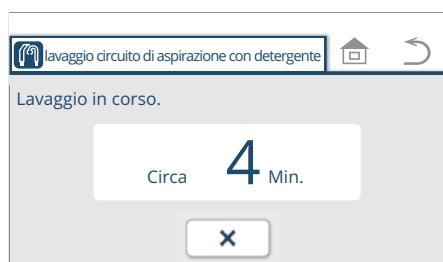


La schermata non ritorna alla schermata iniziale nemmeno quando viene premuto l'interruttore .

* Per interrompere il lavaggio della linea di aspirazione in corso, premere l'interruttore .


Il tempo visualizzato varia a seconda della soluzione chimica.

6 Impostazione/Regolazione

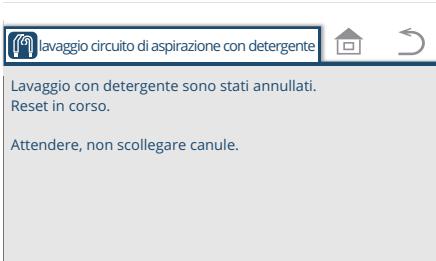


* Se l'interruttore viene premuto durante il lavaggio, appare la schermata mostrata nella figura a sinistra.

Se si rimuove il manipolo dal connettore mentre è visualizzata la schermata a sinistra, il detergente verrà lasciato all'interno del manipolo e del tubo flessibile del manipolo. Lasciare il detergente fermo potrebbe causare una crescita batterica.

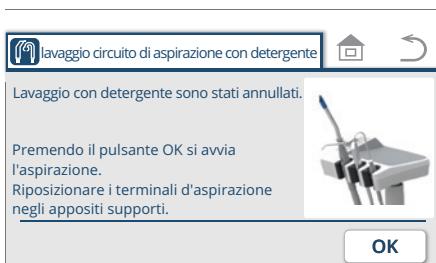


Premere l'interruttore .

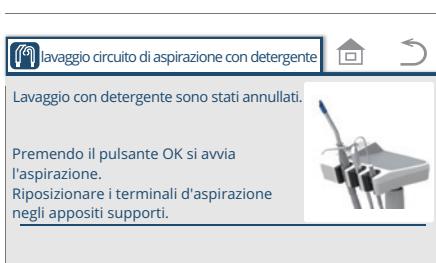

* Dopo l'avvio dell'aspirazione, riportare i manipoli di aspirazione e aspirasaliva nel supporto assistente.

Quando i manipoli di aspirazione e aspirasaliva vengono riportati al supporto assistente, la schermata torna alla schermata iniziale.

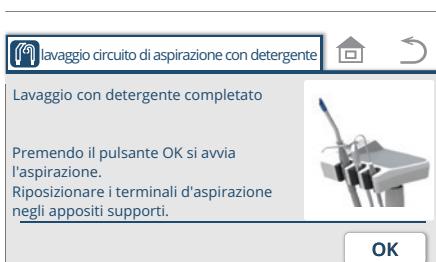

3. Al termine del lavaggio della linea di aspirazione con detergente, premere .



* Dopo l'avvio dell'aspirazione, riportare i manipoli di aspirazione e aspirasaliva nel supporto assistente.

Quando i manipoli di aspirazione e aspirasaliva vengono riportati al supporto assistente, la schermata torna alla schermata iniziale.


Dopo l'avvio dell'aspirazione, rimuovere i manipoli di aspirazione e aspirasaliva dal connettore.

È possibile evitare il gocciolamento del detergente.

Se il detergente gocciola dal connettore, pulirlo immediatamente.

I luoghi in cui il detergente aderisce potrebbero scolorirsi.

6 Impostazione/Regolazione

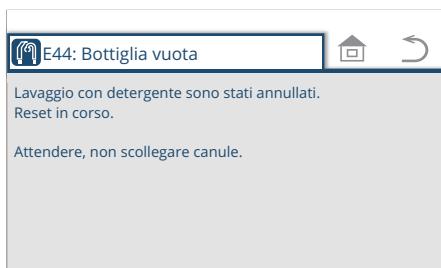


4. In caso di uno stato di errore, adottare le misure necessarie.


In caso di uno stato di errore prima/nel/durante il lavaggio con detergente/risciacquo, il sistema verrà ripristinato e verrà visualizzata la schermata di errore. "Messaggio sul pannello a sfioramento e misure da prendere" Fare riferimento alle pagine da 286 a 288 e prendere le misure in conformità con i rimedi indicati.

es.

E44: Non c'è acqua nel flacone

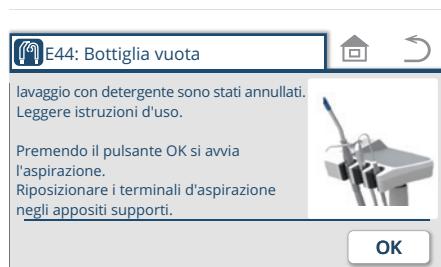

5. Premere l'interruttore **OK**.

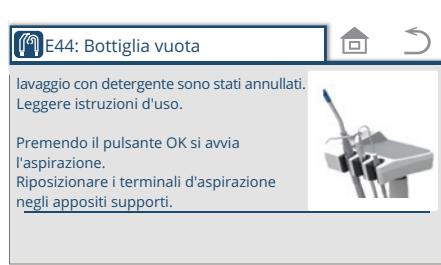


* Dopo l'avvio dell'aspirazione, riportare i manipoli di aspirazione e aspirasaliva nel supporto assistente.

Quando i manipoli di aspirazione e aspirasaliva vengono riportati al supporto assistente, la schermata torna alla schermata iniziale.

6 Impostazione/Regolazione


Lavaggio e risciacquo della linea di aspirazione

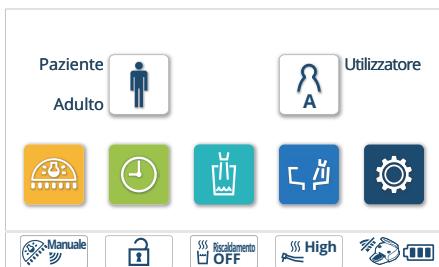

1. Premere l'interruttore funzione . Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.




2. Premere l'interruttore 'Risciacquo, lavaggio della linea di aspirazione'.

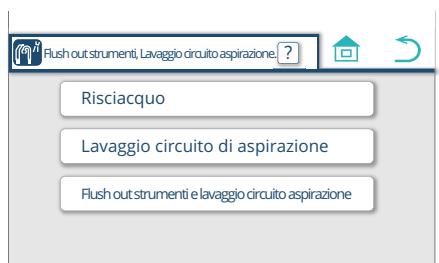

3. Premere l'interruttore 'Risciacquo e lavaggio della linea di aspirazione'.

* Per visualizzare la spiegazione del risciacquo e del lavaggio della linea di aspirazione, premere l'interruttore (fare riferimento a pagina 216).

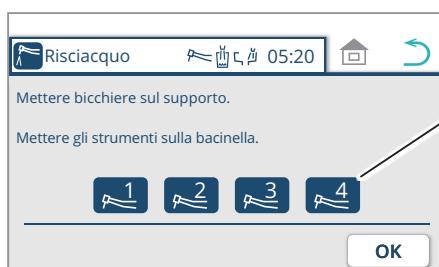

4. Prendere il manipolo che si desidera lavare e posizionarlo nella sputacchiera.


Viene visualizzato il numero del manipolo che è stato preso.
(I manipoli sono numerati 1, 2, 3 e 4 dalla parte anteriore sinistra.)

La schermata non ritorna alla schermata iniziale nemmeno quando viene premuto l'interruttore .

Lavare sempre il manipolo con il corpo principale dell'ablatore a ultrasuoni collegato. Il risciacquo senza fare questo potrebbe causare un malfunzionamento.

5. Premere l'interruttore .

6 Impostazione/Regolazione

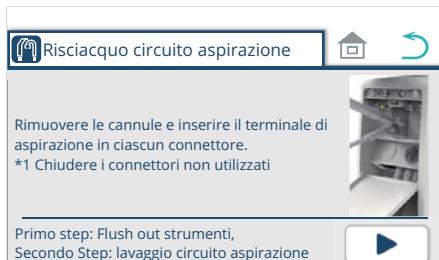

6. Aprire il pannello anteriore dell'unità sputacchiera. Prendere i manipoli di aspirazione e aspirasaliva dal supporto assistente e inserirli nel connettore.

Premere l'interruttore

Il lavaggio e il risciacquo della linea di aspirazione iniziano.

* Prima di premere l'interruttore , assicurarsi di inserire i manipoli di aspirazione e aspirasaliva nel connettore.

La schermata non ritorna alla schermata iniziale nemmeno quando viene premuto l'interruttore .



L'acqua fuoriesce dal manipolo per 2 minuti 40 secondi.

Quindi, l'acqua fuoriesce dall'ugello del sistema di riempimento bicchiere e dall'ugello di risciacquo sputacchiera per 2 minuti 40 secondi.

Se la sputacchiera non è in dotazione, il risciacquo della linea di aspirazione inizia 5 minuti dopo il lavaggio dei circuiti dell'acqua dei manipoli.

Se è necessario iniziare a risciacquare la linea di aspirazione subito dopo aver lavato i circuiti dell'acqua dei manipoli, premere , quindi premere . Il risciacquo della linea di aspirazione si avvia.
[Fare riferimento a pagina 220]


La schermata non torna alla schermata precedente anche se si preme l'interruttore .

* Per sospendere il risciacquo, premere l'interruttore sul pannello a sfioramento, l'interruttore a membrana, oppure attivare il pannello assistente o premere il pedale del comando a pedale.

* Per riprendere il risciacquo, premere l'interruttore .

* Per terminare il risciacquo prematuramente dopo aver premuto , premere /interruttore a membrana/interruttore del pannello di comando assistente o premere il comando a pedale.

* Per terminare il risciacquo prematuramente senza premere , premere l'interruttore a membrana/interruttore del pannello di comando assistente o premere il comando a pedale.

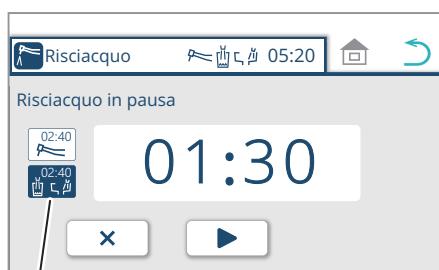

Stato di risciacquo sistema di riempimento bicchiere e sputacchiera

6 Impostazione/Regolazione


Per visualizzare la schermata al passaggio 6, premere l'interruttore .

Per visualizzare la schermata mostrata nella figura a sinistra, premere l'interruttore .




Quando il lavaggio è stato completato, si avvia il risciacquo della linea di aspirazione.

* Per interrompere il risciacquo della linea di aspirazione in corso, premere l'interruttore .

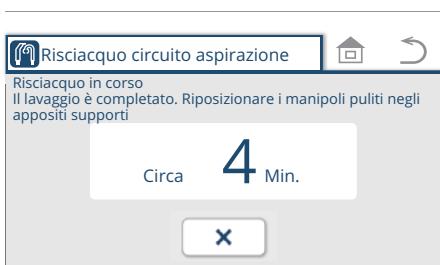


* Se l'interruttore  viene premuto durante il risciacquo, appare la schermata mostrata nella figura a sinistra.

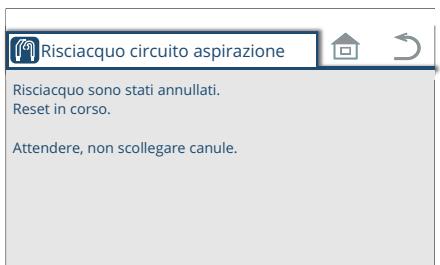

Premere l'interruttore .

* Dopo l'avvio dell'aspirazione, riportare i manipoli di aspirazione e aspirasaliva nel supporto assistente.

Quando i manipoli di aspirazione e aspirasaliva vengono riportati al supporto assistente, la schermata torna alla schermata iniziale.

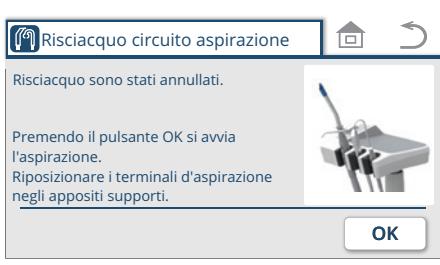

6 Impostazione/Regolazione



7. Al termine del risciacquo della linea di aspirazione, rimettere i manipoli per l'unità medico nel portastrumenti.

Dopo il lavaggio, se i manipoli vengono riportati sul portastrumenti mentre la linea di aspirazione viene risciacquata, la schermata mostrata nella figura a sinistra non viene visualizzata.


* L'acqua non viene scaricata automaticamente dalla siringa. Premere la leva/il pulsante W della siringa per 40 secondi per scaricare.

Per visualizzare la schermata mostrata nella figura a sinistra, premere l'interruttore


Premere l'interruttore .

Appare la schermata del passaggio 6.

Per visualizzare la schermata al passaggio 3, premere l'interruttore

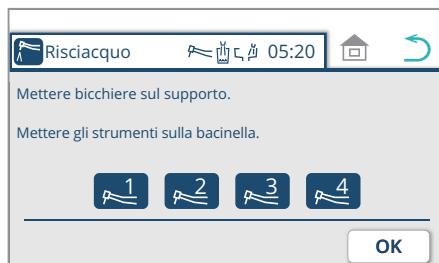


8. Premere l'interruttore .

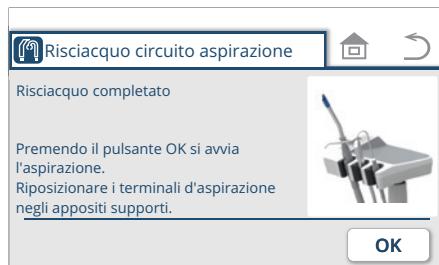

* Dopo l'avvio dell'aspirazione, riportare i manipoli di aspirazione e aspirasaliva nel supporto assistente.

Quando i manipoli di aspirazione e aspirasaliva vengono riportati al supporto assistente, la schermata torna alla schermata iniziale.

* Se i manipoli dell'unità medico vengono riportati indietro dopo i manipoli di aspirazione e aspirasaliva, viene visualizzata la schermata iniziale invece della schermata del passaggio 8.

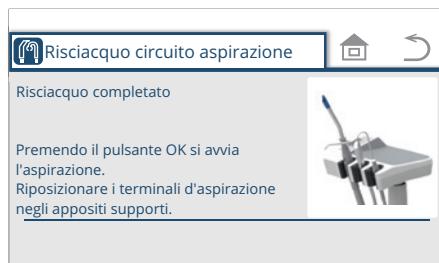


Dopo l'avvio dell'aspirazione, rimuovere i manipoli di aspirazione e aspirasaliva dal connettore.

È possibile evitare il gocciolamento del detergente.

Se il detergente gocciola dal connettore, pulirlo immediatamente.

I luoghi in cui il detergente aderisce potrebbero scolorirsi.

6 Impostazione/Regolazione

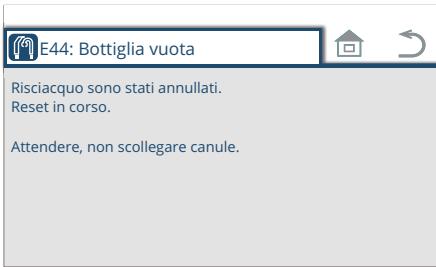

es.

E44: Non c'è acqua nel flacone

9. In caso di uno stato di errore, adottare le misure necessarie.

In caso di uno stato di errore prima/nel/durante il lavaggio con detergente/risciacquo, il sistema verrà ripristinato e verrà visualizzata la schermata di errore. "Messaggio sul pannello a sfioramento e misure da prendere" Fare riferimento alle pagine da 286 a 288 e prendere le misure in conformità con i rimedi indicati.



10. Premere l'interruttore **OK**.



* Dopo l'avvio dell'aspirazione, riportare i manipoli di aspirazione e aspirasaliva nel supporto assistente.


Quando i manipoli di aspirazione e aspirasaliva vengono riportati al supporto assistente, la schermata torna alla schermata iniziale.

6 Impostazione/Regolazione

(1)



(3)

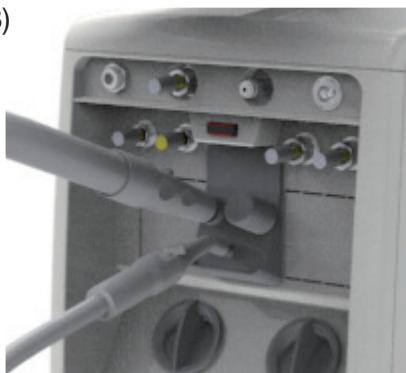

Procedure per il lavaggio con detergente

(1) Aprire il pannello di manutenzione dell'unità sputacchiera.

(2) Prendere i manipoli di aspirazione e aspirasaliva dal supporto assistente.

Rimuovere i chip di aspirazione e aspirasaliva.

(3) Inserire (2) nel connettore.

Un tappo del connettore di aspirazione (di seguito, 'tappo del connettore') deve essere fissato a un connettore che non viene utilizzato.

Non rimuovere il tappo del connettore collegato a un connettore che non ha alcuna funzione o a un connettore che non viene utilizzato. La sua rimozione indebolisce l'aspirazione e potrebbe ostacolare la capacità di aspirazione. Il tappo del connettore potrebbe andare perso quando viene rimosso.

* Non rimuovere il raccoglitore di solidi durante il lavaggio. Senza il raccoglitore di solidi, l'aspirazione non funziona.


Se il raccoglitore di solidi viene rimosso durante il lavaggio, il lavaggio non verrà eseguito e l'acqua potrebbe fuoriuscire con forza.

* Non rimuovere il manipolo dal connettore durante il lavaggio. Potrebbe verificarsi un errore.

Il lavaggio potrebbe richiedere più tempo di quello indicato a seconda della capacità di aspirazione della stanza della macchina.

6 Impostazione/Regolazione

(1)

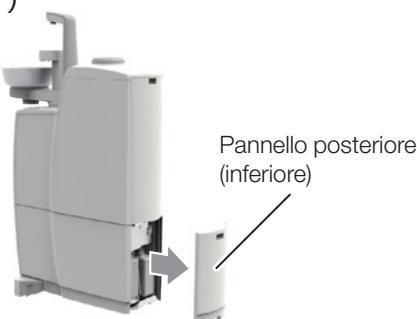


Come rabboccare il detergente

Piedistallo

- (1) Aprire il pannello posteriore (inferiore) dell'unità sputacchiera.
- (2) Estrarre il flacone del detergente e posizionarlo sul pavimento.
- (3) Versare fino a 500 ml di detergente nel flacone di ricambio. Posizionare il tappo sul flacone e portare il flacone vicino all'unità sputacchiera.
- (4) Posizionare i flaconi del detergente e di ricambio uno accanto all'altro.
- (5) Rimuovere il tappo dal flacone di ricambio.

(2)

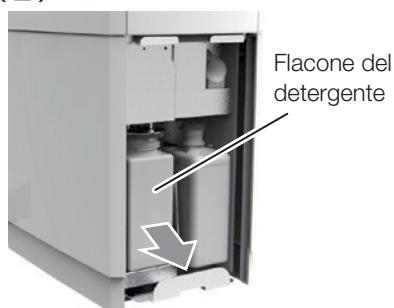


- (6) Rimuovere il coperchio dal flacone di detergente sollevandolo lentamente.
Fissare il coperchio su (5).
- (7) Spostare (6) al punto in cui il flacone del detergente usato è stato posizionato originariamente.

Oltre al flacone nell'unità sputacchiera, è montato anche un flacone di ricambio con un tappo. Conservarlo in un magazzino e utilizzarlo per sostituire il flacone del detergente nell'unità sputacchiera con uno nuovo.

(4)

(5)

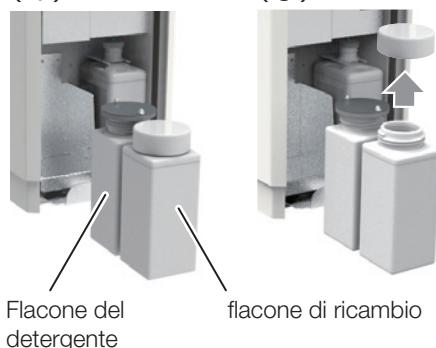


Non utilizzare soluzioni chimiche diverse da quella già impostata sul display. Il set di soluzioni chimiche è quello scelto dalla nostra lista specificata.

[Riferimento] Soluzione chimica specificata da noi [pagina 215]

Il flacone può contenere 500 ml di soluzione chimica. Il numero di lavaggi varia a seconda della soluzione chimica.

Posizionare il tappo sul flacone rimanente. Utilizzare il flacone di ricambio. Utilizzare il detergente rimanente nel flacone sostituito quando si rabbocca il detergente la volta successiva.

(6)

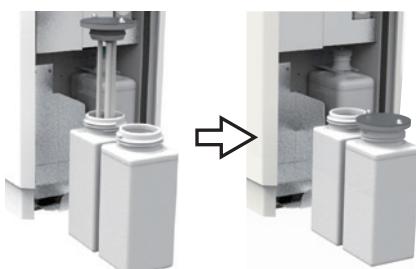


(7)



6–2–4 Visualizzazione della pressione dell'aria di azionamento

Visualizzare la pressione dell'aria di azionamento del manipolo.

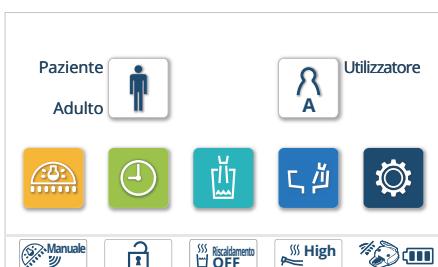


1. Premere l'interruttore funzione .

Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.



2. Premere 'Manipolo'.

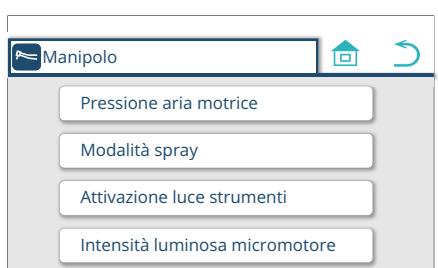

3. Premere 'Pressione dell'aria di azionamento'.

Appare la schermata della pressione dell'aria di azionamento.



4. Prendere il manipolo per cui misurare la pressione dal portastrumenti.

5. Premere il pedale del comando a pedale.

Viene visualizzata la pressione dell'aria.

Quando si preme il pedale del comando a pedale, premendo la modalità non passa alla schermata iniziale; premendo la modalità non passa alla schermata precedente.

6. Dopo aver controllato la pressione, riportare il manipolo al portastrumenti.


7. Premere l'interruttore per visualizzare la schermata iniziale.

6-2-5 Impostazione della modalità spruzzo

Due modalità: spruzzo ON/OFF

Quattro modalità: aria e acqua ON/OFF

Indipendentemente dalle due o quattro modalità, un ablatore a ultrasuoni può commutare tra ON/OFF di solo W (acqua).

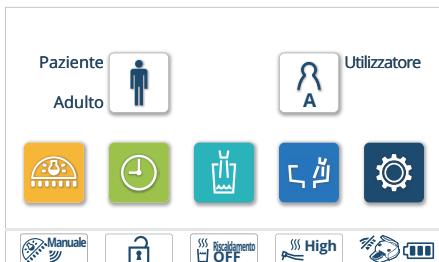

- Premere l'interruttore funzione .

Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.



- Premere 'Manipolo'.



- Premere 'Modalità spray'.

Viene visualizzata la schermata di impostazione della modalità spruzzo.



- Prendere il manipolo che si desidera impostare.

- Selezionare 'Due modalità' o 'Quattro modalità'.

- Premere  per salvare l'impostazione.

Viene visualizzata la schermata precedente.

* Per annullare l'impostazione, premere  senza premere .

- Riportare il manipolo nel portastrumenti.

- Premere l'interruttore  per visualizzare la schermata iniziale.

6–2–6 Impostazione del tempo di attivazione della lampada

Possono essere selezionati due tipi di tempi di attivazione della lampada.
‘Quando si prende un manipolo’

Si accende quando il manipolo viene preso dal portastrumenti e si spegne quando viene riportato al supporto.

* Per NO PAIN, la lampada si spegne dopo il completamento del periodo di post-accensione.

‘Quando si preme il comando a pedale’

Si accende quando il manipolo viene attivato e si spegne dopo che il periodo di post-accensione (circa 5 secondi) è terminato dopo la disattivazione del manipolo.

* Per NO PAIN, la lampada si spegne dopo il completamento del periodo di post-accensione.

* Rivolgersi al concessionario autorizzato Belmont di zona quando si deve modificare l'impostazione del periodo di post-accensione per NEWTRON/VARIO170.

L'impostazione del periodo di post-accensione per NO PAIN non può essere modificata.



1. Premere l'interruttore funzione .

Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.




2. Premere ‘Manipolo’.



3. Premere ‘Attivazione luce del manipolo’.

Viene visualizzata la schermata di impostazione dell'attivazione della luce del manipolo.

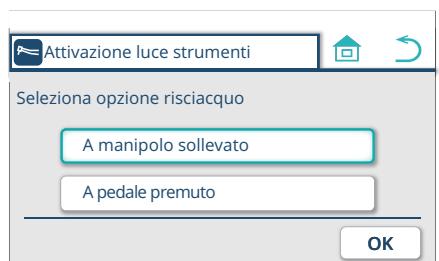

4. Selezionare ‘Quando si prende un manipolo’ o ‘Quando si preme il comando a pedale’.

5. Premere per salvare l'impostazione.

Viene visualizzata la schermata precedente.

* Per annullare l'impostazione, premere senza premere .

6. Premere l'interruttore per visualizzare la schermata iniziale.


6-2-7 Impostazione della luminosità del micromotore

La luminosità della luce del manipolo (illuminamento) può essere modificata.

NLX plus

1. Premere l'interruttore funzione ☀.

Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.

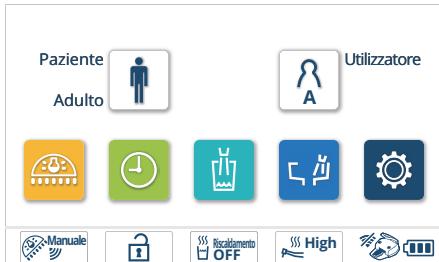

2. Premere 'Manipolo'.



3. Premere 'Luminosità luce micromotore'.

Viene visualizzata la schermata di impostazione della luminosità della luce del micromotore.




4. Prendere il manipolo da impostare.

5. Premere gli interruttori ▼ e ▲ per regolare la luminosità.

Regolare la luminosità controllando la luminosità effettiva.

* Non è necessario premere OK per salvare questa impostazione.
Viene memorizzata quando la luminosità (illuminamento) è impostata.

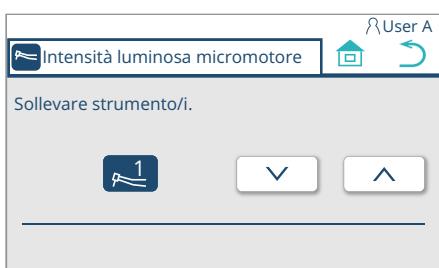

6. Premere l'interruttore □ per tornare alla schermata iniziale.

6 Impostazione/Regolazione



MX2/MCX

1. Premere l'interruttore funzione .

Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.




2. Premere 'Manipolo'.



3. Premere 'Luminosità luce micromotore'.

Viene visualizzata la schermata di impostazione della luminosità della luce del micromotore.

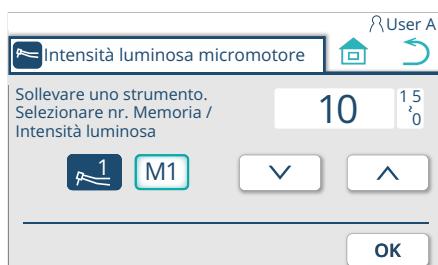

4. Prendere il manipolo che si desidera impostare.

5. Premere l'interruttore per selezionare [M1], [M2], [M3] o [M4].

Questi quattro interruttori appaiono in sequenza ogni volta che si preme l'interruttore [M1].

6. Premere gli interruttori per regolare la luminosità tra [0] e [15].

La luminosità può essere regolata in incrementi di [1].

7. Premere per salvare l'impostazione.

Viene visualizzata la schermata precedente.

* Per annullare l'impostazione, premere senza premere .

8. Premere l'interruttore per tornare alla schermata iniziale.

6–2–8 Impostazione del livello dell'acqua del sistema di riempimento bicchiere

L'impostazione del livello dell'acqua del sistema di riempimento bicchiere è impostata in fabbrica, ma può essere regolata secondo necessità. Il livello dell'acqua del sistema di riempimento bicchiere e la durata di riempimento quando si utilizza l'interruttore del sistema di riempimento bicchiere (riempimento forzato bicchiere) possono essere regolati.



1. Premere l'interruttore funzione .

Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.

2. Premere l'interruttore .

Viene visualizzata la seconda pagina della schermata di impostazione della funzione.

3. Premere 'Riempimento bicchiere, risciaco sputacchiera'.

4. Premere 'Livello dell'acqua di riempimento bicchiere'.

Viene visualizzata la schermata di impostazione del livello dell'acqua del sistema di riempimento bicchiere.

5. Posizionare un bicchiere vuoto sulla base del sistema di riempimento bicchiere e mantenere premuto l'interruttore per riempire il bicchiere fino al livello desiderato.

* L'acqua viene fornita mentre l'interruttore è premuto e si arresta quando viene rilasciato.

* Per memorizzare il livello dell'acqua di riempimento bicchiere, premere . Dopo aver premuto , viene visualizzata la schermata precedente.

* Per annullare l'impostazione, premere senza premere . Dopo aver premuto , viene visualizzata la schermata precedente.

6 Impostazione/Regolazione

6. Premere l'interruttore  per tornare alla schermata iniziale.

Se l'acqua alimentata supera il livello di acqua desiderato, impostarla nuovamente dall'inizio.

Per annullare l'impostazione a metà, premere  o .

6-2-9 Impostazione dell'interblocco riempimento bicchiere/risciacquo sputacchiera


È possibile selezionare le due seguenti modalità:

'Interblocco'

Il risciacquo sputacchiera inizia allo stesso tempo del riempimento bicchiere.

'Nessun interblocco'

La sputacchiera non viene risciacquata anche quando si avvia il riempimento bicchiere.

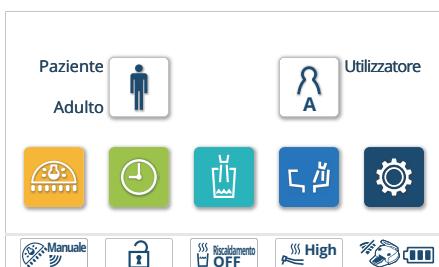

1. Premere l'interruttore funzione .

Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.



2. Premere l'interruttore .

Viene visualizzata la seconda pagina della schermata di impostazione della funzione.



3. Premere 'Riempimento bicchiere, risciacquo sputacchiera'.



4. Premere 'Interblocco di riempimento bicchiere, risciacquo sputacchiera'. Appare la schermata di interblocco di riempimento bicchiere, risciacquo sputacchiera.



5. Selezionare 'Interblocco' o 'Nessun interblocco'.

6. Premere per salvare l'impostazione.


Viene visualizzata la schermata precedente.

* Per annullare l'impostazione, premere senza premere .

7. Premere l'interruttore per tornare alla schermata iniziale.

6–2–10 Impostazione del tempo di risciacquo sputacchiera

La durata del risciacquo della sputacchiera può essere impostata.

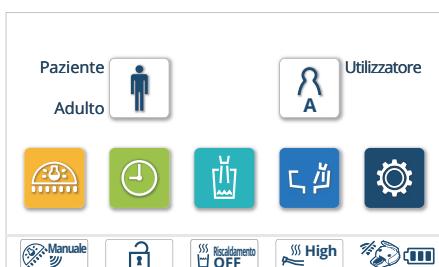

1. Premere l'interruttore funzione .

Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.




2. Premere l'interruttore .

Viene visualizzata la seconda pagina della schermata di impostazione della funzione.




3. Premere 'Riempimento bicchiere, risciacquo sputacchiera'.

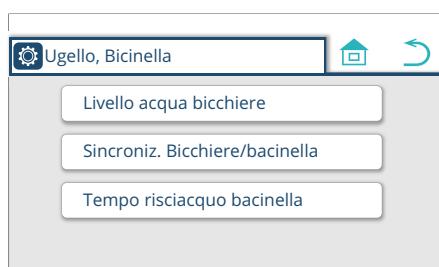

4. Premere 'Tempo di risciacquo sputacchiera'.

Appare la schermata di impostazione del tempo di risciacquo sputacchiera.

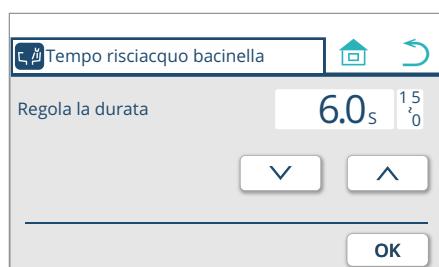

5. Premere gli interruttori per impostare il tempo tra [0] e [15] secondi.

6. Premere per salvare l'impostazione.


Viene visualizzata la schermata precedente.

* Per annullare l'impostazione, premere senza premere .

7. Premere l'interruttore per tornare alla schermata iniziale.

6-2-11 Impostazione della lingua

La lingua visualizzata sul pannello a sfioramento può essere modificata.

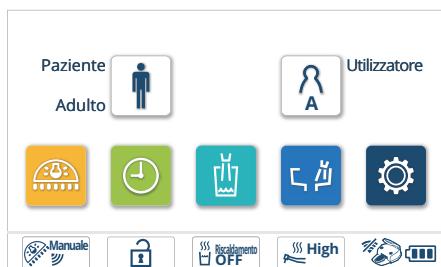


1. Premere l'interruttore funzione .

Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.



2. Premere 'Lingua'.

Viene visualizzata la schermata di impostazione della lingua.

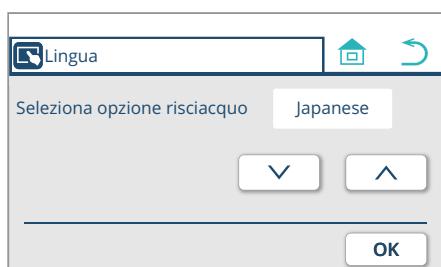

3. Premere gli interruttori per selezionare la lingua.

4. Premere per salvare l'impostazione.


Viene visualizzata la schermata precedente.

* Per annullare l'impostazione, premere senza premere .

5. Premere l'interruttore per tornare alla schermata iniziale.

6–2–12 Impostazione del tono di allarme del timer

Il tono di allarme emesso quando il timer raggiunge lo zero può essere impostato. Sono disponibili cinque toni e possono essere impostati per distinguere tra poltrone diverse nella stessa stanza.

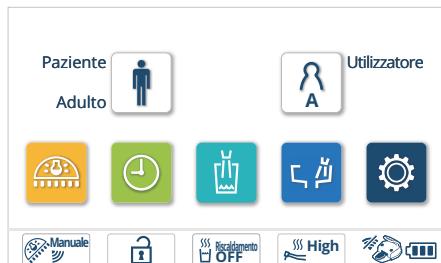

1. Premere l'interruttore funzione .

Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.




2. Premere l'interruttore .

Viene visualizzata la seconda pagina della schermata di impostazione della funzione.




3. Premere 'Timer, pannello di comando'.

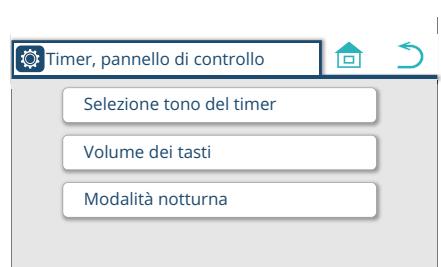

4. Premere 'Selezione allarme timer'.

Viene visualizzata la schermata di impostazione selezione allarme timer.

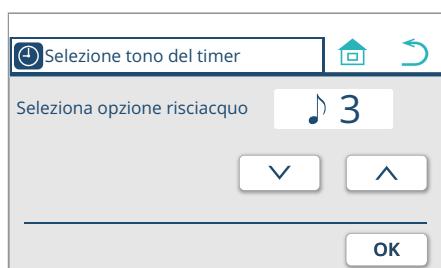

5. Premere gli interruttori per selezionare un tono da cinque tipi (da '♪ 1' a '♪ 5').

6. Premere per salvare l'impostazione.

Viene visualizzata la schermata precedente.


* Per annullare l'impostazione, premere senza premere .

7. Premere l'interruttore per tornare alla schermata iniziale.

6 Impostazione/Regolazione

6-2-13 Impostazione del volume del tocco dei tasti

Il tono emesso quando un interruttore viene premuto può essere impostato.

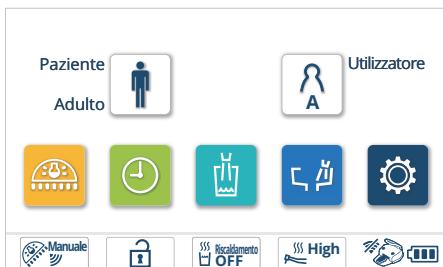

1. Premere l'interruttore funzione .

Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.




2. Premere l'interruttore .

Viene visualizzata la seconda pagina della schermata di impostazione della funzione.



3. Premere 'Timer, pannello di controllo'.

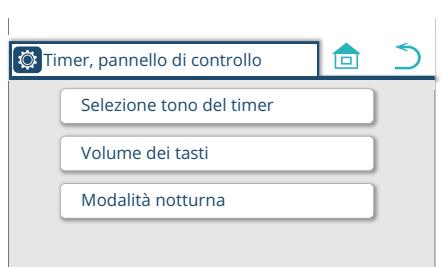

4. Premere 'Volume tocco tasti'.

Appare la schermata di impostazione del volume di tocco tasti.



5. Premere il grafico a barre a sfioramento per impostare il volume su cinque livelli (da '1' a '5').

L'interruttore emette il suono del tono.

L'interruttore silenzia il tono.

Per silenziare il tono, premere , il display passa a .

6. Premere per salvare l'impostazione.


Viene visualizzata la schermata precedente.

* Per annullare l'impostazione, premere senza premere .

7. Premere l'interruttore per tornare alla schermata iniziale.

6–2–14 Impostazione del tempo modalità sospensione

Quando nessun interruttore sul pannello di comando viene utilizzato per un certo tempo, lo schermo del pannello a sfioramento diventa scuro e passa alla modalità di sospensione. È possibile regolare il tempo prima di entrare in modalità di sospensione.

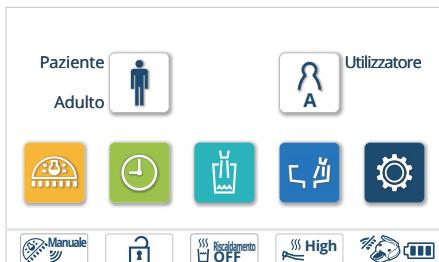

1. Premere l'interruttore funzione .

Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.




2. Premere l'interruttore .

Viene visualizzata la seconda pagina della schermata di impostazione della funzione.




3. Premere 'Timer, pannello di controllo'.

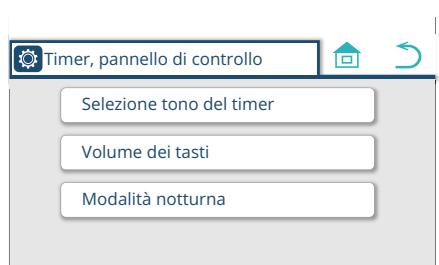

4. Premere 'Tempo modalità sospensione'.

Appare la schermata di impostazione del tempo modalità sospensione.

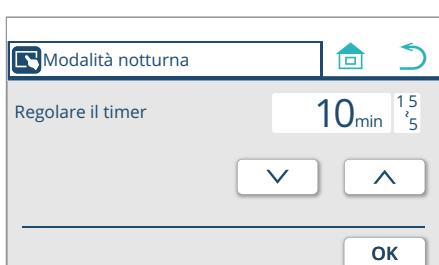

5. Premere gli interruttori   per selezionare una delle tre durate ('5 min', '10 min' e '15 min').

6. Premere  per salvare l'impostazione.

Viene visualizzata la schermata precedente.

* Per annullare l'impostazione, premere  senza premere .


7. Premere l'interruttore  per tornare alla schermata iniziale.

* Per annullare la modalità di sospensione, toccare lo schermo.

6-2-15 Impostazione dell'annullamento di emergenza del blocco poltrona

La funzione di blocco della poltrona, quando attivata, può essere temporaneamente annullata.

Utilizzare questo annullamento temporaneo solo quando la funzione di blocco poltrona deve essere disattivata per risolvere un malfunzionamento.

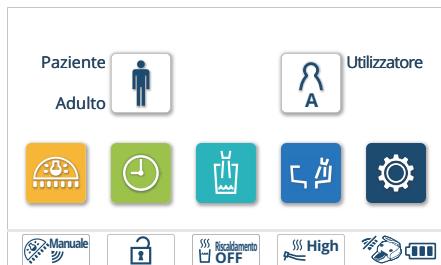

1. Premere l'interruttore funzione .

Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.




2. Premere l'interruttore .

Viene visualizzata la seconda pagina della schermata di impostazione della funzione.



3. Premere 'Annullamento di emergenza del blocco poltrona'.

Viene visualizzata la schermata di impostazione annullamento di emergenza del blocco poltrona.

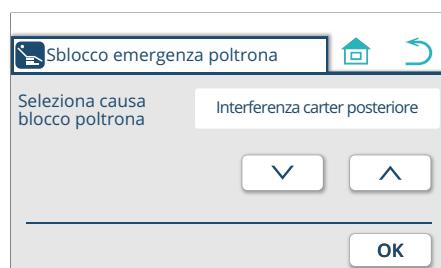

4. Premere gli interruttori per annullare il blocco della poltrona.

[Riferimento] Funzione di blocco della poltrona [pagine da 140 a 142]

5. Premere l'interruttore per salvare l'impostazione.

Viene visualizzata la schermata precedente.


* Per annullare l'impostazione, premere senza premere .

6. Premere l'interruttore per tornare alla schermata iniziale.

* Quando l'interruttore principale viene spento, l'annullamento di emergenza del blocco della poltrona viene disattivato e la funzione di blocco della poltrona viene riattivata.

6–2–16 Visualizzazione della versione del programma

È possibile controllare la versione del programma di ciascun circuito stampato installato all'interno dell'unità.

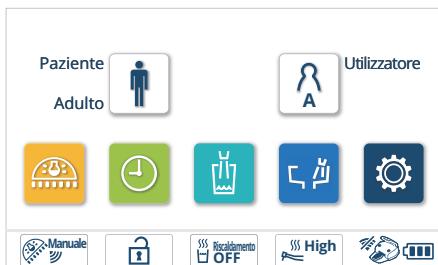

1. Premere l'interruttore funzione .

Venne visualizzata la schermata di impostazione della funzione.



2. Premere l'interruttore .

Venne visualizzata la seconda pagina della schermata di impostazione della funzione.



3. Premere 'Versione programma'.

Appare la schermata per controllare la versione del programma.

Versione software			
	ID	Maggiore	Pieno
Principale	TB1709	2	2D
LCD-Principale	TB2205	1	1.4
LCD-Secondario	TB2204	1	1.4
Sistema immagini	TB1815	2	2.5
Riscaldatore(trumenti)			
Pedale			
Ricevitore Pedale			

4. Controllare la versione del programma

(esempio) La versione LCD principale è TB220514

ID : TB2205

Maggiore : 1

Pieno : 1.4


Premere l'interruttore per procedere alla 2^a pagina.

Premere l'interruttore per tornare alla 1^a pagina.

Versione software			
	ID	Maggiore	Pieno
Poltrona			
Assistente			
Tavoletta assistente			
Ugello riempimento bicchiere			
Lampada scialitica			
Lavaggio circuito di aspirazione			


5. Premere l'interruttore per visualizzare la schermata iniziale

6-3 Regolazione della quantità di acqua/aria fornita dall'unità medico

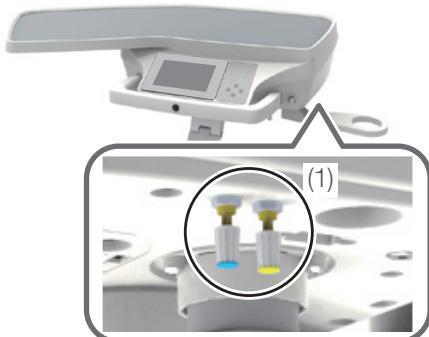


Regolazione della quantità di acqua/aria fornita allo spruzzo della siringa
La quantità di acqua e aria fornita dall'unità medico può essere regolata con le manopole (1).

Tappo blu (lato W): quantità di acqua fornita
Tappo giallo (lato A): quantità di aria fornita

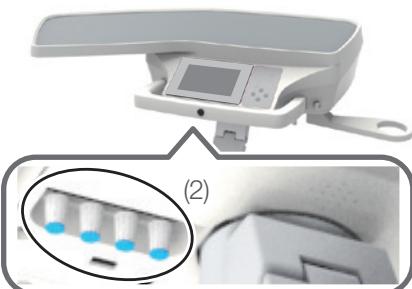

Regolazione della quantità di acqua fornita allo spruzzo del manipolo
La quantità di acqua fornita allo spruzzo del manipolo dall'unità medico può essere regolata con le manopole (2) (con tappi blu).

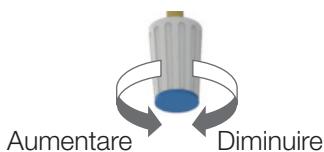

Tutte le manopole diminuiscono la portata quando vengono ruotate in senso orario e la aumentano quando vengono ruotate in senso antiorario.

Non serrare eccessivamente la manopola di regolazione. Viene utilizzata per aumentare o diminuire la portata e non è una valvola di arresto. Si noti che diventa inattiva se la si chiude troppo strettamente.

- * La corrispondenza tra un supporto e la relativa manopola di regolazione (2) dipende dalla posizione della siringa.
(Vedere la figura a sinistra) Azionare il sistema e notare la corrispondenza tra i numeri della manopola di regolazione e il manipolo.



Segnaposto



6-4 Regolazione della quantità di acqua/aria fornita all'unità sputacchiera



Coperchio del pannello di manutenzione

Premere il coperchio del pannello manutenzione per aprirlo.



(1) Manopola di controllo della fornitura di acqua per la siringa
Regolare la quantità di acqua fornita alla siringa.

(2) Manopola di controllo della fornitura di aria per la siringa
Regolare la quantità di aria fornita alla siringa.

(3) Manopola di controllo della fornitura dell'acqua per l'accoppiatore di servizio dell'acqua
Regolare la quantità di acqua fornita dall'accoppiatore di servizio dell'acqua.

(4) Manopola di regolazione del risciacquo sputacchiera


(5) Manopola di regolazione del sistema di riempimento bicchiere*

* Le manopole (5) sono fornite per la manutenzione.

Sono già state regolate per garantire una fornitura ottimale dell'acqua durante l'installazione.

Il livello dell'acqua può essere regolato secondo necessità.

[Riferimento] Impostazione del livello dell'acqua nel sistema di riempimento bicchiere [pagina 237]

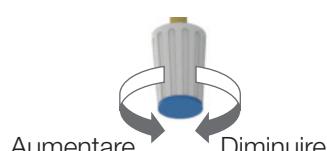

Tutte le manopole diminuiscono la portata quando vengono ruotate in senso orario e la aumentano quando vengono ruotate in senso antiorario.

Non serrare eccessivamente la manopola di regolazione. Viene utilizzata per aumentare o diminuire la portata e non è una valvola di arresto. Si noti che diventa inattiva se la si chiude troppo strettamente.

7-1 Esterno

7-1-1 Pulizia e disinfezione delle superfici

Per pulire e disinfettare la parte esterna del prodotto (tranne il pannello a sfioramento), pulire la superficie con un panno morbido o un tovagliolo di carta inumiditi con FD366, prodotto da Dürr, quindi asciugarla con un panno asciutto.

Se l'esterno è eccessivamente sporco, inumidire un panno morbido con acqua contenente circa 10% di detergente neutro, quindi strofinare l'esterno con il panno. Quindi, pulirlo con un panno inumidito con acqua e asciugarlo completamente con un panno asciutto.

ATTENZIONE

Per pulire e disinfettare il pannello a sfioramento, utilizzare etanolo per disinfezione.

L'uso di altri disinfettanti potrebbe portare a un funzionamento errato, con conseguenti lesioni.

Non utilizzare mai i prodotti elencati di seguito:

Sostanze chimiche volatili come diluenti per vernici, butanolo, alcool isopropilico, acetone, benzina o cherosene; detergenti acidi, alcalini o al cloro; disinfettanti altamente corrosivi (iodopovidone come Isodine, ipoclorito di sodio, ecc.); cera abrasiva lucidante o spugna abrasiva

Non utilizzare una spazzola o uno scrubber per la manutenzione. Tutti questi potrebbero lasciare graffi e/o sporco persistente.

Se dell'acqua o del detergente rimangono sulla superficie, pulirli immediatamente. Umidità o detergente potrebbero causare la formazione di ruggine o il guasto delle parti elettriche.

Non spruzzare il detergente direttamente sulla parte esterna.

Pulire la superficie con un panno morbido o un tovagliolo di carta inumiditi con detergente e asciugarla con un panno.

Se del liquido penetra nel prodotto, potrebbe causare malfunzionamenti o guasti.

Confermare che il detergente sia stato completamente asciugato prima di attivare il prodotto.

7-2 Poltrona

7-2-1 Parte in pelle

Pulire la superficie con un panno morbido o un tovagliolo di carta inumiditi con FD360, prodotto da Dürr, quindi asciugarla con un panno asciutto.

Se è eccessivamente sporca, inumidire un panno morbido con acqua contenente circa 10% di detergente neutro, quindi strofinare l'esterno con il panno. Quindi, pulirlo con un panno inumidito con acqua e poi asciugarlo completamente con un panno asciutto.

[Riferimento] Precauzioni per l'uso della pelle sintetica [pagina 43]


Non utilizzare solventi organici, detergenti contenenti sostanze abrasive o candeggina per pulire la parte in pelle.


Tutti questi potrebbero deteriorare la superficie e cambiare la consistenza o la lucentezza.

Non spruzzare il detergente direttamente sulla pelle o sulla parte esterna.
Pulire la superficie con un panno morbido o un tovagliolo di carta inumiditi con detergente e asciugarla con un panno asciutto.

Il liquido potrebbe penetrare all'interno del prodotto attraverso le fessure e causare un malfunzionamento o un guasto.

Confermare che il detergente sia stato completamente asciugato prima di attivare il prodotto.

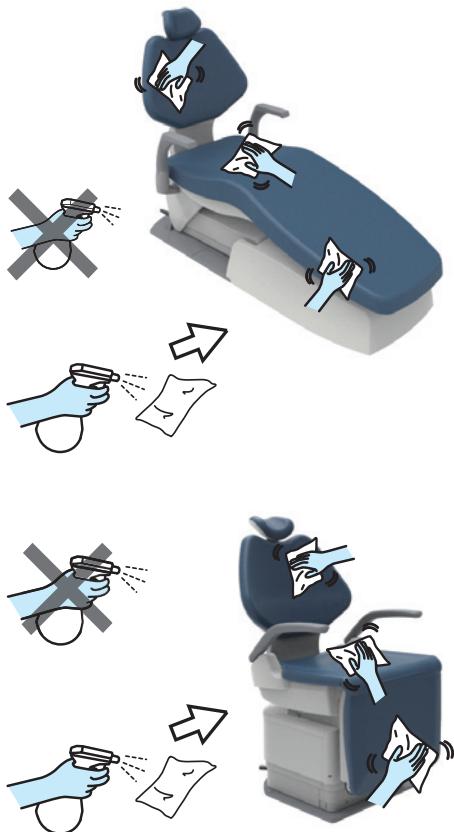

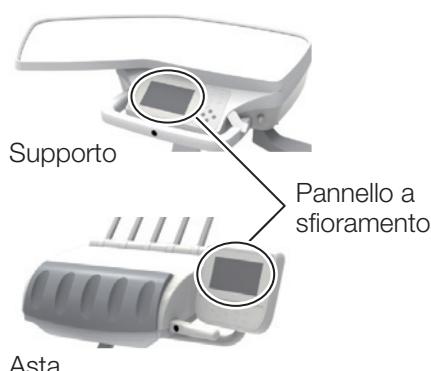

7-3 Unità medico

7-3-1 Pannello a sfioramento

Spegnere l'interruttore principale per evitare la pressione accidentale di un interruttore durante la pulizia o la disinfezione.

Quando si effettua pulizia o disinfezione mentre si accende l'interruttore principale, bloccare il pannello a sfioramento dell'unità medico.

(Esempio) Pulizia della superficie del pannello a sfioramento durante la procedura.



1. Aprire la schermata [Blocco display] e premere **OK**.

Il pannello a sfioramento è bloccato.

Mentre è bloccato, una finestra secondaria che indica lo stato di blocco viene visualizzata sul pannello a sfioramento.

2. Pulire il pannello a sfioramento con un panno morbido inumidito con detergente.

3. Mantenere premuto l'interruttore a membrana per poltrona/poggiatesta per almeno un secondo.

In questo modo si sblocca il funzionamento del pannello a sfioramento.


Non spruzzare il detergente direttamente sulla parte esterna.

Pulire la superficie con un panno morbido o un tovagliolo di carta inumiditi con detergente e asciugarla con un panno asciutto.

Se del liquido penetra nel prodotto, potrebbe causare malfunzionamenti o guasti.

ATTENZIONE

Assicurarsi di eliminare tutta l'acqua e il detergente. In caso contrario, si potrebbe causare un guasto del funzionamento, un malfunzionamento, con conseguenti lesioni.

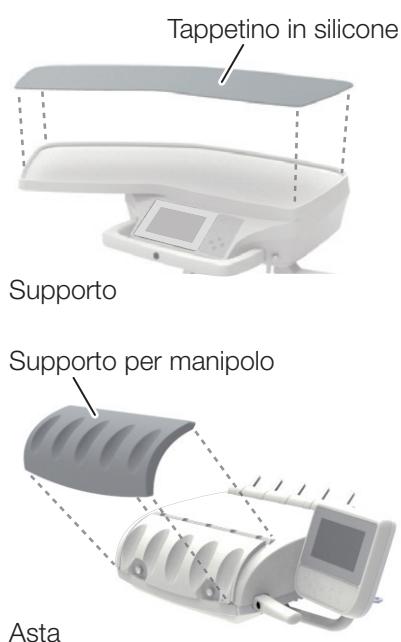

7-3-2 Tappetino in silicone/appoggio per manipolo

Passarli in autoclave a una temperatura di 134 °C per 3 minuti. Oppure, pulire la superficie con un panno morbido inumidito con disinfettante FD366 prodotto da Dür.

Prima della sterilizzazione, rimuovere lo sporco dalla superficie e lavarli sotto l'acqua corrente.


Assicurarsi di porli in un sacchetto per la sterilizzazione durante il processo in autoclave.

Non eseguire il processo di asciugatura e lasciare asciugare in modo naturale.

La ripetizione della sterilizzazione in autoclave potrebbe causare degradazione o scolorimento, ma non incide sulle funzioni del prodotto.

Se soluzioni chimiche vengono versate sull'apparato, pulirle immediatamente. In caso contrario, potrebbe verificarsi scolorimento.

Tipo supporto

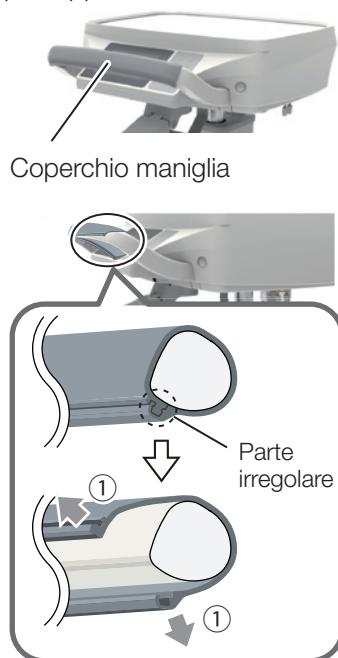

7-3-3 Coperchio maniglia

Il coperchio maniglia è amovibile per la pulizia.

Pulire bene con un panno morbido inumidito con FD366 prodotto da Dürr.

Il coperchio maniglia può essere sterilizzato in autoclave a una temperatura di 134 °C per 3 minuti.

Prima della sterilizzazione, rimuovere lo sporco sulla superficie e lavarlo sotto l'acqua corrente.

Assicurarsi di porlo in un sacchetto per la sterilizzazione durante il processo di sterilizzazione.

Non eseguire il processo di asciugatura superando la temperatura di sterilizzazione e lasciare asciugare naturalmente.

[Metodo di distacco] Tipo di supporto

① Prima di tutto, rimuovere la parte irregolare sul bordo del coperchio della maniglia.

② Rimuovere il coperchio della maniglia.

* Assicurarsi di rimuoverlo con le mani.


[Metodo di riconnessione]

Rimontarlo nell'ordine inverso alle procedure di distacco.

* Allineare la parte non uniforme del coperchio della maniglia, quindi riattaccarlo.



Tipo ad asta

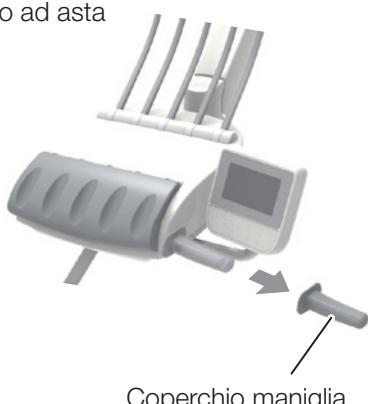

[Metodo di distacco] Tipo ad asta

Rimuovere il coperchio della maniglia.

* Assicurarsi di rimuoverlo con le mani.

[Metodo di riconnessione]

Rimontarlo nell'ordine inverso alle procedure di distacco.

* Allineare la parte non uniforme del coperchio della maniglia, quindi riattaccarlo.

La ripetizione della sterilizzazione in autoclave potrebbe causare degradazione o scolorimento, ma non incide sulle funzioni del prodotto.

Non eseguire il processo di asciugatura che supera la temperatura di sterilizzazione e lasciare asciugare naturalmente.


In caso contrario, potrebbero verificarsi deformazione o scolorimento.

Se soluzioni chimiche vengono versate sull'apparato, pulirle immediatamente. In caso contrario, potrebbe verificarsi scolorimento.

7-3-4 Supporto contenitore rifiuti

Quando il contenitore rifiuti si riempie, posizionare un contenitore di carta sul supporto contenitore rifiuti.

Se il supporto si sporca, pulirlo bene con un panno morbido inumidito con FD366 prodotto da Dürr.

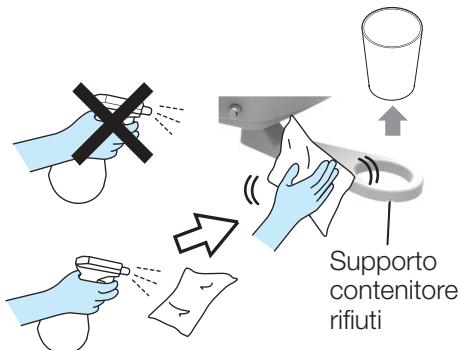


7-3-5 Portastrumenti


Supporto



Segnaposto

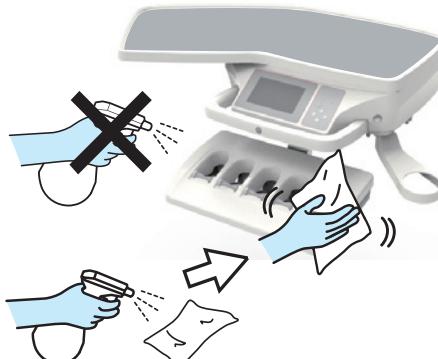

Asta

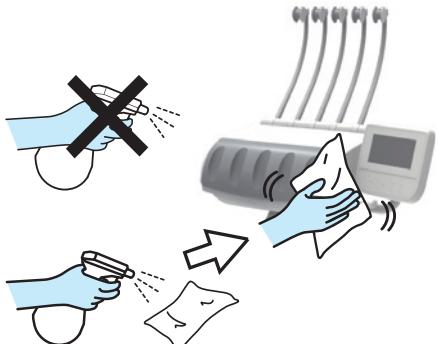

Non utilizzare mai i prodotti elencati di seguito:

Sostanze chimiche volatili come diluenti per vernici, butanolo, alcool isopropilico, acetone, benzina o cherosene; detergenti acidi, alcalini o al cloro; disinfettanti altamente corrosivi (iodopovidone come Isodine, ipoclorito di sodio, ecc.); cera abrasiva lucidante o spugna abrasiva


Non utilizzare una spazzola o uno scrubber durante la manutenzione. Tutti questi potrebbero lasciare graffi e/o sporco persistente.

Se dell'acqua o del detergente rimangono sulla superficie, pulirli immediatamente. Umidità o detergente potrebbero causare la formazione di ruggine o il guasto delle parti elettriche.


Non spruzzare il detergente direttamente sulla pelle o sulla parte esterna. Pulire la superficie con un panno morbido o un tovagliolo di carta inumiditi con detergente e asciugarla con un panno asciutto.

Se il liquido penetra all'interno del prodotto attraverso le fessure può causare un malfunzionamento o un guasto.

Confermare che il detergente sia completamente evaporato prima di attivare il prodotto.

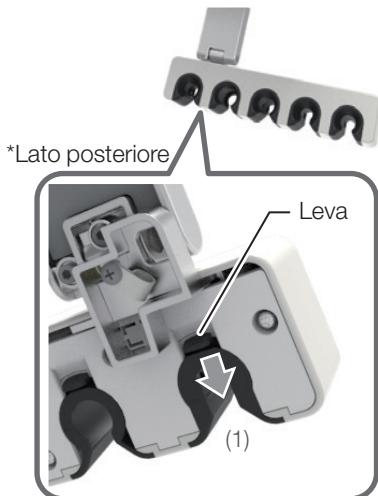

Portastrumenti

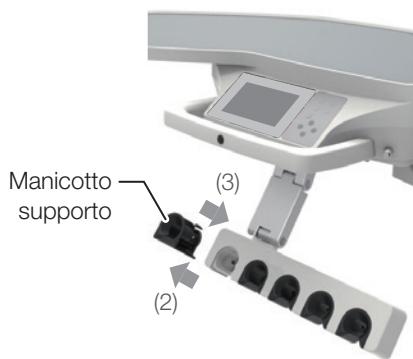

Manicotto supporto

I manicotti supporto del portastrumenti sono amovibili per la pulizia.

Pulire bene con un panno morbido inumidito con FD366 prodotto da Dürr.

Il manicotto da n. A1 ad A3 può essere sterilizzato in autoclave a una temperatura di 134 °C per 3 minuti.

Il manicotto n. 1 - 4 non può essere sterilizzato in autoclave.

Prima della sterilizzazione, rimuovere lo sporco sulla superficie e lavarlo sotto l'acqua corrente.

Assicurarsi di porlo in un sacchetto per la sterilizzazione durante il processo di sterilizzazione.

Non eseguire il processo di asciugatura oltre la temperatura di sterilizzazione e lasciare asciugare naturalmente.

Per quanto riguarda il n. manicotto di ciascun manipolo/siringa, fare riferimento alla tabella alla pagina successiva.

[Metodo per staccare/riattaccare]

1. Tirare la leva della sezione inferiore del manicotto supporto verso di sé (1).

2. Mentre si tira la leva, spingere il manicotto supporto verso l'alto per rimuoverlo (2).

3. Per riattaccarlo, inserirlo dal lato superiore finché non scatta in posizione (3).

Ciascun manicotto supporto ha il proprio numero in basso e un adesivo che mostra lo stesso numero è applicato al portastrumenti. Assicurarsi di fissare il manicotto supporto al supporto che ha lo stesso numero.

Assicurarsi di collegare i manicotti supporto ai supporti con i numeri corrispondenti (alle posizioni originali) fino a quando non scattano in posizione. Una combinazione non corrispondente interromperà il corretto funzionamento del prodotto.

Non sterilizzare in autoclave il manicotto n. 1 - 4.

La sterilizzazione in autoclave potrebbe deformati o degradarli.

Il manicotto da n. A1 ad A3 può essere sterilizzato in autoclave a una temperatura di 134 °C per 3 minuti.

La ripetizione della sterilizzazione in autoclave potrebbe causare degradazione o scolorimento, ma non incide sulle funzioni del prodotto.

Non eseguire il processo di asciugatura oltre la temperatura di sterilizzazione e lasciare asciugare naturalmente.

In caso contrario, potrebbero verificarsi deformazione o scolorimento.

Se soluzioni chimiche vengono versate sull'apparato, pulirle immediatamente. In caso contrario, potrebbe verificarsi scolorimento.

7 Manutenzione e pulizia

Tipo non sterile


Manicotto n.	Manipolo/siringa applicabili	
1	Siringa	BT14 3WAY LUZZANI 3WAY (Minilight) LUZZANI 6WAY (Minilight)
2	Siringa Turbina ad aria Motore pneumatico Ablatore a ultrasuoni	SYR-20 3WAY Tipo 77 3WAY LUZZANI 3WAY (Minimate) Turbina ad aria Motore pneumatico NSK VARIOS VS170 SCALER
3	Micromotore Ablatore a ultrasuoni	NSK NBX NSK NLX plus NSK NLX nano BIEN AIR MX2 (DMX3) BIEN AIR MCX SATELEC Xinetic SATELEC SP4055 NEWTRON EMS NO PAIN Lampada polimerizzante SATELEC MINI LED STD OEM
4	Siringa Ablatore a ultrasuoni	DCI 3439 3WAY NSK VARIOS VS170 LUX SCALER ABLATOR DENTSPLY CAVITRON (TIPO G139) SATELEC SP4055 NEWTRON SLIM

Tipo sterilizzabile

Manicotto n.	Manipolo/siringa applicabili	
A1	Siringa Turbina ad aria Motore pneumatico	SYR-20 3WAY Tipo 77 3WAY Turbina ad aria Motore pneumatico
A2	Siringa Micromotore Ablatore a ultrasuoni	BT14 3WAY LUZZANI 3WAY (Minilight) LUZZANI 6WAY (Minilight) BIEN AIR MCX BIEN AIR MX2 (DMX3) NSK NBX NSK NLX plus NSK NLX nano NSK VARIOS VS170 SCALER ABLATOR NSK VARIOS VS170 LUX SATELEC Xinetic SATELEC SP4055 NEWTRON EMS NO PAIN Lampada polimerizzante SATELEC MINI LED STD OEM
A3	Siringa Ablatore a ultrasuoni	DCI 3439 3WAY LUZZANI 3WAY (Minimate) DENTSPLY CAVITRON SCALER (TIPO G139) SATELEC SP4055 NEWTRON SLIM

Segnaposto

La parte superiore del segnaposto è amovibile per la pulizia.

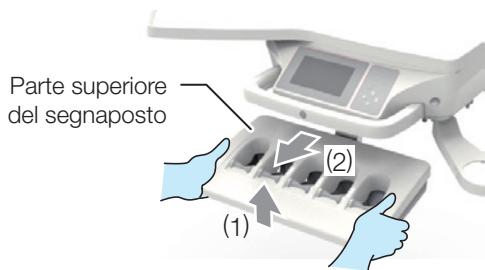

[Metodo per staccare/riattaccare]

1. Tenere la parte superiore del segnaposto con entrambe le mani e tirarlo leggermente verso l'alto. (1)
2. Tirarlo verso di sé e rimuoverlo. (2)
3. Per rimontarla, inserirlo nella posizione originale dal lato superiore. (3)



7-3-6 Siringa BT14 3WAY


Lavaggio e sterilizzazione dell'ugello

L'ugello di BT14 è amovibile e adatto per la pulizia e la sterilizzazione in autoclave.


[Pulizia all'interno dell'ugello]

Inserire l'utensile per la pulizia degli ugelli in dotazione dalla punta dell'ugello. Pulire l'interno dell'ugello e rimuovere i residui spruzzando acqua e aria. Se l'ugello viene sterilizzato in autoclave lasciando dei residui, questi producono ostruzioni all'interno dell'ugello e l'acqua potrebbe non fuoriuscire.

Procedura di distacco

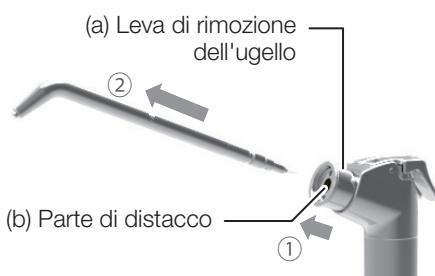

Procedure di collegamento

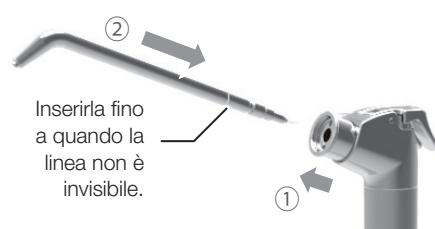

Esempio di collegamento dell'ugello

Esempio corretto

La leva di distacco dell'ugello viene riportata in posizione.

*(a) e (b) sono sullo stesso piano



Esempio sbagliato



[Procedura di distacco]

Tirare la leva di distacco dell'ugello per sbloccare l'ugello, quindi l'ugello è amovibile.

[Procedura di lavaggio]

Lavare l'ugello con le seguenti procedure.

1. Lavare con cura l'ugello sotto acqua corrente.

Far passare l'acqua all'interno dell'ugello.

2. Immergere l'ugello nel disinfettante ID212 prodotto da Dürr diluito con acqua per circa 25 volte ed eseguire la pulizia a ultrasuoni per 10 minuti o più.

Immergere la superficie interna dell'ugello nella soluzione.

3. Dopo la pulizia a ultrasuoni, lavare di nuovo accuratamente l'ugello sotto acqua corrente.

Far passare l'acqua all'interno dell'ugello.

[Procedura per la sterilizzazione]

Passarli in autoclave a una temperatura di 134 °C per 3 minuti.

Assicurarsi di porli in un sacchetto per la sterilizzazione durante il processo in autoclave.

[Procedure di collegamento]

1. Tirare la leva di distacco dell'ugello e inserire l'ugello finché la linea non diventa visibile come mostrato nella figura a sinistra.

2. Rilasciare la leva di distacco dell'ugello e tirare leggermente l'ugello. Esso scatta e si blocca.

3. Dopo aver fissato l'ugello, confermare che l'ugello non si stacchi tirandolo. Seguire l'esempio di fissaggio dell'ugello mostrato nella figura a sinistra e controllare che l'ugello sia fissato saldamente.

AVVERTENZA

Se si utilizza BT14 con il suo ugello non saldamente collegato, potrebbe scoppiare quando si spruzza acqua o aria e potrebbe danneggiare gli utenti o altre persone. Verificare che l'ugello sia fissato saldamente prima di utilizzarlo.

ATTENZIONE

Fare attenzione a non ferirsi quando si utilizza l'utensile di pulizia degli ugelli poiché la punta è affilata.

Solo l'ugello può essere sterilizzato in autoclave.
Per il controllo delle infezioni, si consiglia la sterilizzazione in autoclave tra trattamenti.

Non sterilizzare l'ugello se non con la sterilizzazione in autoclave.
Si consiglia lo sterilizzatore autoclave in conformità alla Classe B.

La temperatura dello sterilizzatore in autoclave deve essere di 135 °C o inferiore, non superiore a 135 °C. Non eseguire il processo di asciugatura e lasciare asciugare naturalmente se la temperatura è superiore a 135 °C.

Se sostanze chimiche o sostanze estranee aderiscono all'ugello, potrebbe verificarsi un guasto o scolorimento. Pertanto, la pulizia e il lavaggio devono essere eseguiti prima della sterilizzazione in autoclave.

I manipoli possono essere sterilizzati nell'autoclave fino a 250 volte.

Per la pulizia, non inserire lo spazzolino interdentale o simili nella porta di inserimento ugello mentre l'ugello è staccato. L'O-ring (materiale di tenuta) è fissato all'interno della porta di inserimento dell'ugello. Se è danneggiato, potrebbero verificarsi perdite d'acqua.

Applicazione di vaselina all'ugello

Ripetuti distacchi dell'ugello diminuiscono la quantità di grasso per l'O-ring, il che potrebbe irrigidire l'operazione di distacco. Se l'operazione di distacco dell'ugello si irrigidisce, applicare una piccola quantità di vaselina sulla superficie della parte di inserimento dell'ugello mostrata nella figura a sinistra.

Risciacquo


Quando si lava via l'acqua trattenuta, viene utilizzata una clip in dotazione per il risciacquo (d'ora in avanti, 'clip') per mantenere lo scarico dell'acqua.

Quando si inserisce la siringa BT14 all'interno del manicotto di risciacquo incorporato, la clip non è necessaria.

[Metodo da utilizzare]

1. Dirigere l'ugello verso la sputacchiera e premere la leva W per scaricare l'acqua. (①)
2. Mentre si scarica l'acqua, inserire la clip tra il corpo e la leva come mostrato nella figura a sinistra (②) per mantenere premuta la leva W.
3. Eseguire anche il risciacquo per gli altri manipoli in dotazione con l'unità.
4. Dopo il risciacquo, rimuovere la clip premendo la leva W e rimettere la siringa nel portastrumenti.

Conservare la clip in modo sicuro per non perderla.

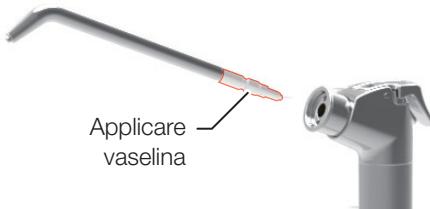

Dopo aver fissato la clip



ATTENZIONE

Fare attenzione a non ferirsi quando si utilizza la clip per il risciacquo poiché le punte sono affilate.

7-3-7 Siringa SYR-20 3WAY



Pulizia dell'interno della leva

Se polvere o sporcizia si accumulano all'interno della leva, utilizzare un batuffolo di cotone per rimuoverli.

Smontaggio



Lavaggio della superficie



Lavaggio e sterilizzazione dell'ugello

Lavare e sterilizzare i manipoli tra un paziente e l'altro.

Per sterilizzare correttamente la siringa a 3 vie, è necessario lavarla per rimuovere lo sporco e immergerla nel detersivo.

Quindi risciacquarla per rimuovere eventuali residui di detersivo.

Seguire la procedura riportata di seguito per lavare e sterilizzare l'ugello.

Smontaggio

Per prepararsi al lavaggio, smontare gli ugelli come mostrato in figura. Tirare la leva di distacco dell'ugello ① per sbloccare l'ugello, quindi l'ugello ② è amovibile.

Lavaggio della superficie

[Lavaggio a mano]

Rimuovere la contaminazione della superficie con un panno mentre si risciacqua la superficie facendo scorrere acqua calda pulita a 40 ± 5 gradi.

Strofinare la punta e la parte articolare dell'ugello con uno spazzolino per la pulizia o con uno spazzolino da denti con acqua corrente tiepida e pulita a 40 ± 5 gradi.

Controllare se la contaminazione è stata rimossa o meno dopo la pulizia.
Continuare la pulizia se la contaminazione è rimasta.

Immergere in un disinfettante o un detergente alcalino per 5 minuti.
(Si consiglia di utilizzare ID212 prodotto da Dürr)

Sciacquare abbondantemente con acqua distillata a temperatura normale o con acqua pulita per più di 1 minuto.

[Lavaggio a mano/Bagno a ultrasuoni]

Pulire l'ugello sotto l'acqua corrente per 30 secondi con una spazzola morbida e lavarlo in un bagno a ultrasuoni con un detergente enzimatico per rimuovere i residui superficiali prima della sterilizzazione.

Se rimangono residui, l'ugello non sarà sterilizzato correttamente.

⚠ ATTENZIONE

Lavare gli ugelli immediatamente dopo l'uso.

Se sostanze chimiche o sostanze estranee aderiscono all'ugello, potrebbero verificarsi guasti o scolorimento.

Pertanto, la pulizia e il lavaggio devono essere eseguiti prima della sterilizzazione in autoclave.

Se lo sporco non può essere rimosso, sostituire gli ugelli.

L'ugello può essere sterilizzato in autoclave fino a 250 volte.

Sterilizzazione



sacchetto per la sterilizzazione

Collegamento dell'ugello



Esempio di collegamento dell'ugello

Esempio corretto



Esempio sbagliato



Sterilizzazione

Scegliere il metodo appropriato tra i seguenti cicli di sterilizzazione in base al tipo di sterilizzatore in autoclave della propria clinica:

[Rimozione ad aria dinamica]

1. Posizionare l'ugello in un sacchetto per la sterilizzazione e sigillare l'apertura.
2. Passare in autoclave a una temperatura di 134 °C per 3 minuti con un tempo di asciugatura di 15 minuti.

[Spostamento per gravità]

1. Posizionare l'ugello in un sacchetto per la sterilizzazione e sigillare l'apertura.
2. Passare in autoclave a una temperatura di 132 °C per 15 minuti con un tempo di asciugatura di 30 minuti.

ATTENZIONE

La sterilizzazione deve essere eseguita dopo ogni uso con i pazienti.

Non sterilizzare l'ugello se non con la sterilizzazione in autoclave.

Si consiglia lo sterilizzatore autoclave in conformità alla Classe B.

La temperatura di sterilizzazione è di 135 °C o meno.

Non eseguire il processo di asciugatura e lasciare asciugare naturalmente se la temperatura del processo di asciugatura è superiore a 135 °C.

In caso di danni al sacchetto di sterilizzazione, smaltire e sterilizzare nuovamente utilizzando un nuovo sacchetto per la sterilizzazione.

Metodo di conservazione

Dopo la sterilizzazione, conservare l'ugello nel sacchetto per la sterilizzazione in un luogo buio e fresco.

Collegamento dell'ugello

Tirare la leva di sgancio dell'ugello ① e inserire l'ugello finché la linea nera ② non diventa invisibile come mostrato nella figura a sinistra.

Rilasciare la leva di distacco dell'ugello e tirare ③ leggermente l'ugello.

Esso scatta e si blocca.

Dopo aver fissato l'ugello, confermare che l'ugello non si stacchi tirandolo.

Seguire l'esempio di fissaggio dell'ugello mostrato nella figura e controllare che l'ugello sia fissato saldamente.

AVVERTENZA

Se si utilizza una siringa a 3 vie SYR-20 con il suo ugello non saldamente collegato, potrebbe scoppiare quando si spruzza acqua o aria e potrebbe danneggiare gli utenti o altre persone.

Verificare che l'ugello sia fissato saldamente prima di utilizzarlo.



7-3-8 Siringa tipo 77 3WAY

Smontaggio

Per prepararsi al lavaggio, smontare gli ugelli come mostrato in figura. Tirare la leva di distacco dell'ugello ① per sbloccare l'ugello, quindi l'ugello ② è amovibile.

Lavaggio

Lavaggio a mano

Rimuovere la contaminazione della superficie con un panno mentre si risciacqua la superficie facendo scorrere acqua calda pulita a 40 ± 5 gradi.

Strofinare la punta e la parte articolare dell'ugello con uno spazzolino per la pulizia o con uno spazzolino da denti con acqua corrente tiepida e pulita a 40 ± 5 gradi.

Controllare se la contaminazione è stata rimossa o meno dopo la pulizia.

Continuare la pulizia se la contaminazione è rimasta.

Immergere in un disinfettante o un detergente alcalino per 5 minuti.

(Si consiglia di utilizzare ID212 prodotto da Dürr)

Sciacquare abbondantemente con acqua distillata a temperatura normale o con acqua pulita per più di 1 minuto.

Lavaggio a mano/Bagno a ultrasuoni

Pulire l'ugello sotto l'acqua corrente per 30 secondi con una spazzola morbida e lavarlo in un bagno a ultrasuoni con un detergente enzimatico per rimuovere i residui superficiali prima della sterilizzazione.

Se rimangono residui, l'ugello non sarà sterilizzato correttamente.

ATTENZIONE


La pulizia deve essere eseguita dopo ogni uso con i pazienti.

Lavare gli ugelli immediatamente dopo l'uso.

Se sostanze chimiche o sostanze estranee aderiscono all'ugello, potrebbero verificarsi guasti o scolorimento. Pertanto, la pulizia e il lavaggio devono essere eseguiti prima della sterilizzazione in autoclave.

Se lo sporco non può essere rimosso, sostituire gli ugelli.

I manipoli possono essere sterilizzati nell'autoclave fino a 250 volte.

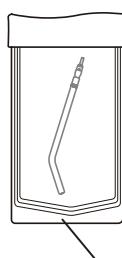

Sacchetto per la sterilizzazione

Sterilizzazione

Sterilizzazione

Scegliere il metodo appropriato tra i seguenti cicli di sterilizzazione in base al tipo di sterilizzatore in autoclave della propria clinica:

[Rimozione ad aria dinamica]

1. Inserire l'ugello in un sacchetto per la sterilizzazione e sigillarlo.
2. Passare in autoclave a una temperatura di 134°C per 3 minuti con un tempo di asciugatura di 15 minuti.

[Spostamento per gravità]

1. Inserire l'ugello in un sacchetto per la sterilizzazione e sigillarlo.
2. Passare in autoclave a una temperatura di 132°C per 15 minuti con un tempo di asciugatura di 30 minuti.

ATTENZIONE

La sterilizzazione deve essere eseguita dopo ogni uso con i pazienti.


Sterilizzazione con cicli di classe B.

La temperatura di sterilizzazione è di 135°C o meno.

Non eseguire il processo di asciugatura e lasciare asciugare naturalmente se la temperatura è superiore a 135°C .

In caso di danni al sacchetto per la sterilizzazione, smaltire e sterilizzare nuovamente utilizzando un nuovo sacchetto.

7 Manutenzione e pulizia

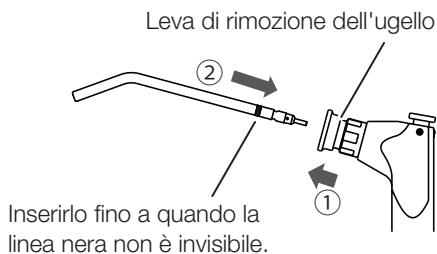

Collegamento dell'ugello

Esempio di collegamento dell'ugello

Esempio corretto



Esempio sbagliato



Conservazione

Dopo la sterilizzazione dell'ugello, conservarlo nel sacchetto per la sterilizzazione in un luogo buio e fresco.

Collegamento dell'ugello

Tirare la leva di sgancio dell'ugello ① e inserire l'ugello finché la linea nera ② non diventa invisibile come mostrato nella figura a sinistra.

Rilasciare la leva di distacco dell'ugello e tirare leggermente l'ugello. Esso scatta e si blocca.

Dopo aver fissato l'ugello, confermare che l'ugello non si stacchi tirandolo.


Seguire l'esempio di fissaggio dell'ugello mostrato nella figura e controllare che l'ugello sia fissato saldamente.

AVVERTENZA

Se si utilizza una siringa a 3 vie di tipo 77 con l'ugello non fissato saldamente, potrebbe scoppiare quando si spruzzano acqua o aria e potrebbe arrecare danni agli utenti o ad altre persone. Verificare che l'ugello sia fissato saldamente prima di utilizzarlo.

7-3-9 Tubo flessibile del manipolo

Quando il manipolo si sporca, pulirlo bene con un panno morbido inumidito con FD366 prodotto da Dürr.

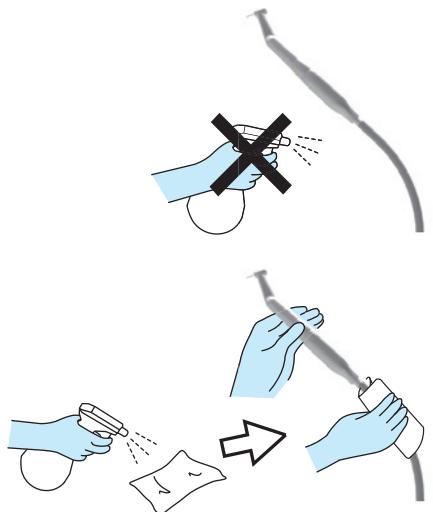


Non spruzzare il detergente direttamente sulla parte esterna.

Pulire la superficie con un panno morbido o un tovagliolo di carta inumiditi con detergente e asciugarla con un panno asciutto.

Se del liquido penetra nel prodotto, potrebbe causare malfunzionamenti o guasti.

Confermare che il detergente sia completamente evaporato prima di attivare il prodotto.

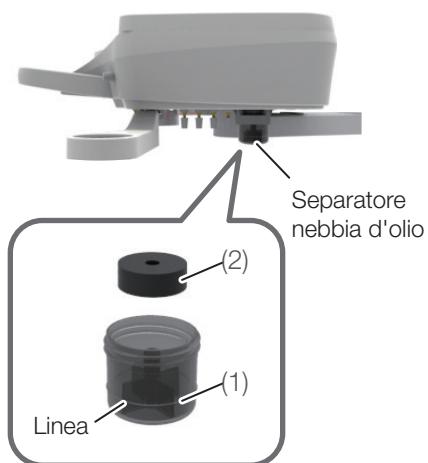

7-3-10 Separatore nebbia d'olio

Questa unità raccoglie l'olio dall'aria di scarico del manipolo.

Quando l'olio raggiunge la linea sul serbatoio dell'olio (1), assicurarsi di eliminare l'olio.


Ruotare il serbatoio dell'olio in senso antiorario per rimuoverlo.

Se la spugna igroscopica (2) (materiale di consumo) è eccessivamente sporca o ha una quantità eccessiva di olio su di essa, sostituirla.

Contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona per la sostituzione della spugna igroscopica. (La sostituzione sarà a pagamento.)

7–4 Unità sputacchiera

7–4–1 Supporto assistente

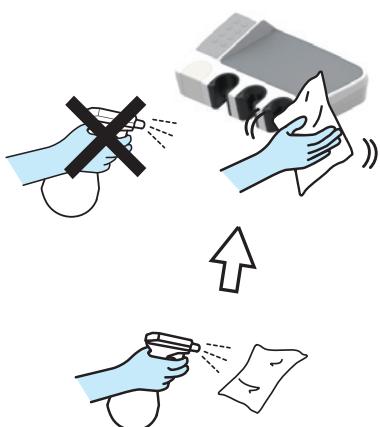

Pulire la superficie con un panno morbido o un tovagliolo di carta inumiditi con FD366, prodotto da Dürr, quindi asciugarla con un panno asciutto.

Se l'esterno è eccessivamente sporco, inumidire un panno morbido con acqua contenente circa 10% di detergente neutro, quindi strofinare l'esterno con il panno. Quindi, pulirlo con un panno inumidito con acqua e poi asciugarlo completamente con un panno asciutto.

Non utilizzare mai i prodotti elencati di seguito:

Sostanze chimiche volatili come diluenti per vernici, butanolo, alcool isopropilico, acetone, benzina o cherosene; detergenti acidi, alcalini o al cloro; disinfettanti altamente corrosivi (iodopovidone come Isodine, ipoclorito di sodio, ecc.); cera abrasiva lucidante o spugna abrasiva.

Non usare una spazzola o uno scrubber durante la manutenzione. Tutti questi potrebbero lasciare graffi e/o sporco persistente.


Se dell'acqua o del detergente rimangono sulla superficie, pulirli immediatamente. L'umidità o il detergente residuo potrebbero causare la formazione di ruggine o il guasto dei componenti elettrici.

Non spruzzare il detergente direttamente sulla parte esterna.


Pulire la superficie con un panno morbido o un tovagliolo di carta inumiditi con detergente e asciugarla con un panno asciutto.

Se del liquido penetra nel prodotto, potrebbe causare malfunzionamenti o guasti.

Confermare che il detergente sia completamente evaporato prima di attivare il prodotto.

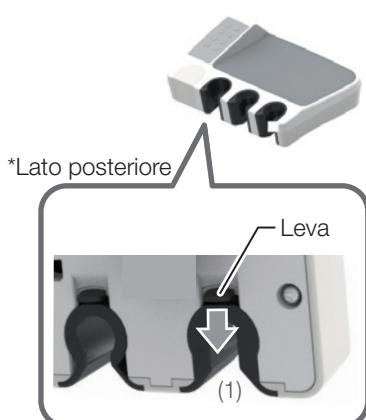

Supporto assistente

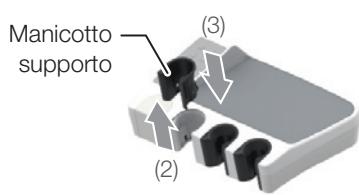

Manicotto supporto

I manicotti supporto del portastrumenti sono amovibili per la pulizia.

Pulire bene con un panno morbido inumidito con FD366 prodotto da Dürr.

Il manicotto da n. A1 ad A4 può essere sterilizzato in autoclave a una temperatura di 134 °C per 3 minuti.

Il manicotto n. 1 - 6 non può essere sterilizzato in autoclave.

Prima della sterilizzazione, rimuovere lo sporco sulla superficie e lavarlo sotto l'acqua corrente.

Assicurarsi di porlo in un sacchetto per la sterilizzazione durante il processo di sterilizzazione.

Non eseguire il processo di asciugatura oltre la temperatura di sterilizzazione e lasciare asciugare naturalmente.

Per quanto riguarda il n. manicotto di ciascun manipolo/siringa, fare riferimento alla tabella alla pagina successiva.

[Metodo per staccare/riattaccare]

1. Tirare la leva della sezione inferiore del manicotto supporto verso sé (1).
2. Mentre si tira la leva, spingere il manicotto supporto verso l'alto per rimuoverlo (2).
3. Per riattaccarlo, inserirlo dal lato superiore finché non scatta in posizione (3).

7 Manutenzione e pulizia



Ciascun manicotto supporto ha il proprio numero in basso e un adesivo che mostra lo stesso numero è applicato al supporto assistente.
Assicurarsi di fissare il manicotto supporto al supporto che ha lo stesso numero.

Assicurarsi di collegare i manicotti supporto ai supporti con i numeri corrispondenti (alle posizioni originali) fino a quando non scattano in posizione. Una combinazione non corrispondente interromperà il corretto funzionamento del prodotto.

Non sterilizzare in autoclave il manicotto n. 1 - 6.
La sterilizzazione in autoclave potrebbe deformarli o scolorirli.

Il manicotto da n. A1 ad A4 può essere sterilizzato in autoclave a una temperatura di 134 °C per 3 minuti.
La ripetizione della sterilizzazione in autoclave potrebbe causare degradazione o scolorimento, ma non incide sulle funzioni del prodotto.

Non eseguire il processo di asciugatura oltre la temperatura di sterilizzazione e lasciare asciugare naturalmente.
In caso contrario, potrebbero verificarsi deformazione o scolorimento.

Se soluzioni chimiche vengono versate sull'apparato, pulirle immediatamente. In caso contrario, potrebbe verificarsi scolorimento.


Tipo non sterile

Manicotto n.	Manipolo/siringa applicabili	
1	Siringa	BT14 3WAY LUZZANI 3WAY (Minilight) LUZZANI 6WAY (Minilight)
2	Siringa	SYR-20 3WAY Tipo 77 3WAY LUZZANI 3WAY (Minimate)
3	Lampada polimerizzante	SATELEC MINI LED STD OEM
4	Siringa Manipolo dell'aspirasaliva	DCI 3439 3WAY Dürr
5	Manipolo di aspirazione	VH-18 Dürr
6	Manipolo dell'aspirasaliva	BT06

Tipo sterilizzabile

Manicotto n.	Manipolo/siringa applicabili	
A1	Siringa	SYR-20 3WAY Tipo 77 3WAY
A2	Siringa	BT14 3WAY LUZZANI 3WAY (Minilight) LUZZANI 6WAY (Minilight)
	Lampada polimerizzante	SATELEC MINI LED STD OEM
A3	Siringa	DCI 3439 3WAY LUZZANI 3WAY (Minimate)
	Manipolo dell'aspirasaliva	Dürr
A4	Manipolo di aspirazione	VH-18 Dürr

7-4-2 Fascetta del tubo flessibile assistente

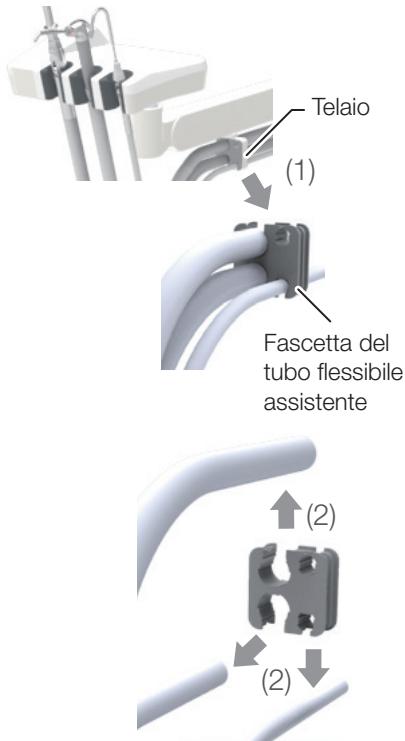

La fascetta del tubo flessibile assistente dell'unità assistente è amovibile dal telaio, il che è adatto per la pulizia.

Se si sporca, pulirla bene con un panno morbido inumidito con FD366 prodotto da Dürr.

[Metodo di distacco]

(1) Rimuovere la fascetta del tubo flessibile assistente dal telaio.

* Assicurarsi di rimuoverlo con le mani.

(2) Rimuovere il tubo flessibile dalla fascetta del tubo flessibile assistente.


[Metodo di riconnessione]

Rimontarlo nell'ordine inverso alle procedure di distacco.

Non sterilizzarli in autoclave.

La sterilizzazione in autoclave potrebbe deformarli o scolorirli.

7-4-3 Tappetino in silicone assistente

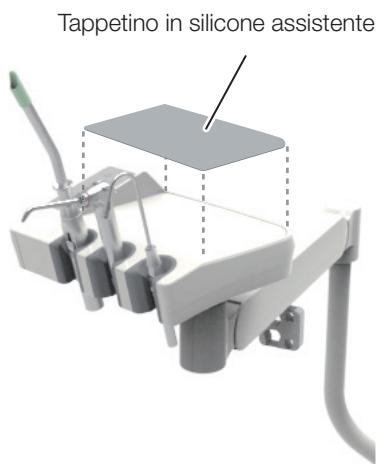

Passarli in autoclave a una temperatura di 134 °C per 3 minuti. Oppure, pulire la superficie con un panno morbido inumidito con disinfettante FD366 prodotto da Dürr.

Prima della sterilizzazione, rimuovere lo sporco dalla superficie e lavarli sotto l'acqua corrente.

Assicurarsi di porli in un sacchetto per la sterilizzazione durante il processo in autoclave.


Non eseguire il processo di asciugatura e lasciare asciugare in modo naturale.

La ripetizione della sterilizzazione in autoclave potrebbe causare degradazione o scolorimento, ma non incide sulle funzioni del prodotto.

Se soluzioni chimiche vengono versate sull'apparato, pulirle immediatamente. In caso contrario, potrebbe verificarsi scolorimento.

7-4-4 Lavaggio e sterilizzazione del manipolo di aspirazione e del manipolo aspirasaliva

(1) Smontaggio

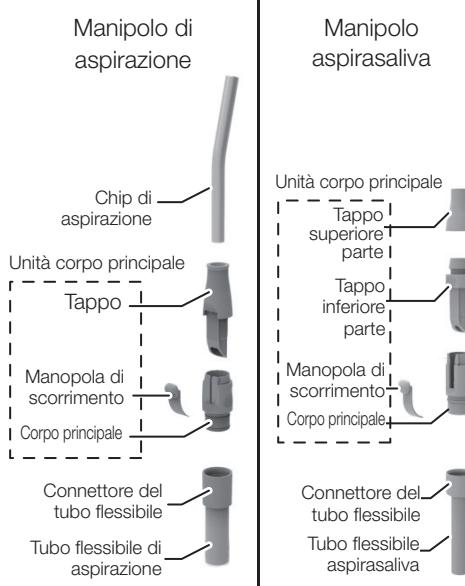

Lavare e sterilizzare i manipoli tra un paziente e l'altro.

Per sterilizzare correttamente i manipoli di aspirazione e aspirasaliva è necessario lavarli per rimuovere lo sporco e immergerli nel detergente.

Quindi risciacquarli per rimuovere eventuali residui di detergivo.

Seguire la procedura riportata di seguito per lavare e sterilizzare i manipoli.

(1) Smontaggio

Per prepararsi al lavaggio, smontare i manipoli come mostrato in figura.

Tenere il connettore del tubo flessibile e tirare il tubo flessibile di aspirazione e il tubo flessibile aspirasaliva per staccarli dal corpo principale.

(2) Lavaggio della superficie

Sciacquare la superficie con acqua pulita (acqua di rubinetto) riscaldata a una temperatura di $40 \pm 5^\circ\text{C}$ e strofinarla con un panno per rimuovere lo sporco. Quando tutto lo sporco è stato rimosso, asciugare.

(3) Lavaggio dell'interno e della scanalatura scorrevole

Sciacquare l'interno e la scanalatura scorrevole del corpo principale con acqua pulita (acqua di rubinetto) riscaldata a una temperatura di $40 \pm 5^\circ\text{C}$, e strofinarli con uno spazzolino per pulizia o uno spazzolino da denti. Quando tutto lo sporco è stato rimosso, asciugarli.

(4) Parti di lavaggio inaccessibili con una spazzola

Se alcune parti sono inaccessibili con una spazzola, strofinarle con un panno. Risciacquare bene con acqua pulita (acqua di rubinetto) riscaldata a una temperatura di $40 \pm 5^\circ\text{C}$ (per almeno 1 minuto).

Immergere le parti in ID212 prodotto da Dürr o in un detergente alcalino per 5 minuti. Risciacquare poi bene con acqua pulita (acqua di rubinetto) riscaldata a una temperatura di $40 \pm 5^\circ\text{C}$ (per almeno 1 minuto).

Controllare le parti per la presenza di sporco visibile. Se rimane dello sporco visibile, ripetere il processo di lavaggio di cui sopra.


Lavarli immediatamente dopo l'uso.

Se le parti sono nelle condizioni descritte di seguito dopo il lavaggio, non sterilizzarle in autoclave. Sostituirle.

Un foro/i fori sono intasati e lo sporco non può essere rimosso.


Lo sporco su alcune parti o lo sporco solido non possono essere rimossi.

(2) Lavaggio della superficie

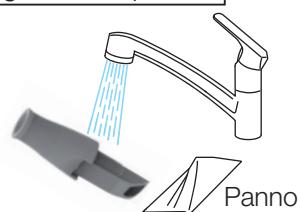


(3) Lavaggio dell'interno e della parte scorrevole

Spazzolino di pulizia o spazzolino da denti

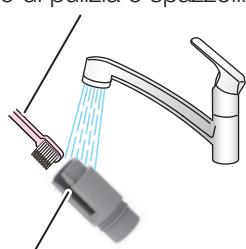

Scanalatura di scorrimento

(4) Parti di lavaggio inaccessibili con una spazzola

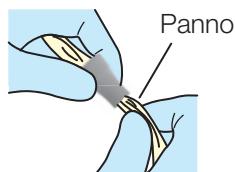

7 Manutenzione e pulizia



Precauzioni durante il montaggio del manipolo di aspirazione prima della sterilizzazione

VH-18

Tappo



Corpo

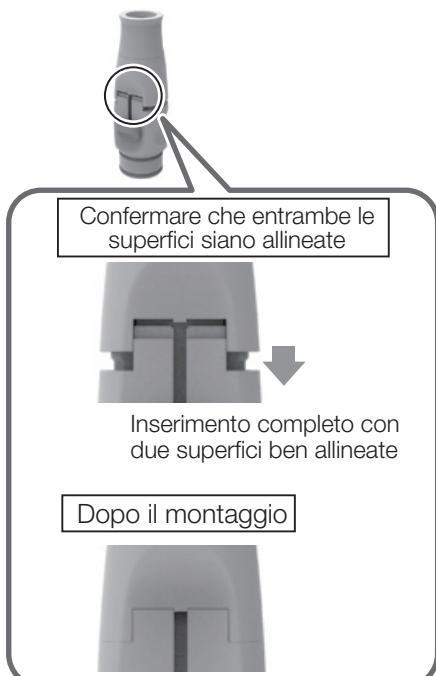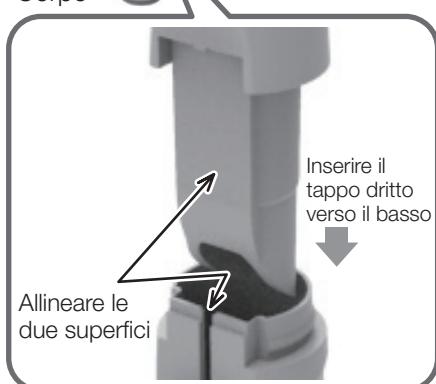

Manipolo di aspirazione



Manipolo aspirasaliva



Sacchetto per la sterilizzazione

(5) Sterilizzazione

Il manipolo di aspirazione e il manipolo aspirasaliva sono sterilizzabili in autoclave. Rimontare l'unità del corpo principale e sterilizzare i manipoli di aspirazione e aspirasaliva.

Per il montaggio del manipolo di aspirazione, allineare le due superfici; una superficie piana del tappo e la superficie della scanalatura scorrevole del corpo. Quindi, far scorrere il tappo nel corpo diritto.

* Non inserirlo con una torsione.

1. Inserire il manipolo in un sacchetto per la sterilizzazione e sigillare l'apertura.

2. Sterilizzazione in autoclave

La temperatura di sterilizzazione e il tempo di sterilizzazione per ciascun manipolo di aspirazione sono i seguenti.


Dürr: 134 °C per 5 minuti.

VH-18/BT06: 134 °C per 3 minuti.

Se la temperatura deve superare i 135 °C durante il processo di asciugatura, non eseguire il processo di asciugatura e lasciare asciugare in modo naturale. I manipoli possono essere sterilizzati nell'autoclave fino a 250 volte.

Metodo di conservazione: dopo la sterilizzazione, conservare il manipolo nel sacchetto per la sterilizzazione in un luogo buio e fresco.

7 Manutenzione e pulizia

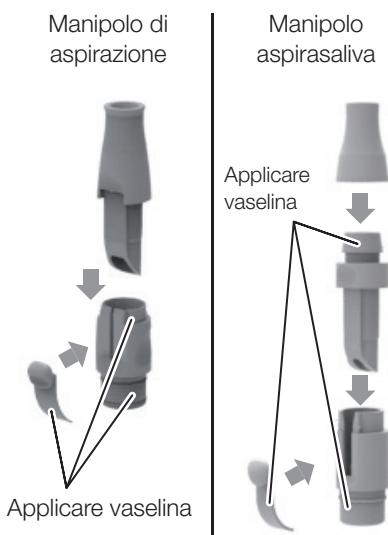

Dopo la sterilizzazione in autoclave, smontare i manipoli, applicare vaselina e riassemblare prima dell'uso.


Se i manipoli vengono utilizzati senza vaselina, una guarnizione potrebbe danneggiarsi, con conseguenti perdite.



Manipolo di aspirazione/manipolo aspirasaliva

Aspirare una tazza d'acqua (circa 100 ml) o più nei manipoli di aspirazione e aspirasaliva dopo l'uso da parte di un paziente. Ciò serve per pulire e diluire i farmaci utilizzati e per evitare che i manipoli si deteriorino.

Alcuni farmaci utilizzati per la procedura potrebbero causare il deterioramento del manipolo. Potrebbe dissolversi, deformare o danneggiare parte del manipolo, con la possibilità di provocare perdite dal manipolo o problemi di aspirazione. In questo modo si rende il manipolo inutilizzabile. Lavarli correttamente per garantire un uso a lungo termine.

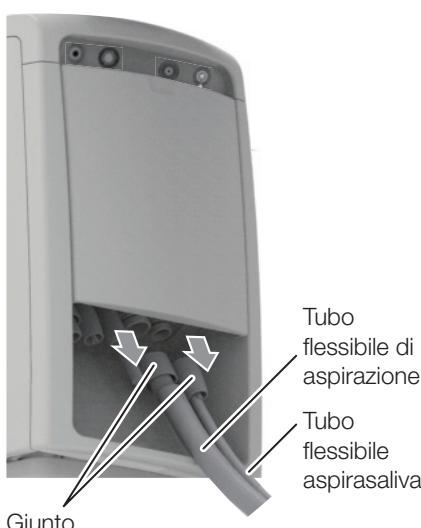

Tubo flessibile di aspirazione/tubo flessibile aspirasaliva

Il tubo flessibile di aspirazione e il tubo flessibile aspirasaliva possono essere rimossi afferrando il giunto e tirando il tubo flessibile.


La parte esterna del tubo flessibile può essere lavata sotto acqua di rubinetto.

* Per il lavaggio della parte interna del tubo flessibile (le linee di aspirazione e aspirasaliva), fare riferimento a [pagina 270].

Per ricollegare il tubo flessibile, inserire il giunto nella presa.

Spegnere sempre l'interruttore principale prima di tirare il tubo flessibile per lavarlo.

[Soluzione chimica: Orotol plus]

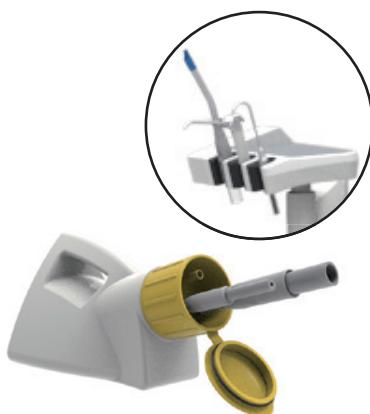

7-4-5 Lina di aspirazione/linea aspirasaliva

I manipoli di aspirazione e aspirasaliva aspirano le secrezioni, la saliva o il sangue che contengono batteri. Pertanto, dopo la procedura, lavarli e sterilizzarli sempre utilizzando la soluzione chimica specificata da noi.

[Riferimento] Soluzione chimica specificata da noi [pagina 215]

Non utilizzare detergenti diversi da quello designato. In caso contrario, detergenti fortemente acidi o preparati di scarico alcalini possono causare intasamento, danni o corrosione del metallo.

7-4-6 Siringa BT14 3WAY

[Riferimento] Siringa BT14 3WAY [pagina 257]

7-4-7 Siringa SYR-20 3WAY

[Riferimento] Siringa SYR-20 3WAY [pagina 259]

7-4-8 Siringa tipo 77 3WAY

[Riferimento] Siringa tipo 77 3WAY [pagina 261]

7-4-9 Finestra sensore per sistema di riempimento bicchiere

Pulire la superficie con un panno morbido o un tovagliolo di carta inumiditi con FD366, prodotto da Dürr, quindi asciugarla con un panno asciutto.

Se l'esterno è eccessivamente sporco, inumidire un panno morbido con acqua contenente circa 10% di detergente neutro, quindi strofinare l'esterno con il panno. Quindi, pulirlo con un panno inumidito con acqua e poi asciugarlo completamente con un panno asciutto.



7-4-10 Sputacchiera

Sputacchiera/Unità di riempimento bicchiere

Utilizzare MD550 prodotto da Dürre come detergente per la sputacchiera.

(1) Sputacchiera

La sputacchiera è amovibile e può essere lavata sotto l'acqua di rubinetto. Sollevarla nella direzione indicata dalla freccia per staccarla.

Dopo averla rimontata, controllare che sia fissata saldamente prima dell'uso.

ATTENZIONE

Indossare i guanti di pulizia quando si stacca la sputacchiera.

La sputacchiera è fatta di ceramica e potrebbe causare lesioni in caso di rottura.

Spegnere sempre l'interruttore principale prima di rimuovere la sputacchiera.

(2) Filtro (3) Coperchio uscita di scarico

Poiché il filtro si intasca facilmente, staccare il coperchio (3) uscita di scarico e pulire il filtro ogni giorno dopo l'orario di consultazione.

(4) Base del sistema di riempimento bicchiere (5) Finestra sensore per sistema di riempimento bicchiere

Prima della pulizia, spegnere l'interruttore principale o passare la modalità a quella di sensore disattivato. [pagina 182]

(6) Indicatore LED

Pulire l'indicatore LED con un panno morbido inumidito con FD366 prodotto da Dürre per rimuovere lo sporco e le gocce d'acqua.




(7) Sezione inferiore del sifone di scarico

Se il sifone di scarico non è stato completamente drenato, lo sporco potrebbe accumularsi sulla parete interna. Ruotare la sputacchiera di 90 gradi come mostrato in figura, ruotare la sezione inferiore (7) del sifone di scarico in senso antiorario per staccarla e pulirla. Quando si stacca la sezione inferiore (7) del sifone di scarico, l'acqua sporca potrebbe traboccare dall'interno. Staccare sempre il filtro (2) e il coperchio dell'uscita di scarico (3) e lavare la sputacchiera con una tazza di acqua prima di staccare la sezione inferiore (7) del sifone di scarico. (Ciò riduce la quantità di acqua sporca nel sifone di scarico.)

Per riattaccarlo, ruotare la sezione inferiore del sifone di scarico in senso orario fino a quando la linea verticale non incontra la marcatura a triangolo.

Quando la sezione inferiore del sifone di scarico è staccata, non fare scorrere l'acqua nella sputacchiera.

Per evitare l'odore proveniente dallo scarico, lavare la sputacchiera dopo la pulizia.

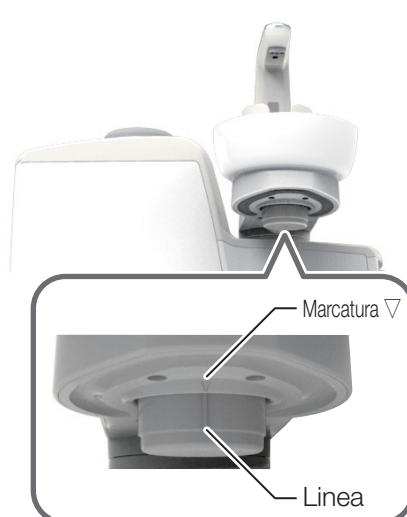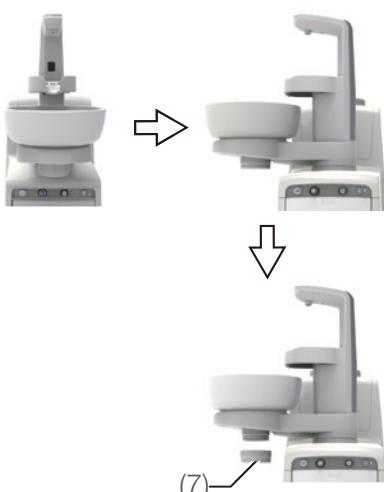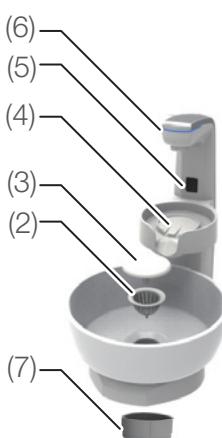

7 Manutenzione e pulizia

Non utilizzare carta vetrata, paglietta metallica, spugnette abrasive o detergenti abrasivi.

Non utilizzare alcun detergente diverso da quello designato. In caso contrario, detergenti fortemente acidi o preparati di scarico alcalini possono causare intasamento, danni o corrosione del metallo.

Evitare che oggetti metallici vengano a contatto con la sputacchiera quando la si stacca o ricollega, poiché il contatto potrebbe lasciare un segno metallico. Se l'oggetto metallico segna la sputacchiera, utilizzare un prodotto per la rimozione dei segni metallici (disponibile in commercio).

* Un segno metallico è una linea nera o argentata causata da un forte contatto e attrito tra la superficie in ceramica e l'oggetto metallico.

Prima di staccare o rimontare la sputacchiera, spegnere sempre l'interruttore principale. Quando si pulisce la base del sistema di riempimento bicchiere, spegnere l'interruttore principale o cambiare la modalità a quella di sensore disattivato.

Quando si stacca o si rimonta la sputacchiera, il sensore del sistema di riempimento bicchiere potrebbe rilevare la mano o un altro oggetto, facendo sì che l'acqua per il risciacquo della sputacchiera o della base del sistema di riempimento bicchiere spruzzi intorno, il che potrebbe fare arrugginire le parti metalliche.

La sputacchiera è realizzata in ceramica. Potrebbe rompersi se riceve un colpo violento. Non lavarla con acqua bollente, perché potrebbe romperla.

Dato che la sputacchiera può essere facilmente staccata o ricollegata, non applicare forza eccessiva se non durante il lavaggio. (Non batterla, colpirla o farla cadere.)

Non versare acqua sulla base del sistema di riempimento bicchiere durante la pulizia. Non è impermeabile e troppa acqua potrebbe causarne il malfunzionamento.

Per la pulizia della base del sistema di riempimento bicchiere, fare riferimento a [pagina 271].

Non far fluire acqua sulla base del sistema di riempimento bicchiere. La funzione di scarico della base del sistema di riempimento bicchiere è progettata per scaricare l'acqua in eccesso quando si riempie un bicchiere.


7-4-11 Raccoglitore di solidi

Dopo l'orario di consultazione, rimuovere il filtro dal raccoglitore di solidi nell'unità sputacchiera e lavarlo.

I detriti accumulati potrebbero degradare la forza di aspirazione del manipolo di aspirazione o del manipolo aspirasaliva.

[Metodo per staccare/riattaccare il filtro]

1. Premere il pannello di manutenzione dell'unità sputacchiera per aprirlo.

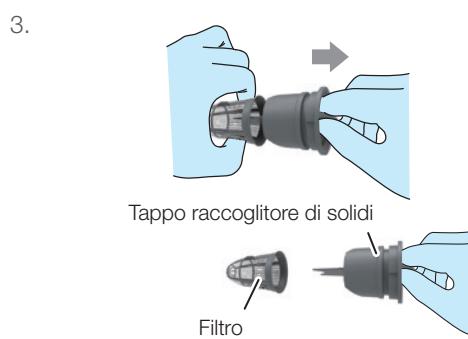


2. Estrarre il raccoglitore di solidi.

3. Staccare il tappo del raccoglitore di solidi dal filtro.


Tirare il filtro per staccare il tappo del raccoglitore di solidi come mostrato nella figura a sinistra.

4. Lavare il tappo del raccoglitore di solidi e il filtro sotto l'acqua corrente.

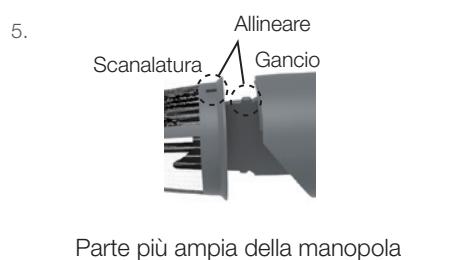

5. Allineare il gancio sul tappo del raccoglitore solido con la scanalatura sul filtro per fissarli.


6. Fissare il raccoglitore di solidi nella sua posizione originale con il tappo allineato come mostrato nella figura a sinistra.

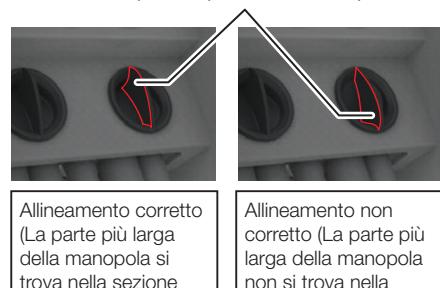

Premere il raccoglitore di solidi nell'estremità del contenitore con il corretto allineamento. Se non è montato correttamente, il manipolo di aspirazione e il manipolo aspirasaliva potrebbero non funzionare correttamente.

7–4–12 Valvola sputacchiera

Pulire la valvola della sputacchiera due volte al giorno al termine del trattamento del mattino e del trattamento della sera. (Al termine del trattamento della sera, se pulisce una volta al giorno.)

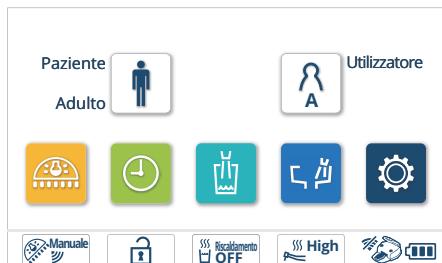


1. Premere l'interruttore funzione .

Viene visualizzata la schermata di impostazione della funzione.



2. Premere 'Pulizia valvola sputacchiera'.

Appare la schermata di pulizia della valvola sputacchiera.

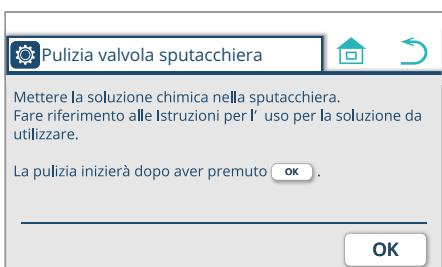


3. Riempire la coppa sputacchiera con soluzione chimica e premere .

Si consiglia 1 litro di "Orotol Plus" diluito come soluzione chimica.
Se si desidera utilizzare altre soluzioni, verificare in anticipo con il rivenditore o il distributore



4. La pulizia della valvola sputacchiera si avvia



Sullo schermo viene visualizzato il messaggio 'Pulizia della valvola sputacchiera'.

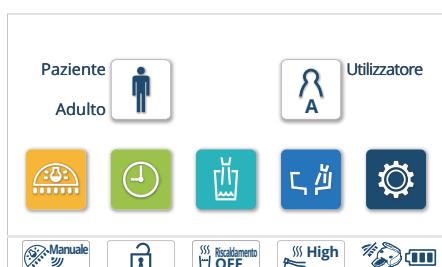

5. La pulizia della valvola sputacchiera termina

Il messaggio 'Pulizia della valvola sputacchiera' scompare dallo schermo.

Piedistallo

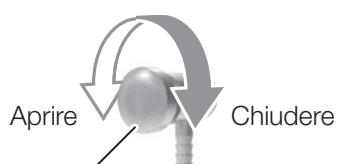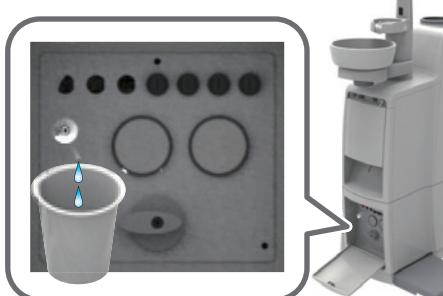

Manopola della valvola di scarico

7-4-13 Filtro dell'aria

Svuotare l'acqua che si è accumulata nel filtro dell'aria almeno una volta alla settimana.


1. Aprire il coperchio del pannello di manutenzione.
2. Preparare una tazza in cui versare l'acqua.
3. Ruotare la manopola della valvola di scarico in senso antiorario e scaricare l'acqua nella tazza.
4. Quando non fuoriesce più acqua, ruotare la manopola della valvola di scarico in senso orario per chiuderla.

Dopo aver chiuso la manopola della valvola di scarico, l'acqua rimasta nel tubo potrebbe fuoriuscire.

Pulire l'acqua con un panno per evitare che l'acqua fuoriesca.

Qualsiasi traccia di acqua penetrata nella linea aria, potrebbe causare un guasto del prodotto.

Supporto per poltrona

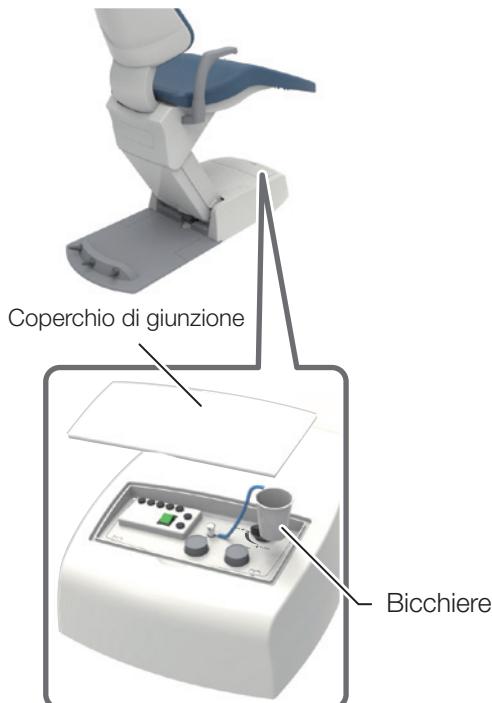

Carrello medico (unità di giunzione)




7–4–14 Compressore d'aria

Per la manutenzione del compressore d'aria, seguire le istruzioni per l'uso fornite con il compressore d'aria.

7–4–15 Pompa di aspirazione

Per la manutenzione della pompa di aspirazione, seguire le istruzioni per l'uso fornite con la pompa di aspirazione.

7-4-16 Sistema di risciacquo integrato

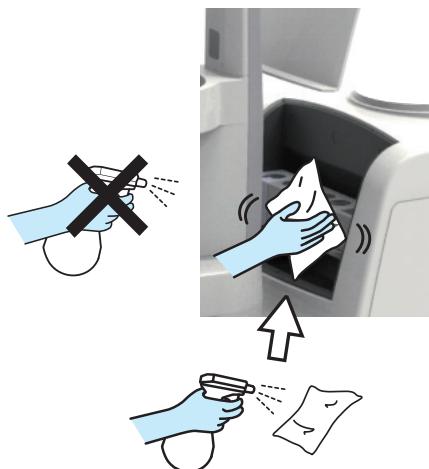

Pulire la superficie con un panno morbido o un tovagliolo di carta inumiditi con FD366, prodotto da Dürr, quindi asciugarla con un panno asciutto.

Se l'esterno è eccessivamente sporco, inumidire un panno morbido con acqua contenente circa 10% di detergente neutro, quindi strofinare l'esterno con il panno. Quindi, pulirlo con un panno inumidito con acqua e poi asciugarlo completamente con un panno asciutto.

Non utilizzare mai i prodotti elencati di seguito:

Sostanze chimiche volatili come diluenti per vernici, butanolo, alcool isopropilico, acetone, benzina o cherosene; detergenti acidi, alcalini o al cloro; disinfettanti altamente corrosivi (iodopovidone come Isodine, ipoclorito di sodio, ecc.); cera abrasiva lucidante o spugna abrasiva.

Non usare una spazzola o uno scrubber durante la manutenzione. Tutti questi potrebbero lasciare graffi e/o sporco persistente.

Se dell'acqua o del detergente rimangono sulla superficie, pulirli immediatamente. L'umidità o il detergente residuo potrebbero causare la formazione di ruggine o il guasto dei componenti elettrici.

Non spruzzare il detergente direttamente sulla parte esterna.

Pulire la superficie con un panno morbido o un tovagliolo di carta inumiditi con detergente e asciugarla con un panno asciutto.

Se del liquido penetra nel prodotto, potrebbe causare malfunzionamenti o guasti.

Confermare che il detergente sia completamente evaporato prima di attivare il prodotto.

Manicotto di risciacquo

I manicotti di risciacquo del risciacquo incorporato sono amovibili per la pulizia. Pulire bene con un panno morbido inumidito con FD366 prodotto da Dürr. Utilizzare uno spazzolino di pulizia o uno spazzolino da denti per gli angoli.



[Procedure per distaccare/riattaccare]

1. Tirare i manicotti di risciacquo verso di sé (1)

2. Smontare i manicotti di risciacquo (2)


3. Per riattaccarli, rimontare i manicotti di risciacquo e fissare il mancotto di risciacquo facendo scorrere le scanalature su entrambe le estremità sulle sporgenze situate sul lato interno. (3)

Fissare saldamente i manicotti sulle sporgenze.

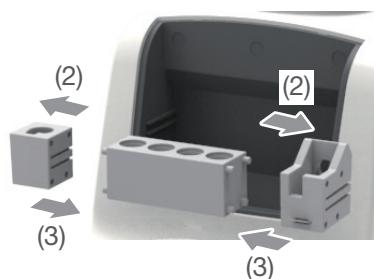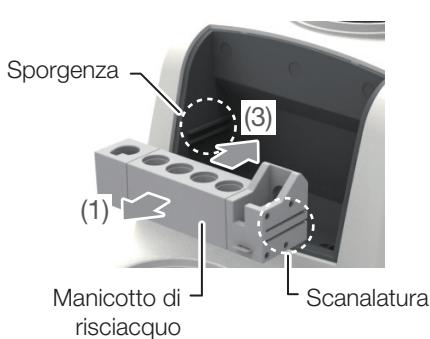

7-5 Come staccare la batteria dell'unità medico


Consegna dello strumento: Supporto/Segnaposto

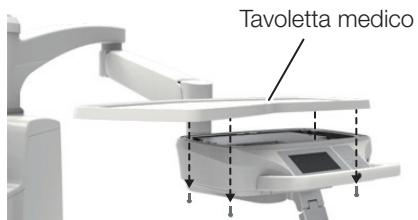

1. Rimuovere le quattro viti sotto la tavoletta medico e staccare la tavoletta medico.



2. Rimuovere le sette viti e staccare il piano del tavolo.

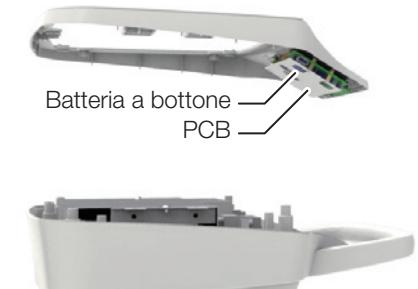


3. Staccare la batteria a bottone (CR1632) sul PCB.


7 Manutenzione e pulizia

Consegna dello strumento: Asta

1. Rimuovere le quattro viti e staccare il coperchio posteriore.

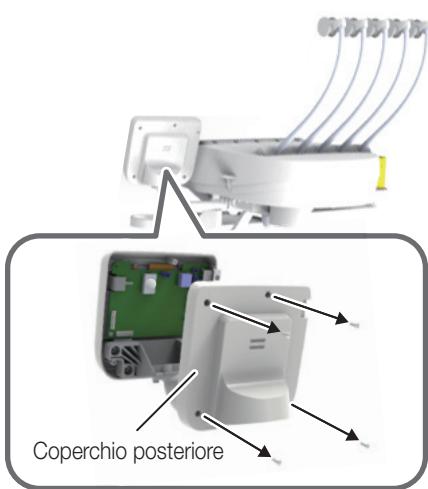

Batteria a bottone

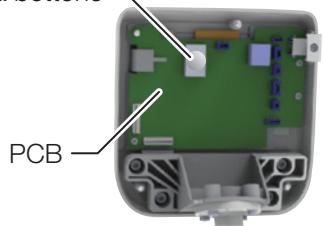

2. Staccare la batteria a bottone (CR1632) sul PCB.

7–6 Manutenzione e ispezione

Note sulla manutenzione e l'ispezione quotidiana (da parte dell'utente)

È responsabilità dell'utente (istituzioni mediche) garantire che il dispositivo medico sia sottoposto correttamente a manutenzione e ispezione. Per garantire un uso sicuro di questo prodotto, l'unità deve essere controllata a intervalli specifici, come descritto nella seguente tabella:

N.	Voce di ispezione	Intervallo di ispezione	Procedura e criteri di ispezione	Risultato se l'ispezione non viene effettuata	Manutenzione richiesta quando il criterio di ispezione non è soddisfatto
1	Controllo della funzione di annullamento	Prima delle ore di consultazione	Quando la poltrona è in funzionamento automatico, deve arrestarsi quando uno degli interruttori di funzionamento mostrati a [pagina 138] viene premuto o premuto con pedale.	La poltrona si sposta inaspettatamente durante la procedura, provocando lesioni. I pazienti potrebbero rimanere intrappolati tra l'unità medico e la poltrona, provocando un incidente.	Se la poltrona non si arresta, contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
2	Controllare per perdite di acqua, aria e olio	Prima delle ore di consultazione	Controllare non vi siano perdite di acqua, aria o olio dal prodotto.	Il prodotto non funziona correttamente, impedendo il trattamento o la procedura corretti.	In caso di fuoriuscita di acqua, aria o olio, contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
3	Riempimento bicchiere	Prima delle ore di consultazione	Posizionare un bicchiere sulla base di riempimento bicchiere e controllare che il bicchiere venga rilevato e riempito correttamente. * Utilizzare un bicchiere con un peso di 3 grammi o superiore.	In alcuni casi il bicchiere non viene riempito d'acqua.	Seguire la descrizione in 'Riempimento bicchiere' e ricontrollare. [pagina 182] Se il problema non viene risolto dopo il nuovo controllo, contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
4	Controllare il funzionamento di ciascun manipolo	Prima delle ore di consultazione	(1) Verificare che la turbina ruoti correttamente e che siano fornite le corrette quantità di acqua e aria. (2) Controllare che il micromotore ruoti correttamente e che venga fornita la corretta quantità d'acqua. (3) Controllare che l'ablatore a ultrasuoni vibri correttamente e che venga fornita la corretta quantità d'acqua. (4) Controllare che le quantità corrette di acqua e aria siano erogate dalla siringa.	Il paziente potrebbe subire lesioni alla bocca o il manipolo potrebbe non funzionare correttamente.	Regolare la quantità di acqua o aria. [pagina 247] Per altri guasti, fare riferimento alle istruzioni per l'uso dei rispettivi manipoli. Se il problema persiste, contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
5	Controllare il funzionamento della leva (siringa)	Prima delle ore di consultazione	L'acqua, l'aria e lo spruzzo fuoriescono premendo la leva A e la leva W. Non si osservano oscillazioni quando si preme la leva.	Il prodotto non funziona correttamente, impedendo il trattamento o la procedura corretti.	Contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
6	Controllare che la fresa corretta per la turbina, il motore pneumatico e il micromotore sia montata.	Prima di ciascun paziente	Controllare che la fresa corretta sia montata saldamente. Consultare le istruzioni per l'uso della turbina, del motore pneumatico e del micromotore. Controllare che la fresa non presenti difetti (danni o deformazioni).	La fresa non ruoterà liberamente, provocando un incidente.	Se la fresa è danneggiata, deformata o presenta altri difetti, sostituirla seguendo le istruzioni per l'uso della turbina, del motore pneumatico e del micromotore.
7	Controllare la punta dell'ablatore	Prima di ciascun paziente	Verificare che la punta corretta sia montata saldamente e utilizzata correttamente. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso dell'ablatore. Controllare che la punta non presenti difetti (danni o deformazioni).	La punta non ruoterà liberamente, provocando un incidente.	Se la punta è usurata o deformata, sostituirla seguendo le istruzioni per l'uso dell'ablatore. Per altri difetti, contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.

7 Manutenzione e pulizia

N.	Voce di ispezione	Intervallo di ispezione	Procedura e criteri di ispezione	Risultato se l'ispezione non viene effettuata	Manutenzione richiesta quando il criterio di ispezione non è soddisfatto
8	Controllare in caso di blocco dell'ugello (BT14/SYR-20/tipo 77)	Prima di ciascun paziente	Controllare che l'ugello sia bloccato saldamente. Controllare che l'ugello bloccato non si stacchi quando lo si tira.	L'ugello potrebbe scoppiare e danneggiare gli utenti o altre persone.	Bloccare saldamente l'ugello. [pagine 257, 260 e 262] In caso di malfunzionamenti, contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
9	Detriti sul micromotore	Dopo le ore di consultazione	Verificare che l'olio in eccesso del manipolo non aderisca all'unità motore.	L'unità motore potrebbe non funzionare correttamente, causando un malfunzionamento.	Seguire le istruzioni per l'uso del micromotore per la manutenzione.
10	Manutenzione di manipolo di aspirazione/ manipolo aspirasaliva	Dopo le ore di consultazione	Lavare le linee di aspirazione e le linee aspirasaliva.	L'aspirazione è difettosa.	Lavare le linee di aspirazione. [pagina 270]
11	Manutenzione della sputacchiera	Dopo le ore di consultazione	Controllare che la sputacchiera non contenga sporco (o escrescenze). Verificare che non si sia accumulata sporcizia nel filtro sporcizia.	Lo scarico è difettoso.	Pulire la sputacchiera e il filtro sporcizia. [pagine 271, 272]
12	Manutenzione del raccoglitrice di solidi	Dopo le ore di consultazione	Verificare che non si sia accumulata sporcizia sul raccoglitrice di solidi.	La potenza di aspirazione del manipolo di aspirazione o del manipolo aspirasaliva è diminuita.	Pulire il filtro. [pagina 273]
13	Manutenzione della parte esterna	Dopo le ore di consultazione	Controllare che non ci siano soluzioni chimiche o acqua sporca che aderiscono o rimangono sulla superficie esterna del prodotto.	Eventuali residui di liquido causeranno scolorimento o modifica delle proprietà della parte esterna o faranno arrugginire le parti metalliche.	Pulirli. [pagina 249]
14	Controllare l'interruttore principale e la valvola principale dell'acqua	Dopo le ore di consultazione	Controllare che l'interruttore principale sia spento e che la valvola principale dell'acqua sia chiusa.	Si potrebbe verificare un cortocircuito o perdite d'acqua.	Se l'interruttore principale non può essere spento o la valvola principale dell'acqua non può essere chiusa, contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
15	Parti mobili del prodotto	Una volta alla settimana	Quando si utilizza il prodotto, verificare che le parti mobili non emettano rumori anomali.	Il prodotto non funziona correttamente, impedendo il trattamento o la procedura corretti.	Se una parte mobile emette un rumore anomalo, contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
16	Manutenzione della valvola di scarico	Una volta alla settimana	Scaricare l'acqua dalla valvola di scarico sul filtro dell'aria.	L'acqua penetra nella linea dell'aria, provocando un malfunzionamento.	Scaricare sempre il filtro dell'aria. [pagina 275]
17	Controllare la pressione dell'acqua e pneumatica	Una volta al mese	Controllare la pressione dell'acqua e pneumatica usando il manometro sul pannello di manutenzione. Pressione dell'acqua principale: 0,2 MPa Pressione dell'aria principale: 0,5 MPa	Il prodotto non funziona correttamente, impedendo il trattamento o la procedura corretti.	Se la pressione non rientra nell'intervallo della pressione principale dell'acqua o dell'aria, contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
18	Controllare l'unità medico	Una volta al mese	La tavoletta medico è a livello e si ferma alla posizione specificata.	Oggetti cadono dalla tavoletta medico, causando lesioni o incidenti.	Se la tavoletta medico non è a livello o non si ferma nella posizione specificata, contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
19	Separatore nebbia d'olio	Una volta al mese	L'olio di scarico non raggiunge la linea sul separatore nebbia d'olio.	Il manipolo potrebbe non funzionare correttamente a causa di un guasto allo scarico.	Svuotare l'olio. [pagina 263]

AVVERTENZA

Fare sempre riferimento a questa guida e alle istruzioni per l'uso fornite con ciascun dispositivo (come la lampada odontoiatrica e i manipoli) prima di effettuare la manutenzione e l'ispezione quotidiane.

Se non si esegue la manutenzione o l'ispezione quotidiana, l'uso del prodotto potrebbe provocare lesioni personali o danni ai dispositivi nelle vicinanze.

Note per l'ispezione periodica

Il prodotto contiene parti che smettono di funzionare o si usurano in base alla frequenza di utilizzo, pertanto è importante eseguire la manutenzione in un'ispezione periodica una volta all'anno (inclusa la sostituzione di materiali di consumo) e i controlli di sicurezza.

I pezzi di ricambio necessari per l'ispezione periodica (inclusi i materiali di consumo) sono elencati nella tabella di seguito. Tuttavia, a seconda delle specifiche del dispositivo, potrebbero essere disponibili pezzi alternativi che differiscono da quelli elencati nella tabella di seguito.

Manutenzione e ispezione possono essere affidati in outsourcing a personale qualificato, per esempio riparatori autorizzati di dispositivi medici.

In caso di domande sull'ispezione periodica, contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.

Elenco dei pezzi di ricambio richiesti per l'ispezione periodica

Nome del pezzo	Durata di servizio standard	Nome del pezzo	Durata di servizio standard
Parte mobile	7 anni	Interruttore	5 anni
Cavo per una parte mobile	5 anni	Scheda PC	5 anni

Elenco di materiali di consumo richiesti per l'ispezione periodica

Nome del pezzo	
O-ring	Membrana
Imballaggio	Ugello aspirasaliva

AVVERTENZA

Affidare sempre l'ispezione periodica al concessionario autorizzato Belmont di zona.

Se non si esegue l'ispezione periodica, l'uso dell'apparecchio potrebbe causare lesioni personali o danni ai dispositivi nelle vicinanze.

7-7 Parti amovibili

Nome del pezzo	Nome del pezzo
Manipolo	Punta di aspirazione
Tubo flessibile del manipolo	Ugello aspirasaliva
Manicotto supporto	Tappo raccoglitore di solidi
Sputacchiera	Filtro raccoglitore di solidi
Coperchio per l'uscita di scarico della sputacchiera	Connettore di servizio dell'acqua
Filtro sputacchiera	Connettore di servizio dell'aria
Manipolo di aspirazione	Ugello siringa
Manipolo aspirasaliva	Corpo della siringa
Separatore nebbia d'olio	Tubo flessibile della siringa
Coperchio per sistema di risciacquo integrato	Manicotto di risciacquo

7-8 Metodo di conservazione

Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo dopo le ore di consultazione o durante le vacanze, assicurarsi di osservare le precauzioni indicate di seguito:

1. Spegnere sempre l'interruttore principale dopo le ore di consultazione.
(Questo serve per interrompere l'alimentazione di aria, acqua e l'alimentazione elettrica).
Prendere l'abitudine di eseguire questa operazione per evitare perdite d'acqua e incidenti elettrici.
2. Dopo le ore di consultazione, ruotare la manopola della valvola principale dell'acqua in senso antiorario in posizione verticale per chiudere la valvola principale dell'acqua. Prendere l'abitudine di farlo per evitare incidenti causati da perdite d'acqua.
3. Spegnere l'interruttore del compressore e scaricare l'aria.
(Assicurarsi, inoltre, di aver spento l'alimentazione elettrica.)
4. Disattivare l'interruttore della pompa del vuoto.
(Assicurarsi, inoltre, di aver spento l'alimentazione elettrica.)
5. Disattivare l'interruttore di circuito del dispositivo nell'ambulatorio. (Assicurarsi, inoltre, di aver spento l'alimentazione elettrica.)
6. Impostare la poltrona nella posizione più bassa e lo schienale nella posizione più reclinata.

8–1 Assistenza post-vendita

Quando si richiede una riparazione

Fare riferimento a ‘Risoluzione dei problemi’ [da pagina 285 in avanti] prima di controllare il dispositivo. Se il problema persiste, spegnere l’interruttore principale e contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona per richiedere una riparazione.

8–2 Durata di servizio

La durata di servizio di questo prodotto è di 10 anni a condizione che manutenzione e ispezione siano eseguite correttamente [in base alla nostra autocertificazione (i nostri dati)].

Tuttavia, la durata di servizio standard di pezzi di ricambio che richiedono una ispezione periodica varia in base al pezzo. [pagina 282]

8–3 Periodo di conservazione dei pezzi

Disponiamo di parti di ricambio come i materiali di consumo per i prodotti per 10 anni dal momento del lancio.

* I pezzi di ricambio sono componenti necessari per la riparazione per riportare il prodotto allo stato e alle funzioni originali o per mantenere le sue funzioni.

9–1 Risoluzione dei problemi

Se si riscontrano i problemi sotto elencati, adottare le contromisure descritte di seguito prima di richiedere una riparazione. Se il problema persiste anche dopo un intervento di risoluzione dei problemi, interrompere immediatamente l'uso del prodotto, spegnere l'interruttore principale e contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.

Fenomeno	Controllare	Rimedio
Il prodotto non funziona affatto.	L'interruttore principale è attivato?	Attivare l'interruttore principale. [pagine 84, 88]
	L'alimentazione del compressore è accesa?	Accendere l'alimentazione.
	L'interruttore di circuito per l'apparecchio sul quadro interruttori dello studio dell'odontoiatra è attivato?	Attivare l'interruttore di circuito per il dispositivo.
La poltrona non si muove.	La funzione di blocco della poltrona è attivata?	Sbloccare la poltrona. [pagine da 139 a 142]
	Il prodotto è stato utilizzato continuativamente per un periodo prolungato?	Il dispositivo di prevenzione surriscaldamento del motore idraulico è stato attivato. Attendere circa 10 minuti, quindi spostare la poltrona.
Il prodotto non può essere azionato con il pedale wireless.	Sono state inserite le batterie corrette?	Inserire le batterie con le polarità corrette. [pagina 176]
	Le batterie sono scariche?	Sostituire le batterie con delle batterie nuove (o caricate) con le corrette polarità. [pagina 176]
	Il pedale wireless è troppo lontano dal prodotto?	Mantenere la distanza tra il comando a pedale e il prodotto a circa 1 metro o meno.
	Se si utilizza più di un prodotto, ci si sta confondendo con il comando a pedale di un altro prodotto?	Controllare il codice di identificazione dell'accoppiamento e utilizzare la combinazione con gli stessi codici. [pagina 175]
Non viene fornita aria.	L'alimentazione del compressore è accesa?	Accendere l'alimentazione.
	La manopola che controlla l'alimentazione dell'aria alla siringa o ad altre parti è chiusa?	Aprire la manopola di controllo dell'alimentazione d'aria. [pagine 247, 248]
Non viene erogata acqua.	La valvola principale dell'acqua è chiusa?	Aprire la valvola principale dell'acqua. [pagina 83]
	La manopola di controllo dell'erogazione dell'acqua al manipolo o alla siringa è chiusa?	Aprire la manopola di controllo dell'erogazione dell'acqua. [pagine 247, 248]
	La punta dell'ugello è ostruita? (siringa)	Pulire la punta dell'ugello. [pagine 257, 259 e 261] Se il problema persiste, sostituire l'ugello.
Il manipolo di aspirazione o il manipolo aspirasaliva non attivano la funzione di aspirazione.	L'alimentazione della pompa di aspirazione è attivata?	Accendere l'alimentazione.
	Il filtro del raccoglitore di solidi è sporco?	Pulire il filtro. [pagina 273]
	Il filtro del raccoglitore di solidi è collegato correttamente?	Fissare correttamente il raccoglitore di solidi. [pagina 273]
Sul pannello a sfioramento è visualizzato un messaggio?	Leggere il messaggio.	Adottare le misure correttive indicate nel messaggio. [pagine da 286 a 288]
L'acqua continua a scorrere dal sistema di riempimento bicchieri e non si ferma.	C'è dello sporco o una goccia sulla superficie del sensore del sistema di riempimento bicchieri?	Spegnere l'interruttore principale e pulire la superficie del sensore del sistema di riempimento bicchieri.
L'acqua non esce dal sistema di riempimento bicchieri.	C'è dello sporco o una goccia sulla superficie del sensore del sistema di riempimento bicchieri?	Spegnere l'interruttore principale e pulire la superficie del sensore del sistema di riempimento bicchieri.
	La modalità di disattivazione del sensore è attivata?	Annnullare la modalità di disattivazione del sensore. [pagina 182]

9–2 Messaggio sul pannello a sfioramento e misure da adottare

Fenomeno	Controllare	Rimedio
E01: Comunicazione con la sezione sputacchiera	Errore di comunicazione interno del dispositivo	Spegnere l'interruttore principale e contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
E02: Comunicazione con FC		
E03: Comunicazione con riscaldatore acqua (HP)		
E04: Comunicazione con micromotore		
E05: Comunicazione con ablatore		
E06: Comunicazione con poltrona		
E07: Comunicazione con sistema di riempimento bicchiere		
E08: Comunicazione con lavaggio della linea di aspirazione		
E12: Pannello di comando (Dott.)	L'interruttore a membrana viene premuto quando l'alimentazione è attivata.	Tenere le mani lontane dall'interruttore a membrana. Se il codice di errore non si spegne quando la mano contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
E13: Pannello di comando (ASST)	L'interruttore sul pannello di comando assistente viene premuto quando l'alimentazione è attivata.	Tenere la mano lontana dal pannello di comando assistente. Se il codice di errore non si spegne quando la mano contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
E14: Pressione aria troppo bassa	La pressione principale nel sistema pneumatico diminuisce.	Spegnere l'interruttore principale e contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
E20: HP raccolto quando FC è attivo	Il pedale del comando a pedale viene premuto quando il manipolo viene preso.	Rilasciare il pedale del comando a pedale. Se il codice di errore non scompare quando si toglie il piede, contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
E22: Comando a pedale (scorrimento)	Un cavo nel comando a pedale si è scollegato.	Spegnere l'interruttore principale e contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
E24: La linea di comunicazione con FC è occupata.	Le comunicazioni dal comando a pedale sono inceppate. (Pedale wireless)	Utilizzare il cavo contenuto nella confezione.
E25: Comando a pedale EEPROM	Errore di lettura EEPROM (contenuti della memoria) per il comando a pedale	Spegnere l'interruttore principale e contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
E30: EEPROM della poltrona	Errore di lettura EEPROM (contenuti della memoria) per la poltrona	Spegnere l'interruttore principale e contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
E31: Potenziometro (Sedua)	Errore di rilevamento posizione poltrona	
E32: Potenziometro (schienale)		
E33: Potenziometro (Gambale)		
E34: Termistore (Elettrovalvola)	Errore di rilevamento temperatura olio poltrona	

9 Risoluzione dei problemi

Messaggio sul pannello a sfioramento	Dettagli	Rimedio
E35: Joystick	Il joystick viene premuto quando l'alimentazione è accesa.	Controllare che non sia presente una gamba o un oggetto a contatto con il joystick sulla poltrona. Se non c'è nulla a contatto con essa, ma il codice di errore non si spegne, contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
E37: Potenziometro (Scorrimento in alto del gambale)	Errore di rilevamento posizione poltrona	Spegnere l'interruttore principale e contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
E38: Potenziometro (Poggiatesta)		
E39: Timeout (Poltrona)	Nel funzionamento automatico, la poltrona non riesce a completare il movimento verso la posizione target entro il tempo specificato.	
E42: Timeout (Riempimento bicchiere)	Il riempimento del bicchiere non è stato completato entro il tempo specificato.	Se la fornitura dell'acqua non è sufficiente, regolare la fornitura con la manopola di controllo del sistema di riempimento bicchiere. Se il codice di errore non si spegne dopo la regolazione, contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
E43: EEPROM sistema di riempimento bicchiere	Errore di lettura EEPROM (contenuti della memoria) nel sistema di riempimento bicchiere	Spegnere l'interruttore principale e contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
E44: Non c'è acqua nel flacone	Il rilevamento del livello dell'acqua all'interno del flacone o l'elettrovalvola si comportano in modo anomalo.	Premere l'interruttore OK . Riportare i manipoli di aspirazione dell'aspirasaliva nel portastrumenti, quindi contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
E45: L'acqua nel flacone non può essere scaricata.	Il manipolo di aspirazione e dell'aspirasaliva non è collegato al punto di inserimento.	Premere l'interruttore OK e riprovare.
	Il rilevamento del livello dell'acqua all'interno del flacone o la funzione di aspirazione dell'acqua si comportano in modo anomalo.	Premere l'interruttore OK . Riportare i manipoli di aspirazione dell'aspirasaliva nel portastrumenti, quindi contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
E46: La pompa del detergente non funziona.	La pompa è in sovraccarico.	

9 Risoluzione dei problemi

Messaggio sul pannello a sfioramento	Dettagli	Rimedio
C03: Annullato. Il braccio assistente è a contatto.	Un oggetto interferisce con il braccio assistente mentre la poltrona è in movimento e la poltrona si arresta a metà corsa.	Rimuovere la causa dell'arresto di emergenza e spostare la poltrona. Quando la poltrona si muove correttamente, il codice di errore scompare.
C04: Annullato. La sputacchiera è di ostacolo.	La sputacchiera è stata rimossa mentre la poltrona era in movimento e la poltrona si arresta a metà corsa.	Riposizionare in posizione la sputacchiera e spostare la poltrona.
C05: Annullato. Il poggiapiedi è a contatto.	Un oggetto interferisce con il poggiapiede mentre la poltrona è in movimento e la poltrona si arresta a metà corsa.	Rimuovere la causa dell'arresto di emergenza e spostare la poltrona. Quando la poltrona si muove correttamente, il codice di errore scompare.
C06: Annullato. Lo schienale è a contatto.	Un oggetto interferisce con lo schienale mentre la poltrona è in movimento e la poltrona si arresta a metà corsa.	Rimuovere la causa dell'arresto di emergenza e spostare la poltrona. Quando la poltrona si muove correttamente, il codice di errore scompare.
C07: Annullato. Il carter posteriore struttura sollevamento poltrona è a contatto.	Un oggetto interferisce con il carter posteriore struttura sollevamento poltrona mentre la poltrona è in movimento e la poltrona si arresta a metà corsa.	
C09: Annullato. FC è a contatto.	Il pedale viene premuto mentre la poltrona era in movimento e la poltrona si arresta a metà corsa.	Rilasciare il pedale del comando a pedale e spostare la poltrona. Quando la poltrona si muove correttamente, il codice di errore scompare.
C10: Attendere. La poltrona si sta riscaldando.	Quando la temperatura è bassa, la funzione di riscaldamento della poltrona è attivata.	Attendere che il codice di errore si spenga (o che il riscaldamento sia stato completato)
C12: Prima priorità (Manipolo)	La funzione priorità è attivata.	Riportare tutti i manipoli nel portastrumenti. Se il codice di errore non scompare, contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
C13: Riportare il manipolo sul portastrumenti.	Un manipolo non è collocato nel portastrumenti quando l'alimentazione viene accesa.	Verificare che tutti i manipoli siano posizionati nel portastrumenti. Se il codice di errore non scompare con tutti i manipoli in posizione, contattare il concessionario autorizzato Belmont di zona.
C14: Posizione LP	Quando la poltrona deve essere spostata dall'ultima posizione alla posizione di gargarismo, la poltrona è già nella posizione di gargarismo	Spostare la poltrona utilizzando un interruttore diverso dall'interruttore ultima posizione.
C15: Rabboccare il flacone con acqua.	Acqua non sufficiente nella bottiglia dell'acqua.	Riempire la bottiglia dell'acqua con acqua.

10-1 Accessori

Istruzioni per l'uso (questo documento)

Istruzioni di installazione

Dichiarazione di conformità

Cavo (solo per il pedale wireless)

Strumento di pulizia degli ugelli (siringa BT14)



Clip per risciacquo (siringa BT14)



Clip per risciacquo integrato

(Manicotto di risciacquo per siringa: BT14/tipo 77/DCI)



10-2 Materiali di consumo

I materiali di consumo sono parti che normalmente si usurano o si deteriorano, il cui aspetto cambia o che si danneggiano dopo l'uso. Si noti che la riparazione o la sostituzione dei materiali di consumo non sono coperte da garanzia e saranno effettuate a pagamento.

(* Grado di usura, deterioramento o danno e tempi per la sostituzione dipendono dall'ambiente di utilizzo e dalle condizioni nei locali del cliente.)

Materiali di consumo (I componenti elencati di seguito sono al di fuori della copertura della garanzia e sono parti a pagamento.)

[Riferimento] Elenco dei pezzi di ricambio richiesti per l'ispezione periodica [pagina 282]

EC | **REP**

TAKARA COMPANY EUROPE GmbH

Industriestrasse 21, 61381
Friedrichsdorf, Germania

CE
0197

CH | **REP**

Albo-Healthcare GmbH

Alte Steinhauserstrasse 19
CH-6330 Cham

Belmont

TAKARA BELMONT CORPORATION



2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan
TEL : +81-6-6213-5945
FAX : +81-6-6212-3680